


ComPACS

Review Station

Manuale dell'utente

Rev 10.10

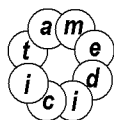

MediMatic

Viale Cembrano 4C, 16148 Genova, ITALIA
Tel: +39 010 3071634 Fax: +39 010 3074548
<http://www.medimatic.com>, info@medimatic.com



Dispositivo: ComPACS
Fabbricante: MediMatic S.r.l.
Viale Cembrano 4C
16148, Genova
Italia

MANUALE UTENTE¹

Data d'emissione documento: 04/07/2018
Revisione Software: 10.10.16
Fabbricante: MediMatic S.r.l.
Revisione Documento: 9

Divieto di copiare questo documento –Tutti i diritti riservati

© Copyright MediMatic S.r.l. 2004-2018

¹ Tutti i marchi, i nomi e i loghi presenti in questo documento appartengono ai loro legittimi proprietari.

INDICE

| | |
|--|-----|
| Manuale dell'utente | 1 |
| 1. INFORMAZIONI GENERALI | 6 |
| 1.1. COME USARE QUESTO MANUALE..... | 6 |
| 1.2. ICONE..... | 6 |
| 1.3. USO DEL MOUSE..... | 7 |
| 2. INTRODUZIONE | 9 |
| 2.1. INDICAZIONI D'USO..... | 9 |
| 2.2. REQUISITI DI SISTEMA..... | 11 |
| 2.3. LICENZA - COPYRIGHT - GARANZIA..... | 13 |
| 3. AVVIO DELL'APPLICATIVO | 22 |
| 3.1. ATTIVAZIONE E LOGIN..... | 22 |
| 3.2. CAMBIO PASSWORD..... | 25 |
| 3.3. PROTEZIONE IN CASO DI INATTIVITA'..... | 26 |
| 4. ASPETTO | 28 |
| 5. AVVIO VELOCE | 32 |
| 5.1. ACCESSO VELOCE ALLE FUNZIONI PRINCIPALI..... | 34 |
| 6. REVIEW STATION | 36 |
| 6.1. APRIRE I FILE..... | 36 |
| 6.2. VISIONE DELLE IMMAGINI..... | 41 |
| 6.3. RIPRODUZIONE DI FILMATI..... | 54 |
| 6.4. FILTRAGGIO DI IMMAGINI..... | 59 |
| 6.5. TRASFORMARE LE IMMAGINI..... | 64 |
| 6.6. ECOSTRESS..... | 70 |
| 6.7. STAMPARE O ESPORTARE LE IMMAGINI..... | 73 |
| 6.8. ESPORTAZIONE IN CARTELLE O SUPPORTI..... | 80 |
| 7. IMPOSTAZIONI GENERALI | 82 |
| 8. L'ARCHIVIO | 84 |
| 8.1. RICERCHE E RECUPERO DATI..... | 84 |
| 8.2. ASSEGNAZIONE ESAMI..... | 90 |
| 8.3. STATO DELL'ESAME E DEL REFERTO..... | 91 |
| 8.4. URGENZA DELL'ESAME..... | 93 |
| 8.5. AGGIUNGERE O MODIFICARE ELEMENTI..... | 96 |
| 8.6. FUSIONE E SPOSTAMENTO ELEMENTI..... | 101 |
| 8.7. ARCHIVIARE IMMAGINI E FILMATI..... | 103 |
| 8.8. ALLEGATI..... | 108 |
| 8.9. NOTE..... | 112 |
| 8.10. PERMESSI..... | 114 |
| 9. ANNOTAZIONI SU IMMAGINI CHIAVE | 117 |
| 9.1. VISUALIZZARE LE ANNOTAZIONI SU IMMAGINI CHIAVE..... | 117 |
| 9.2. CREARE NUOVE ANNOTAZIONI SU IMMAGINI CHIAVE..... | 119 |
| 9.3. MODIFICARE LE ANNOTAZIONI SU IMMAGINI CHIAVE..... | 119 |
| 9.4. ALTRE OPERAZIONI..... | 121 |
| 9.5. APRIRE LE ANNOTAZIONI SU IMMAGINI CHIAVE..... | 121 |
| 9.6. RICERCARE LE ANNOTAZIONI SU IMMAGINI CHIAVE..... | 122 |
| 10. GESTIONE DEI REFERTI | 123 |

| | |
|--|------------|
| 10.1. CREAZIONE DI UN NUOVO REFERTO | 123 |
| 10.2. IMPORTAZIONI DI REFERTI ESISTENTI..... | 126 |
| 10.3. MODIFICARE UN REFERTO..... | 127 |
| 10.4. APRIRE DOCUMENTI DI REFERTO..... | 128 |
| 10.5. CRONOLOGIA DELLE REVISIONI DI REFERTO | 129 |
| 11. ANALISI ECOGRAFICA..... | 131 |
| 11.1. ATTIVAZIONE DELL'ANALISI ECOGRAFICA | 131 |
| 11.2. MISURE OFF-LINE | 132 |
| 11.3. MISURE IMPORTATE | 135 |
| 11.4. GESTIONE DELLE MISURE | 145 |
| 11.5. IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE..... | 148 |
| 12. ANALISI ANGIOGRAFICA..... | 149 |
| 12.1. ATTIVAZIONE DI COMPACS QCA II | 149 |
| 12.2. ATTIVAZIONE DI COMPACS LVA..... | 150 |
| 12.3. CALIBRAZIONE..... | 150 |
| 12.4. ANALISI DELLE CORONARIE | 155 |
| 12.5. ANALISI DEL VENTRICOLO | 161 |
| 13. ANALISI IVUS..... | 164 |
| 13.1. ATTIVAZIONE DI COMPACS IVUS | 164 |
| 13.2. RICOSTRUZIONE LONGITUDINALE (ILD)..... | 165 |
| 13.3. MISURE OFF-LINE..... | 165 |
| 13.4. GESTIONE DELLE MISURE | 173 |
| 13.5. IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE | 176 |
| 14. MISURE GENERICHE..... | 177 |
| 14.1. ATTIVAZIONE DELLE MISURE GENERICHE..... | 177 |
| 14.2. MISURE OFF-LINE..... | 178 |
| 14.3. GESTIONE DELLE MISURE | 185 |
| 14.4. IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE | 186 |
| 15. PHILIPS QLAB | 188 |
| 15.1. ATTIVAZIONE DI PHILIPS QLAB..... | 188 |
| 15.2. LANCIO DI PHILIPS QLAB | 189 |
| 16. INVIA CORRIDOR 4DM..... | 192 |
| 16.1. ATTIVAZIONE DI INVIA CORRIDOR 4DM | 192 |
| 16.2. LANCIO DI INVIA CORRIDOR 4DM | 192 |
| 17. GE ECHOPAC PLUGIN..... | 194 |
| 17.1. ATTIVAZIONE DEL PLUGIN GE ECHOPAC..... | 194 |
| 17.2. LANCIO DI GE ECHOPAC PLUGIN | 194 |
| 18. ANALISI TOMTEC..... | 196 |
| 18.1. ATTIVAZIONE DEL PLUGIN DI ANALISI TOMTEC | 196 |
| 18.2. LANCIO DELL'ANALISI TOMTEC..... | 196 |
| 19. ANALISI MEDIS | 198 |
| 19.1. ATTIVAZIONE DEL PLUGIN DI ANALISI MEDIS..... | 198 |
| 19.2. LANCIO DELL'ANALISI MEDIS | 198 |
| 20. ANALISI EPSILON ECHOINSIGHT..... | 200 |
| 20.1. ATTIVAZIONE DEL PLUGIN DI ANALISI ECHO INSIGHT | 200 |

| | |
|---|------------|
| 20.2. LANCIO DELL'ANALISI ECHO INSIGHT | 200 |
| 21. GESTIONE DEGLI ECG | 202 |
| 21.1. REVISIONE DI ECG DICOM | 202 |
| 21.2. ATTIVAZIONE DELL'ANALISI E REFERTAZIONE ECG | 204 |
| 21.3. REFERTAZIONE | 205 |
| 21.4. CONFRONTO..... | 206 |
| 21.5. MISURE OFF-LINE..... | 207 |
| 21.6. GESTIONE DELLE MISURE | 210 |
| 21.7. IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE | 213 |
| 22. REFERTAZIONE..... | 215 |
| 22.1. ATTIVAZIONE DELLA REFERTAZIONE..... | 215 |
| 22.2. CREARE O APRIRE UN REFERTO | 216 |
| 22.3. ANTEPRIMA E STAMPA DEL REFERTO..... | 220 |
| 22.4. OPERAZIONI AVANZATE | 222 |
| 22.5. CONFERMA O ANNULLAMENTO DEI CAMBIAMENTI..... | 226 |
| 22.6. STORIA DELLE REVISIONI..... | 229 |
| 23. SINCRONIZZAZIONE DI CONTESTO | 230 |
| 24. APPENDICE A..... | 231 |
| 24.1. VIGILANZA POST- VENDITA..... | 231 |
| 24.2. MODULO DI SEGNALAZIONE DEI PERICOLI | 232 |
| 25. APPENDICE B..... | 233 |
| 25.1. CONFIGURAZIONE | 233 |
| 25.2. ARCHIVI AGGIUNTIVI | 237 |
| 25.3. ALTRE OPZIONI | 237 |
| 26. APPENDICE C..... | 239 |
| 26.1. COMPACS ECHO - ACCURATEZZA E PRECISIONE | 239 |
| 27. APPENDICE D | 240 |
| 27.1. ANALISI ANGIOGRAFICA - ACCURATEZZA E PRECISIONE | 240 |
| 27.2. CALIBRAZIONE SU DI UNA DISTANZA NOTA..... | 240 |
| 27.3. CALIBRAZIONE SUL CATETERE..... | 241 |
| 27.4. ANALISI DELLE CORONARIE | 241 |
| 27.5. VOLUME VENTRICOLARE | 241 |
| 27.6. SUPERFICIE CORPOREA..... | 242 |
| 27.7. ACCORCIAMENTO REGIONALE | 242 |
| 28. APPENDICE E | 243 |
| 28.1. ANALISI IVUS - ACCURATEZZA E PRECISIONE..... | 243 |
| 29. APPENDICE F..... | 244 |
| 29.1. MISURE GENERICHE - ACCURATEZZA E PRECISIONE..... | 244 |



1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. COME USARE QUESTO MANUALE

Questo manuale è scritto con l'obiettivo di aiutare a usare il prodotto correttamente e massimizzarne l'efficacia.

Il manuale può essere usato sia per auto-addestrarsi sia come supporto all'utilizzo e si applica sia a nuovi utenti sia a utenti che hanno già familiarità col sistema e/o con precedenti versioni/revisioni dello stesso.

Le icone presenti nel manuale aiutano a trovare facilmente suggerimenti, informazioni urgenti e passaggi da trattare con attenzione. La spiegazione del significato delle icone è presente in questo capitolo.

1.2. ICONE



Il testo scritto di seguito a questa icona indica informazioni molto importanti, precauzioni d'uso o passaggi da trattare con attenzione.



Il simbolo di STOP indica informazioni che devono essere lette prima di continuare.



Questa icona riguarda informazioni riguardanti suggerimenti o idee che permettono di usare il software in maniera più semplice e veloce.

1.3. USO DEL MOUSE

In questo capitolo sono descritte le funzioni principali del mouse per velocizzare il lavoro. Sono spiegati i comportamenti più comuni sull'uso del mouse che sono comuni a tutti i sistemi operativi Windows™.



Se si è già a conoscenza di come usare il mouse, si può saltare questa sezione.

- ***Pulsante sinistro del mouse***

Questo pulsante è principalmente usato per selezionare/deselezionare un oggetto sul desktop (ad esempio un'icona), per muovere oggetti e per lanciare applicazioni.

Selezionare un oggetto del desktop

1. Posizionare il cursore sull'oggetto da selezionare
2. Cliccare una volta e lasciare subito il pulsante. L'oggetto è selezionato.

Deselezionare un oggetto del desktop

1. Posizionare il cursore lontano dall'oggetto in questione.
2. Cliccare il pulsante sinistro per deselezionare l'oggetto.

Muovere un oggetto del desktop

1. Puntare all'oggetto.
2. Cliccare il pulsante sinistro e, mantenendolo premuto, muovere l'oggetto in un'altra locazione.

Aprire un oggetto del desktop

- 1.) Premere due volte il pulsante sinistro del mouse (doppio-click).
- 2.) Se l'oggetto è collegato a un'applicazione, come ComPACS Viewer, tale applicazione sarà lanciata. Altri oggetti, come un file di Word o di Excel saranno aperti col programma che li ha creati.

- **Pulsante destro del mouse**

Questo tasto è principalmente usato per attivare uno specifico menù di contesto associato con ogni oggetto del desktop.

Per compiere operazioni col tasto destro

1. Cliccare col tasto destro su un oggetto del desktop.
2. Appare un menù con differenti operazioni concernenti l'oggetto in questione. Premere il pulsante sinistro su un'operazione per attivarla.

- **Pulsante centrale del mouse**

Questo pulsante (se presente) fornisce operazioni con specifiche funzionalità. Fare riferimento al manuale dell'applicazione in questione per informazioni più dettagliate.

2. INTRODUZIONE

Il presente manuale si riferisce alla Review Station di ComPACS ed ai suoi moduli e componenti.

2.1. INDICAZIONI D'USO

Il prodotto è un software creato per essere usato da personale medico qualificato che, dopo un'appropriata installazione con i requisiti hardware e software indicati, permette di ricevere, archiviare, trasmettere, visualizzare, analizzare e refertare immagini e filmati medicali.



ATTENZIONE

ComPACS può essere usato per scopi diagnostici in accordo con la Direttiva 2007/47/CE della Comunità Europea che modifica la Direttiva 93/42/CEE, la 510k FDA degli USA e il regolamento SOR91/24 canadese. L'uso diagnostico fuori dall'ambito di applicazione di suddette direttive è esplicitamente vietato.

ComPACS e i moduli e componenti integrati possono essere soggetti a limitazioni aggiuntive. Si prega di visionare i relativi certificati per determinare quali moduli possono essere utilizzati per finalità diagnostiche in relazione alle norme vigenti.

ComPACS e i moduli e componenti integrati sono soggetti ai termini di licenza e garanzia indicati in questo documento. Si prega di esaminare le condizioni di licenza e di garanzia attentamente prima di utilizzare il dispositivo. L'utilizzo del dispositivo implica l'accettazione di tali termini di licenza e garanzia.

ComPACS e i moduli e componenti integrati sono progettati per funzionare in un'appropriata configurazione software e hardware indicata nella sezione seguente. Se i requisiti non sono soddisfatti il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.

Il presente documento deve essere letto con attenzione prima di utilizzare il dispositivo. In particolare è importante notare i seguenti avvisi e consigli:

ComPACS, i moduli e i componenti integrati non devono essere usati prima di apposito training e consapevolezza di aver pienamente compreso le istruzioni operative.

Nessun altro software deve essere installato nella stazione di revisione tranne quello richiesto esplicitamente dal prodotto. Prendete contatto con il vostro rappresentante per avere informazioni sull'eventuale software che volete installare. MediMatic non è responsabile per problemi attribuibili a cambiamenti non autorizzati, installazione o rimozione di componenti software o hardware MediMatic o di terze parti.

Le informazioni contenute in questo manuale sono relative solo all'uso corretto del dispositivo. Nessun tipo d'informazione su procedure medicali o su altri dispositivi medicali viene fornita.

Non rimuovere o cambiare assolutamente i dischi dal dispositivo durante la lettura/scrittura su tale supporto, altrimenti è molto alto il rischio di perdere dati.

Prima di salvare o archiviare un esame, controllare accuratamente che il nome della persona sia corretto.

Quando un esame viene cancellato i relativi file sono irrimediabilmente persi. Siate certi di aver effettuato una copia dell'esame su di un altro supporto prima di cancellarlo.

Se si verifica un calo di potenza elettrica durante l'esame di una persona, alcune informazioni possono essere salvate in maniera incompleta.

Quando si seleziona la compressione "Lossy Compression" alcune informazioni sono perse. Più è alta la compressione, maggiore sarà la quantità d'informazione perduta.

L'installazione e/o l'utilizzo della Workstation o del Viewer con tecnologie basate su desktop virtuali o desktop remoto non sono supportate. L'utilizzo di tali tecnologie può alterare la qualità dell'immagine visualizzata e condurre a una diagnosi errata.

Usare esclusivamente accessori e ricambi raccomandati da MediMatic.

2.2. REQUISITI DI SISTEMA



Per visualizzare le Istruzioni per l'Uso in forma elettronica è necessario installare sul sistema il software Adobe® Acrobat Reader.

ComPACS Workstation e ComPACS Web Workstation

- Processore Intel/AMD Quad Core o superiore
- 4 GB di RAM o superiore (6 GB suggeriti)
- 80 GB su disco SATA o superiore
- Masterizzatore CD/DVD
- Scheda di rete Gigabit
- (minima) Scheda video con 256MB di memoria dedicata e doppia uscita DVI; doppio monitor 19" flat panel LCD; risoluzione: 1280*1024 @ 60Hz, Luminosità: 250cd/m², Dot Pitch: 0.27mm Tempo di risposta: 8 ms
- (suggerita) Scheda video con almeno 1 GB di memoria dedicata e doppia uscita DVI; doppio monitor 23" flat panel LED; risoluzione: 1920*1080 @ 60Hz, Luminosità: 300cd/ m², Dot Pitch: 0.27mm, Tempo di risposta: 8 ms, Contrasto: 1.000:1 (tipico), 2.000.000:1 (dinamico/max)
- Windows 10 Pro / Enterprise, Windows 7 Business/Ultimate.
- Tastiera e mouse

Nota. E' anche supportato Windows Vista Business.

Nota. Installazioni basate su configurazioni Citrix® Virtual Desktop non sono formalmente supportate. Vi è tuttavia conoscenza del funzionamento del sistema in tali configurazioni. Occorre inoltre esaminare le seguenti avvertenze a tal proposito.

ComPACS Web Viewer

- Processore equivalente a Intel/AMD Dual Core o superiore
- 2 GB di RAM o superiore (6 GB suggeriti)
- 5 GB di spazio su disco disponibile o superiore
- Scheda di rete 100 Mbps o superiore
- (minima) Scheda video con 256MB di memoria dedicata e singola uscita DVI; monitor 19" flat panel LCD; risoluzione: 1024*768 @ 60Hz, Luminosità: 250cd/m², Tempo di risposta: 8 ms
- (suggerita) Scheda video con almeno 1 GB di memoria dedicata e singola uscita DVI; monitor 23" flat panel LED; risoluzione: 1920*1080 @ 60Hz, Luminosità: 300cd/ m², Dot Pitch: 0.27mm, Tempo di risposta: 8 ms, Contrasto: 1.000:1 (tipico), 2.000.000:1 (dinamico/max)
- Windows 10 Pro / Enterprise, Windows 7 Business/Ultimate.
- Tastiera e Mouse

Nota. E' anche supportato Windows Vista Business.

Nota. Installazioni basate su configurazioni Citrix® Virtual Desktop non sono formalmente supportate. Vi è tuttavia conoscenza del funzionamento del sistema in tali configurazioni. Occorre inoltre esaminare le seguenti avvertenze a tal proposito.

Componenti di terze parti

Nel caso in cui ComPACS sia integrato con componenti di terze parti (ad esempio Philips QLAB), possono essere necessari requisiti aggiuntivi. Si prega di far riferimento alla documentazione dei componenti di terze parti per le relative specifiche.



E' vietato l'uso di questa applicazione su sistemi diversi da quelli esplicitamente indicati. Gli utenti sono responsabili di tutte le relative conseguenze, incluso il non corretto funzionamento dell'applicazione, delle performance, della perdita o della corruzione dei dati e/o di calcoli errati.



Nessun altro software deve essere installato nella stazione di revisione tranne quello richiesto esplicitamente dal prodotto. Prendere contatto con il vostro rappresentante per avere informazioni sull'eventuale software che volete installare. MediMatic non è responsabile per problemi attribuibili a cambiamenti non autorizzati, installazione o rimozione di componenti software o hardware MediMatic o di terze parti.



L'installazione e/o l'utilizzo della Workstation o del Viewer con tecnologie basate su desktop virtuali o desktop remoto non sono supportate. L'utilizzo di tali tecnologie può alterare la qualità dell'immagine visualizzata e condurre a una diagnosi errata.

2.3. LICENZA - COPYRIGHT - GARANZIA

ComPACS Review Station

MediMatic S.r.l.

Copyright © 2004-2018. Tutti i diritti riservati.

AVVERTENZA: LEGGERE CON ATTENZIONE IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE. LA COPIA, L'INSTALLAZIONE OVVERO L'UTILIZZO, INTEGRALE O PARZIALE, DEL SOFTWARE COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE, INCLUSE IN PARTICOLARE LE LIMITAZIONI RELATIVE A: UTILIZZO, TRASFERIBILITÀ, GARANZIA E RESPONSABILITÀ.

L'UTENTE CONCORDA E RICONOSCE CHE IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE COSTITUISCE UN CONTRATTO SCRITTO, NEGOZIATO E SOTTOSCRITTO DALL'UTENTE STESSO. IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE E' EFFICACE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE E DI QUALSIASI PERSONA GIURIDICA CHE HA OTTENUTO IL SOFTWARE E PER CONTO DELLA QUALE IL SOFTWARE SIA USATO: AD ESEMPIO, SE DEL CASO, IL DATORE DI LAVORO DELL'UTENTE.

QUALORA L'UTENTE NON ACCETTI I TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE, NON DOVRÀ UTILIZZARE IL SOFTWARE. I TERMINI E LE LIMITAZIONI CHE REGOLANO LA RESTITUZIONE DEL SOFTWARE ED IL RELATIVO RIMBORSO SONO DISPONIBILI DA MEDIMATIC.

UTILIZZANDO IL SOFTWARE L'UTENTE RICONOSCE DI AVER LETTO IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE, DI COMPRENDERLO E DI ESSERE VINCOLATO DAI SUI TERMINI.

CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE

Questo contratto di Licenza Software costituisce l'intero, finale contratto e sostituisce qualsiasi precedente o contemporanea rappresentazione o contratto orale tra la parti sull'argomento in oggetto. Si sottolinea tuttavia che potreste essere in possesso di un altro contratto sottoscritto da entrambe le parti che integra o sostituisce tutto o parti del presente contratto.

Nessuna correzione, integrazione o modifica del presente contratto è valida se non sottoscritta da entrambe le parti. Se parti di questo contratto si determinano invalide o non applicabili, tale condizione non si estende né modifica in alcun modo la validità o applicabilità delle parti restanti. Inoltre tali parti risultate invalide o non applicabili saranno riformulate, se possibile, solo al fine di renderle applicabili.

Licenza Software

MediMatic S.r.l. e i suoi fornitori detengono tutti i diritti di proprietà intellettuale sul Software. Il Software è fornito in licenza, non venduto. MediMatic S.r.l. consente all'utente di copiare, scaricare, installare, utilizzare o in generale beneficiare delle funzionalità e proprietà intellettuali del Software solo in accordo con i termini del presente contratto. L'utilizzo di alcune componenti o servizi di terze parti inclusi o accessibili attraverso il Software possono essere soggetti ad altri termini e condizioni tipicamente rintracciabili in contratti di licenza software separati, termini di utilizzo o semplicemente file "Leggimi" posizionati all'interno o in vicinanza di tali componenti o servizi.

All'utente, purché rispetti i termini del presente contratto, MediMatic concede una licenza non esclusiva e non trasferibile per l'utilizzo del Software secondo le modalità e per gli scopi descritti nella Documentazione, come di seguito riportato.

L'utente può installare e utilizzare una copia del Software su un (1) computer per ogni licenza valida in suo possesso. Se la licenza valida in possesso si riferisce per iscritto ad accessi concorrenti, l'utente può installare una copia del Software su più computer di proprietà dell'utente stesso o della sua organizzazione fino al limite indicato da tale licenza. Il numero totale di utenti concorrenti in ciascun momento non potrà eccedere il numero indicato da tale licenza valida.

L'utente può effettuare una (1) o due (2) copie di backup del Software purché tali copie non siano installate o utilizzate se non per motivi di archiviazione.

Proprietà Intellettuale

Il Software e tutte le copie autorizzate dell'utente costituiscono proprietà intellettuale e sono di proprietà di MediMatic e dei suoi fornitori di componenti di terze parti, qualora presenti. La struttura, l'organizzazione e il codice del Software costituiscono informazioni confidenziali e segreti commerciali di valore per MediMatic e di tali fornitori.

MediMatic, e i suoi fornitori di componenti di terze parti, qualora presenti, detengono tutti i diritti, titoli, e interessi per e nel Software, la sua Documentazione, tutti e ciascun servizio collegato, altri contenuti, prodotti, documentazione, software, materiali o altre tecnologie relative al Software incluso, ma non limitato a, tutte e ciascuna modifica, miglioramento, aggiornamento, e configurazione, sia scritta, stampata, elettronica, o in codice sorgente o in altro formato, qualsiasi brevetto, copyright, segreto commerciale, marchio o proprietà intellettuale, più generalmente indicati come la "Proprietà MediMatic".

MediMatic acconsente esclusivamente alla licenza e conseguenti diritti qui espressamente indicati e non trasferisce alcun titolo o proprietà della Proprietà MediMatic né di proprietà intellettuali di terze parti, né di alcuna modifica, miglioramento o oggetto derivato. L'utente non interferirà o metterà in discussione tali diritti di MediMatic sulla Proprietà MediMatic, né rimuoverà o altererà, né consentirà la rimozione o alterazione, di avvisi, simboli o legenda di marchi, copyright o altri diritti che appaiono nella o sulla Proprietà MediMatic. L'utente con il presente contratto trasferisce a MediMatic tutti i diritti su tutti e ciascun suggerimento, concetto, miglioramento comunicati dall'utente a MediMatic e conseguentemente incorporato nel Software, mantenendo il Software e la Documentazione liberi da qualsiasi richiesta, legame o impedimento.

L'utente non dovrà: (i) modificare, tradurre, fare reverse engineering, decompilare, disassemblare, creare oggetti o servizi derivati da, o altrimenti cercare di derivare del codice sorgente dal Software; (ii) alterare o copiare, consentire a terze parti di alterare o copiare qualsiasi parte del Software, eccetto per le copie di backup per ragioni di sicurezza e archiviazione; (iii) utilizzare il Software per fornire un servizio centralizzato, mediante accesso condiviso o in time sharing, o processo di distribuzione "shareware", o altri servizi per terze parti; né (iv) fornire in sub-licenza, distribuire, vendere, assegnare, trasferire, noleggiare, condividere, dimostrare o consentire l'accesso al Software o la Documentazione a nessuno eccetto gli agenti o dipendenti dell'utente e solo ai fini strettamente necessari per l'utilizzo del Software secondo la licenza e le indicazioni all'uso dello stesso.

Titolo al Prodotto

Pieno titolo alle licenze Software non pagate interamente dall'utente, anche se regolarmente consegnate e/o installate, rimarrà a MediMatic fino alla ricevuta del completo pagamento.

Responsabilità dell'Utente

Nell'utilizzo del Software, l'utente è il solo responsabile per la gestione dei privilegi di accesso e per il mantenimento della sicurezza di tutti gli utenti, password e informazioni confidenziali. L'utente dovrà prontamente: a) riferire a MediMatic sugli eventuali errori o irregolarità in connessione all'utilizzo del Software e fornire, ove possibile, copie di tutti i programmi, report, file dati e altro materiale richiesto da MediMatic per identificare il problema, b) fornire il supporto sufficiente a MediMatic per cercare di duplicare tale situazione irregolare e c) fornire l'accesso al sistema per il tempo necessario a MediMatic per effettuare controlli, correzioni e verifiche di funzionamento in modo da correggere il problema riscontrato.

L'utente è consapevole che il materiale fornito potrebbe includere componenti o proprietà intellettuali di terze parti e che dovrà gestire tali componenti o proprietà allo stesso modo della Proprietà MediMatic. L'utente si assume la piena responsabilità per tutti i rischi associati all'utilizzo del Software, incluso ma non limitato al non rispetto degli obblighi e delle tutele finanziarie verso i propri malati o terze parti.

Restrizioni

L'utente non può fare copie del Software ad eccezione di quanto previsto dal presente contratto. Ogni copia autorizzata del Software effettuata dall'utente deve riportare gli stessi avvisi relativi al diritto d'autore ed agli altri diritti di esclusiva presenti sulla copia originale del Software.

L'utente non può modificare, adattare ovvero tradurre il Software. L'utente non può compiere operazioni di reverse engineering, decompilare, disassemblare ovvero tentare in altro modo di scoprire il codice sorgente del Software, fatta eccezione per i casi in cui la normativa vigente ne consente espressamente la decompilazione al solo fine di conseguire l'interoperabilità con il Software.

Il Software può includere diverse applicazioni, utilità e componenti, può supportare più piattaforme e lingue e può essere fornito su più supporti ovvero in copie multiple. L'utente non è obbligato ad usare tutti i componenti che sono parte del Software, ma non può separare i vari componenti al fine di

utilizzarli su diversi Computer. L'utente non può scindere i componenti del pacchetto Software né ricreare con essi un altro pacchetto Software a scopo di distribuzione, trasferimento ovvero rivendita.

L'UTENTE NON PUÒ CONCEDERE IN LOCAZIONE, IN AFFITTO, IN SUBLICENZA, NON PUÒ VENDERE, ASSEGNARE OVVERO TRASFERIRE I PROPRI DIRITTI SUL SOFTWARE, NÉ CONSENTIRE LA COPIA PARZIALE DEL SOFTWARE SU COMPUTER DI ALTRE PERSONE FISICHE OVVERO GIURIDICHE, SALVO QUANTO EVENTUALMENTE CONCESSO IN CONFORMITÀ AL PRESENTE CONTRATTO.

E' espressamente vietato trasferire i diritti all'utilizzo del Software senza esplicito consenso scritto da parte di MediMatic S.r.l.

Ad eccezione di quanto consentito nel presente contratto, nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, archiviata in un repository, o trasmessa, in qualsiasi forma o mezzo, elettronico o meccanico, registrazione o altro senza il previo consenso scritto da parte di MediMatic S.r.l. Si sottolinea che il contenuto di questo manuale è protetto dalle leggi sul copyright e sul diritto d'autore anche se non distribuito assieme al software a cui fa riferimento.

Il contenuto di questo manuale è fornito esclusivamente per un utilizzo informativo, è soggetto a variazioni senza preavviso, e non deve essere considerato come un impegno di alcun tipo da parte di MediMatic S.r.l. MediMatic S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per errori o inaccuranze che potrebbero essere presenti nel contenuto informativo del presente manuale.

Aggiornamenti

Qualora il Software sia un miglioramento ovvero un aggiornamento di una versione precedente di un software MediMatic, per poterli utilizzare l'utente dovrà essere in possesso di una valida licenza per la versione precedente. Dopo aver installato tale miglioramento o aggiornamento, l'utente potrà continuare ad utilizzare qualsiasi versione precedente nel rispetto del suo accordo di licenza per utenti finali soltanto se (a) il miglioramento o aggiornamento e tutte le precedenti versioni sono installate sul medesimo terminale, (b) le precedenti versioni o copie non sono trasferite ad un terzo o ad un altro terminale, a meno che tutte le copie del miglioramento o aggiornamento siano state trasferite a tale terzo o a tale terminale e (c) l'utente prende atto che qualsiasi obbligazione che MediMatic potrà avere relativamente all'assistenza di tali versioni precedenti potrà venire meno a seguito dell'installazione di un miglioramento o aggiornamento.

Nessun utilizzo della/e versione/i precedente/i è concessa dopo l'installazione di un aggiornamento o miglioramento. I miglioramenti e gli aggiornamenti possono essere concessi in licenza da MediMatic sulla base di termini aggiuntivi ovvero diversi.

Garanzia

MediMatic garantisce di possedere il diritto di fornire in licenza il Software all'Utente e che il software consegnato funzionerà sostanzialmente come descritto nella Documentazione per un periodo di un (1) anno (la "Durata della Garanzia") dall'acquisto del prodotto. L'unica responsabilità di MediMatic durante il periodo di garanzia in relazione a difetti materiali nel Software è il ragionevole impegno commerciale di correggere tali difetti o sostituire il Software in un periodo di tempo ragionevole. Se

MediMatic non risulta essere in grado di riparare o rimpiazzare il Software, MediMatic dovrà rimborsare l'Utente per la porzione del costo di Licenza Software relativa alla porzione difettosa. MediMatic inoltre garantisce che tutti i servizi forniti da MediMatic saranno effettuati in modo professionale in relazione agli standard industriali. Ad eccezione di quanto suddetto, MediMatic non sarà responsabile e tale garanzia sarà da ritenersi nulla in caso di: (a) errori o difetti causati da negligenza dell'Utente, uso errato o danni al Software; (b) utilizzo del software con qualsiasi tecnologia non in accordo con le raccomandazioni scritte di MediMatic; o (c) qualsiasi perdita o danno ai dati dovuti a falle nella tecnologia di sicurezza e protezione utilizzata dall'Utente in relazione al Software. MediMatic non garantisce che il Software sarà utilizzabile in modo ininterrotto e privo di errori. Eccetto a quanto indicato, MediMatic esclude qualsiasi garanzia di qualsiasi tipo, esplicita o implicita, incluso ma non limitato a, le garanzie implicite di rivendita, adeguatezza a uno specifico scopo, titolo e non violazione.

L'utente comprende e riconosce che il Software implica l'utilizzo di applicazioni per computer che compiono operazioni complesse e sofisticate per assistere l'Utente nell'esercizio della medicina, ma che il Software non è un sostituto per il giudizio e l'intervento di personale umano competente. L'utente sarà il solo responsabile per l'accuratezza e l'adeguatezza delle informazioni e dei dati forniti per il processamento e per qualsiasi uso effettuato dall'Utente o dai suoi collaboratori sui dati in uscita forniti dal Software o per l'affidamento e dipendenza su tali dati. Indipendentemente da quanto si possa ritenere che questo contratto o qualsiasi clausola possano aver fallito il loro intento principale, in nessun modo la responsabilità cumulativa di MediMatic verso l'Utente, i suoi malati o altre parti, per qualsiasi richiesta in relazione al contratto, indipendentemente dalla forma, sia se prevista dal contratto, in garanzia, per colpa o altrimenti, potrà eccedere l'ammontare pagato dall'Utente a MediMatic per: (a) il costo delle licenze software; o (b) il costo per il supporto e l'aggiornamento pagate nei dodici (12) mesi successivi alla data in cui la causa di tale azione si è verificata per la prima volta; o (c) la porzione dei servizi relativi alla specifica responsabilità in oggetto. Ad eccezione di quanto precedentemente indicato, in nessuna circostanza MediMatic o i suoi fornitori di terze parti, qualora applicabile, saranno responsabili verso l'Utente o altre parti per qualsiasi danno o costo consequenziale, accidentale, indiretto, speciale o punitivo, incluso ma non limitato a: perdita di ricavo, profitto, servizi, dati o attrezzature; interruzione di servizio; costo di beni o servizi sostitutivi: malfunzionamenti di computer, virus o pericoli digitali; indisponibilità o inaccuratezza di dati o del software; qualsiasi azione intrapresa o non intrapresa dall'Utente in relazione all'utilizzo del software; richieste in casi di malasanità, e qualsiasi altra circostanza, indipendentemente dal fatto che MediMatic fosse a conoscenza, fosse stata informata, o fosse consapevole della possibilità di tali eventi. L'utente comprende che il costo che MediMatic attribuisce alla licenza in oggetto riflette l'allocatione dei rischi espresso da tali limitazioni nella garanzia, nei rimedi in caso di violazione di tali garanzie limitate, e nelle limitazioni delle responsabilità previste nel presente contratto. L'utilizzo del software implica l'accettazione di tali termini e il riconoscimento che la loro modifica altererebbe il vantaggio economico associato al presente contratto.

MediMatic, a sue spese, difenderà, indennizzerà e tutelerà l'Utente da richieste per cui il Software costituisca una violazione di brevetti, copyright o altri diritti di proprietà di una terza parte (eccetto le richieste in cui è l'Utente a difendere e proteggere MediMatic come indicato di seguito), a condizione che l'Utente consenta a MediMatic, a sua insindacabile discrezione, di difendere o giungere a un accordo. Se il Software è ritenuto violare un brevetto, copyright o altro diritto di terze parti, e il Software fornito all'Utente ne è coinvolto, MediMatic, a sua insindacabile discrezione e cura dovrà: (i) procurare all'Utente il diritto a continuare a utilizzare il Software libero da qualsiasi responsabilità per violazione; (ii) rimpiazzare o modificare il Software con un Software equivalente che non violi tali diritti; o (iii) a seguito della restituzione del Software, rimborsare l'Utente dell'ammontare pagato a

MediMatic per i componenti oggetto della violazione, deprezzati sulla base di algoritmo lineare di deprezzamento totale su cinque (5) anni. QUESTO PARAGRAFO INDICA ESPRESSAMENTE TUTTI GLI OBBLIGHI DI MEDIMATIC IN CASO DI VIOLAZIONE DI BREVETTI, COPYRIGHT O ALTRE PROPRIETA' INTELLETTUALI.

L'Utente difenderà, indennizzerà e tutelerà MediMatic, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, successori da qualsiasi richiesta o azione contro MediMatic da parte o per conto dei malati, altre persone o terze parti in relazione a azioni o omissioni dei collaboratori o agenti dell'Utente stesso. Inoltre l'Utente difenderà e proteggerà MediMatic da qualsiasi richiesta di terze parti contro MediMatic sulla base di: (a) un qualsiasi errore, difetto o inaccuratezza del Software o dei dati medici causati dall'Utente; o (b) modifiche dell'utente a dati medici, a condizione che la suddetta richiesta o azione non avvenisse se non per tale modifica; o (c) violazione del Software di qualsiasi proprietà intellettuale di terze parti risultante da progetti, idee, specifiche o alterazioni dal software da parte dell'Utente; o (d) utilizzo del Software in combinazione con altri componenti non-MediMatic eccetto quelli specificatamente approvati per iscritto da MediMatic.

Gli obblighi di indennizzo e tutela di entrambe le parti sono validi solo se il tutelato fornisce al tutelante: (a) una sollecita notifica dell'esistenza di qualsiasi richiesta; (b) la piena cooperazione nel raggiungimento di un accordo o nella difesa da tale richiesta; (c) entro dieci (10) giorni dal ricevimento di tale richiesta, tutte le informazioni ragionevolmente necessarie per difendere o raggiungere un accordo su tale richiesta; (d) tutte le informazioni in possesso del tutelato necessarie al tutelante per condurre la difesa; e (e) il totale e insindacabile controllo della difesa o della negoziazione. Il tutelato può decidere di partecipare direttamente alla propria difesa a proprie spese.

Le parti riconoscono che il loro personale può avere accesso a informazioni che l'altra parte ritiene essere confidenziali, proprietarie e di valore commerciale ("Informazioni confidenziali"). Per il presente contratto per "Informazioni Confidenziali" si intende: (a) tutte e ciascuna informazione commerciale proprietaria o confidenziale o dati in relazione alla parte che rivela tale informazione, o suoi collaboratori, impiegati, clienti, incluso qualsiasi informazione di cui la parte ricevente viene a conoscenza come risultato dell'attività oggetto del presente contratto, e (b) Segreti commerciali, sia orali, scritti o in forma elettronica. In particolare per MediMatic, le Informazioni Confidenziali includono a titolo esemplificativo il Software e la Documentazione, e tutto il codice sorgente, codice oggetto, strutture dati, metodi, algoritmi, diagrammi e altro materiale relativo al Software. Il termine "Segreti Commerciali" si riferisce a informazioni inerenti l'attività della parte che rivela l'informazione da cui deriva attuale o potenziale valore economico per il non essere generalmente nota o facilmente accertabile da altre persone e che la parte cerca di mantenere riservata. Ciascuna parte rivelerà le Informazioni Confidenziali ricevute solo a propri dipendenti o agenti che hanno stretta necessità di conoscerle e si impegnerà a mettere in atto un ragionevole standard di gestione per prevenirne la rivelazione a altre parti. Senza limitare ciò che è stato suddetto, nessuna delle parti rivelerà i termini di questo contratto a altre entità senza previo consenso scritto. La parte ricevente notificherà immediatamente all'altra parte qualora venisse a conoscenza di qualsiasi rivelazione, perdita o utilizzo di Informazioni Confidenziali in violazione del presente contratto. Le limitazioni nel presente paragrafo non si applicano a qualsiasi informazione che: (i) è di dominio pubblico al momento in cui viene rivelata o che diviene di pubblico dominio senza colpa da parte della parte ricevente; (ii) è stata indipendentemente prodotta o ottenuta dalla parte ricevente; (iii) è stata fornita alla parte ricevente da terza parte in diritto di rivelare tale informazione senza violare alcun vincolo di segretezza; o (iv) deve essere rivelata a causa di un processo amministrativo o giudiziario, legge o regolamento, a condizione che la parte a cui è richiesto di rivelare l'informazione notifichi prontamente l'altra parte di tale richiesta

e le necessarie informazioni al fine di consentire all'altra parte di intraprendere azioni per proteggere i propri interessi. I requisiti di confidenzialità del presente contratto sopravvivono alla terminazione dello stesso per un periodo di tre (3) anni.

Termine, Terminazione e Controversie

Il presente contratto è valido fino alla sua terminazione secondo le procedure qui di seguito riportate.

L'utente può terminare il contratto se MediMatic S.r.l. viola uno qualsiasi dei termini e condizioni del presente contratto e non rimedia a tale violazione. In caso di violazione materiale del contratto da parte di MediMatic, l'utente notificherà la propria richiesta per iscritto a MediMatic che avrà novanta (90) giorni per rimediare alla violazione. Se la violazione non viene rimediata, l'Utente ha il diritto di terminare il contratto. Al termine del contratto da parte dell'Utente, l'Utente restituirà immediatamente il Software, la Documentazione, e qualsiasi altra informazione confidenziale di MediMatic a MediMatic, e distruggerà in modo permanente tutto il materiale archiviato in una forma non restituibile incluso, ma non limitato a, elettronica, fiche, ecc. L'utente rimane tuttavia responsabile di tutti i pagamenti pendenti per i prodotti e servizi forniti e per le spese effettuate fino alla data di terminazione, eccetto solo il pagamento di prodotti o servizi difettosi che costituiscono la causa primaria della violazione.

MediMatic può terminare il contratto se l'utente viola uno qualsiasi dei termini e condizioni del presente contratto e non rimedia a tale violazione. In caso di violazione materiale del contratto da parte dell'utente, MediMatic notificherà la propria richiesta per iscritto all'Utente che avrà novanta (90) giorni per rimediare alla violazione. Se la violazione non viene rimediata, MediMatic ha il diritto di terminare il contratto e l'Utente restituirà immediatamente il Software, la Documentazione, e qualsiasi altra informazione confidenziale di MediMatic a MediMatic, e distruggerà in modo permanente tutto il materiale archiviato in una forma non restituibile incluso, ma non limitato a, elettronica, fiche, ecc. Inoltre l'utente provvederà immediatamente al pagamento di tutte le somme pendenti che sono o sarebbero state dovute per la completa consegna delle licenze software, del servizio o del supporto.

La parti dichiarano di essere disponibili a risolvere in via amichevole ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione e/o performance di questi termini contrattuali. Prima di portare qualsiasi azione di fronte a un tribunale o di terminare il contratto, le parti concordano all'incontro di persona o telefonico da parte di loro personale dirigente al fine di dirimere la disputa entro venti (20) giorni lavorativi dalla richiesta di una delle due parti per la risoluzione di una disputa. I rappresentanti incaricati proveranno in buona fede a risolvere i problemi in oggetto. Nessuna azione o notifica di terminazione sarà inviata o sarà valida fino a venti (20) giorni lavorativi successivi a tale incontro o data successiva in cui entrambe le parti concordano. Se la controversia non è risolta durante tali incontri o entro tale data successiva concordata, la parte lese e le parti possono procedere alla notifica della violazione o terminazione del contratto.

Tutte le disposizioni di questo contratto in relazione alla limitazione di garanzia, limitazione di responsabilità, rimedi, danni, confidenzialità o altri termini che, o perché espresso o per loro natura debbano rimanere in vigore, sopravvivranno e rimarranno in vigore in piena forza ed efficacia anche alla terminazione del presente contratto.

Trasferibilità, Notifiche e Forza Maggiore

L'utente può trasferire i diritti e delegare le responsabilità e obblighi relativi al presente contratto a qualsiasi entità che gli succede o lo acquisisce previa comunicazione scritta a MediMatic S.r.l. MediMatic può trasferire i diritti e delegare le responsabilità e obblighi relativi al presente contratto a qualsiasi entità che gli succede previa comunicazione scritta all'Utente o mediante pubblicazione sul sito web aziendale.

Tutte le notifiche e comunicazioni oggetto del presente contratto saranno considerate valide solo se sottoposte per iscritto e consegnate per (i) posta raccomandata con avviso di ricevimento, (ii) facsimile, o (iii) servizio qualificato di corriere espresso, all'indirizzo della parte ricevente come qui indicato o a qualsiasi altro indirizzo indicato. Le notifiche saranno considerate consegnate se ricevute dalla parte notificata. L'impossibilità di una parte di esercitare un proprio diritto non sarà considerata una manleva per tale diritto.

Entrambe le parti non saranno responsabili per alcun difetto nelle proprie obbligazioni per disastri naturali, rivolte, guerre, epidemie, vertenze contrattuali dei lavoratori, restrizioni governative, interruzione di servizi necessari, guasti meccanici o elettrici, mancanza di materia prima o ritardi nel reperimento, difficoltà nei trasporti, azioni di subcontraenti o qualsiasi altra azione o evento che sono al di fuori del ragionevole controllo della parte coinvolta.

Indipendenza dei Contraenti

Le parti concordano che ognuna opera all'interno del presente contratto come contraente indipendente e che il presente contratto non costituisce: joint-venture, partnership, assunzione, o altra relazione. Nessuna delle due parti ha diritti, autorità o poteri espressi o impliciti per assumere qualsiasi impegno o entrare in qualsiasi contratto o accordo per conto dell'altra parte.

Legge Applicabile

Senza limitare alcuna disposizione del presente contratto, ogni parte sarà indipendentemente responsabile per il rispetto e l'applicazione delle leggi e regolamenti in vigore. Il contratto è stato redatto in accordo con le Leggi in vigore in Italia e qualsiasi azione o procedimento relativo al contratto dovrà essere presentato esclusivamente al tribunale di Genova, Italia che avrà l'esclusiva giurisdizione su tutte le dispute relative al contratto. Nessuna azione legale relativa al presente contratto, indipendentemente dalla forma, può essere presentata dopo più di due (2) anni dopo la prima occorrenza della causa dell'azione.

VP8 CODEC

MediMatic DICOM Web Compression 1 è una compressione DICOM non standard, con perdita, che utilizza il Codec VP8 di Google® che è soggetto ai seguenti termini di licenza:

Copyright (c) 2010, Google Inc. Tutti i diritti sono riservati.

IL SOFTWARE VP8 CODEC E' FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI CONTRIBUTORI "COSI' COM'E'" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, SIA ESPlicitA SIA IMPLICITA, INCLUSO, MA NON LIMITATO A, GARANZIE IMPLICITHE DI RIVENDITA, ADEGUATEZZA PER UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO I TITOLARI DEL COPYRIGHT O I CONTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO, DIRETTO, INDIRETTO, INCIDENTALI, SPECIALE, ESEMPLARE, O CONSEQUENZIALE (INCLUSO, MA NON LIMITATO A, APPROVIGIONAMENTO DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI; MANCATO UTILIZZO, PERDITA DI DATI O PROFITTI; O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA') CAUSATO IN QUALSIASI MODO E PER QUALSIASI TEOREMA DI RESPONSABILITA', SIA DI NATURA CONTRATTUALE, RESPONSABILITA' DIRETTA O TORTO (INCLUSO LA NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTE IN QUALSIASI MODO DALL'UTILIZZO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE AVVERTITI DELLA POSSIBILITA' DI TALE DANNO.

3. AVVIO DELL'APPLICATIVO

3.1. ATTIVAZIONE E LOGIN

Per lanciare ComPACS Review Station fare doppio-click sull'icona MediMatic che dovrebbe essere presente sul desktop del computer.



La presenza dell'icona sul desktop dipende dalle opzioni scelte durante l'installazione; in ogni modo l'icona di avvio è anche presente solitamente in: *C:\Programmi\Medimatic\ComPACS\Workstation*.




Il manuale dei moduli integrati all'interno di ComPACS Review Station si riferisce esclusivamente al loro utilizzo in forma integrata. Nel caso di utilizzo in prodotti di terze parti si prega di fare riferimento ai manuali di tali prodotti per informazioni aggiuntive e specifiche.




ComPACS Report Manager agisce insieme a moduli di *Refertazione* o di *Analisi*. Questi sono i moduli responsabili della gestione (creazione, modifica, ecc...) dei referti. Se questi moduli non sono installati apparirà un messaggio che vi invita ad attivarli prima di poter procedere.

Al primo avvio il software richiede qualche istante per configurare e caricare i moduli installati. La seguente figura dovrebbe apparire sullo schermo.

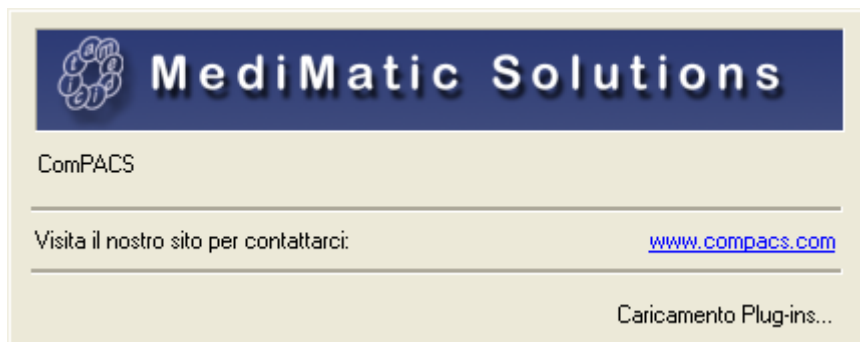

Se è stata installata anche qualche applicazione che richiede una login (un archivio ad esempio), apparirà una finestra come questa.

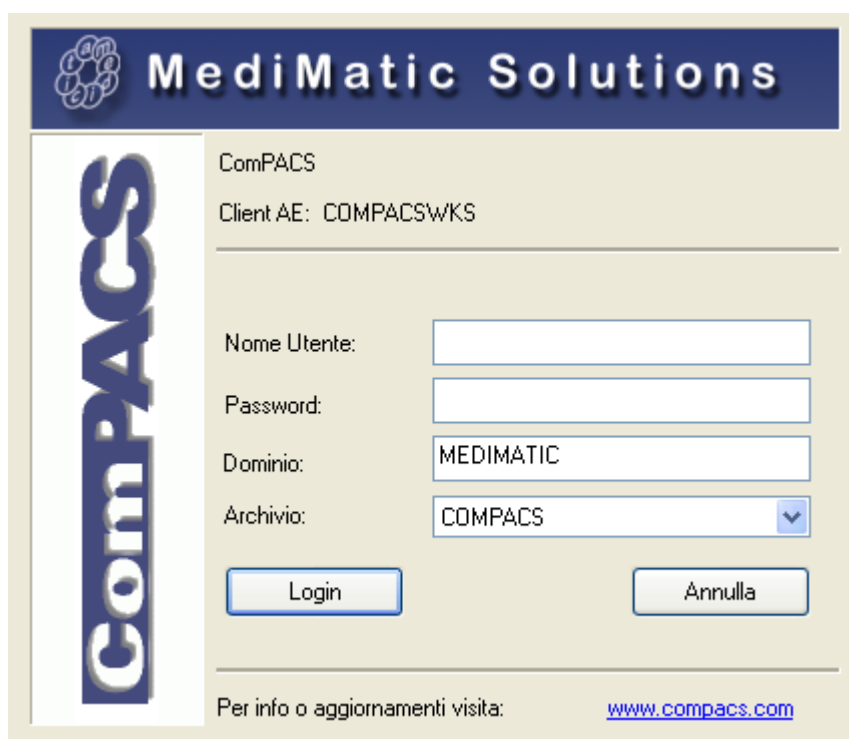The image shows a login dialog box for ComPACS. On the left side, there is a vertical logo with the text 'ComPACS' in a large, bold, blue font. To the right of the logo, the text 'ComPACS' and 'Client AE: COMPACSWKS' is displayed. Below this, there are four input fields: 'Nome Utente:' with an empty text box, 'Password:' with an empty text box, 'Dominio:' with a text box containing 'MEDIMATIC', and 'Archivio:' with a dropdown menu showing 'COMPACS'. At the bottom, there are two buttons: 'Login' and 'Annulla'. Below the buttons, the text 'Per info o aggiornamenti visita:' is followed by the URL 'www.compacs.com' in blue.

In questa finestra di dialogo bisogna inserire il *Nome Utente*, la *Password* e il *Dominio*, quindi selezionare quale archivio utilizzare. Il *Nome Utente* e la *Password* sono gli stessi usati per la login nel sistema operativo Windows™. Gli ultimi due parametri sono di solito pre-impostati ai valori di default.



ComPACS non impone l'utilizzo di un sistema di autenticazione distinto bensì consente l'utilizzo degli stessi utenti di Windows®.



Di solito viene configurato un solo archivio. Nel caso in cui sia presente più di un archivio cui connettersi, assicuratevi di aver selezionato quello a cui volete effettivamente collegarvi



Nel caso in cui non sia configurato alcun archivio, apparirà automaticamente la finestra di configurazione. Per ulteriori dettagli vedere il capitolo *Configurazione*.




In alcune configurazioni, normalmente prive di archivio, è possibile effettuare la login come *Anonimo*, in questo modo ogni operazione relativa all'archivio sarà disabilitata. Questo è il comportamento che si ha quando l'*Archivio* non è installato.




Se l'autenticazione diretta è abilitata per la configurazione di *Archivio* di default, il sistema procederà automaticamente all'autenticazione sulla base dell'utente di Windows collegato. Per inibire questa funzionalità occorre tenere premuto il tasto *Shift* durante l'avvio dell'applicazione.

3.2. CAMBIO PASSWORD

Per cambiare la password dell'utente in uso è necessario selezionare l'opzione *Cambia Password* dal menù *File*.

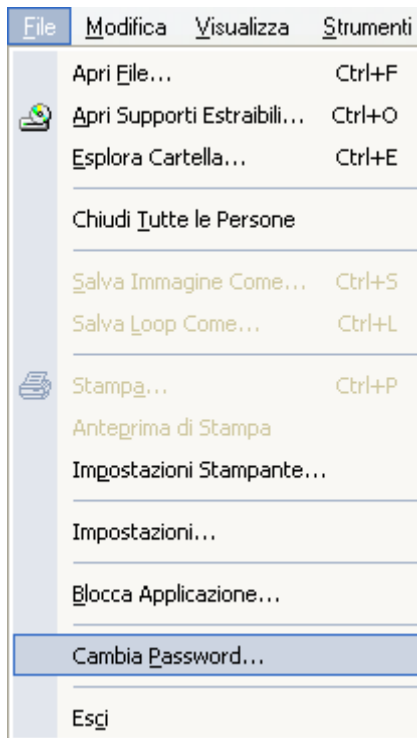

Una apposita finestra apparirà visualizzando le informazioni con cui avete acceduto all'archivio (Configurazione Archivio, Nome Utente e Dominio) e vi chiederà di inserire la password corrente (per motivi di sicurezza) e la nuova password. La nuova password necessita di essere ridigitata per conferma.

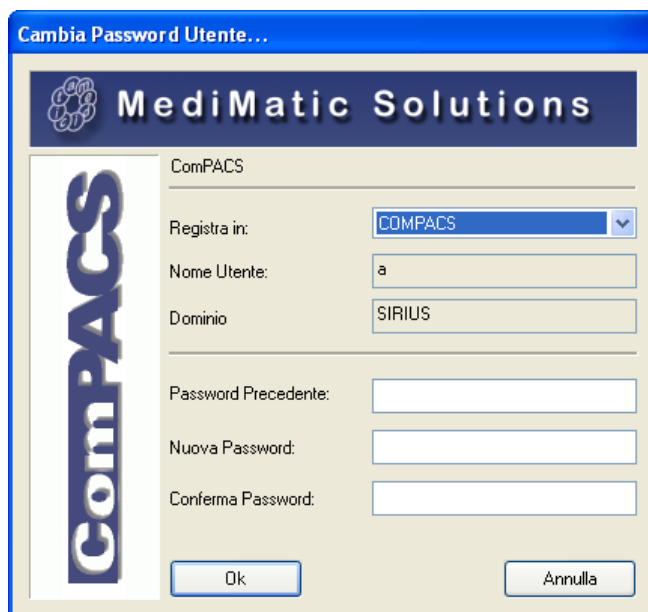



ComPACS utilizza lo stesso *Nome Utente* e *Password* usati per la login nel sistema operativo Windows™. Questo significa che un cambiamento della password all'interno di ComPACS determinerà lo stesso cambiamento nell'accesso al sistema operativo Windows®.



La nuova password deve rispettare le politiche di sicurezza e le restrizioni (lunghezza minima, complessità, ecc...) definite nel Dominio Windows® di appartenenza dell'utente.

3.3. PROTEZIONE IN CASO DI INATTIVITA'

Per bloccare l'applicativo occorre selezionare l'elemento *Blocca Applicazione* dal menù *File*. La seguente finestra di dialogo vi chiederà di inserire le vostre credenziali di accesso prima di poter ri-accedere all'applicazione.

www.compacs.com'."/>

MediMatic Solutions

ComPACS

Client AE:

L'applicazione è bloccata dall'utente:

User name:

Password:

Dominio:

Archivio:

Per moduli aggiuntivi visita: www.compacs.com

L'applicazione si bloccherà anche automaticamente dopo che è trascorso un predefinito tempo di inattività sul computer. Tale periodo è definibile dall'amministratore del sistema tramite il *Web Tool* e documentato negli appositi manuali. Un secondo tempo può essere definito per uscire automaticamente dall'applicativo.



Se un elemento (per esempio un referto) si trova in stato di modifica, l'applicazione non uscirà automaticamente ma sarà semplicemente bloccata.


4

4. ASPETTO




L'aspetto di alcuni oggetti della ComPACS Review Station può variare in relazione ai moduli installati.

Una volta che il programma è stato lanciato si vedrà una finestra come la seguente.

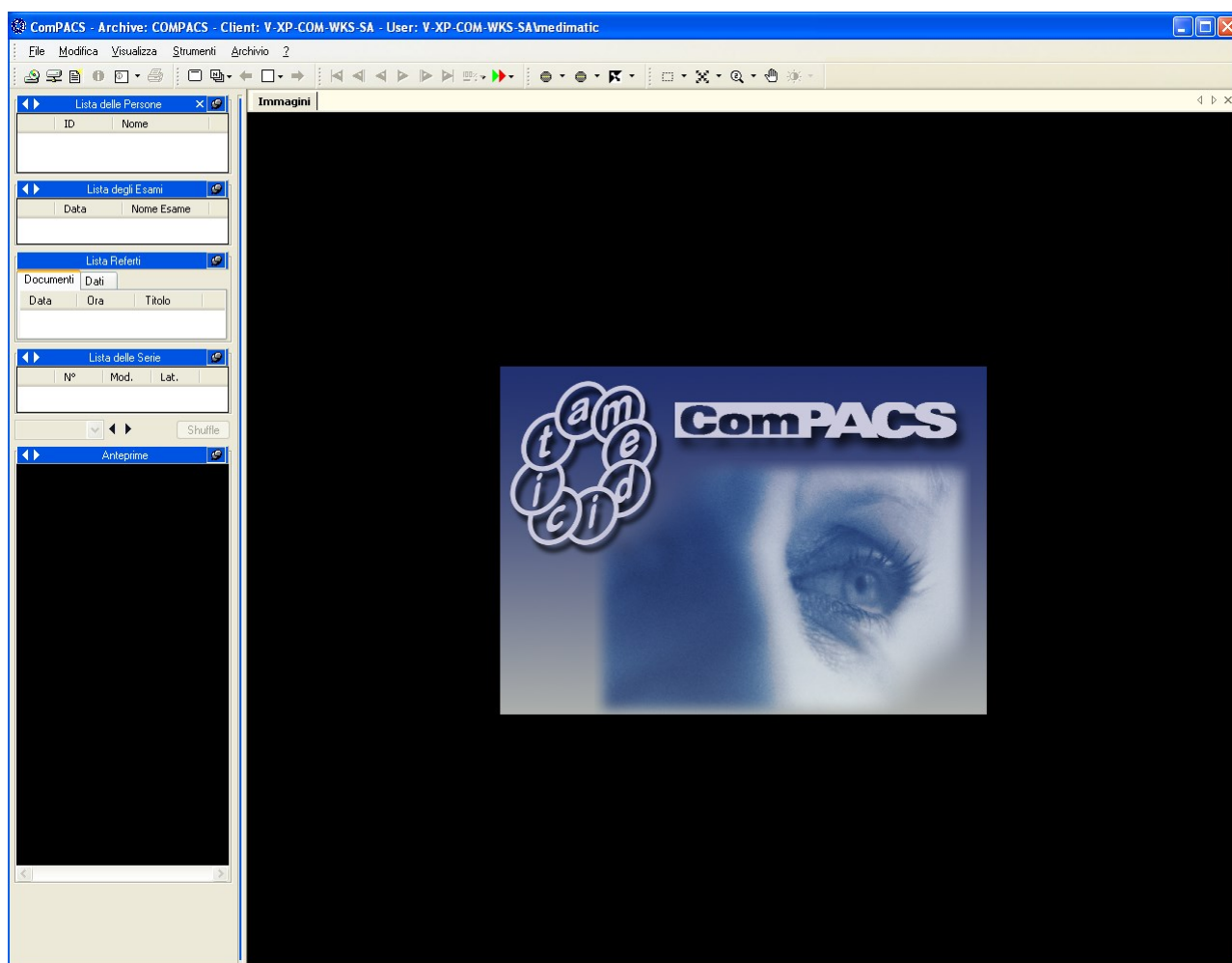

Possono essere identificate quattro parti.

La *barra del menù* (o *menu bar*), in cima allo schermo permette di aprire, salvare, stampare, correggere e chiudere i dati; è possibile richiedere informazioni e impostare le proprietà generali del software; consultare il manuale in-linea e controllare quanti e quali moduli sono correttamente installati.

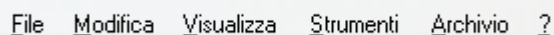


File Modifica Visualizza Strumenti Archivio ?

La *barra del menù* può essere differente in base ai moduli opzionali installati. Ad esempio il menù *Archivio* è presente solo se i moduli *Archive* o *Net Client* sono installati. Menù aggiuntivi o sottomenù possono essere presenti.



La *barra degli strumenti* (o *toolbar*) si trova appena sotto la barra del menù. In questa barra ci sono gli strumenti (filtraggio, zoom, ecc) che possono essere applicati all'immagine; ci sono i comandi di riproduzione e i bottoni per accedere all'archivio (se installato) o per aprire il contenuto di un disco o per creare dei referti (se il relativo modulo è stato installato).



La *finestra di controllo* (o *control window*), situata sulla sinistra, permette di avere controllo diretto su persona, esame, referto, serie o immagini (che sono mostrate in anteprima). Qui è possibile ottenere le informazioni relative a persona, esame, documenti, referti, serie e immagine; si possono archiviare, allegare file alle immagini o scrivere un memo se i relativi moduli sono installati.

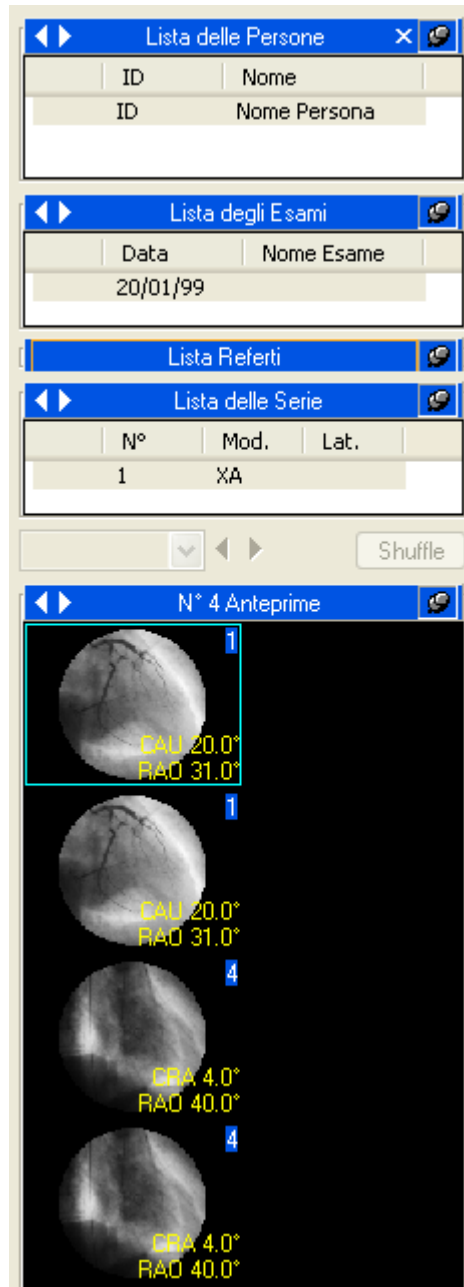

Infine la *finestra dei tab (tabs window)*. Questa è la finestra principale di ComPAS Viewer, qui sono mostrate le immagini e i filmati. Nel caso si stia esplorando un supporto, l'explore window appare nella tabs window, così come per la archive window. Se gli opportuni moduli sono installati e licenziati eventuali file allegati, memo e report sono mostrati in questa finestra.

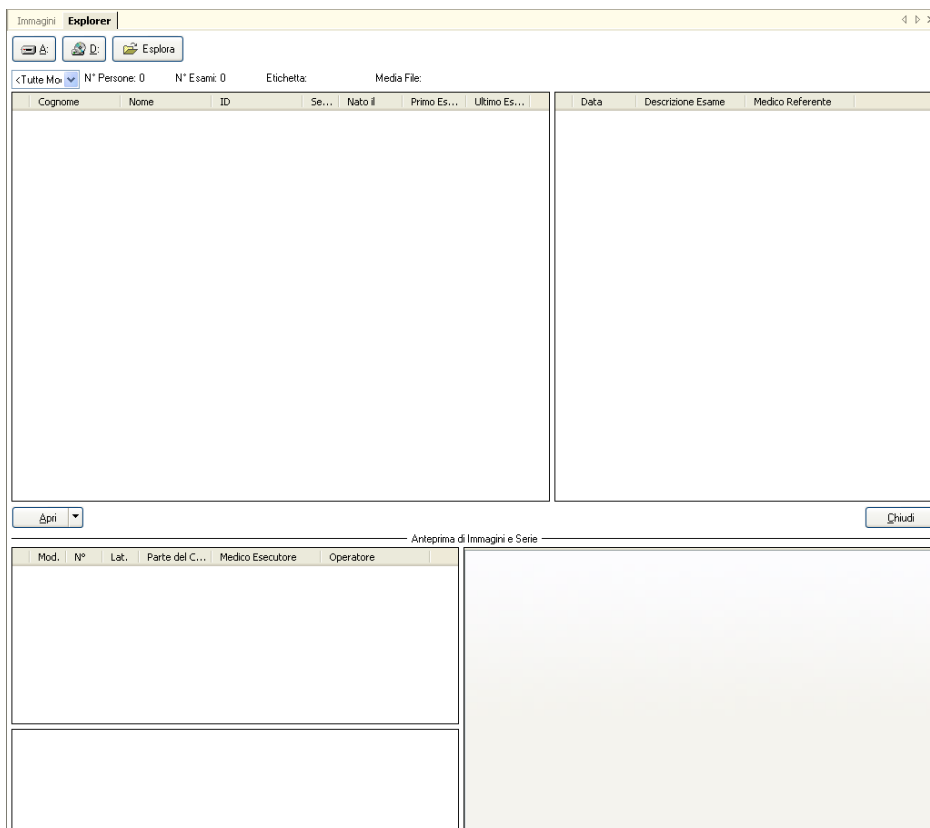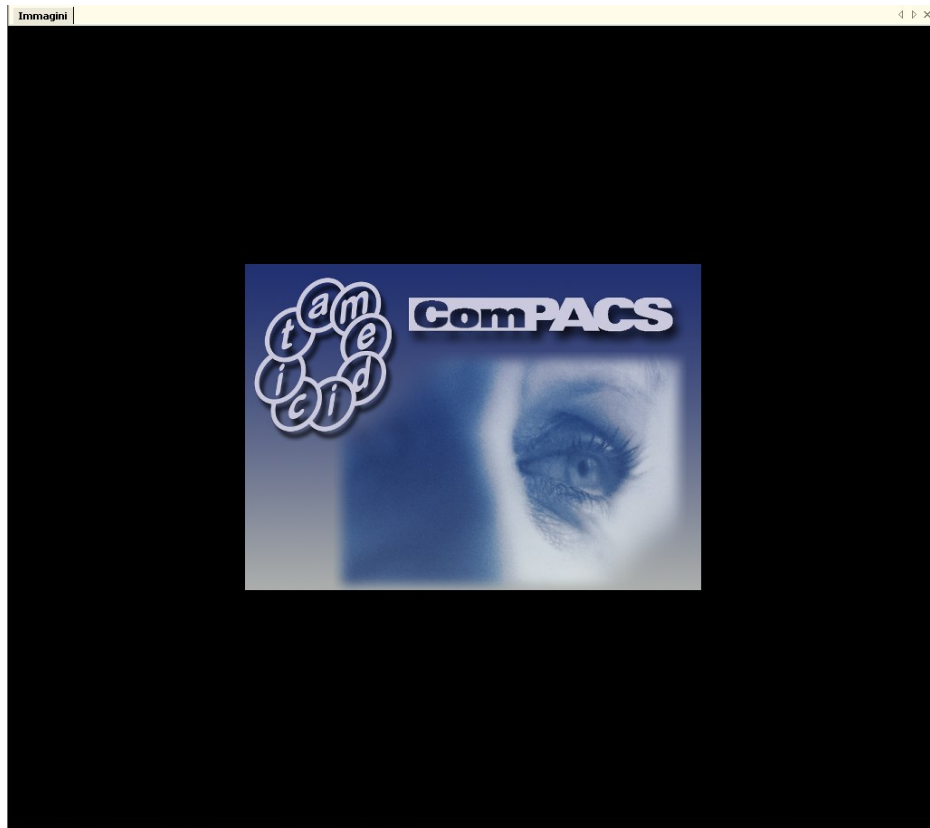

5. AVVIO VELOCE


ComPACS Review Station riconosce automaticamente l'inserzione di un supporto DICOM; basta inserirlo nel lettore del proprio sistema.

Una volta interpretato il contenuto del disco ComPACS Viewer apre automaticamente l'interfaccia per l'esplorazione.




Per un riconoscimento automatico di un supporto DICOM, all'interno della directory principale del supporto deve essere presente un file *dicomdir*. ComPACS Viewer può leggere anche alcuni formati proprietari come *DSR-TIFF* e *DEFF*.




Se il supporto non è riconosciuto automaticamente è comunque possibile accedervi premendo il tasto  *Apri supporti estraibili* nella barra degli strumenti (toolbar).




Una simile operazione può essere effettuata per accedere all'archivio centrale (se il modulo *Archive* è installato) anziché al contenuto del supporto. In questo caso sarà sufficiente premere il tasto  *Cerca Archivio* nella barra degli strumenti (toolbar).

La lista degli esami presenti viene mostrata con alcune informazione accessorie e le anteprime delle immagini.

La finestra dei tab apparirà come la seguente. Nella finestra di servizio ci sono le informazioni relative alla persona, all'esame, alla serie, e le anteprime delle immagini. Nella linguetta (tab) "Immagini" verrà visualizzata la prima immagine o il filmato della persona selezionata.

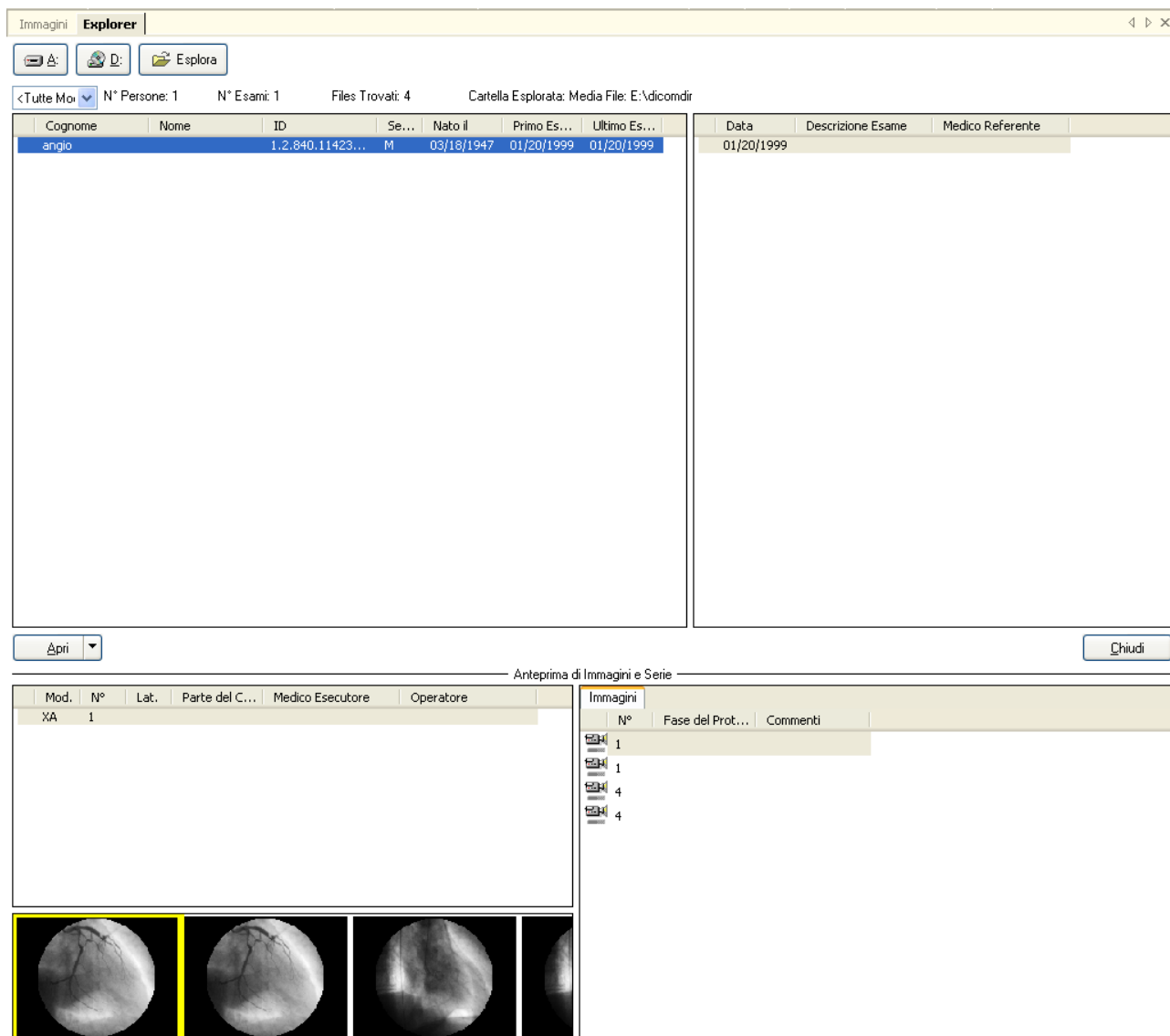

Per selezionare una persona, cliccare col mouse su di esso e poi cliccare su *Apri*. Alternativamente si può semplicemente fare doppio-click sulla persona scelta. Nella linguetta (o tab) “Immagini” verrà visualizzata la prima immagine o il filmato della persona selezionata. L’immagine che segue mostra un esempio di visualizzazione.

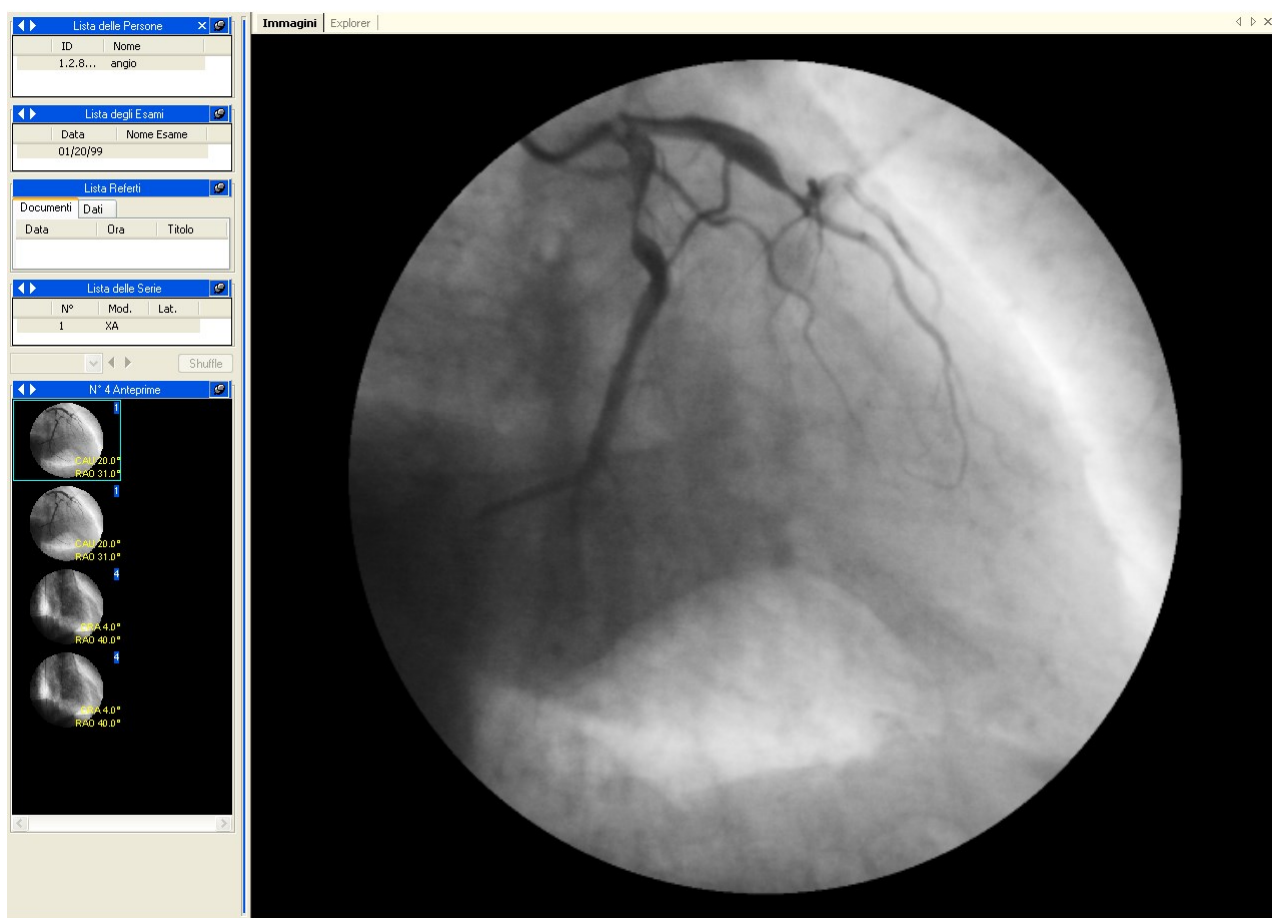







Se il software è configurato per visualizzare l'intestazione con le informazioni sul paziente e sull'esame, tali informazioni saranno visibili in alto, nella finestra "Immagini".


In caso di visualizzazione di molteplici esami per lo stesso paziente o di molteplici pazienti, l'intestazione conterrà tale informazione per avvisare l'utente.


5.1. ACCESSO VELOCE ALLE FUNZIONI PRINCIPALI

Se i dati che si stanno visualizzando sono dei filmati questi possono essere riprodotti tramite i comandi di riproduzione.

-  Play avanti / Stop se ripremuto
-  Play indietro/ Stop se ripremuto
-  e  insieme Sweeping play (Play avanti e indietro continuo)
-  Prossimo fotogramma

 Fotogramma precedente

 Ultimo fotogramma

 Primo fotogramma

o tramite i tasti veloci

↵ Play avanti / Stop

Pag↑ Anteprima precedente

Pag↓ Anteprima successiva

← Fotogramma precedente

→ Fotogramma successivo

↑ Primo fotogramma

↓ Ultimo fotogramma

F1 Aiuto on-line

F2 Passa da normale a schermo intero

Cliccando col tasto destro del mouse quando il puntatore del mouse si trova nella finestra dei tab, un menù di accesso veloce apparirà per consentire la selezione di alcune funzionalità (ad esempio: zoom, modalità di visualizzazione, informazioni, ecc.).

Se la rotella del mouse è configurata per la selezione delle immagini, ruotandola quando il cursore è posizionato nella finestra delle immagini è possibile cambiare le immagini visualizzate. In alternativa la rotella consente di selezionare i fotogrammi in un filmato.

6

6. REVIEW STATION

6.1. APRIRE I FILE

6.1.1 FORMATI DEI FILE

Aprire e chiudere un insieme di file tramite la presenza del file *DICOMDIR* (file in accordo con lo standard DICOM 3.0) è un'operazione tipicamente eseguita in maniera automatica al momento dell'inserimento del disco nel sistema.

Il file *DICOMDIR* deve essere presente nella cartella principale del disco considerato. ComPACS Viewer può anche leggere dei formati proprietari come *DSR-TIFF* e *DEFF*.

6.1.2 APRIRE UN FILE DA DISCHI RIMOVIBILI


Se il vostro sistema non permette il riconoscimento automatico dell'inserzione o rimozione di un disco, o se il file *dicomdir* non è presente, è tuttavia possibile aprire un set di dati DICOM cliccando sull'icona



Questo può essere fatto anche cliccando sul menù *File* e scegliendo *Apri Supporti Estraibili* (Tasti di scelta rapida **Ctrl+O**)



Questa operazione fa apparire nella finestra dei tab un'interfaccia di esplorazione tramite la quale si può navigare all'interno del contenuto del disco (rimovibile, fisso o di rete).

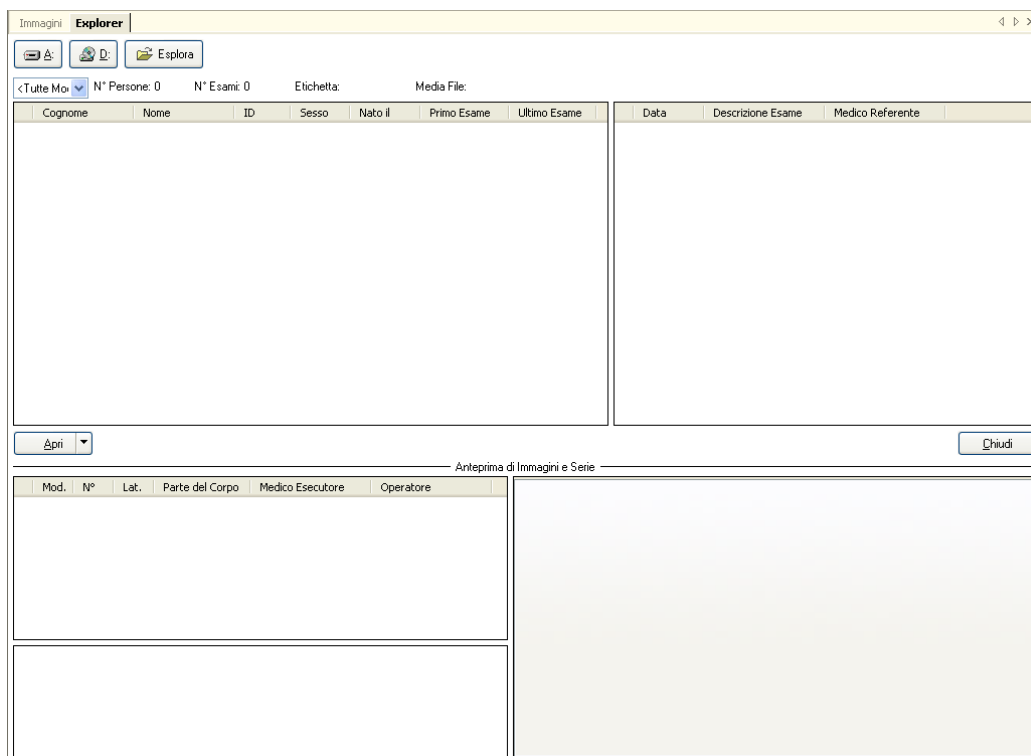


Per esplorare direttamente il contenuto di un disco rimovibile basta cliccare su una delle icone relative ai dischi rimovibili riconosciuti dal sistema (CD, DVD, chiavette USB, ecc...).

Ad esempio:




Le lettere che appaiono sulle icone dipendono dalle impostazioni del sistema.

Il software ricerca il file *dicomdir* (o altri file proprietari supportati) e, se trovato, apre automaticamente il set di dati.

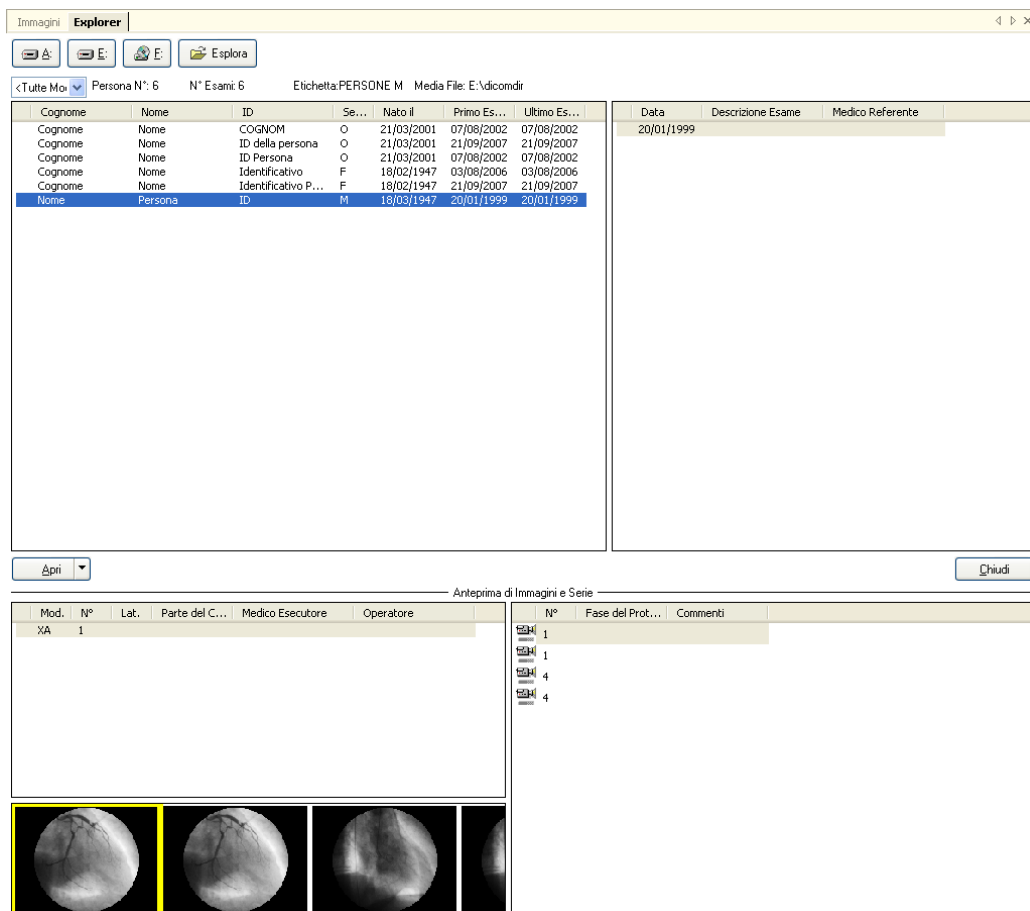


Viene quindi presentata una lista degli esami insieme ad alcune informazioni accessorie. Per selezionare una persona fare doppio-click su di esso. Se si desidera aprire solo un'immagine fare doppio-click su di essa.

Il set di dati viene automaticamente chiuso quando il disco viene estratto; tuttavia i dati possono essere chiusi scegliendo *Chiudi Tutte le Persone* dal menù *File*.

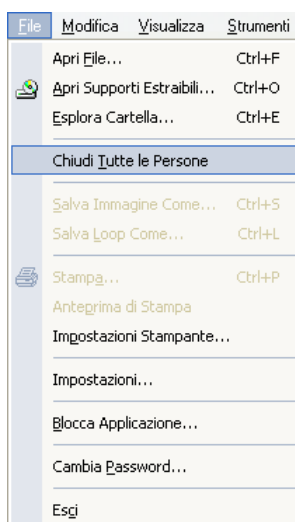


La stessa operazione può anche essere effettuata facendo click col destro nella finestra di servizio e poi scegliendo *Chiudi Persona* o *Chiudi Tutti Pazienti*.

6.1.3 APRIRE DEI FILE DA DISCO FISSO

Per aprire un set di file presenti sul disco fisso, o su un disco di rete, cliccare nella *explorer* window il tasto 


Lo stesso può essere fatto cliccando su *File* e poi su *Esplora Cartella* (tasti di scelta rapida **Ctrl+E**)

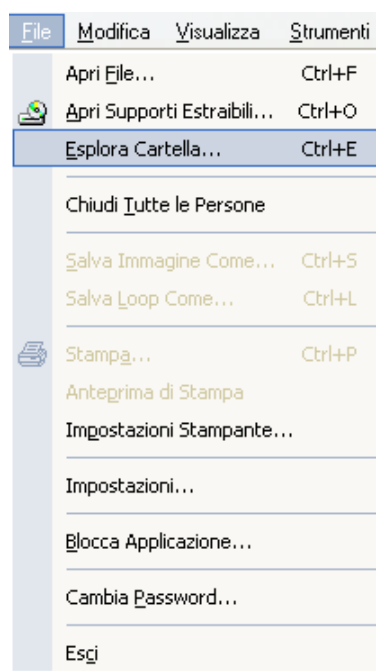

Apparirà una finestra che permette la selezione del file desiderato presente su un disco locale, un dispositivo locale o un dispositivo di rete.




Un altro modo per navigare nelle cartelle è selezionare *Apri File* (tasti di scelta rapida **Ctrl+F**) dal menù *File* e selezionare il file specifico o il DICOMDIR.

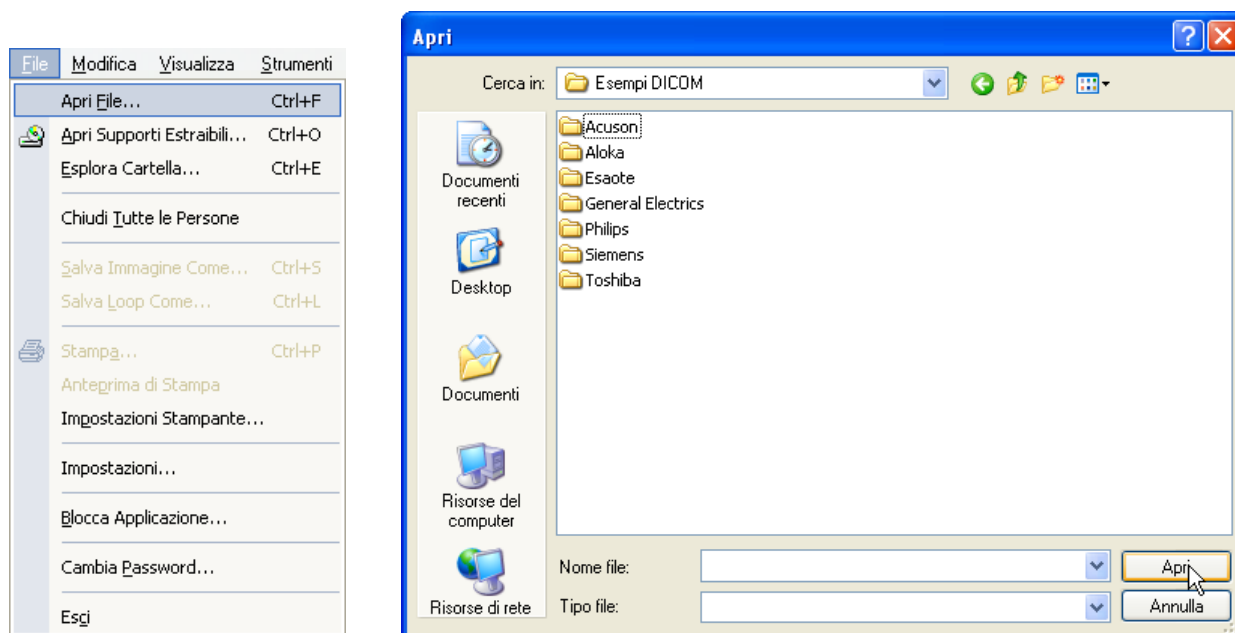

6.1.4 APERTURA DI UNA PERSONA/ESAME DALL'ARCHIVIO




Nel caso in cui un archivio locale o remoto sia installato, è possibile accedere all'archivio centrale anziché al contenuto su file system. In questo caso è sufficiente utilizzare il tasto  *Cerca Archivio* nella barra degli strumenti (toolbar).

6.2. VISIONE DELLE IMMAGINI

6.2.1 ANTEPRIME

Una volta che il set di immagini è stato caricato, queste vengono mostrate nella finestra di servizio sottoforma di anteprima.

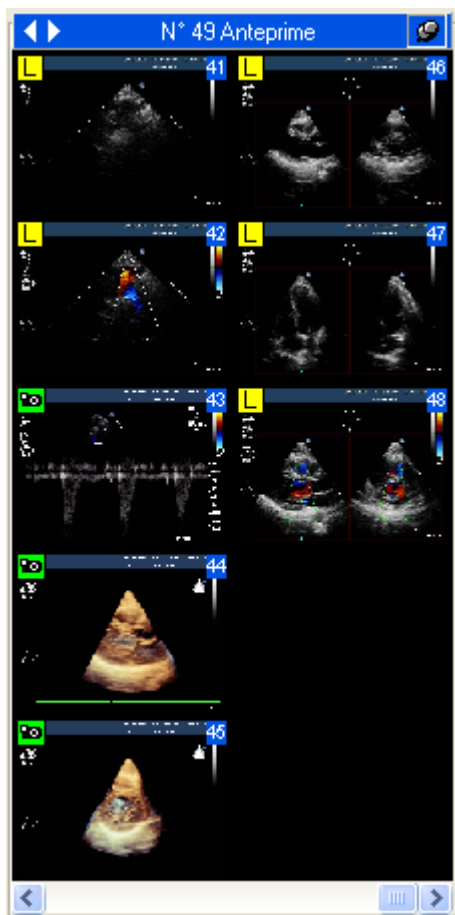






Si può navigare tra le anteprime usando il mouse, i *Control Keys* o tramite tastierino numerico.

E' possibile anche utilizzare uno dei due tasti appositamente creati per questo scopo.


➡ anteprima successiva (tasto di scelta rapida **PagUp**) e ⬅ anteprima precedente (tasto di scelta rapida **PgDn**).


Le anteprime verranno visualizzate sottoforma di piccola immagine dell'oggetto a cui si riferisce, nel caso di immagine o filmato. In alternativa, nel caso in cui l'oggetto rappresentato sia un referto o una forma d'onda, l'anteprima sarà visualizzata come il tipo di Modalità, il suo numero e la data e ora dell'oggetto.

Inoltre alle immagini di anteprima possono essere assegnati simboli differenti che forniscono informazioni aggiuntive circa l'oggetto in questione. In dettaglio verranno usati i seguenti simboli per far riferimento a:


-  - oggetti che contengono dati in formato *Lossy* (Ad esempio per una Transfer Syntax DICOM Lossy);
-  - oggetti che rappresentano immagini formate da un singolo fotogramma;
-  - oggetti che non sono supportati dalla versione del software installata.;
-  - oggetti in fase di trasferimento dall'archivio centrale. Questo simbolo scomparirà una volta che l'operazione di download sarà ultimata e l'oggetto sarà disponibile;
-  - serie di oggetti (e non solo oggetti singoli, immagini o filmati). Questo simbolo viene usato tipicamente per oggetti che spesso necessitano di essere impilati (stacked) come ad esempio le Risonanze Magnetiche (MR) o TAC (CT).

6.2.2 ASPETTO

ComPACS Review Station permette di vedere una o più immagini contemporaneamente. Ciò può essere fatto cliccando l'icona di *Disposizione*  quindi selezionando la divisione dello schermo desiderata.

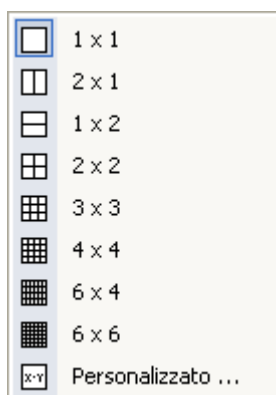


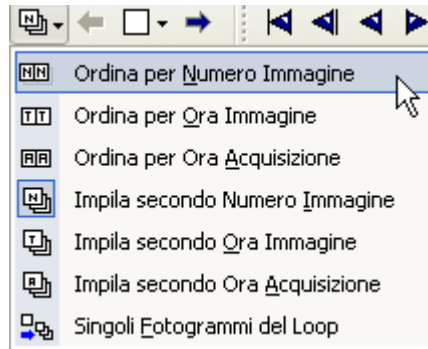
Lo stesso può essere fatto cliccando su *Visualizza* e selezionando *Visualizza Layout*.

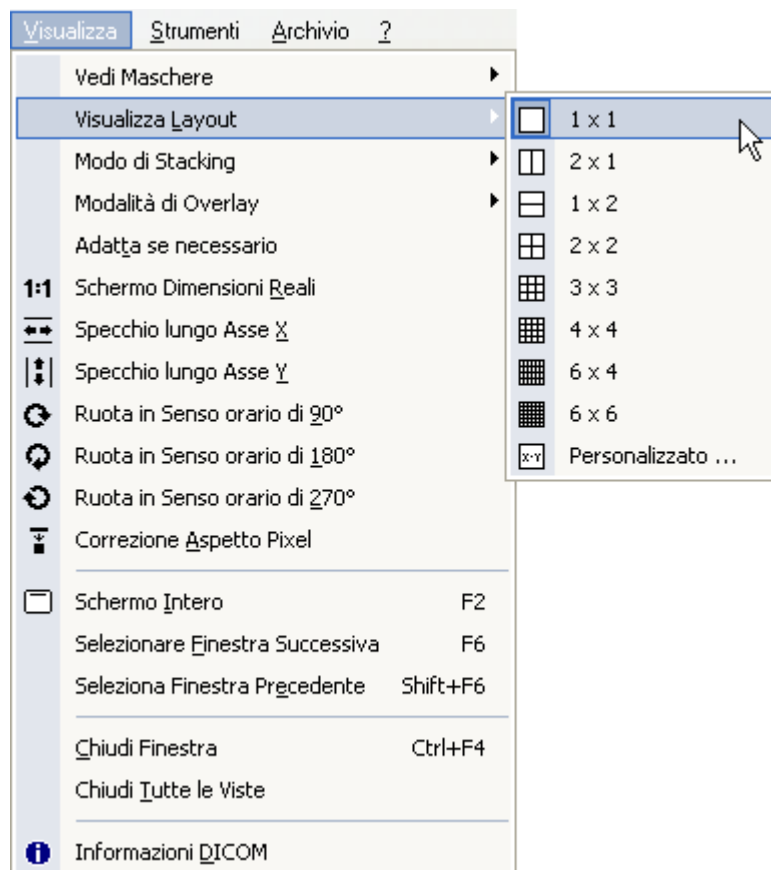


La divisione dello schermo può anche essere personalizzata (il massimo consentito è 10 x 10). Facendo doppio-click su un'anteprima sullo schermo saranno mostrate l'immagine selezionata e le altre che la seguono, fino a riempire totalmente lo schermo. La sequenza di immagini può essere variata a piacere trascinando le immagini (drag-and-drop) nella locazione scelta.

Con ComPACS Viewer è anche possibile specificare le informazioni di *Raggruppamento* per costruire filmati composti da singoli fotogrammi (tipica situazione di un esame TAC o RM). Al contrario possono essere divisi in singoli fotogrammi (*Separazione*) i filmati DICOM per osservare tale filmato in modalità fotogramma per fotogramma.


Per accedere alla funzionalità descritta cliccare l'icona d'*Ordinamento*  quindi selezionare la scelta desiderata.



Lo stesso può essere fatto selezionando il menù *Visualizza* e quindi *Modo di Stacking*

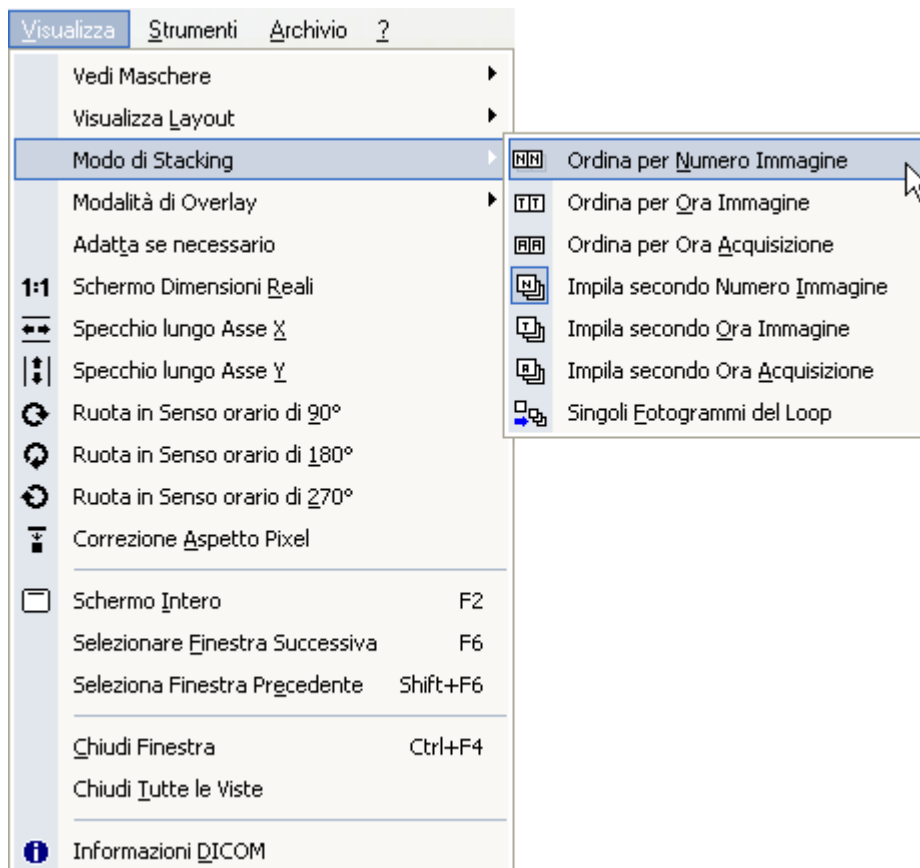


Di seguito viene mostrato come esempio una griglia 2 x 3. Cambiare le impostazioni sull'aspetto non influenza le funzionalità del software.

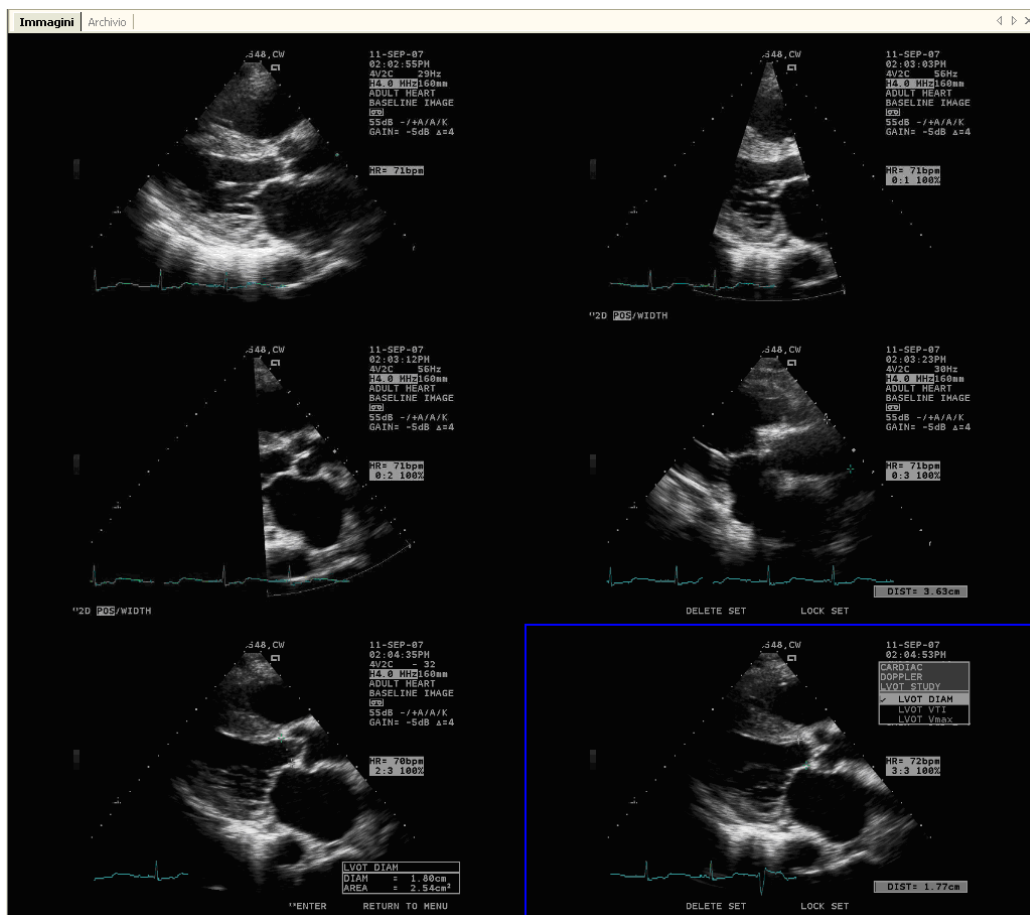


La modalità di stacking di default è quella di *Ordina per numero immagine* NH. Si prega di impostare questa modalità se riscontrate dei comportamenti anomali in fase di visualizzazione delle immagini o dei filmati.

6.2.3 SCHERMO INTERO

ComPACS Viewer permette la visione a schermo intero. Quest'opzione può essere attivata e disattivata usando il pulsante  presente nella barra degli strumenti, o con il tasto funzione **F2**.

6.2.4 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE


Nella finestra di servizio, insieme alle anteprime, si possono vedere altre tre finestre che mostrano informazioni circa il set attivo. Si può notare la *Lista delle Persone*, la *Lista degli Esami*, la *Lista dei referti* e la *Lista delle Serie*. In altre parole nella finestra di servizio si possono ottenere informazioni circa persona, esame, serie.

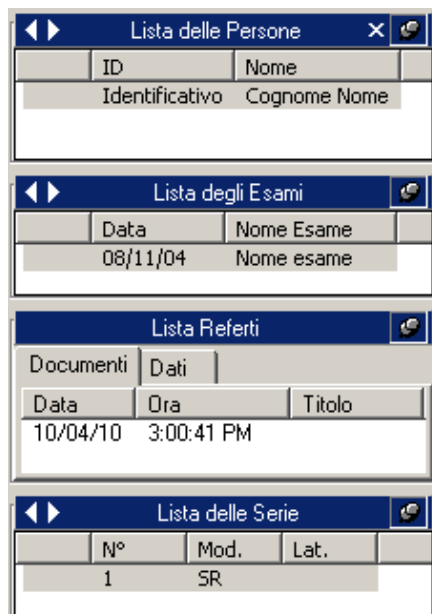

Ulteriori informazioni sono disponibili cliccando col tasto destro del mouse su di un'immagine o su un'anteprima. Quindi cliccando su *Informazioni DICOM*. In questo modo apparirà una nuova finestra dove sono mostrate tutte le informazioni concernenti l'immagine selezionata.




Tutte le informazioni DICOM vengono mostrate.

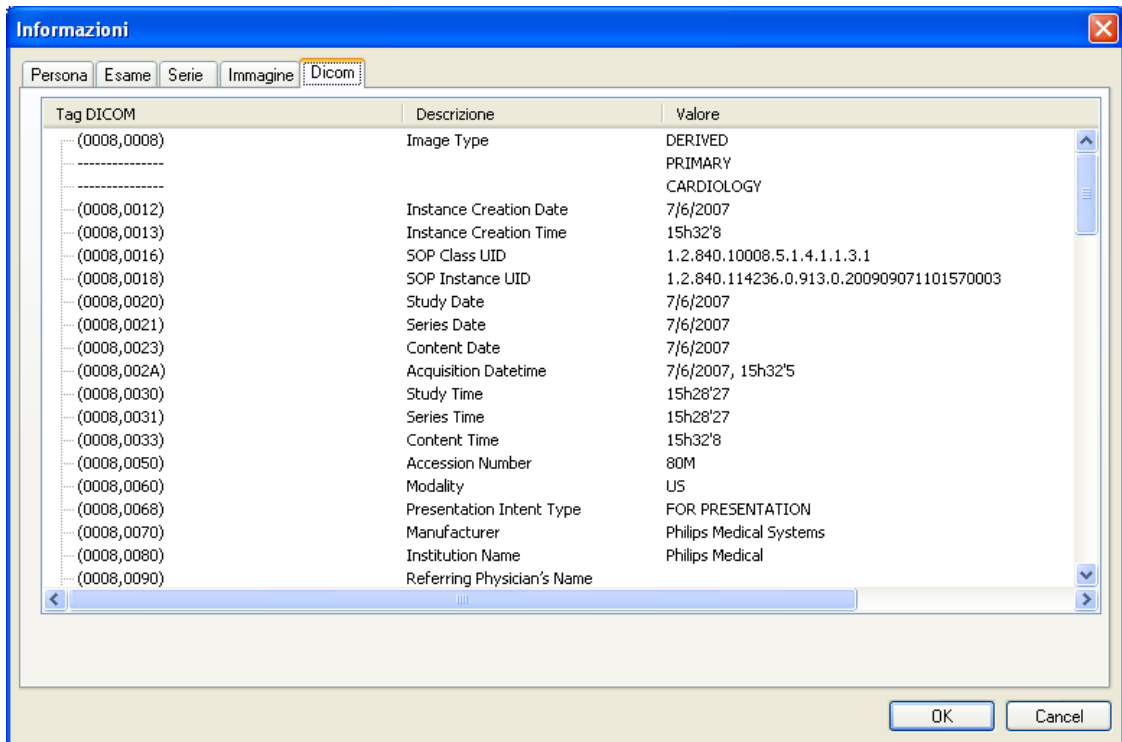

The screenshot shows a window titled 'Informazioni' with a tabbed interface. The 'Dicom' tab is selected, displaying a table of DICOM tags and their corresponding values.

| Tag DICOM | Descrizione | Valore |
|-------------|----------------------------|---|
| (0008,0008) | Image Type | DERIVED PRIMARY CARDIOLOGY |
| (0008,0012) | Instance Creation Date | 7/6/2007 |
| (0008,0013) | Instance Creation Time | 15h32'8 |
| (0008,0016) | SOP Class UID | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 |
| (0008,0018) | SOP Instance UID | 1.2.840.114236.0.913.0.200909071101570003 |
| (0008,0020) | Study Date | 7/6/2007 |
| (0008,0021) | Series Date | 7/6/2007 |
| (0008,0023) | Content Date | 7/6/2007 |
| (0008,002A) | Acquisition Datetime | 7/6/2007, 15h32'5 |
| (0008,0030) | Study Time | 15h28'27 |
| (0008,0031) | Series Time | 15h28'27 |
| (0008,0033) | Content Time | 15h32'8 |
| (0008,0050) | Accession Number | 80M |
| (0008,0060) | Modality | US |
| (0008,0068) | Presentation Intent Type | FOR PRESENTATION |
| (0008,0070) | Manufacturer | Philips Medical Systems |
| (0008,0080) | Institution Name | Philips Medical |
| (0008,0090) | Referring Physician's Name | |


I campi *Persona*, *Esame*, *Serie*, *Immagine* hanno lo stesso significato della finestra di servizio. Il campo *Dicom* contiene tutte le informazioni derivate dall'interpretazione dei dati DICOM.

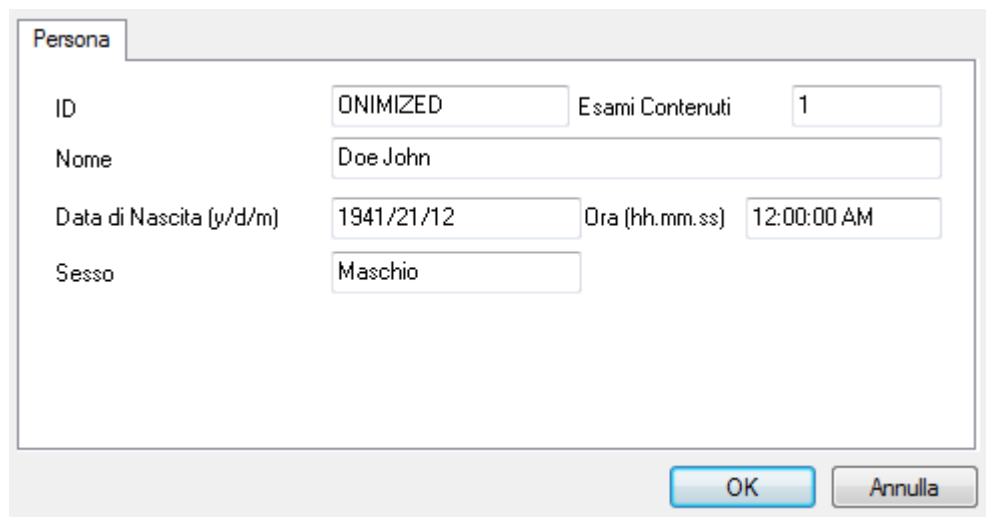


The screenshot shows the 'Persona' tab of the 'Informazioni' window. It contains several input fields for personal information:

| | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|-------------|
| ID | ONIMIZED | Esami Contenuti | 1 |
| Nome | Doe John | | |
| Data di Nascita (y/d/m) | 1941/21/12 | Ora (hh.mm.ss) | 12:00:00 AM |
| Sesso | Maschio | | |

Informazioni DICOM sulla persona

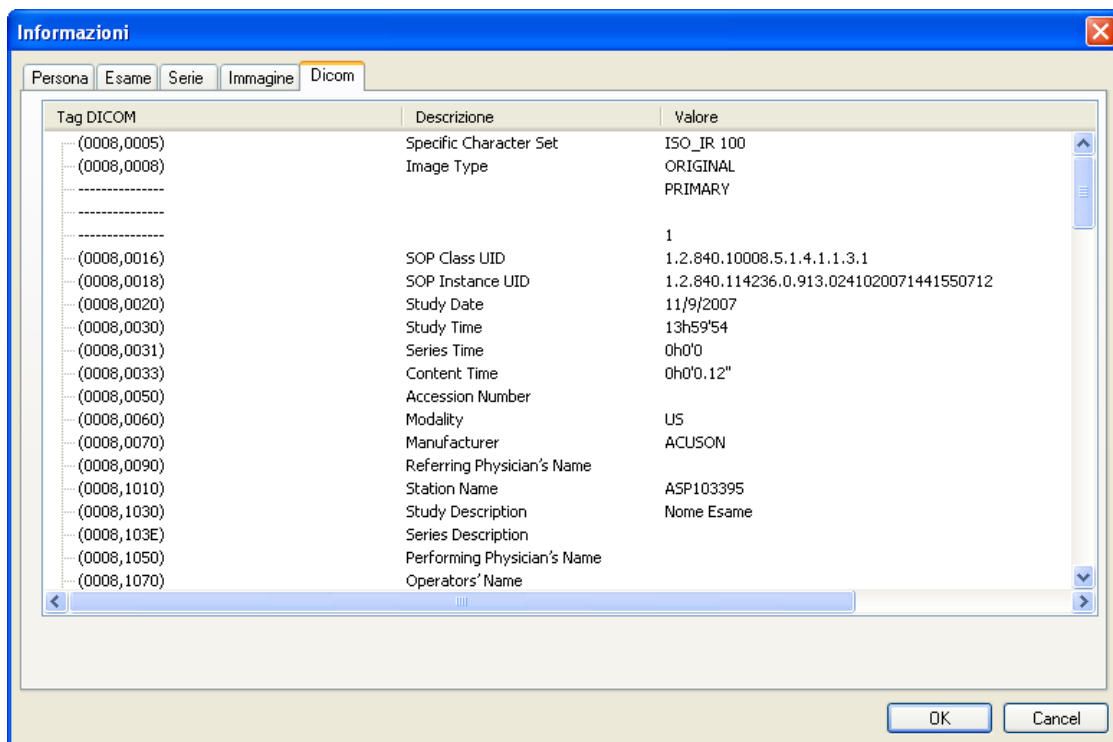


Informazioni DICOM estese


Un'altra maniera per accedere a questo tipo d'informazioni è di cliccare su menù *Visualizza* e quindi su *Informazioni DICOM*, o direttamente cliccando sull'icona *Informazioni*  presente nella barra degli strumenti.



6.2.5 INFORMAZIONI DI OVERLAY (SOVRAPPOSIZIONE)

Può essere utile nascondere o mostrare le informazioni di *Overlay*. Ovvero mostrare o nascondere *Nome della Persona*, *Data Esame* e le informazioni di compressione dell'immagine.

E' possibile mostrare o nascondere le informazioni di overlay cliccando sull'icona  o selezionando dal menù *Visualizza* l'opzione *Modalità di Overlay*.

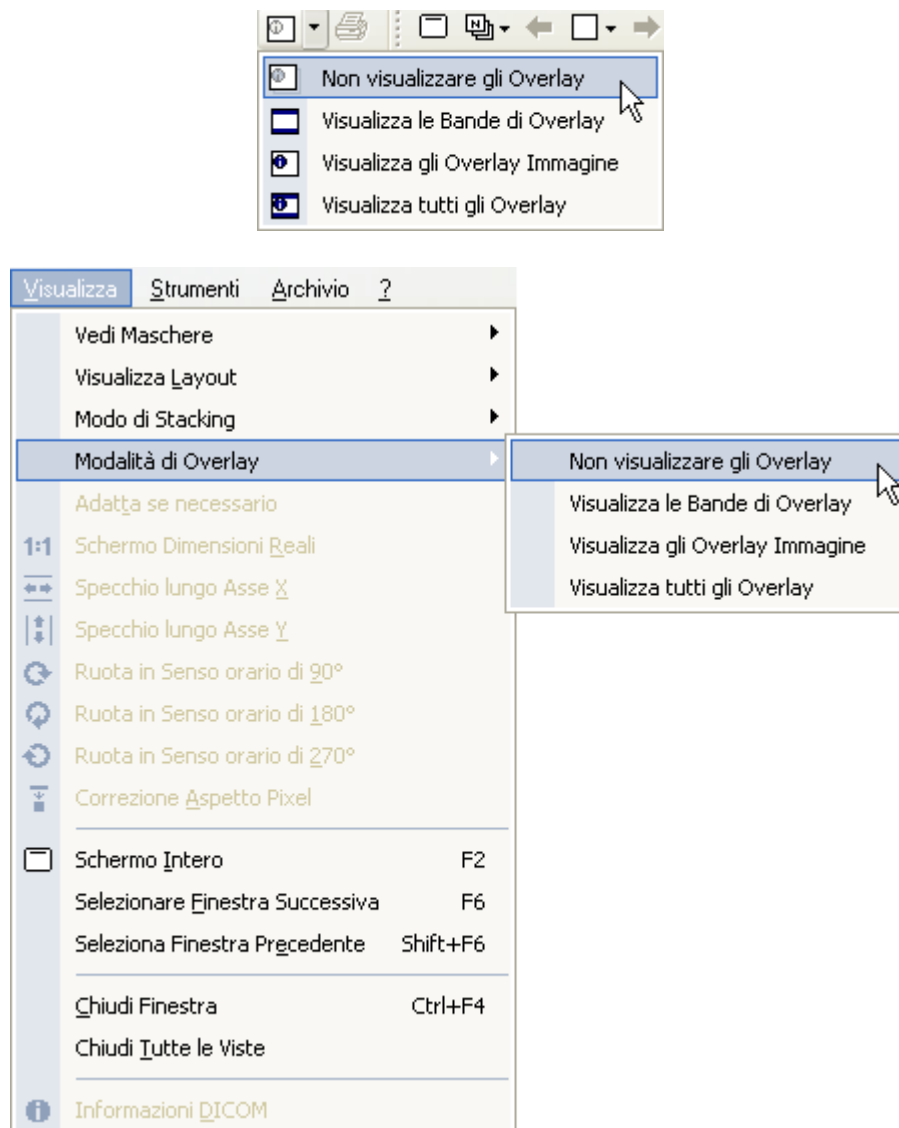

Esistono due tipi differenti di overlay:

a) una banda colorata posizionata nelle estremità superiore dell'immagine contenente informazioni sulla persona e sull'esame;

b) overlay dell'immagine utilizzate per mostrare informazioni di configurazione più dettagliate (per ulteriori informazioni vedere il capitolo sulle configurazioni).

Un overlay dinamico sarà inoltre visualizzato quando il cursore è posizionato nella parte bassa dell'immagine. In tale overlay sono visualizzate informazioni sulla compressione, numero della serie, numero dell'immagine e del fotogramma. Per i filmati l'overlay contiene anche un pulsante per attivare o interromperne la riproduzione e uno slider per selezionare specifici fotogrammi.



Anche quando la *Modalità di Overlay* è disabilitata, le informazioni di Overlay rimarranno sullo schermo per cinque secondi ogni volta che i vari esami o le varie persone saranno aperte, per poter avvisare l'utente che si stanno visualizzando immagini appartenenti a persone differenti. Si prega di fare molta attenzione a queste informazioni per evitare possibili confusioni tra persone o esami.

6.2.6 VISUALIZZAZIONE REFERTI

La finestra di servizio "Lista Referti" visualizzerà i documenti dei referti e gli SR rispettivamente nelle tab "Documenti" e "Dati".

| Lista Referti | | |
|---------------|------------|--------|
| Documenti | | Dati |
| Data | Ora | Titolo |
| 10/04/10 | 3:00:41 PM | |

Per visualizzare il documento relativo al referto, cliccare sul relativo oggetto. Nella finestra principale verrà aperto un nuovo tab che conterrà il documento selezionato.




Per visualizzare il documento del referto è necessario avere installato sul proprio sistema Adobe® Acrobat Reader.



Gli oggetti strutturati presenti nel tab "Dati" non possono essere analizzati solo se i moduli di analisi e reporting sono licenziati ed attivati.

6.2.7 CHIUSURA OGGETTI

Per pulire la finestra dei tab, senza perdere le anteprime cliccare sul menù *Visualizza* quindi su *Chiudi Finestra* (tasti di scelta rapida **Ctrl+F4**).

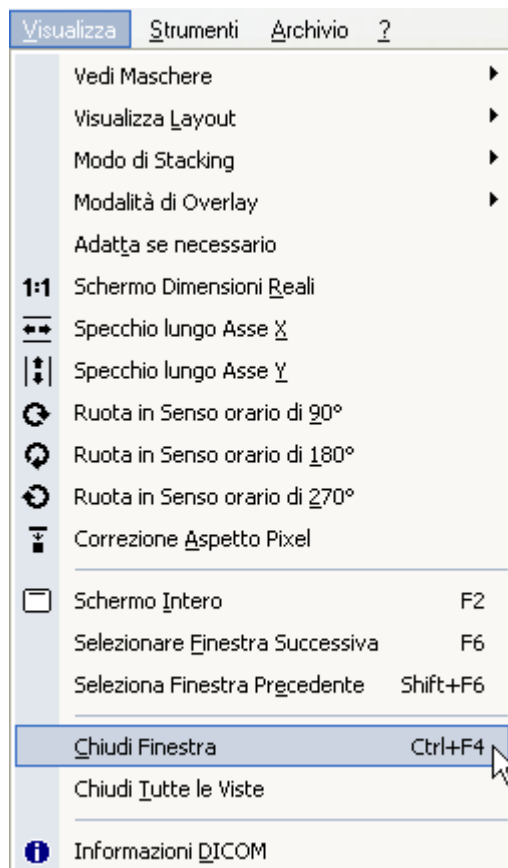

Nel caso abbiate più di un'immagine aperta selezionando *Chiudi Finestra* chiuderà solo l'immagine selezionata. Per chiudere tutte le immagini nella Main Window (senza chiudere le anteprime) è sufficiente cliccare su *Chiudi tutte le Viste* o cliccare sul tasto **X** della finestra dei tab.

Cliccando sul tasto **X** della finestra di servizio relative alla persona, verranno chiusi tutte le persone aperte e tutti i loro relativi esami. Se si desidera chiudere una sola persona è sufficiente cliccare col tasto destro del mouse sulla persona o sulla barra del titolo della finestra di servizio e selezionare l'opzione *Chiudi Persona*.

6.2.8 MULTI-MONITOR

ComPACS Viewer permette di utilizzare una configurazione multi-monitor (se il relativo modulo è installato e licenziato). Per accedere alle impostazioni relative cliccare sul menù *File*, quindi su *Impostazioni*.



Questa operazione aprirà una finestra con diversi tab. Il tab *Multi-Monitor* permette di impostare le opzioni per i diversi monitor. Ogni monitor può avere una sua funzione specifica.

- *Non usato*;
- *Monitor Principale*: usualmente utilizzato per l'interfaccia principale (per le finestre di servizio)
- *Monitor Aggiuntiva*: usualmente utilizzato per le immagini aggiuntive o per i referti.

Monitor

1. Generic Non-PrP Monitor

Finestra (oriz. = 1, vert. = 1)
Finestra (oriz. = 2, vert. = 1)

Tipo

Abilita

Orizzontale #:

Verticale #:

Dimensioni Automatiche

Tipo e Posizione

Non Usato

Monitor Principale

Monitor Aggiuntiva

Pos. X:

Pos. Y:

Larghezza:

Altezza:

Proprietà

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Permetti Ridimensionamento della Finestra | <input checked="" type="checkbox"/> Mostra Altre Finestre |
| <input checked="" type="checkbox"/> Auto-Apri la Finestra | <input checked="" type="checkbox"/> Mostra Anteprima di Stampa delle Immagini |
| <input type="checkbox"/> Auto-Apri Esame Aggiuntivo | <input checked="" type="checkbox"/> Mostra Anteprima di Stampa dei Referti |
| <input type="checkbox"/> Mostra Liste | <input checked="" type="checkbox"/> Mostra Finestra di Approvazione del Referto |
| <input type="checkbox"/> Mostra Referti | <input checked="" type="checkbox"/> Mostra tutte le Anteprime di Stampa |

In sostanza è possibile decidere quale funzione assegnare a ogni monitor. Ovviamente uno dei due monitor deve essere impostato come interfaccia principale (Monitor Principale), l'altro monitor sarà "Monitor Aggiuntiva". Si possono quindi assegnare le diverse proprietà ricordando che se una funzione è stata assegnata a un monitor, questa dovrebbe essere disabilitata per l'altro.

Le proprietà principali dei monitor sono le seguenti:

- Auto-Apri la Finestra. Questa proprietà definisce in quale monitor saranno automaticamente visualizzate le immagini relative all'esame aperto in revisione. Nel caso più di un monitor sia configurato con tale proprietà, le immagini saranno distribuite su tali monitor selezionati.
- Auto-Apri Esame Aggiuntivo. Questa proprietà definisce in quale monitor saranno automaticamente visualizzate le immagini relative a un secondo esame aperto in revisione per un confronto. Se non impostata. Tutti gli esami saranno visualizzati sui monitor di riferimento prima indicati. Nel caso più di un monitor sia configurato con tale proprietà, le immagini saranno distribuite su tali monitor selezionati.
- Mostra Liste. Questa proprietà definisce in quale monitor saranno visualizzate le liste dei pazienti e degli esami (per esempio le finestre di ricerca nell'archivio).
- Mostra Referti. Questa proprietà definisce in quale monitor sarà visualizzata la finestra per creare o modificare un referto.

Il significato delle restanti proprietà si può desumere direttamente dalla loro descrizione.

Inoltre è possibile dividere i vari monitor sia orizzontalmente sia verticalmente, emulando la funzionalità di multi-monitor anche nel caso in cui si abbia un solo monitor a disposizione. E' possibile inoltre definire la posizione e le dimensioni delle suddivisioni.

Tutte le impostazioni avranno effetto solo dopo aver fatto ripartire l'applicazione.



Si prega di ricordare che le opzioni relative al multi-monitor dipendono anche dalla scheda video installata sul computer in uso.

6.3. RIPRODUZIONE DI FILMATI

6.3.1 COME RIPRODURRE FILMATI

Una volta che un file DICOM è stato caricato, ComPACS Viewer mostra le immagini nella finestra dei tab. Se tale finestra non è abbastanza larga da contenere l'immagine, questa sarà automaticamente ridimensionata per una visione ottimale.

Per controllare i filmati ci sono diverse possibilità: attraverso le icone di riproduzione.



Play avanti / Stop se ripremuto



Play indietro/ Stop se ripremuto



e insieme Sweeping play (Play avanti e indietro)



Prossimo fotogramma



Fotogramma precedente



Ultimo fotogramma



Primo fotogramma

Tutti questi comandi sono anche inclusi nel menù *Strumenti* selezionando *Controllo Riproduzione*.



C'è anche un altro modo per controllare la riproduzione: i Control Keys.

↵ Play avanti / Stop

Pag↑ Anteprima precedente

Pag↓ Anteprima successiva

← Fotogramma precedente

→ Fotogramma successivo

↑ Primo fotogramma

↓ Ultimo fotogramma

Un overlay dinamico sarà inoltre visualizzato quando il cursore è posizionato nella parte bassa dell'immagine. Per i filmati l'overlay contiene anche un pulsante per attivare o interrompere la riproduzione e uno slider per selezionare specifici fotogrammi.

Infine può anche essere usato il tastierino numerico dove i tasti assumono le seguenti funzionalità:

Tasto 7: prima immagine

Tasto 1: ultima immagine

Tasto 9: immagine precedente

Tasto 3: immagine successiva

Tasto 8: primo fotogramma

Tasto 2: ultimo fotogramma

Tasto 4: fotogramma precedente


Tasto 6: fotogramma successivo


Tasto Invio: Play



Tasto 5: Stop

Tasto +: Play indietro

6.3.2 CONTROLLO DELLA VELOCITA'

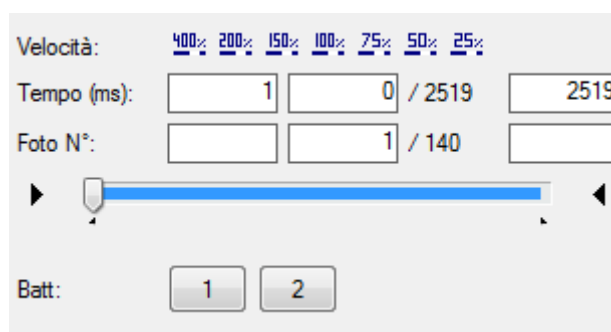Premendo il pulsante *Velocità di Riproduzione*  si avrà accesso ad un menù mediante il quale è possibile controllare la velocità di riproduzione ed impostare i differenti limiti del filmato in termini di tempo o di fotogramma.



La velocità può variare tra 400% e 25%. I limiti di tempo e di fotogramma possono essere variati posizionando la barra di progresso (progress-bar) e cliccando sulle piccole frecce a sinistra  e a destra . I relativi marcatori della barra si posizioneranno di conseguenza.

Se il file DICOM contiene le informazioni dell' ECG Onda-R, verrà visualizzato un pulsante per ciascun battito. Premendo uno o più pulsanti è possibile limitare la riproduzione del filmato ai battiti selezionati.




Queste impostazioni sono solo temporanee, quindi non salvate e non si avranno in caso di ri-apertura dello stesso filmato.




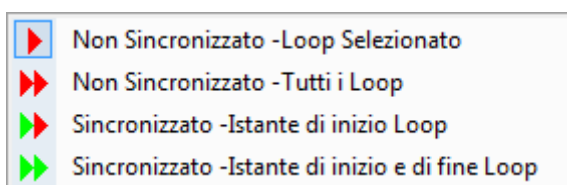
Le velocità impostate saranno ottenute solo se si hanno a disposizione abbastanza risorse computazionali. In caso contrario si otterrà una velocità di visualizzazione ridotta.

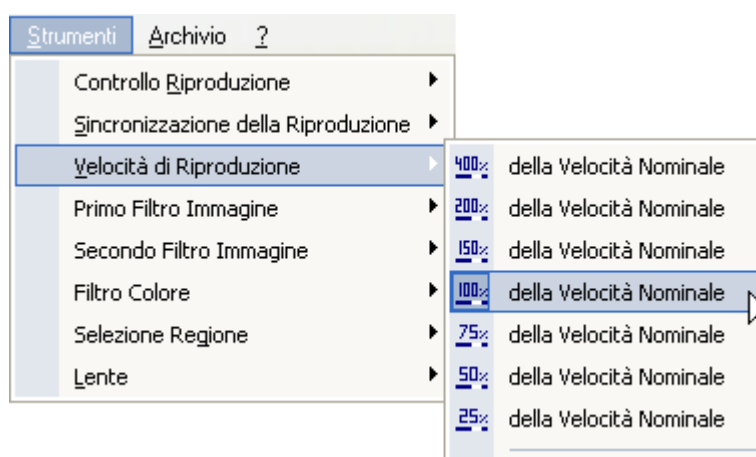

La stessa finestra è accessibile cliccando sul menù *Strumenti* e quindi su *Velocità di Riproduzione*.




6.3.3 CONTROLLO MULTI LOOP

Nel caso si stiano analizzando diversi filmati contemporaneamente (disposizione modificata) si può facilmente controllarne la sincronizzazione. Per entrare nell'interfaccia di *Sincronizzazione* è necessario premere il pulsante  e si aprirà la seguente finestra.




Le possibili scelte sono intuitive. Ad esempio per sincronizzare tutti i filmati sul fotogramma iniziale selezionare il pulsante , o per sincronizzarli su inizio e fine premere , ecc... Queste stesse funzionalità possono essere ottenute dal menù *Strumenti* e scegliendo *Sincronizzazione della Riproduzione*.

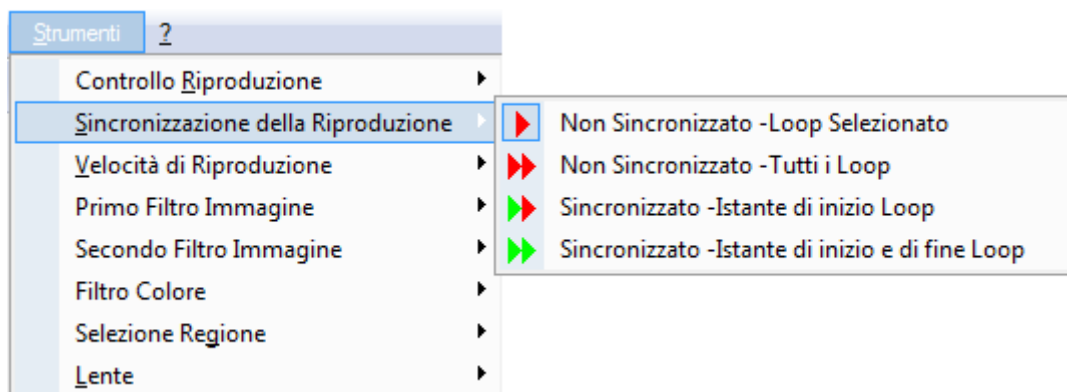

6.3.4 RAGGRUPPAMENTO


Con ComPACS Viewer è possibile costruire un filmato con una serie di singoli fotogrammi (tipicamente una serie TAC o RM); o viceversa scomporre un filmato in tutti i fotogrammi di cui fa parte.

Le possibilità di raggruppamento sono accessibili tramite il pulsante 

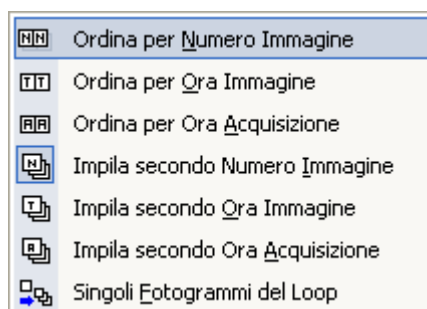

In questo menù è possibile scegliere che tipo di ordinamento utilizzare. Le icone *Ordina* lasciano i dati nel loro formato originale. Le icone *Impila* uniscono i fotogrammi di una serie per crearne un filmato. L'icona *Singoli Fotogrammi del Loop* scompone un filmato in una serie di fotogrammi statici.

Nella figura che segue ad esempio viene mostrato un filmato MR in cui sono analizzati i primi sedici fotogrammi (*separazione*) di una serie. Chiaramente prima di fare ogni operazione di ordinamento/separazione bisogna impostare la disposizione desiderata (nella figura è 4 x 4).

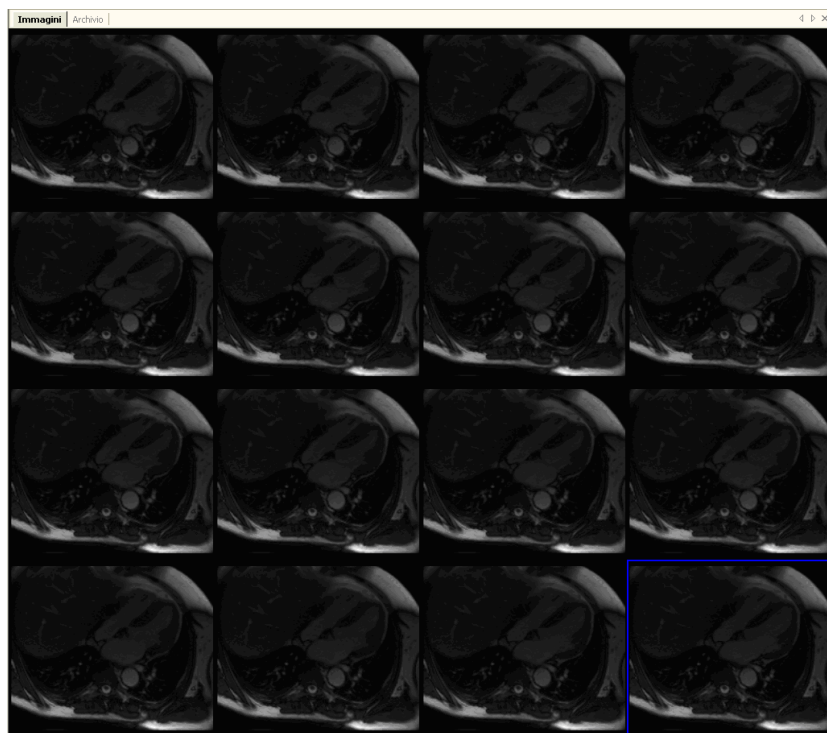

Il sistema permette inoltre ad una serie di immagini MR o CT di essere impilata per essere mostrata e trattata come se fosse un filmato. Anche in questo caso è importante definire come le immagini saranno ordinate in questo filmato, generalmente scegliendo l'opzione *Impila secondo Numero Immagine*. Una volta che quest'opzione è scelta tutte le operazioni aperte che riferiscono un'anteprima di serie saranno impilate in un filmato.

Al contrario il sistema permette anche a un filmato di essere separato in strutture indipendenti mostrate separatamente. Per attivare questa opzione selezionare *Singoli fotogrammi del Loop*. Una volta che questa opzione è scelta tutte le viste aperte che riferiscono un filmato saranno separate in più viste di immagine.




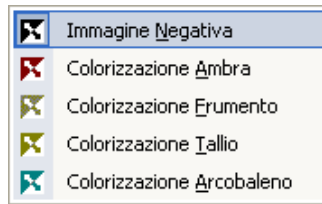
Alcune delle icone cambiano il proprio aspetto in relazione all'ultima scelta attiva.

6.4. FILTRAGGIO DI IMMAGINI

Ci sono due diverse possibilità di filtraggio: *filtro colore* e *filtro dinamico*.


6.4.1 FILTRO COLORE

Per aggiungere un filtro colore alle immagini cliccare sul pulsante  presente sulla barra degli strumenti, si aprirà una finestra dove sono selezionabili diversi filtri.




Per accedere a questa finestra si può anche cliccare menù *Strumenti* e poi *Filtro Colore*.





Questo filtro ha effetto su ogni tipo d'immagine; per rimuovere l'effetto del filtro ripremere il pulsante *Filtro Colore* .

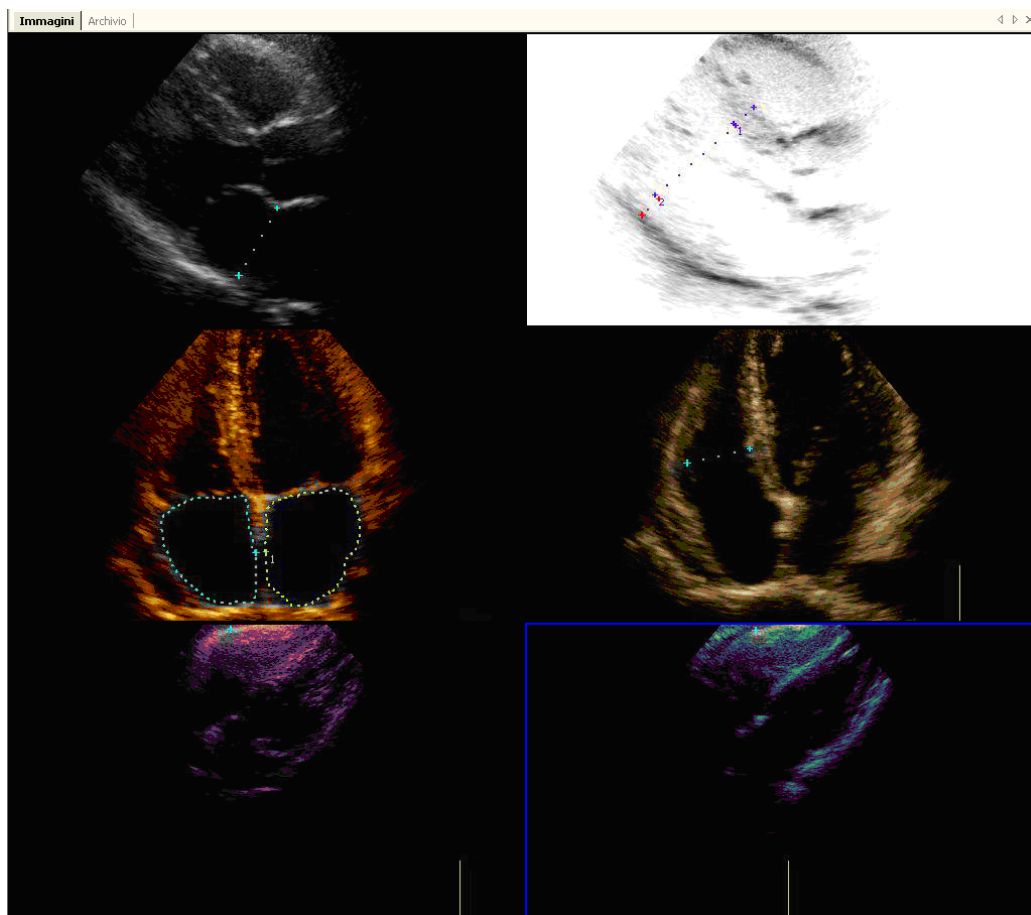
Di seguito viene mostrato l'effetto del Filtro Colore; nella figura si vedono sei immagini trattate rispettivamente con: nessun filtro, Immagine Negativa, Colorizzazione Ambra, Colorizzazione Frumento, Colorizzazione Tallio, Colorizzazione Arcobaleno.



Attenzione, il pulsante *Filtro Colore* prende l'aspetto dell'ultima opzione selezionata.

6.4.2 FILTRO DINAMICO

Un altro insieme di filtri disponibile è il filtro dinamico, caratterizzato dal pulsante  o  o un pulsante simile (dipende dal filtro precedentemente selezionato) localizzato nella barra degli strumenti. Cliccando il pulsante *Filtro Immagine* si apre una finestra dove sono implementati diversi tipi di filtri.

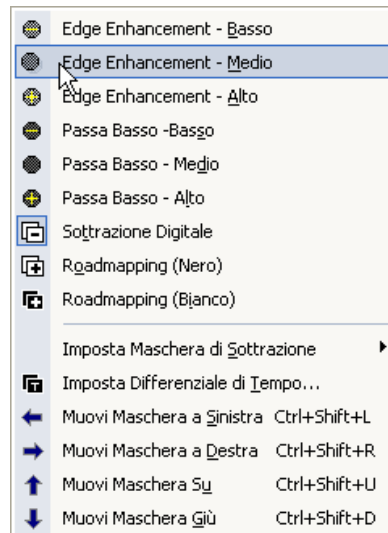


Si possono applicare fino a due filtri contemporaneamente sulla stessa immagine.


Lo stesso menù è disponibile cliccando sul menù *Strumenti* e poi su *Primo/Secondo Filtro Immagine*.

Per quanto riguarda il filtro *Sottrazione Digitale* la maschera di sottrazione viene importata automaticamente dalle maschere definite nel file DICOM. Se nessuna maschera è stata definita, occorre compiere una serie di operazioni aggiuntive. La maschera può essere impostata su un fotogramma tramite i tasti di scelta rapida **Ctrl+Shift+M**.

Altrimenti ci sono diverse scelte di mascheramento accessibili cliccando sul pulsante *Filtro Immagine* e selezionando *Imposta Maschera di Sottrazione*.

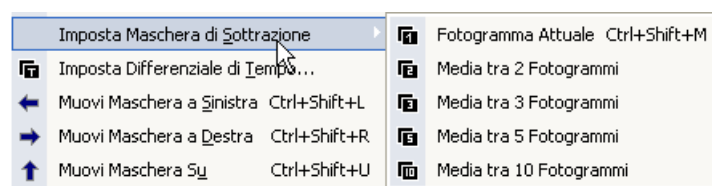


C'è un altro controllo sulla maschera per la Sottrazione Digitale, infatti si può decidere di usare una maschera dinamica cliccando *Imposta Differenziale di Tempo* sul menù precedente. Quest'operazione fa aprire una finestra dove si decide l'offset della maschera in termini di tempo o di fotogrammi.

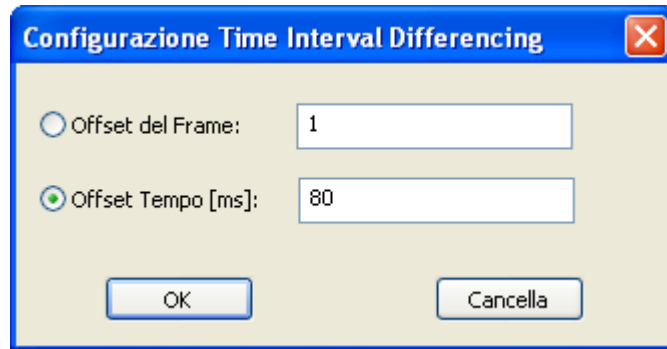

Una volta impostata una maschera questa può anche essere mossa sull'immagine. Ciò si rivela utile in caso di piccoli movimenti fatti dalle sonde. Si può muovere una maschera su (tasti di scelta rapida **Ctrl+Shift+U**), giù (tasti di scelta rapida **Ctrl+Shift+D**), a sinistra (tasti di scelta rapida **Ctrl+Shift+L**) e a destra (tasti di scelta rapida **Ctrl+Shift+R**). Lo stesso può essere fatto accedendo al menù *Filtro Immagine*.


Ad esempio nella figura seguente si può osservare un esame cardiaco RM. L'immagine sulla sinistra è quella originale; sulla destra c'è la stessa immagine opportunamente trattata con il filtro *Sottrazione Digitale (Bianco)*. Il dettaglio migliore dei vasi e delle pareti è evidente.

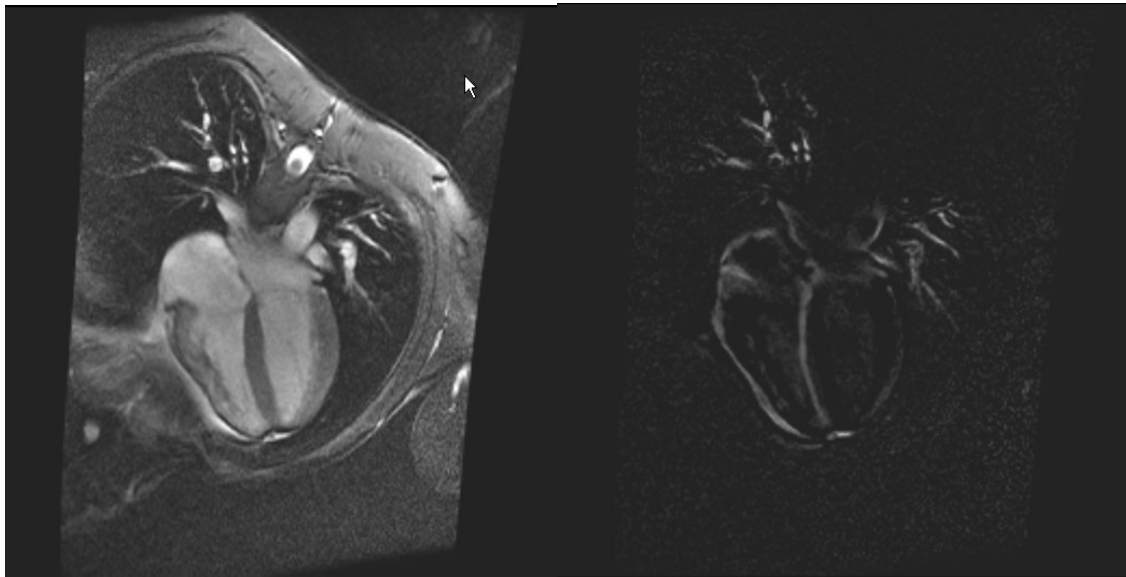

Bisogna notare che l'utilizzo di filtri implica un carico computazionale maggiore che può ridurre l'efficacia di riproduzione. Per questo motivo suggeriamo di evitare l'uso dei filtri durante la riproduzione in sistemi a configurazione lenta.


6.5. TRASFORMARE LE IMMAGINI

6.5.1 FUNZIONE DI SPECCHIO E DI ROTAZIONE


ComPACS Review Station mette a disposizione funzioni di Specchio (Mirroring) e rotazione da applicare alle immagini (e ovviamente ai filmati). Per accedere a questo tipo di strumenti cliccare sul pulsante  e si avrà accesso allo specifico menù.



In questo menù sono disponibili diverse scelte circa le funzioni di specchio e di rotazione e si ha la possibilità di correggere la dimensione di un'immagine. Lo stesso menù è accessibile facendo click col tasto destro del mouse sulla finestra dei tab.

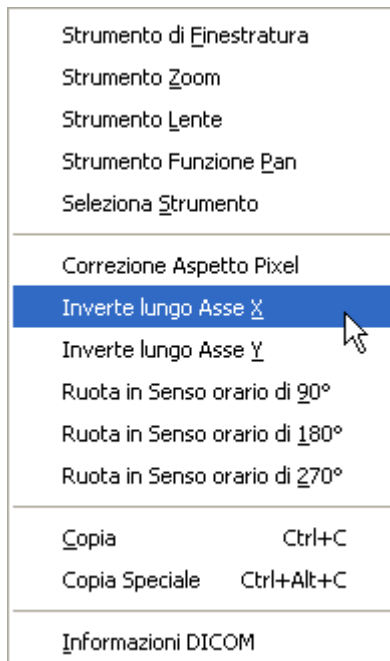

6.5.2 FUNZIONE DI ZOOM


Cliccando il pulsante , il puntatore prenderà l'aspetto di tale pulsante e, utilizzando la rotella del mouse si otterrà un effetto di zoom. Per rimuovere lo zoom fare un doppio click con il pulsante sinistro del mouse.

Lo strumento *Zoom* è anche disponibile facendo click col tasto destro sull'immagine e poi scegliendo *Zoom*.




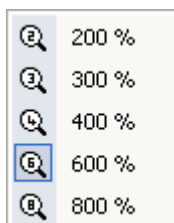
La qualità di visualizzazione e la velocità di zoom dipende dalle prestazioni dell'hardware su cui è installato il software. E' importante sottolineare che la funzione di zoom, durante l'esecuzione, necessita elevato calcolo computazionale, su alcune piattaforme hardware poco performanti quindi può rallentare la velocità di riproduzione.

6.5.3 FUNZIONE DI PAN


Quando lo zoom è attivo, e le dimensioni dell'immagine sono maggiori della finestra che la ospita, si può muovere tale finestra sull'immagine selezionando lo strumento *Pan*  e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse muoverlo lungo l'immagine. Questa opzione è raggiungibile anche facendo click col destro sull'immagine e selezionando *Strumento funzione Pan*.

6.5.4 LENTE


Un altro modo di effettuare uno zoom sull'immagine è lo strumento *Lente*. Tale strumento è identificato da questo pulsante  che dà accesso ad un menù *Lente*.




Lo stesso menù può essere aperto cliccando sul menù *Strumenti* e poi su *Lente*.

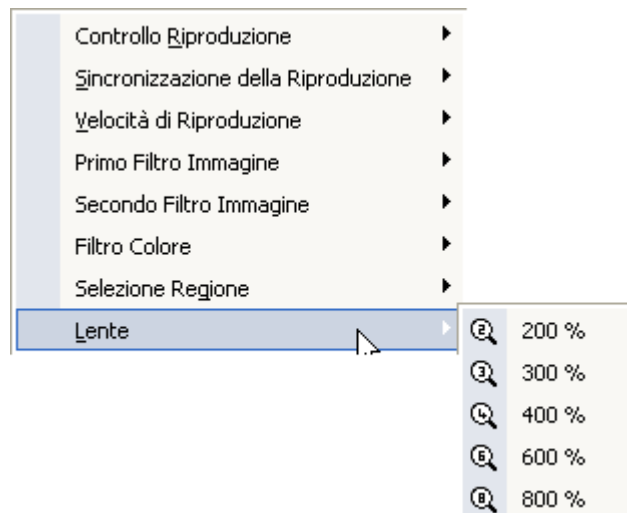



L'aspetto del puntatore del mouse diventa simile ad una lente, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e muovendosi lungo l'immagine si crea un effetto lente. La figura seguente è un esempio che chiarisce il comportamento di questo strumento.

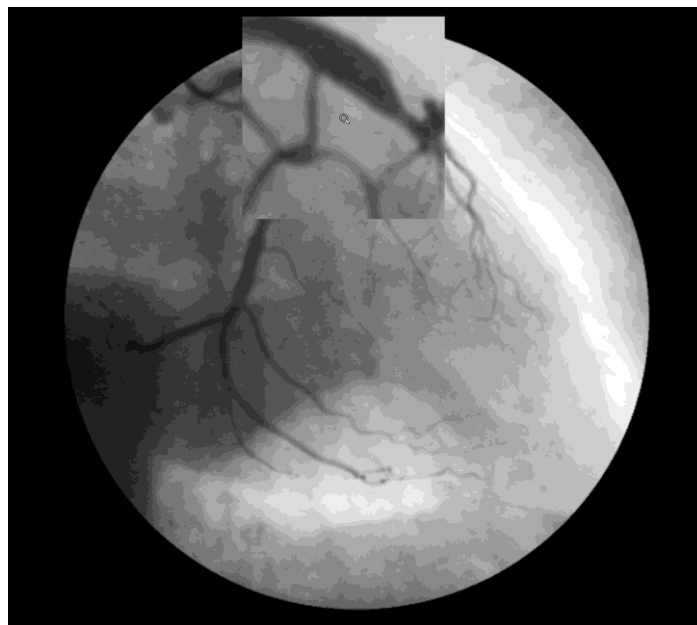

6.5.5 LUMINOSITA E CONTRASTO


Per cambiare il livello di luminosità e di contrasto si può usare il pulsante . Si aprirà una finestra dove decidere i valori di luminosità e contrasto per una o per tutte le immagini.

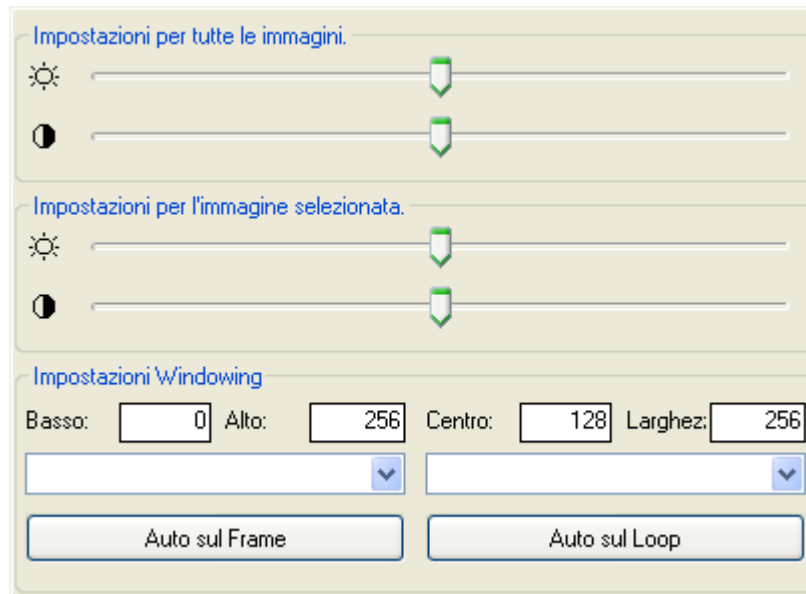

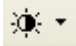Un altro modo è di selezionare il pulsante  e poi, mantenendo premuto il tasto sinistro del mouse sull'immagine, muovendo il mouse su e giù si cambiano i livelli di contrasto, muovendo il mouse a destra e sinistra si cambiano i livelli di luminosità. Per resettare i valori a quelli originali fare doppio click sull'immagine.

Un altro strumento presente nella precedente finestra è il “windowing” (finestratura). In un monitor non è possibile vedere più di 256 livelli di grigio; se l'immagine selezionata contiene un numero maggiore di livelli di grigio è necessario riscalarne tali valori per una corretta visualizzazione.


Normalmente, se l'immagine richiede un'operazione di windowing, le finestre possibili sono immagazzinate nel file DICOM dell'immagine stessa. Queste impostazioni automatiche, se presenti, sono disponibili nella finestra a tendina. Effettuando una selezione nel menù a tendina i corrispondenti valori di windowing saranno applicati all'immagine.

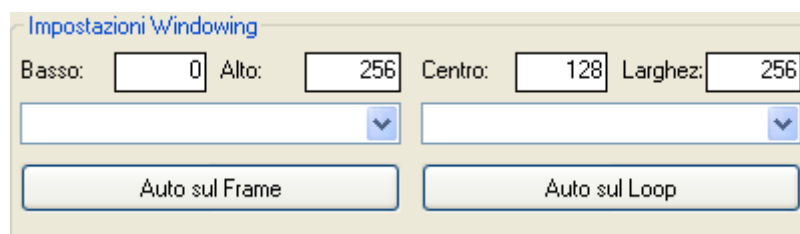




Se i valori di finestratura non sono presenti è possibile tuttavia calcolarli automaticamente tramite il pulsante *Auto* o settarli manualmente editando i box nella parte inferiore della finestra.


6.5.6 REGIONI DI INTERESSE (ROI – Region Of Interest)

Per enfatizzare una regione d'interesse si può usare lo strumento apposito, premendo il pulsante *Region Of Interest*  che dà accesso ad un ROI menù.




Qui si può selezionare che tipo di forma usare. Ogni linea della regione è fissata da un singolo click; l'intera regione è fissata da un doppio-click. Per rimuovere la regione creata ripremere il pulsante ROI .

Lo stesso strumento è disponibile facendo click col destro su di un'immagine e scegliendo *Seleziona Strumento*.

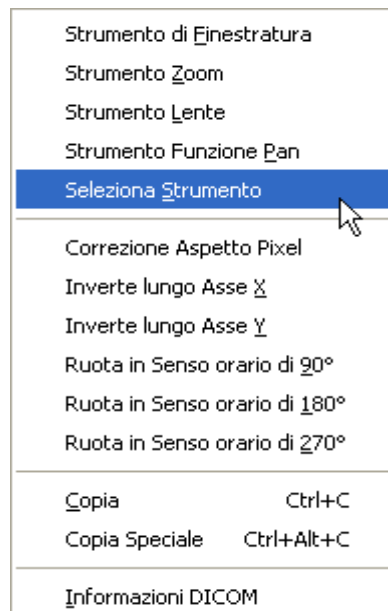

E' possibile anche accedere a questa funzionalità cliccando sul menù *Strumenti* e quindi su *Selezione Regione*.

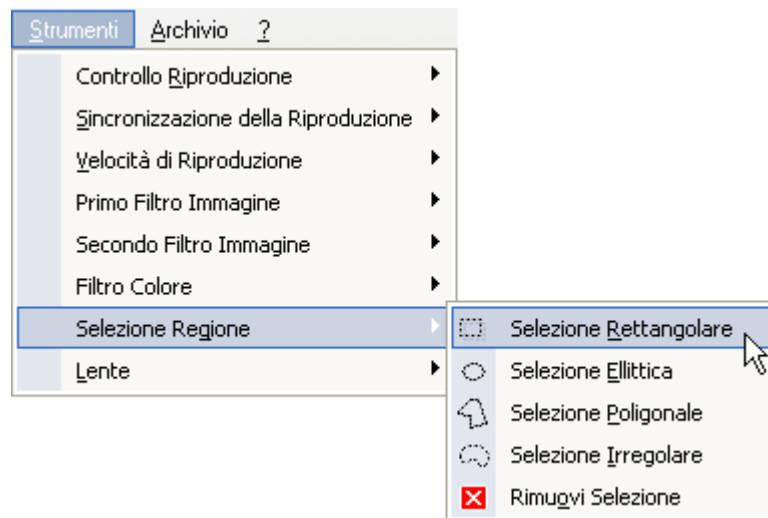

Se si desidera copiare solo la regione selezionata è possibile utilizzare la funzione *Copia Speciale* (tasti di scelta rapida **Ctrl+Alt+C**) facendo click col tasto destro del mouse nella regione. Per copiare l'intera immagine si può seguire la modalità standard: click col tasto destro del mouse sull'immagine e poi *Copia* (tasti di scelta rapida **Ctrl+C**).

6.5.7 MASCHERATURA


E' possibile nascondere o sostituire parti di immagine o filmato applicando una maschera che sarà sovrapposta all'immagine. La parte opaca della maschera sostituirà il contenuto dell'immagine mentre le parti trasparenti manterranno la regione sottostante visibile.



Le maschere da applicare andranno impostate dall'utente nell'apposita sezione. Una volta impostate saranno disponibili premendo semplicemente il tasto destro del mouse sull'immagine ed accedere al menù *Vedi Maschere* per selezionare una maschera da applicare o consentire al sistema di selezionare automaticamente la scelta migliore. Queste maschere possono essere quindi utilizzate per tutte le operazioni supportate, ad esempio stampa, esportazione in AVI o altri formati di immagine multimediali.

6.6. ECOSTRESS

Nel caso in cui ComPACS Lite Viewer riconosca nei campi DICOM un esame di ECOSTRESS, verrà creato un nuovo menù nella finestra di servizio (appena sopra le anteprime).

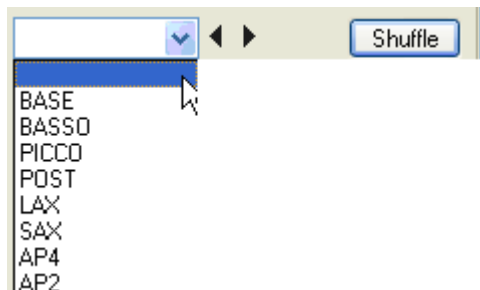


In questo menù sono subito disponibili tutte le differenti fasi e sezioni relative all'esame. Quindi sarà semplicissimo scegliere una particolare fase cliccando il menù a tendina dell'*Eco Stress* menù. E' possibile cambiare sezione o fase anche cliccando sulle frecce alla destra del menù a tendina.


In base alle impostazioni dell'utente, ComPACS aprirà automaticamente la prima sezione o la prima fase. Inoltre potrà impostare la velocità di riproduzione al 50% e la sincronizzazione a inizio-fine ciclo. Le informazioni sulla sezione, fase e frequenza cardiaca saranno visualizzate in sovrapposizione.

Alla chiusura dell'esame i parametri ritorneranno quelli di partenza.


Cliccando sul menù *File*, poi su *Impostazioni* e selezionando l'etichetta *Ecostress*, si potranno visualizzare le impostazioni di riferimento e modificarle se necessario.

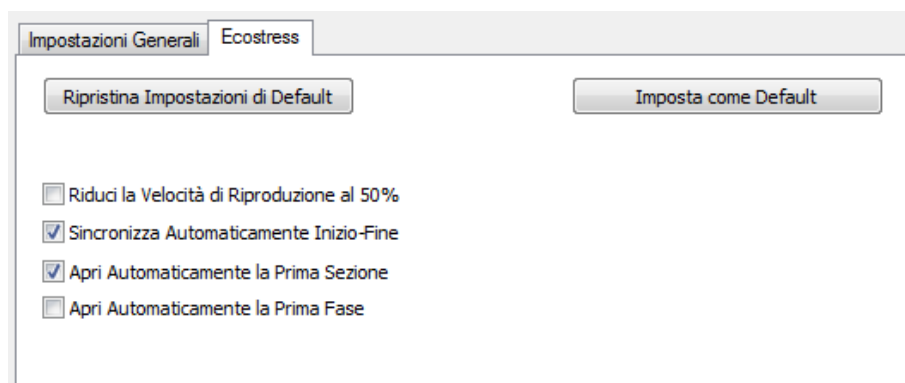

ComPACS Viewer permette di saltare tra una fase e una vista cliccando il pulsante *Shuffle* (Scambia). Nell'esempio seguente iniziamo a vedere la fase *POST Eco Stress*.

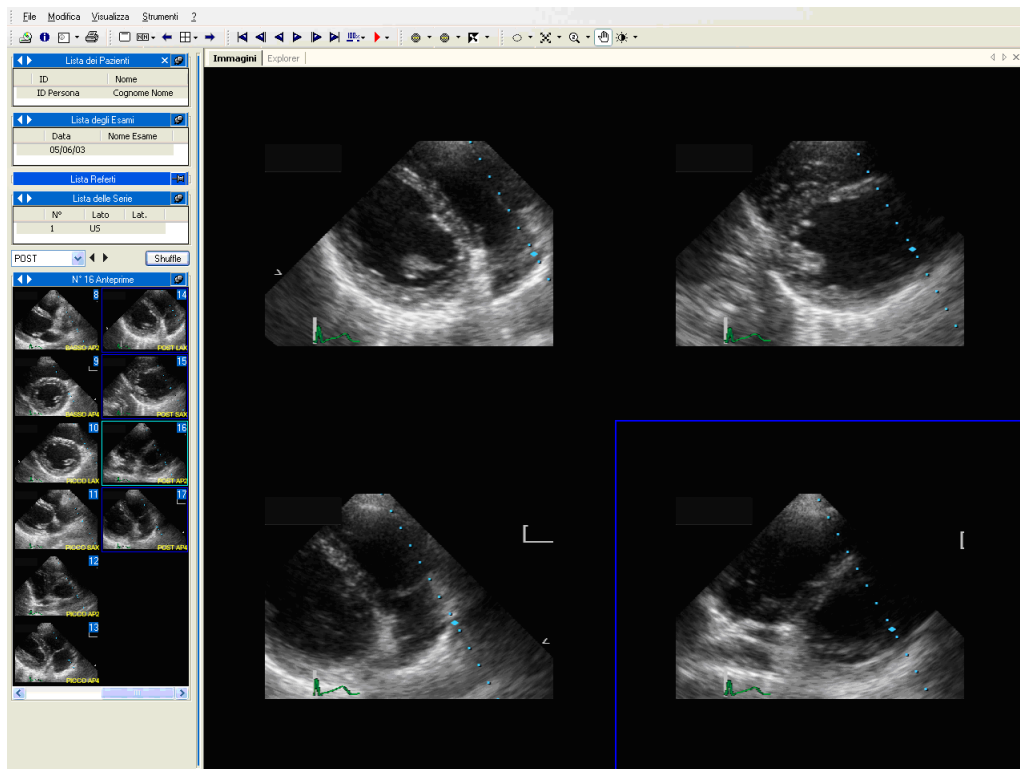

Cliccando *Shuffle* si salta immediatamente ad analizzare la vista *AP2*.

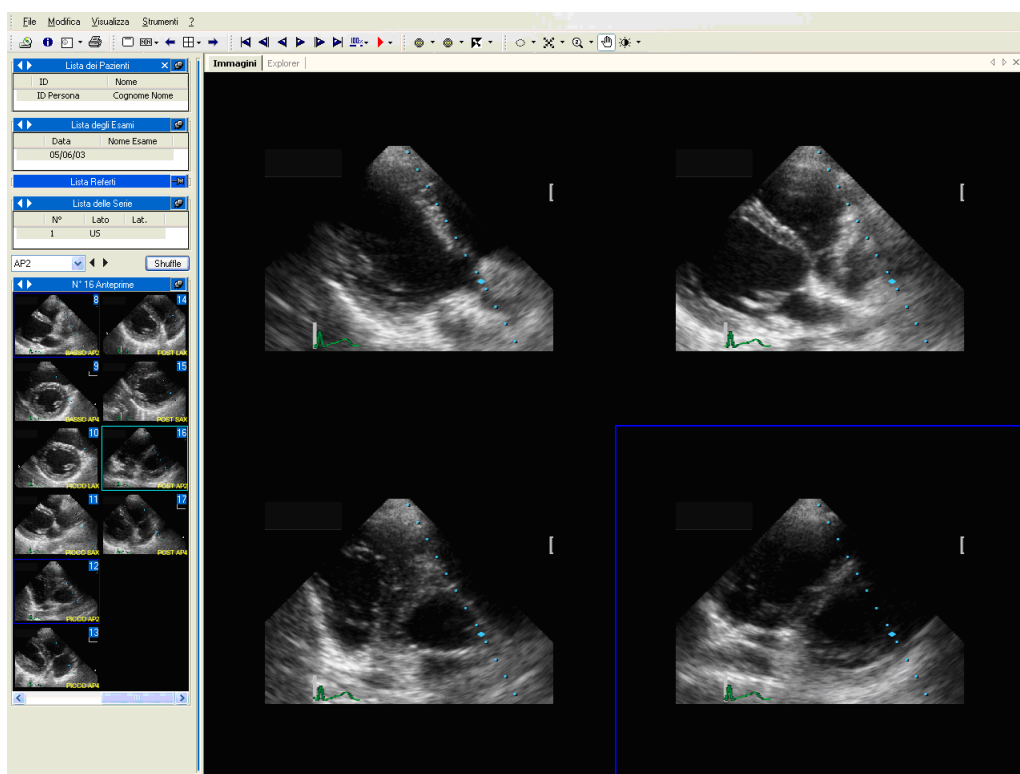


Guardando le anteprime è evidente come questa funzione di “scambio” renda più facile la gestione di tale tipo di esami; infatti se si dovessero cambiare manualmente il tempo necessario sarebbe sicuramente superiore.




La funzione di “scambio” è disponibile solo se il sistema riconosce nei campi DICOM la presenza di un esame eco stress.

Nel caso siano state fatte diverse acquisizioni per la stessa sezione e la stessa fase, un apposito rettangolo in sovrapposizione, e contenente il numero di acquisizioni, informerà l'utente.

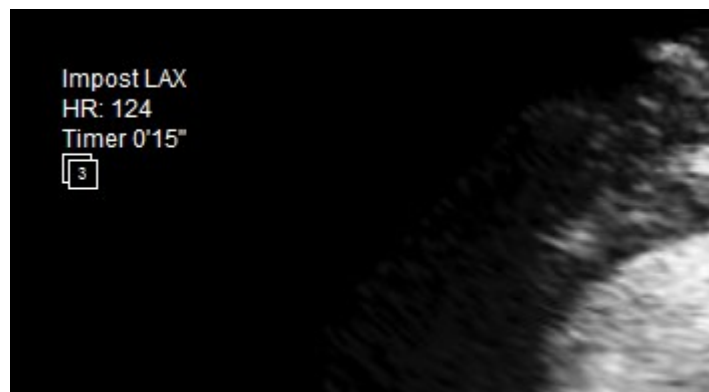

Premendo il pulsante sinistro del mouse all'interno di tale rettangolo sarà possibile visualizzare un menù con l'elenco delle diverse acquisizioni e quindi selezionare un'acquisizione alternativa. La scelta perdurerà fino alla chiusura dell'esame.

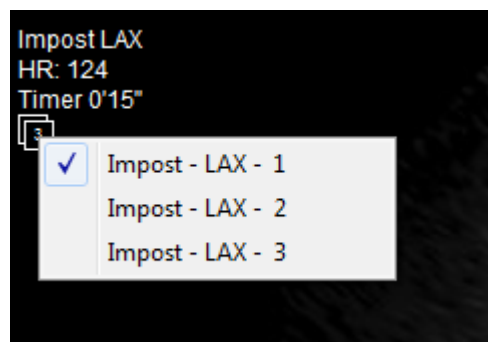


6.7. STAMPARE O ESPORTARE LE IMMAGINI

6.7.1 ESPORTARE IN FORMATO AVI

ComPACS Review Station permette di salvare i filmati in formato AVI. Questo può essere un interessante strumento per creare video per i pazienti o da inserire in presentazioni *Microsoft® PowerPoint*.

Per salvare un filmato in formato AVI bisogna cliccare sul menù *File* e quindi su *Salva Loop Come* (tasti di scelta rapida **Ctrl+L**).

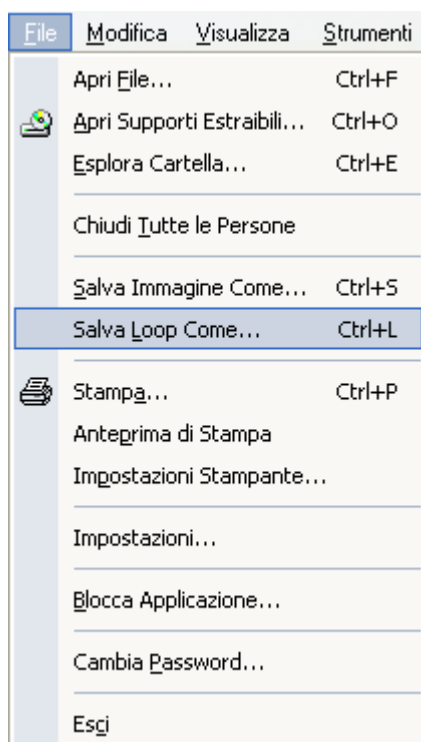


Quest'operazione fa aprire una finestra di dialogo in cui è possibile settare alcune proprietà del filmato da esportare quali:

- **Trimming:** impostazione del fotogramma di inizio e di fine;
- **Taglio:** di un'intera vista, di un'immagine selezionata, di una regione di interesse. Notare che una ROI deve essere precedentemente selezionata nella finestra principale perché sia disponibile.
- **Mascheratura:** perché quest'opzione sia disponibile è necessario selezionare ed attivare la funzione di mascheratura nella finestra principale. La maschera rimarrà valida per tutta l'operazione di esportazione;
- **Zoom:** espresso come percentuale delle dimensioni originali.
- **FPS:** Fotogrammi al secondo (Frames Per Second)
- **Compressore:** Il tasto *Compressore* determinerà l'apertura di un pannello per la selezione del CODEC AVI tra quelli installati sul vostro sistema operativo Windows®.




Assicuratevi che il CODEC che state utilizzando per generare il filmato AVI, sia installato correttamente nel sistema in cui avete intenzione di visualizzarlo.

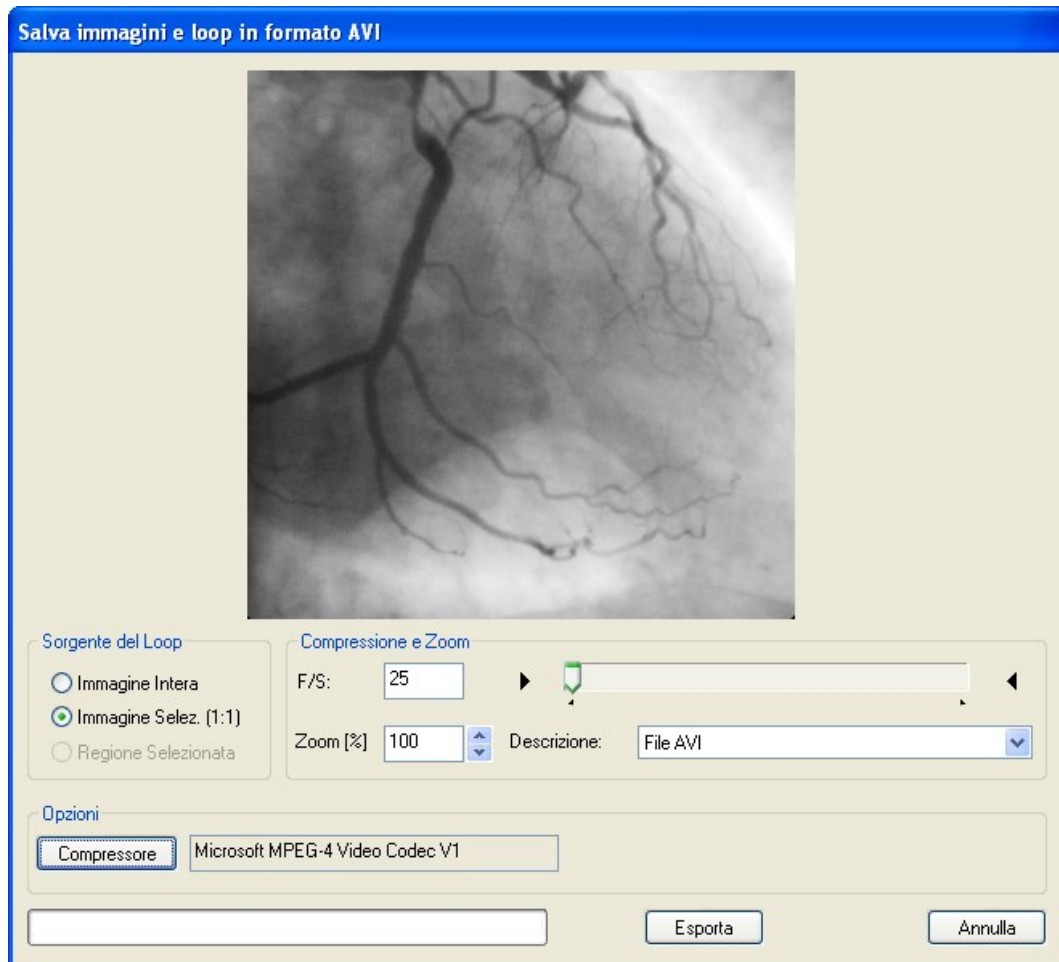


6.7.2 ESPORTARE DEI FOTOGRAMMI

Con questo software è anche possibile salvare in un file un singolo fotogramma. Bisogna cliccare sul menù *File* e quindi su *Salva Immagine Come* (tasti di scelta rapida **Ctrl+S**).

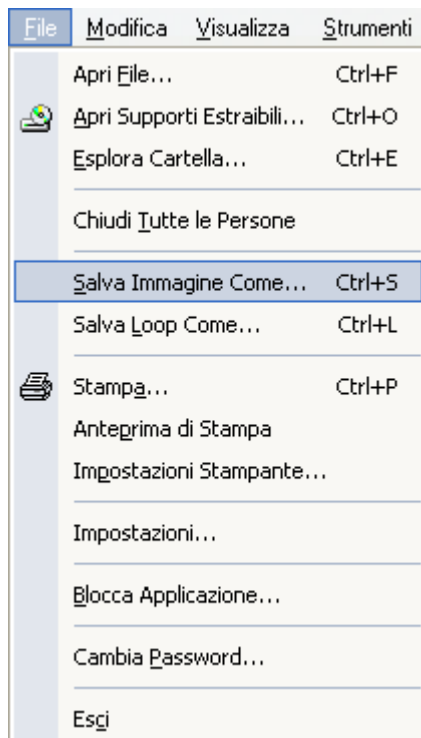


Una nuova finestra permetterà di impostare diversi parametri per il file di output come:


- Taglio: Di un'intera vista, di un'immagine selezionata, di una regione di interesse. Notare che una ROI deve essere precedentemente selezionata nella finestra principale perché sia disponibile;
- Mascheratura: perché questa opzione sia disponibile è necessario selezionare ed attivare la funzione di mascheratura nella finestra principale. La maschera rimarrà valida per tutta l'operazione di esportazione;
- Zoom: espresso come percentuale delle dimensioni originali;
- Formato di output: ad esempio *TIFF*, *JPEG* o *BMP*;
- Qualità di compressione: dove applicabile.

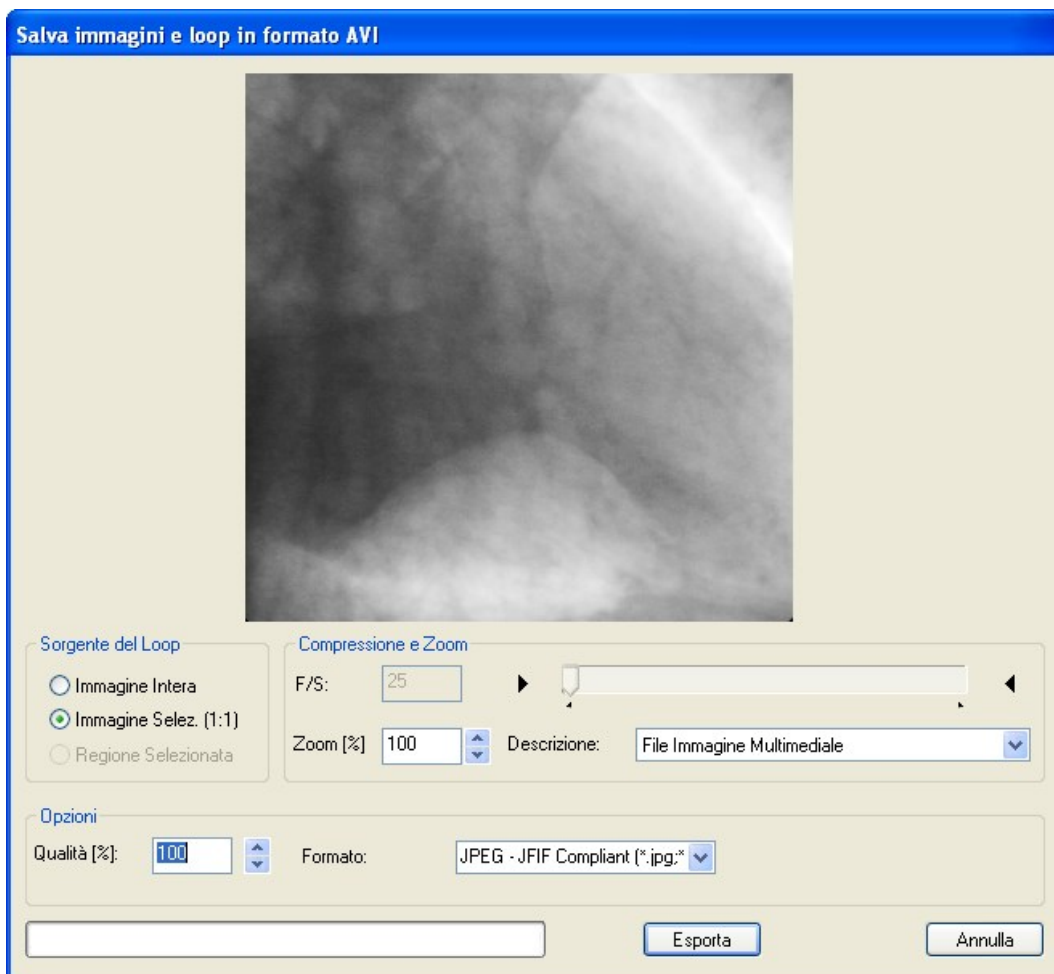


6.7.3 STAMPARE DELLE IMMAGINI

Un altro metodo d'esportazione è la stampa.


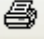
ComPACS Review Station permette di stampare le immagini semplicemente cliccando sul pulsante *Stampa*  o scegliendo dal menù *File* la funzione *Stampa* (tasti di scelta rapida **Ctrl+P**).

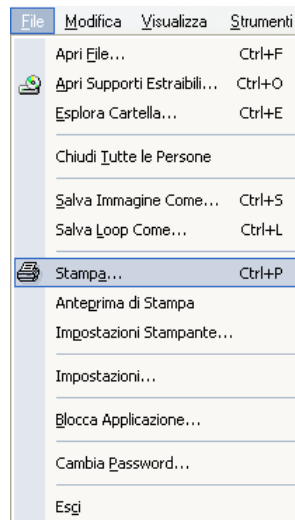


Nella finestra di dialogo che appare si può decidere se mostrare o nascondere le informazioni personali sulla stampa.

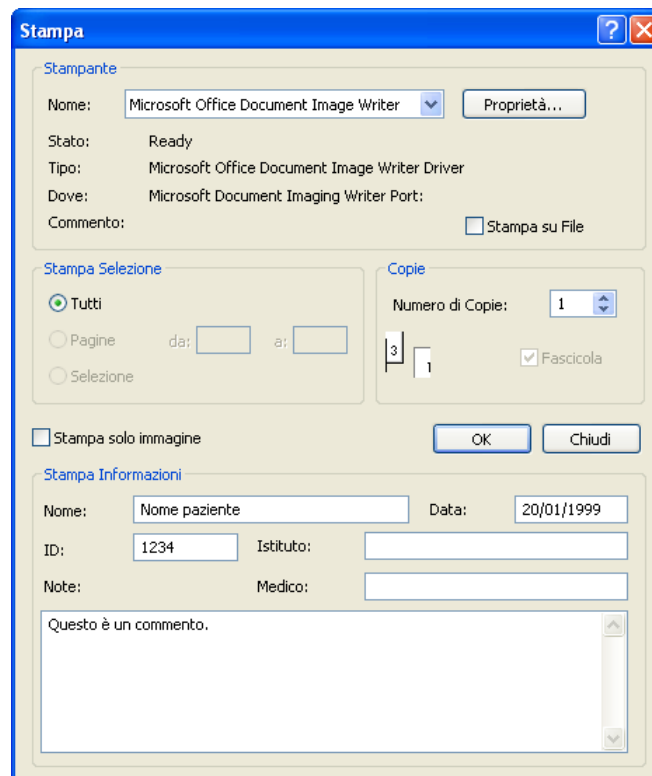


Il software permette anche di impostare proprietà di stampa come le dimensioni del foglio, l'orientamento del foglio (orizzontale o verticale) e le dimensioni dei margini. Il tutto selezionando l'opzione *Impostazioni Stampante* dal menù *File*.

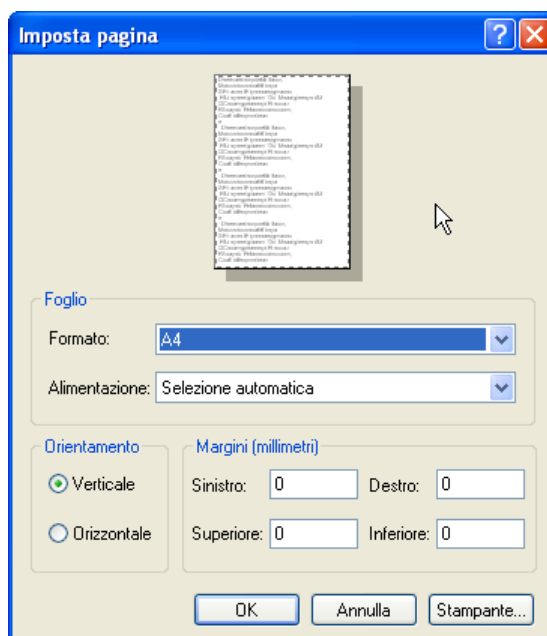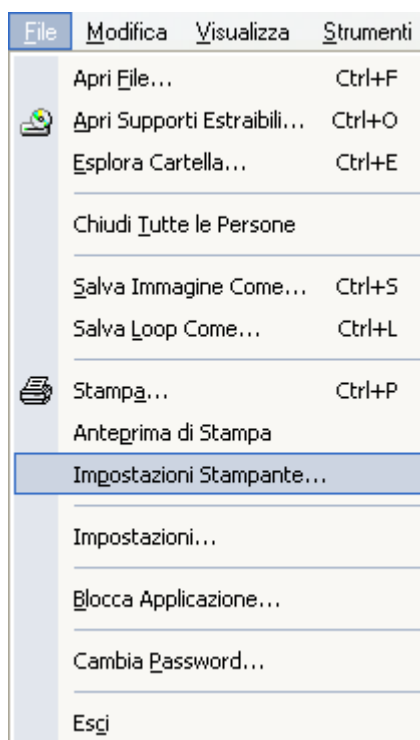

Inoltre prima di stampare effettivamente può essere interessante vedere un'anteprima di stampa. Ciò è possibile cliccando sul menù *File* e poi su *Anteprima di Stampa*.

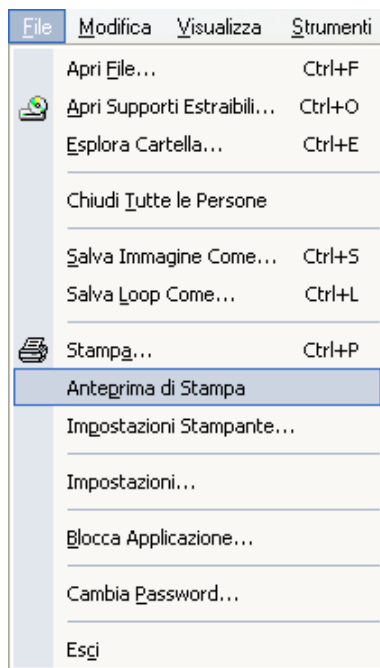


Così facendo nella finestra dei tab apparirà un'anteprima della pagina che sarà stampata.

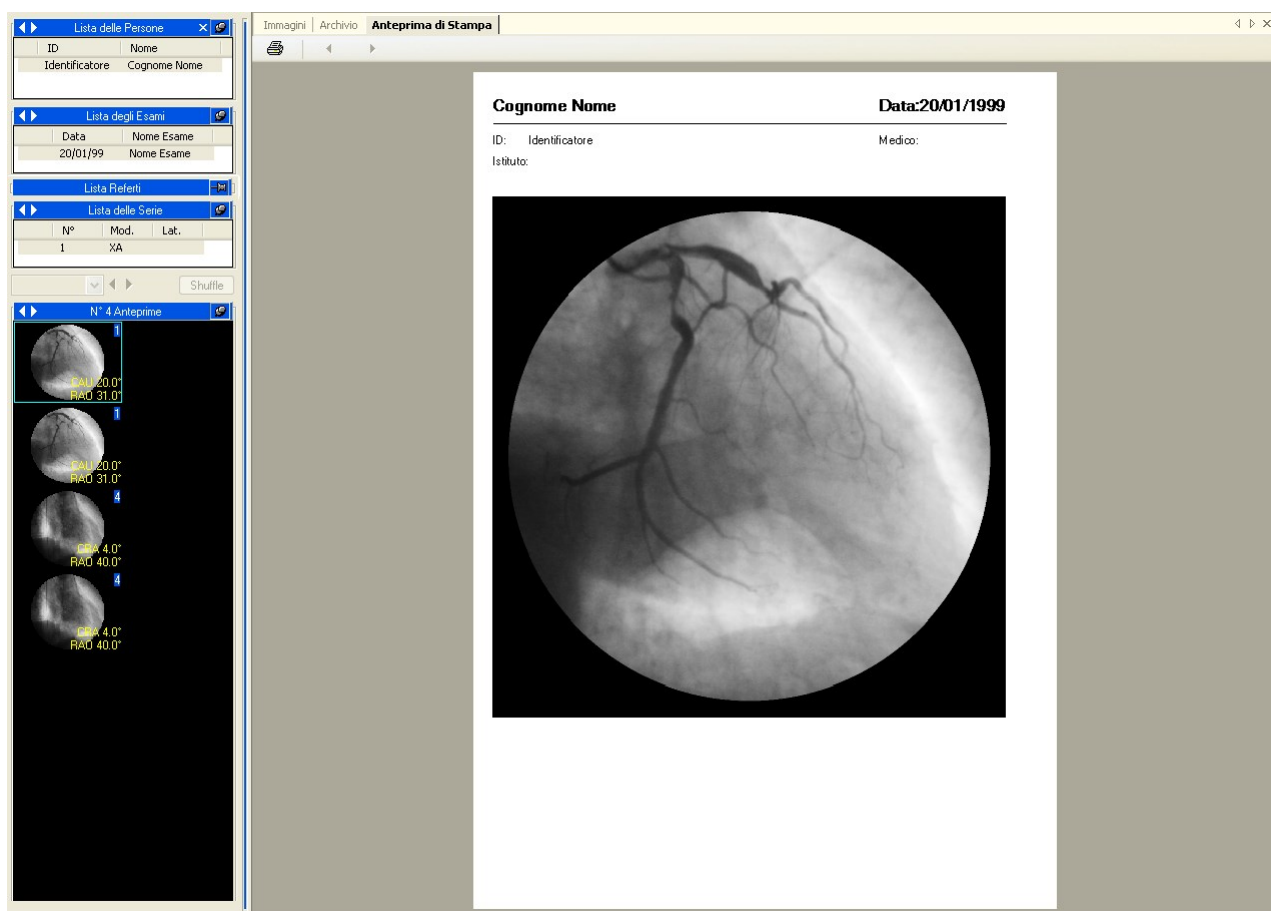


6.8. ESPORTAZIONE IN CARTELLE O SUPPORTI

Per esportare gli oggetti selezionati in una cartella o su un supporto esterno è sufficiente cliccare col tasto destro sull'immagine di anteprima, la serie, l'esame o la persona visualizzati nella finestra di servizio e selezionare la funzione *Esporta* dal menù che appare.

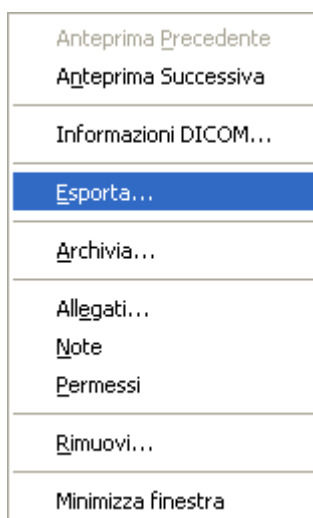

Questo processo è praticamente identico al processo di archiviazione. Si prega di far riferimento alla sezione del di questa guida che affronta il processo di archiviazione in dettaglio. E' necessario comunque premere il tasto *Esporta* per attivare la funzionalità. Una volta premuto il tasto *Esporta* apparirà un'ulteriore finestra.

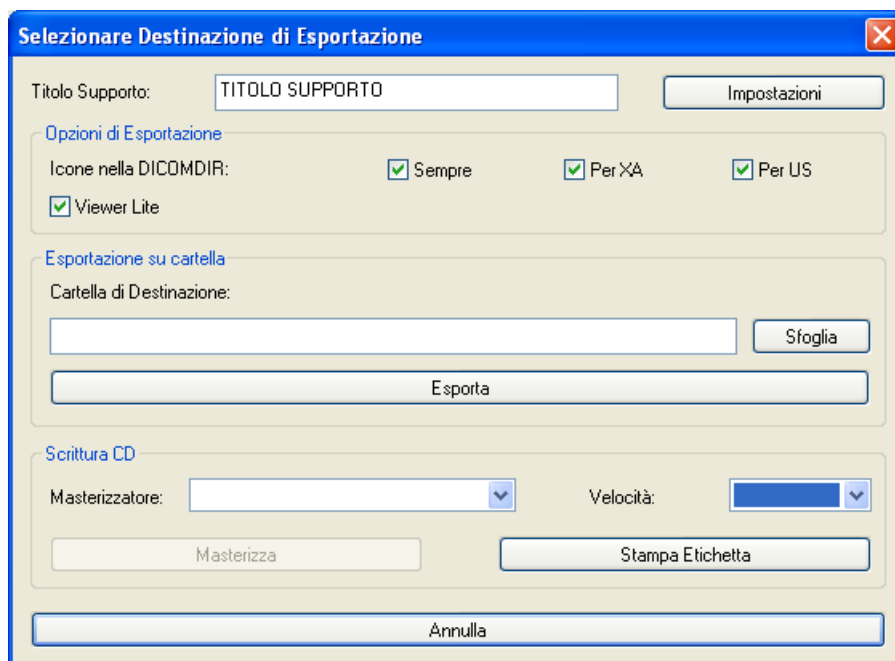

In questa finestra è necessario indicare la destinazione di esportazione (una cartella o un supporto ottico) e alcune impostazioni sul formato di output:

- Se si desidera che nel file DICOMDIR siano presenti delle anteprime (notare che alcuni Viewer non sono in grado di gestire DICOMDIR con queste informazioni).
- Se si desidera che sul supporto ottico venga copiata anche una versione leggera del Viewer (Viewer Lite).

Queste impostazioni (ad anche le impostazioni per la stampa delle etichette) possono essere definite una volta per tutte mediante il tasto *Impostazioni*.

Impostazioni di Esportazione

Opzioni di Esportazione

Cartella Esportazione:

Cartella Temporanea:

Masterizzatore: Velocità:

Opzioni di Esportazione

Icone nella DICOMDIR: Sempre Per XA Per US

Viewer Lite

Opzioni Etichetta

Stampante:

Nome Istituto:


Indirizzo Istituto:

| | | | | |
|---|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> CD/DVD: | Margine X | <input type="text" value="0"/> | Margine Y | <input type="text" value="0"/> |
| <input type="checkbox"/> Fronte Custodia: | Margine X | <input type="text" value="0"/> | Margine Y | <input type="text" value="0"/> |
| <input type="checkbox"/> Lato Custodia: | Margine X | <input type="text" value="0"/> | Margine Y | <input type="text" value="0"/> |


7

7. IMPOSTAZIONI GENERALI

E' possibile impostare diverse proprietà generali del software cliccando sul menù *File* e poi su *Impostazioni*.

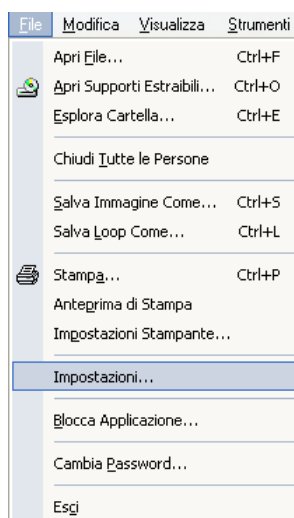

Apparirà quindi una nuova finestra

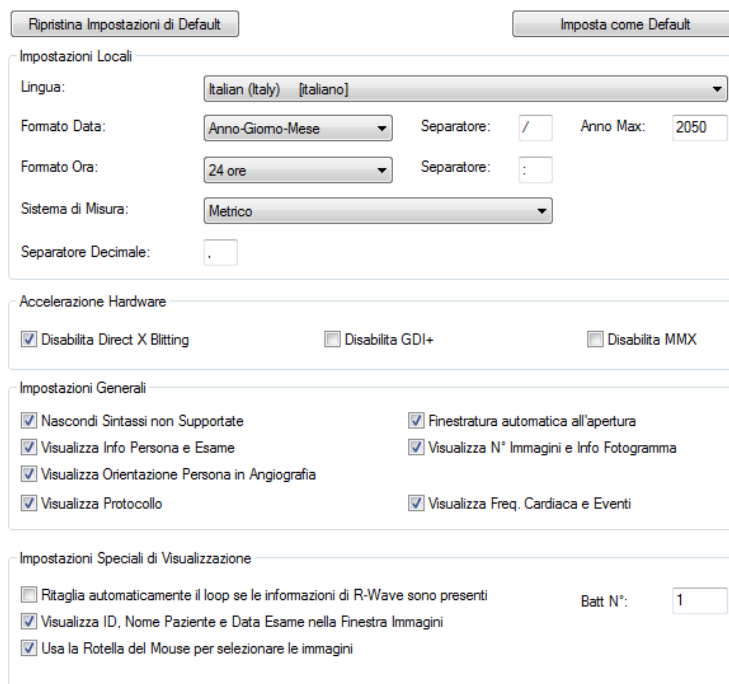A screenshot of the 'Impostazioni' (Settings) dialog box. It has two buttons at the top: 'Ripristina Impostazioni di Default' and 'Imposta come Default'. The dialog is divided into several sections: 'Impostazioni Locali' with fields for 'Lingua' (Italian (Italy)), 'Formato Data' (Anno-Giorno-Mese), 'Formato Ora' (24 ore), 'Sistema di Misura' (Metrico), and 'Separatore Decimale' (.); 'Accelerazione Hardware' with checkboxes for 'Disabilita Direct X Blitting', 'Disabilita GDI+', and 'Disabilita MMX'; 'Impostazioni Generali' with checkboxes for 'Nascondi Sintassi non Supportate', 'Visualizza Info Persona e Esame', 'Visualizza Orientazione Persona in Angiografia', 'Visualizza Protocollo', 'Finestratura automatica all'apertura', 'Visualizza N° Immagini e Info Fotogramma', and 'Visualizza Freq. Cardiaca e Eventi'; and 'Impostazioni Speciali di Visualizzazione' with checkboxes for 'Ritaglia automaticamente il loop se le informazioni di R-Wave sono presenti', 'Visualizza ID, Nome Paziente e Data Esame nella Finestra Immagini', and 'Usa la Rotella del Mouse per selezionare le immagini', along with a 'Batt N°' field set to 1.

Qui possono essere configurati tutti i parametri generali del software al fine di ottimizzarne la prestazione e di personalizzare il software secondo le richieste dell'utente. In particolare è possibile notare le seguenti linguette (o tab):

Impostazioni Generali – In questa tab è possibile selezionare le preferenze di localizzazione (lingua, sistema metrico e delle misure, separatore decimale, formato data e ora visualizzata), le funzionalità di accelerazione hardware e/o software, le impostazioni di overlay sulle immagini.

In questa sezione, qualora il file DICOM contenga le informazioni dell' ECG Onda-R, è possibile automaticamente ritagliare il ciclo in base al numero di battiti. Se il numero di battiti non viene indicato ma l'opzione è abilitata, il ciclo verrà ritagliato per riprodurre tutti i cicli cardiaci completi.

E' altresì possibile visualizzare sempre le informazioni sul paziente e l'esame nella finestra delle immagini e definire il comportamento del software quando si utilizza la rotella del mouse in tale finestra.

DICOM – In questa tab è possibile impostare le specifiche opzioni di interpretazione/conversione DICOM nel caso in cui specifici plug-in proprietari siano installati.

Finestratura – In questo tab è possibile impostare dei diversi livelli di finestratura (*windowing*) da poter selezionare successivamente. Ogni livello, per una facile gestione, può essere organizzato in gruppi contenenti diversi livelli definiti in base alle proprie preferenze.

Mascheratura – In questa tab è possibile definire delle maschere che verranno applicate per l'anonimizzazione automatica delle immagini o dei filmati. Ogni maschera, per una facile gestione, può essere organizzata in gruppi. Possono essere inoltre definiti diversi valori DICOM per permettere al sistema la selezione automatica nel caso di particolari file DICOM.

Multi-Monitor – Si rimanda al capitolo del Multi-Monitor.

Ecostress – In questa finestra è possibile selezionare le specifiche opzioni di gestione del modulo di Ecostress. Si prega di fare riferimento al capitolo Ecostress per maggiori informazioni.



La modifica di alcune di queste proprietà richiede una profonda conoscenza di ComPACS Review Station e, più in generale, delle applicazioni del computer..




La quantità di menù dipende dal numero di moduli installati e licenziati.


8. L'ARCHIVIO

8.1. RICERCHE E RECUPERO DATI

8.1.1 RICERCHE STANDARD

Il termine *Ricerca (Query)* identifica l'operazione di richiesta di dati che viene fatta ad un archivio. Con il termine *Recupero (Retrieve)* si è soliti indicare il ricevimento (dall'archivio) delle informazioni richieste tramite una ricerca.

Per fare una ricerca all'archivio locale o remoto cliccare sul tasto  o selezionare *Cerca Archivio* dal menù *Archivio*.

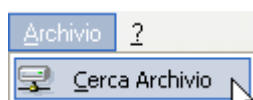

Una volta selezionata la voce *Cerca Archivio* si aprirà nella finestra dei tab l'interfaccia dell'archivio.

The screenshot displays the 'Archivio' (Archive) window in the COMPACS application. At the top, there are several dropdown menus for filtering data: 'COMPACS', 'Data Inserimento', 'Tutti gli Assegnati', 'Tutte le Origini', 'Tutte le Modalità', 'Tutti gli Stati', and 'Tutte le Urgenze'. Below these are buttons for 'Oggi', 'Ultimi 2 Giorni', 'Ultimi 3 Giorni', 'Ultimi 7 Giorni', 'Aggiorna', and 'Annulla'. There are also input fields for 'Cognome' and 'ID Paziente', and buttons for 'Cerca' and 'Ricerca Avanzata'. The main area is divided into two panes. The left pane, titled 'Banco delle Persone', contains a table with columns: 'Cognome', 'Nome', 'ID', 'Sex...', 'Nato il', 'Primo Es...', and 'Ultimo E...'. The right pane, titled 'Banco degli Esami', contains a table with columns: 'Data', 'Ora', 'Descrizione Esame', 'Num. Accesso', 'Stato', 'Urgenza', 'Assegnato', 'Data Ordine', 'Ora', and 'Medic'. At the bottom, there are additional buttons for 'Nuova Persona', 'Modifica Persona', 'Nuovo Esame', 'Modifica Esame', 'Accetta Esame', and 'Abilita Fusione/Spot...'. The interface also shows 'N° Persone: 0' and 'N° Esami: 0'.

Mediante quest'interfaccia sarà possibile interrogare l'archivio in diversi modi. Nella parte superiore della finestra si possono impostare le chiavi di ricerca, i risultati sono mostrati in maniera analoga a quella della *Explorer Window*.

Nella parte in alto sono presenti dei menù a tendina con cui è possibile impostare diversi criteri di ricerca e di filtro dei risultati:


- Scelta dell'Archivio in cui effettuare la ricerca o se occorre effettuarla simultaneamente su tutti gli archivi;
- Scelta della tipologia di ricerca per data. Questa impostazione definisce se le ricerche per data sono da interpretare come ricerche sulla data di esecuzione dell'esame, sulla data di inserimento dell'esame nell'archivio o sull'ultima data in cui l'esame è stato assegnato;
- Filtro sull'assegnazione: per filtrare gli esami assegnati a un utente o gruppo;
- Filtro sull'origine: le Application Entity (definite nel *Web Configuration Tool*) che hanno archiviato l'oggetto;
- Filtro sull'erogatore: le entità (definite nel *Web Configuration Tool*) che sono responsabili dell'esecuzione dell'esame;
- Filtro sulla modalità;
- Filtro sullo stato dell'esame (creato, in corso, ecc.);
- Filtro sull'urgenza dell'esame.



Alcuni filtri o opzioni possono dipendere da funzionalità lato Server e, di conseguenza, non funzionare correttamente per tutti gli archivi.

I pulsanti situati nella parte superiore della finestra permettono all'operatore di processare ricerche rapide predefinite quali *Oggi*, *Ultimi 2 Giorni*, *Ultimi 3 Giorni* o *Ultimi 7 Giorni* ovvero le immagini archiviate oggi, negli ultimi due, tre o sette giorni. Inoltre è possibile ricercare per il cognome del paziente o il suo identificativo. Il tasto *Cerca* dà inizio all'operazione.

Il comportamento di default del tasto *Cerca* è quello di pulire la lista dei risultati e di eseguire la ricerca. In alternativa, cliccando sulla freccia a destra del tasto *Cerca*, è possibile effettuare la ricerca senza cancellare la lista dei risultati. In questo caso i nuovi risultati saranno aggiunti a quelli già elencati.

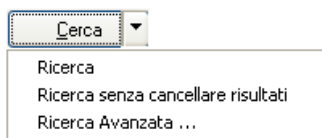

8.1.2 RISULTATI DELLA RICERCA, COLORI E ICONE INFORMATIVE

Un esempio di risultati di ricerca è mostrato qui di seguito:

N° Persone: 1 N° Esami: 1

Nuova Persona Modifica Persona

Elenco delle Persone:

| Cognome | Nome | ID | Ses... | Nato il | Primo Es... | Ultimo E... |
|---------|------|-------------|--------|---------|-------------|-------------|
| Doe | John | ANONIMIZ... | A | - | 2008/18/10 | 2008/18/10 |

Nuovo Esame Modifica Esame Accetta Esame Abilita Fusione/Spot

Bianco degli Esami:

| Data | Ora | Descrizione Esame | Num. Accesso | Stato | Urgenza | Assegnato | Data Ordine | Ora | Medic |
|------------|----------|-------------------|--------------|--------------|---------|-----------|-------------|-----|-------|
| 2008/18/10 | 17:59:30 | | | Esame creato | | | | | |


Apri Rimuovi Assegna Rilascia Storia

Nuova Serie Modifica Serie

| Mod. | N° | Let. | Data | Ora | Descrizione | Parte del Corpo | Medico Esecutore | Operatore |
|------|----|------|------------|----------|-------------|-----------------|------------------|-----------|
| US | 6 | | 2008/18/10 | 17:59:30 | | | | |
| US | 6 | | 2008/13/10 | 17:59:30 | | | | |

Anteprima di Immagini e Serie



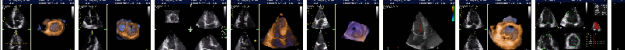

| N° | Data | Ora | Fase del Prot... | Commenti |
|-----|------------|----------|------------------|----------|
| 152 | 2008/03/11 | 14:49:21 | | |
| 153 | 2008/03/11 | 14:53:42 | | |
| 154 | 2008/03/11 | 14:54:11 | | |
| 155 | 2008/03/11 | 14:54:57 | | |
| 156 | 2008/03/11 | 14:55:48 | | |
| 157 | 2008/03/11 | 14:56:59 | | |
| 159 | 2008/03/11 | 15:00:08 | | |
| 161 | 2008/26/11 | 11:47:24 | | |
| 162 | 2008/26/11 | 11:47:48 | | |
| 163 | 2008/26/11 | 11:48:33 | | |




I risultati della ricerca sono strutturati nel seguente modo:

- Nel riquadro in alto a sinistra sono visualizzate le informazioni relative alle persone;
- Nel riquadro in alto a destra vengono visualizzati gli esami relativi alla persona selezionata sulla sinistra;
- Nel riquadro in basso a sinistra vengono visualizzate le serie relative all'esame selezionato in alto a destra;
- Nel riquadro in basso a destra vengono visualizzati gli oggetti relativi alla serie selezionata nel riquadro a sinistra; Tali oggetti sono raggruppati in etichette secondo il loro tipo.
- Nel riquadro orizzontale in basso a sinistra (sotto il riquadro delle serie), vengono visualizzate, se disponibili, le anteprime degli oggetti relativi alla serie selezionata sopra.


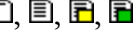
Alla sinistra di ogni elemento (persona, esame, serie o oggetto) una serie di diverse icone può essere presente per fornire informazioni aggiuntive sullo stato dell'elemento corrispondente:

-  - *Allegati*. Questa icona indica che l'elemento contiene uno o più documenti esterni allegati come, per esempio, file in formato Microsoft Word, Excel o PDF.
-  - *Note*. Questa icona indica la presenza di annotazioni sull'elemento per avvisare gli utenti sulla presenza di informazioni importanti.
-  - *Media*. Questa icona indica che un backup dell'elemento è stato effettuato su supporti rimovibili quali CD/DVD, ecc.. Se l'icona è solo parzialmente presente è per segnalare che il backup si riferisce solo a una parte di tale elemento (per esempio un sottoinsieme delle immagini di un esame).
-  - *Deep Archive*. Questa icona indica che un backup dell'elemento è stato effettuato su un archivio remoto. Se l'icona è solo parzialmente presente è per segnalare che il backup si

riferisce solo a una parte di tale elemento (per esempio un sottoinsieme delle immagini di un esame).

 - *Near Line Data*. Questa icona indica che l'elemento non è interamente presente sull'archivio in linea e che deve essere recuperato dall'archivio remoto (*deep archive*) prima di poterlo visualizzare. Ne consegue un maggiore tempo complessivo di caricamento e visualizzazione.

Al livello persona vi sono alcune icone aggiuntive per informare su:

- urgenza per gli esami della persona in oggetto. Il significato di queste icone , è riportato in maggiore dettaglio nella sezione URGENZA DELL'ESAME;
- stato del referto per gli esami della persona in oggetto. Il significato di queste icone , è riportato in maggiore dettaglio nella sezione STATO DELL'ESAME E DEL REFERTO.

Inoltre il colore con cui sono visualizzati i risultati della ricerca può variare sulla base dello stato dell'elemento in oggetto all'interno dell'archivio nel seguente modo:

- **ONLINE**. Questo indica che l'elemento è disponibile in linea. Il colore del testo è il colore standard nero.

- **NEARLINE**. Questo indica che l'elemento è presente solo nell'archivio remoto e che deve essere recuperato prima di poter essere visualizzato. Ne consegue un maggiore tempo complessivo di caricamento e visualizzazione. Il colore del testo è verde.

- **OFFLINE**. Questo indica che l'elemento è presente solo su supporti removibili e che può essere recuperato soltanto rintracciando fisicamente tali supporti e re-inserendoli nella stazione di revisione. Il colore del testo è marrone.

- **UNAVAILABLE**. Questo indica che il file relativi all'elemento sono corrotti o sono stati rimossi dal sistema prima di un backup. Tali elementi non possono più essere recuperati. Il colore del testo è rosso.

8.1.3 RICERCHE AVANZATE

ComPACS Review Station permette anche di effettuare ricerche di tipo avanzato, ponendo delle chiavi di ricerca su persona, esame e serie.

Nella tab *Archivio*, cliccando sul tasto *Ricerche Avanzate*, si possono definire i parametri per la formulazione di una ricerca avanzata.

Com'è mostrato nella seguente figura ci sono numerosi parametri che permettono di eseguire ricerche più organizzate. Ci sono tre differenti livelli di ricerca: livello persona, livello esame e livello serie.

Finestra di Ricerca Avanzata

Generale

Non cancellare la lista delle persone

Opzioni di Ricerca Livello Persona

Nome Persona [Cog. Nome]: ID Persona: Sesso:

Data di Nasc.: Da: A:

Opzioni di Ricerca Livello Esame

Numero di Accesso: Descrizione Esame:

Data Esame: Da: A:

ID Esame: Medico Referente:

Opzioni di Ricerca Livello Serie

Modalità: Medico Esecutore:

Operatore:

Opzioni di Ricerca per Annotazioni su Immagini Chiave:

Nome:

Tipo:

Operatore:

Data di Riferimento: Da: A:

OK Cancel



Le informazioni inserite nei campi possono anche essere incomplete, ad esempio è sufficiente inserire solo i primi caratteri per effettuare ricerche complesse. I caratteri jolly (* ?) sono permessi.



L'esito di ricerche semplici o avanzate è dipendente dalle caratteristiche del Server cui vengono fatte le richieste. Mentre è garantita la piena funzionalità con il Server ComPACS è possibile riscontrare delle limitazioni interrogando Server DICOM di terze parti.

8.1.4 RICEVIMENTO E VISUALIZZAZIONE

Per ricevere dall'archivio i dati relativi ad un oggetto selezionato premere il tasto *Apri*. Le immagini verranno automaticamente visualizzate una volta ricevute. Il software riconosce automaticamente se le informazioni sono già presenti nell'archivio locale o se è necessario aprire un canale di comunicazione con il server remoto per ricevere le informazioni necessarie.




Il comportamento del sistema all'apertura di un paziente è stato modificato. Invece di aprire tutti gli esami del paziente, solo l'esame più recente viene aperto. Se si desidera aprire più esami, si prega di selezionare il paziente, successivamente selezionare gli esami da aprire e infine premere il pulsante *Apri*.

Nel caso in cui si vogliono confrontare diversi esami o persone è possibile farlo cliccando sulla freccia rivolta verso il basso alla destra del tasto *Apri* e selezionare la relativa funzione.



8.1.5 COMPRESSIONE WEB

Quando si ricevono le immagini da un server web ComPACS è possibile adattare il livello di compressione per ottimizzare il tempo di scaricamento in relazione alla banda disponibile e alla qualità richiesta. Un menù a tendina elenca i possibili livelli di compressione applicabili.

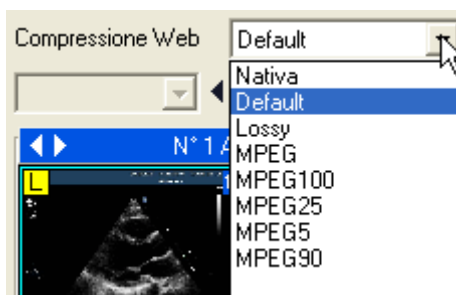


Gli elementi nella lista sono quelli pre-configurati dall'amministratore di sistema. Si prega di far riferimento ai relativi manuali per maggiori informazioni. La voce *Nativa* corrisponde ai file come sono stati archiviati nel server mentre la voce *Default* corrisponde alla compressione automaticamente applicata sempre in base alla pre-configurazione dell'amministratore.



Il livello di compressione selezionato nella finestra deve essere scelto prima di aver scaricato le immagini dall'archivio. Per cambiare il livello di compressione di un esame già aperto occorre prima chiuderlo, cambiare il livello di compressione, e poi riaprirlo.

8.2. ASSEGNAZIONE ESAMI

E' possibile *Assegnare* o *Rilasciare* l'assegnazione di un esame ad un utente o gruppo. Quest'operazione può essere fatta mediante gli appositi tasti *Assegna* e *Rilascio* dopo aver selezionato l'esame.

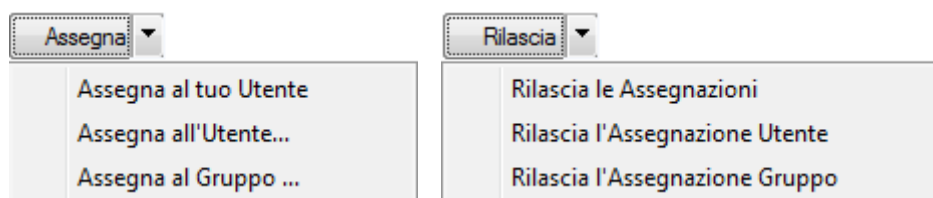


L'opzione *Assegna al tuo Utente* assegnerà automaticamente l'esame all'utente che ha effettuato la login all'applicazione. Nel caso invece in cui si voglia assegnare l'esame ad un utente o gruppo specifico, le opzioni *Assegna all'Utente...* e *Assegna al Gruppo...* causeranno l'apertura di una finestra di selezione dell'utente o gruppo a cui assegnare l'esame. In entrambi i casi le informazioni di assegnazione verranno immediatamente visualizzate nel riquadro degli esami.



Quando un esame è assegnato ad un utente che appartiene al tipo *Medico* o *Tecnico* lo stato dell'esame verrà aggiornato automaticamente durante la fase di refertazione.




Le assegnazioni all'utente e al gruppo sono indipendenti. Un esame può essere assegnato sia a un gruppo, sia a un utente che appartiene a un gruppo differente.

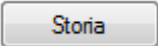Premendo il pulsante , una finestra verrà visualizzata ed elencherà la storia delle assegnazioni e dei cambiamenti di stato dell'esame. La finestra mostrerà inoltre la data e l'ora delle modifiche e l'utente che ha eseguito l'operazione.

| Data | Login Esecutore | Nome Esecutore | Azione | Stato | Urgenza | Assegnazione |
|-----------------------|-----------------|---------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 01/19/2015 8:46:31 AM | W7-PANDORA\j | Administrator, User | Inserito | Esame creato | | |
| 02/22/2015 9:31:22 AM | W7-PANDORA\j | Administrator, User | Modificato | Esame creato | | |
| 02/22/2015 9:36:00 AM | W7-PANDORA\j | Administrator, User | | Esame creato | Elezione | |
| 02/22/2015 9:36:46 AM | W7-PANDORA\j | Administrator, User | | Esame creato | Primaria | |
| 02/22/2015 9:37:39 AM | W7-PANDORA\j | Administrator, User | | Esame creato | Urgenza | |
| 02/22/2015 9:38:56 AM | W7-PANDORA\j | Administrator, User | | Esame creato | Emergenza | |
| 02/23/2015 6:39:03 PM | W7-PANDORA\j | Administrator, User | | Esame creato | | |
| 02/23/2015 6:43:19 PM | W7-PANDORA\j | Administrator, User | | Esame creato | Urgenza | |

Chiudi

8.3. STATO DELL'ESAME E DEL REFERTO

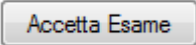L'esame selezionato può essere accettato o modificato premendo il pulsante  o facendo doppio click nel campo *Stato* dell'esame in oggetto, nel riquadro contenente la lista degli esami per la persona selezionata. Una finestra di dialogo consentirà tali operazioni.

Stato Esame
✕

Prestazioni:

| Stato | Prestazione | N. Ricetta | N. Ricet |
|-------|-------------|------------|----------|
| | | | |

Stato Esame:

- Esame creato
- Esame prenotato
- Persona accettata
- Esame in corso
- Esame eseguito
- Esame interrotto
- Assegnato al Tecnico
- Letto dal Tecnico
- Impressioni del Tecnico in corso
- Impressione del Tecnico terminate
- Assegnato al Medico
- Letto dal Medico
- Iniziata Refertazione
- Trascrizione Pendente.
- Referto Trascritto
- Referto Verificato
- Finalizzato

In questa finestra è possibile accettare il paziente per l'esame selezionato premendo il pulsante **“Accetta Paziente”** o, se l'esame è già stato erroneamente accettato, è possibile ripristinare lo stato iniziale premendo il pulsante **“Annulla Accettazione Paziente”**.

Se l'esame viene iniziato per errore ma alla fine non viene erogato, è possibile annullarne l'erogazione premendo il pulsante **“Annulla Erogazione Esame”**. Tutte le prestazioni aggiunte sono annullate e poi rimosse.

Invece, se l'esame è stato erogato ma non è stato completato con successo, è possibile interromperlo premendo il pulsante **“Interrompi Esame Definitivamente”**.

In questa finestra è anche possibile aggiungere o rimuovere le “Prestazioni” associate all'esame. Quando si aggiunge una o più prestazioni, una nuova finestra verrà visualizzata, opzionalmente consentendo di indicare anche il numero di ricetta cartacea o di generare una ricetta elettronica.

Se l'esame è accettato, sulla destra è possibile modificarne manualmente lo stato.



Se il vostro utente non appartiene ad un profilo con diritti di “Controllo Amministrativo” è possibile che, sulla base della configurazione di sistema, vi siano alcune restrizioni. E' possibile che alcuni stati siano impostabili solo automaticamente dal sistema (per esempio tramite DICOM MPPS) e non manualmente dall'utente. Inoltre è possibile che alcuni stati, una volta raggiunti, non siano più manualmente modificabili. In tali circostanze il pulsante *Cambia* sarà disabilitato per prevenire tali cambiamenti.



Lo stato viene anche modificato automaticamente dai componenti server ComPACS Worklist e/o HL7 qualora tali componenti siano installati e configurati.







Quando un esame è assegnato ad un utente che appartiene al tipo *Medico* o *Tecnico* lo stato dell'esame verrà aggiornato automaticamente durante la fase di refertazione.



La generazione di una ricetta elettronica è soggetta all'interfacciamento di un modulo prescrittivo idoneo.


Le informazioni sullo stato dell'esame verranno visualizzate nel riquadro contenente la lista degli esami. Inoltre nel riquadro delle persone una serie di simboli alla sinistra del Cognome della persona avviseranno l'utente nel caso ci sia qualche referto pendente per la persona specifica.

Le possibili icone che si potranno avere sono elencate qui di seguito in ordine decrescente di priorità:

- *Nessuna icona*: almeno un esame per la persona selezionata si trova nello stato *Non letto*;
-  - *Scheda tecnica iniziata*: almeno un esame per la persona selezionata si trova nello stato preliminare della fase di refertazione;
-  - *Scheda tecnica completata*: almeno un esame per la persona selezionata ha una scheda tecnica nello stato di refertazione pendente o di verifica.
-  - *Referto verificato*: almeno un esame per la persona selezionata ha un referto verificato che attende la verifica;
-  - *Referto finalizzato*: tutti i referti per la persona selezionata sono stati finalizzati.

8.4. URGENZA DELL'ESAME

E' possibile modificare lo stato di urgenza di un esame facendo un doppio click nel campo *Urgenza* dell'esame in oggetto, nel riquadro contenente la lista degli esami per la persona selezionata. Apparirà quindi una finestra di selezione dello stato di urgenza.

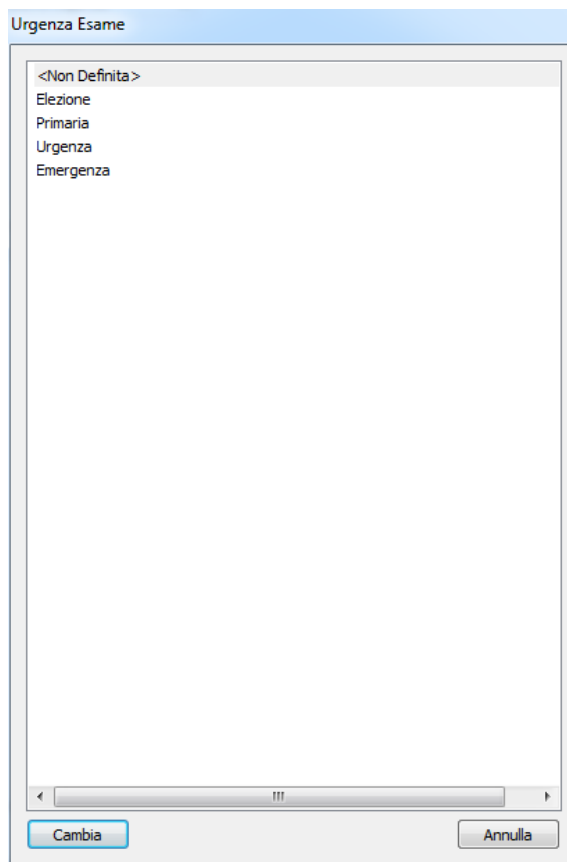



Se il vostro utente non appartiene ad un profilo con diritti di "Controllo Amministrativo" è possibile che, sulla base della configurazione di sistema, vi siano alcune restrizioni. E' possibile che alcuni stati siano impostabili solo automaticamente dal sistema (per esempio tramite DICOM MPPS) e non manualmente dall'utente. Inoltre è possibile che alcuni stati, una volta raggiunti, non siano più manualmente modificabili. In tali circostanze il pulsante *Cambia* sarà disabilitato per prevenire tali cambiamenti.




Lo stato viene anche modificato automaticamente dal componente server ComPACS HL7 qualora tale componente sia installato e configurato.

Le informazioni sullo stato dell'esame verranno visualizzate nel riquadro contenente la lista degli esami. Inoltre nel riquadro delle persone una serie di simboli alla sinistra del Cognome della persona avviseranno l'utente sull'urgenza degli esami del paziente.

Le possibili icone che si potranno avere sono elencate qui di seguito in ordine decrescente di priorità:

- - *Emergenza*. Questo indica che almeno un esame del paziente ha lo stato di emergenza.
- - *Urgenza*. Questo indica che almeno un esame del paziente ha lo stato di urgenza.
- - *Primaria*. Questo indica che almeno un esame del paziente ha lo stato di primaria.
- - *Elezione*. Questo indica che almeno un esame del paziente ha lo stato di elezione.
- *Nessuna Icona*. Questo indica che lo stato di urgenza non è stato definito per nessun esame.

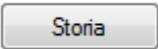Premendo il pulsante , una finestra verrà visualizzata ed elencherà la storia delle assegnazioni e dei cambiamenti di stato dell'esame. La finestra mostrerà inoltre la data e l'ora delle modifiche e l'utente che ha eseguito l'operazione.


Storia dell'Esame

| Data | Login Esecutore | Nome Esecutore | Azione | Stato | Urgenza | Assegnazione |
|-----------------------|-----------------|---------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 01/19/2015 8:46:31 AM | W7-PANDORA\ja | Administrator, User | Inserito | Esame creato | | |
| 02/22/2015 9:31:22 AM | W7-PANDORA\ja | Administrator, User | Modificato | Esame creato | | |
| 02/22/2015 9:36:00 AM | W7-PANDORA\ja | Administrator, User | | Esame creato | Elezione | |
| 02/22/2015 9:36:46 AM | W7-PANDORA\ja | Administrator, User | | Esame creato | Primaria | |
| 02/22/2015 9:37:39 AM | W7-PANDORA\ja | Administrator, User | | Esame creato | Urgenza | |
| 02/22/2015 9:38:56 AM | W7-PANDORA\ja | Administrator, User | | Esame creato | Emergenza | |
| 02/23/2015 6:39:03 PM | W7-PANDORA\ja | Administrator, User | | Esame creato | | |
| 02/23/2015 6:43:19 PM | W7-PANDORA\ja | Administrator, User | | Esame creato | Urgenza | |


Chiudi

8.5. AGGIUNGERE O MODIFICARE ELEMENTI

Per aggiungere nuove persone, nuovi esami o nuove serie, è sufficiente cliccare sui tasti *Nuova Persona*, *Nuovo Esame* o *Nuova Serie* ed inserire le relative informazioni nelle finestre che appariranno.

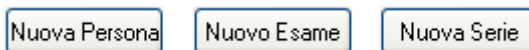

Per modificare invece una persona, un esame o una serie è sufficiente cliccare sui tasti *Modifica Persona*, *Modifica Esame* o *Modifica Serie*.

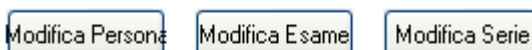

8.5.1 AGGIUNGERE O MODIFICARE PERSONE

Le informazioni che è possibile gestire in fase di inserimento o di modifica di una persona sono presenti nella finestra sottostante.

The screenshot shows a software window titled "Informazioni sulla Nuova Persona". At the top, there are search filters for "Ricerca Persone" and "Ricerca Esami". The search filters include fields for "Fonte" (set to "HL73 - HL7 Source"), "ID", "Cognome", "Nome", "Data di Nasc." (set to "2017/19/04"), "Sesso", "Data Esame" (set to "2017/19/04"), "A:" (set to "2017/19/04"), "Num. Accesso", "Erogatore" (set to "Tutti gli Erogatori"), "Origine" (set to "Tutte le Origini"), and "Stato" (set to "Tutti gli Stati"). Below the search filters is a table with columns: "Fonte", "ID", "Cognome", "Nome", "Ses...", "Nato il", "Data Esame", "Numero di Accesso", and "Descrizione Esame". The table is currently empty. Below the table are two tabs: "Informazioni Generali" (selected) and "Informazioni Aggiuntive". Under "Informazioni Generali", there are sections for "Informazioni Principali" (ID, CF, ID Assicurazione, ID Alternativo, Cognome, Nome, Secondo Nome, Prefisso, Suffixo, Sesso) and "Informazioni sulla Nascita" (Data, Ora, Città, Provincia, Nazione). Under "Informazioni Aggiuntive", there are sections for "Informazioni sulla Riservatezza" (checkbox "Richiedi Riservatezza", "Note") and "Indirizzo" (Via, Numero Civico, Città, CAP, Provincia, Nazione, Telefono 1, Telefono 2). At the bottom of the window are buttons for "Selezione e Aggiorna", "Nuovo", and "Chiudi".

Nella parte superiore della finestra di dialogo è possibile importare i dati della persona dai database disponibili. Per impostazione predefinita, il sistema ricerca tutte le fonti di informazione disponibili, ma può anche essere selezionata una fonte specifica usando l'apposito menù a tendina. La fonte “Fonte Demografica Locale” è sempre presente ed è relativa al database di ComPACS. Possono anche essere presenti altre fonti esterne.


Il tasto *Ricerca pazienti* ricerca all'interno del database i dati demografici della persona mentre il tasto *Ricerca Esami* effettua la ricerca gli esami in lista di lavoro.

La parte inferiore della finestra di dialogo visualizza le informazioni della persona selezionata. Tali informazioni possono anche essere inserite manualmente se la persona non viene trovata nelle varie fonti di ricerca.

Il tasto *Seleziona & Aggiorna* conferma la selezione della persona identificata e aggiorna le informazioni nel database di ComPACS nel caso in cui siano diverse da quelle ottenute dalla fonte di ricerca. Il tasto *Nuovo* invece aggiunge una nuova persona nel database. Per entrambi i tasti, una volta premuti, verrà completata l'operazione e verrà chiusa la finestra.

Nel caso in cui venga effettuata una ricerca sugli esami, verrà aperta una nuova finestra di dialogo per consentire l'aggiunta degli esami alla persona. Tale finestra sarà popolata con i dati importati ricevuti dalla fonte di ricerca.

La finestra che appare per la modifica della persona è molto simile. Al posto dei tasti *Seleziona & Aggiorna* e *Nuovo* sono presenti i tasti *Annulla*, *Aggiorna* e *Fusione*.

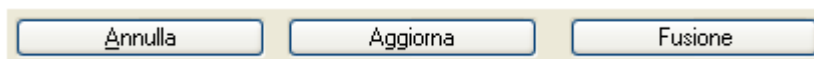

Questi tasti effettuano rispettivamente la reimpostazione delle informazioni della persona ai valori originali, l'aggiornamento dei dati nel database con le nuove informazioni inserite e la fusione della persona con quella selezionata in elenco.

8.5.2 AGGIUNGERE O MODIFICARE ESAMI

Le informazioni sull'esame da aggiungere o modificare sono visualizzate nella seguente finestra:

Nella parte superiore della finestra di dialogo è possibile importare i dati dell'esame dai database disponibili. Per impostazione predefinita, il sistema ricerca tutte le fonti di informazione disponibili, ma può anche essere selezionata una fonte specifica usando l'apposito menù a tendina. La fonte "Fonte Demografica Locale" è sempre presente ed è relativa al database di ComPACS. Possono anche essere presenti altre fonti esterne.

Il tasto *Ricerca esami* ricerca all'interno del database gli esami in lista di lavoro.

La parte inferiore della finestra di dialogo visualizza le informazioni dell'esame selezionato. Tali informazioni possono anche essere inserite manualmente se l'esame non viene trovato nelle varie fonti di ricerca.

Sulla sinistra è possibile visualizzare e modificare le informazioni dell'esame e, se l'esame è associato ad una visita, le relative informazioni sulla visita.

Nella parte centrale è possibile selezionare l'erogatore e, di conseguenza, le liste pre-configurate di descrizione esame per l'erogatore selezionato per una selezione rapida. Questa descrizione è un'impostazione generale del sistema da configurare da parte dell'amministratore di sistema.


Sotto le descrizioni dell'esame vi sono le informazioni sulle procedure associate all'esame. Per ogni procedura è possibile definirne la *Modalità* e il gruppo di Application Entities associate alla procedura.

Sulla destra è possibile identificare le prestazioni associate alla descrizione selezionata e, opzionalmente, informazioni di dettaglio quali: numero di placer order o numero di placer group. Se il numero di placer order o placer group sono definiti, un ordine verrà automaticamente generato e associato a tali prestazioni.

L'etichetta *Informazioni Visita* consente di impostare informazioni di dettaglio sulla visita. L'etichetta *Informazioni su Ordini e Prestazioni* consente di impostare informazioni di dettaglio sugli ordini e sulle prestazioni.

Il tasto *Seleziona & Aggiorna* conferma la selezione dell'esame identificato e aggiorna le informazioni nel database di ComPACS nel caso in cui siano diverse da quelle ottenute dalla fonte di ricerca. Il tasto *Nuovo* invece aggiunge un nuovo esame nel database. Per entrambi i tasti, una volta premuti, verrà completata l'operazione e verrà chiusa la finestra.

La finestra che appare per la modifica dell'esame è molto simile. Al posto dei tasti *Seleziona & Aggiorna* e *Nuovo* sono presenti i tasti *Annulla*, *Aggiorna* e *Fusione*.

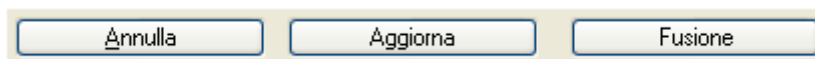

Questi tasti effettuano rispettivamente la reimpostazione delle informazioni della persona ai valori originali, l'aggiornamento dei dati nel database con le nuove informazioni inserite e la fusione della persona con quella selezionata in elenco.



Si possono modificare le informazioni sulle prestazioni sono in fase di creazione dell'esame. Una volta creato, le prestazioni possono essere modificata dal pannello di accettazione.

8.5.3 AGGIUNGERE O MODIFICARE SERIE

Le informazioni che è possibile gestire in fase di inserimento o di modifica di una serie sono presenti nella finestra sottostante.

The screenshot shows a software window titled "Informazioni sulla Nuova Serie". It contains several input fields and a tree view. The fields include: "Istanza" (text box), "Numero:" (text box), "Lateralità" (dropdown menu), "Data:" (calendar icon, checked "02/23/2015"), "Ora:" (checked "10:03:19 PM"), "Parte del Corpo:" (text box), "Protocollo:" (text box), "Medico Esecutore [Cognome - Nome - Medio - Prefisso - Sufisso]:" (four text boxes), and "Operatore [Cognome - Nome - Medio - Prefisso - Sufisso]:" (four text boxes). On the right side, there is a tree view with a root node "US" (highlighted in blue) and two sub-nodes: "Ecocardiografia" and "XA". Under "XA", there is a sub-node "Angiografia". Below the tree view, there are two more fields: "Modalità:" (dropdown menu set to "AR") and "Descrizione:" (text box). At the bottom of the window, there are two buttons: "Nuovo" (grey) and "Annulla" (blue).

Nella parte a destra è possibile avere una lista pre-configurata di descrizione per ogni modalità per una rapida selezione in fase di inserimento o modifica. Tali descrizioni vengono impostate dal vostro amministratore di sistema.

Premendo il tasto *Nuovo* verrà confermata l'operazione e la nuova serie verrà aggiunta.

La finestra che appare per la modifica della serie è molto simile. Al posto del tasto *Nuovo* è presente il tasto *Aggiorna* per confermare le modifiche. La modifica della serie avrà effetto immediato su di essa e sugli oggetti in esso contenuti.

8.6. FUSIONE E SPOSTAMENTO ELEMENTI

La fusione e lo spostamento di Oggetti, Serie, Esami o Persone può essere effettuato in modo facile ed intuitivo utilizzando le azioni basate sul 'Drag & Drop' del mouse.

Queste operazioni portano a cambiamenti significativi alle informazioni contenute nel database di ComPACS e non sono reversibili. Per evitare modifiche accidentali, queste funzionalità devono essere attivate mediante il seguente apposito tasto.

Abilita Fusione/Spost.

8.6.1 FUSIONE DI ELEMENTI

Per unire persone, esami o serie, è sufficiente selezionare uno o più elementi dalla rispettiva finestra dei risultati, trascinarli sull'oggetto con il quale devono essere uniti, all'interno della stessa finestra, e rilasciare la selezione. Una finestra di dialogo avviserà l'utente dell'importanza e della non reversibilità dell'operazione che dovrete accettare per proseguire.



Si consiglia di de-selezionare il tasto *Abilita Fusione/Spost.* al termine di tali operazioni per inibirne di accidentali.

8.6.2 SPOSTAMENTO ELEMENTI

Per spostare esami, serie o oggetti è sufficiente selezionare uno o più elementi dalla rispettiva finestra dei risultati, trascinarli su un oggetto genitore nel quale devono essere spostati e rilasciare la selezione. Una finestra di dialogo avviserà l'utente dell'importanza e della non reversibilità dell'operazione che dovrete accettare per proseguire.

L'oggetto destinatario dello spostamento è solo l'immediato genitore. Un oggetto ha una serie come suo genitore, una serie ha un esame come genitore mentre un esame ha come genitore una persona.



Si consiglia di de-selezionare il tasto *Abilita Merge/Move* al termine di tali operazioni per inibirne di accidentali.

8.6.3 DIVISIONE DI ELEMENTI


La divisione del contenuto di un elemento può essere effettuata mediante le operazioni di creazione e spostamento.

Per dividere ad esempio il contenuto di un esame si potrebbe procedere nel seguente modo:

- Creare un nuovo esame per il paziente selezionato.
- Nell'esame che si desidera dividere, creare una nuova serie dello stesso tipo di quella contenuta nell'esame che si vuole dividere. Se ad esempio l'esame contiene una serie di tipo US, creare una ulteriore serie di tipo US.
- Selezionare gli oggetti che devono essere spostati in un esame diverso spostandoli inizialmente sulla serie appena creata.
- Completare l'operazione spostando la nuova serie nel nuovo esame.

8.7. ARCHIVIARE IMMAGINI E FILMATI

Per archiviare le immagini visualizzate con ComPACS è necessario cliccare col tasto destro del mouse destro sull'anteprima dell'immagine, sulla serie, sull'esame o sulla persona e selezionare la voce *Archivia* dal menù che appare.

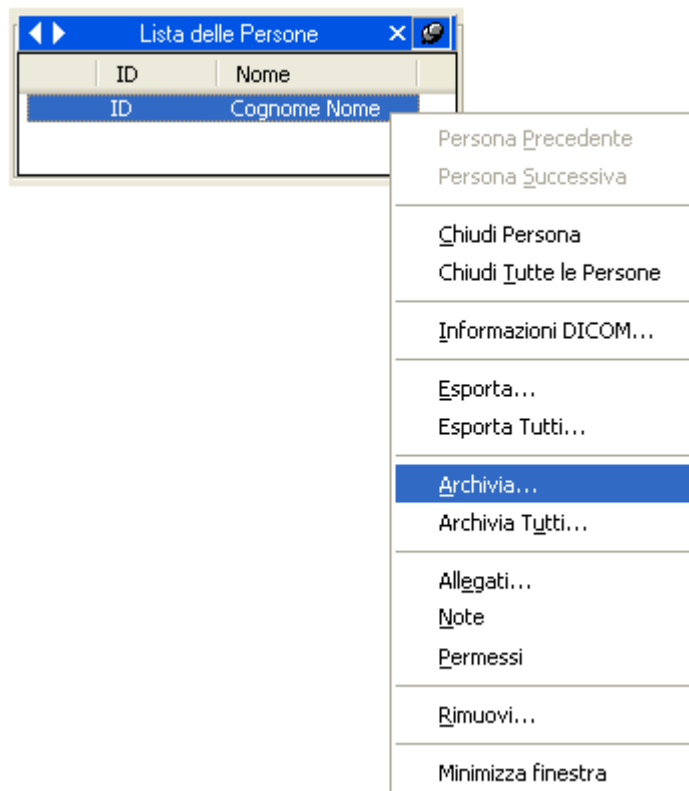

Apparirà una finestra di dialogo chiamata “Finestra Oggetti da Archiviare” contenente la lista delle immagini selezionate. Nella parte in alto di tale finestra è possibile selezionare l'archivio di destinazione.

E' inoltre possibile affinare la selezione cliccando sui vari simboli di spunta per selezionare/de-selezionare i vari elementi che possono essere persone, esami, serie o oggetti.

Se al paziente sono associate delle Annotazioni su Immagini Chiave, è inoltre possibile limitare gli oggetti esportati ai soli oggetti contenuti in tali Annotazioni. Il controllo a tendina “Annotazioni su Immagini Chiave” visualizzerà l'elenco di tali annotazioni.

Navigando nella gerarchia dei vari elementi, è possibile esaminare le relative informazioni DICOM nel pannello alla destra della finestra.

Descrizione: COMPACS

Persone N°: 1 Esami N°: 1 Serie N°: 3 Immagine N°: 9

| Informazioni Oggetto | Risultato |
|---|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Sample KeyImageNote | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 08/07/07 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 - US | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 - US | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 - KO | |

 Lingua: <sop instance default >
 Compressione: <nessun cambiamen >

Annotazioni su Immagini Chiave: _____

Rimuovi Tag Privati Converti Proprietario in DICOM

Informazioni

ID Persona: TESTMULTI

Nome Persona [Cognome - Nome - Medio - Prefisso - Suffixo]:

Sample KeyImageNote

Data di Nasc.: 04/04/44 Ora Nasc.: 12:00: 0 AM

Sesso: Femmina

N° Selez.: 9 N° Inser.: 0 Operazione: In attesa

Avanzamento: _____

Infine, premendo il tasto *Archivia*, gli elementi selezionati saranno trasferiti all'archivio. Se l'archivio scelto è di rete il trasferimento richiederà un tempo maggiore. In fase di archiviazione, la barra di avanzamento indicherà il progresso del trasferimento.

Il trasferimento avvenuto con successo sarà indicato da una icona verde. Un'icona gialla indica un messaggio di avviso per un'archiviazione avvenuta comunque con successo. Un'icona rossa indica un fallimento in fase di archiviazione. Ad ogni oggetto archiviato verrà assegnata un'icona, si raccomanda quindi di controllare tutti i livelli di profondità per avere ulteriori informazioni in merito all'esito dell'archiviazione.

Nell'esempio sotto sono mostrate due situazioni in cui l'archiviazione è andata a buon fine (Successo) senza segnalazioni, nell'esempio di sinistra; con segnalazione di persona già presente nell'esempio di destra.

| Informazioni Oggetto | Risultato |
|------------------------|-----------|
| ✓ NOME PAZIENTE | |
| ✓ 11/09/07 NOME STUDIO | |
| ✓ 1 - US | |
| ✓ 1 | Successo. |
| ✓ 2 | Successo. |
| ✓ 3 | Successo. |
| ✓ 4 | Successo. |
| ✓ 5 | Successo. |
| ✓ 6 | Successo. |
| ✓ 7 | Successo. |
| ✓ 8 | Successo. |
| ✓ 9 | Successo. |
| ✓ 10 | Successo. |
| ✓ 11 | Successo. |
| ✓ 12 | Successo. |
| ✓ 13 | Successo. |
| ✓ 14 | Successo. |
| ✓ 15 | Successo. |
| ✓ 16 | Successo. |
| ✓ 17 | Successo. |
| ✓ 18 | Successo. |
| ✓ 19 | Successo. |
| ✓ 20 | Successo. |

| Informazioni Oggetto | Risultato |
|------------------------|---------------|
| ! NOME PAZIENTE | |
| ! 11/09/07 NOME STUDIO | |
| ! 1 - US | |
| ! 1 | Già presente. |
| ! 2 | Già presente. |
| ! 3 | Già presente. |
| ! 4 | Già presente. |
| ! 5 | Già presente. |
| ! 6 | Già presente. |
| ! 7 | Già presente. |
| ! 8 | Già presente. |
| ! 9 | Già presente. |
| ! 10 | Già presente. |
| ! 11 | Già presente. |
| ! 12 | Già presente. |
| ! 13 | Già presente. |
| ! 14 | Già presente. |
| ! 15 | Già presente. |
| ! 16 | Già presente. |
| ! 17 | Già presente. |
| ! 18 | Già presente. |
| ! 19 | Già presente. |
| ! 20 | Già presente. |

E' possibile anche archiviare tutte le persone aperte nella finestra di servizio cliccando col tasto destro del mouse sulla lista delle persone e selezionando *Archivia Tutti*.

- Persona Precedente
- Persona Successiva

- Chiudi Persona
- Chiudi Tutte le Persone

- Informazioni DICOM...

- Esporta...
- Esporta Tutti...

- Archivia...
- Archivia Tutti...**

- Allegati...
- Note
- Permessi

- Rimuovi...

- Minimizza finestra



A livello oggetto, l'avviso "Già presente" non previene l'esecuzione dell'operazione di salvataggio. In questo scenario, l'oggetto viene sovrascritto con il nuovo oggetto archiviato.

8.7.1 MODIFICA DELLE INFORMAZIONI DICOM

E' possibile archiviare oggetti le cui informazioni DICOM sono state modificate o anonimizzate. Per far ciò, nella finestra "Oggetti da Archiviare", è sufficiente selezionare un oggetto e cliccare sul tasto *Modifica* o *Anonimizza*. Una volta cliccato le informazioni DICOM corrispondenti all'oggetto selezionato saranno modificabili.

E' possibile cambiare la lingua (il cosiddetto Character Set, utilizzato per codificare i caratteri) o il tipo di compressione utilizzata per gli oggetti DICOM. La lingua è comune a tutti gli oggetti della persona mentre il tipo di compressione può essere impostato diversamente per ogni oggetto appartenente alla persona.

E' inoltre possibile rimuovere tutti i Tag DICOM privati dagli oggetti selezionati o convertirli nel formato DICOM standard (utilizzabile ad esempio per il formato Aloka Line Data)

Cliccando nuovamente sul tasto *Modifica* è possibile tornare alle informazioni DICOM originarie degli oggetti.



Quando si ri-archiviano oggetti con modifiche alle informazioni sulla persona, si prego di assicurarsi che lo stesso ID visita non sia utilizzato su diverse persone. Questo identificativo non può essere automaticamente coercizzato e il suo uso su diverse persone genererebbe un conflitto con conseguente fallimento dell'operazione di archiviazione

8.7.2 ANONIMIZZAZIONE DI IMMAGINI

Oltre all'anonimizzazione delle informazioni DICOM, ComPACS permette anche l'anonimizzazione delle immagini e dei filmati DICOM. La tecnica è la stessa descritta nel capitolo sulle *Maschere*. Si può permettere al sistema di riconoscere automaticamente le maschere o selezionarle manualmente per ogni immagine o filmato.

8.7.3 TAGLIO DI FILMATI (TRIMMING)


La finestra di archiviazione può essere ridimensionata (trascinando con il mouse la parte in basso a destra). Questo comporta il ridimensionamento della pagina con le informazioni sull'immagine per meglio visualizzare l'anteprima dell'elemento selezionato. Nel caso di un filmato, l'immagine sarà riprodotta in movimento a una frequenza fissa di venticinque fotogrammi al secondo. Questa visualizzazione non è intesa per finalità diagnostiche ma esclusivamente per consentire una corretta identificazione dell'elemento selezionato.

The screenshot displays the ComPACS software interface for image archiving and trimming. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes fields for "Descrizione:" (COMPACS), "Persone N°:" (1), "Esami N°:" (1), "Serie N°:" (1), and "Immagine N°:" (33).
- Informazioni Oggetto:** A table with two columns: "Informazioni Oggetto" and "Risultato". It lists 35 items, with item 5 selected and highlighted in blue.
- Buttons:** "Modifica", "Anonimizza", "Maschera", "Nessuna maschera", "Rimuovi Tag Privati", and "Converti Proprietario in DICOM".
- Informazioni:** Fields for "Numero:" (5), "Data:" (2013/06/02), and "Ora:" (02:17:18 PM).
- Impostazioni Avanzate:** A section containing a video player showing a cardiac ultrasound image with technical parameters like "FR 50Hz", "15cm", "2D", "50%", "C 60", "P Low", "15fps", and "78 bpm".
- Footer:** Fields for "N° Selez.:" (33), "N° Inser.:" (0), "Operazione:", "In attesa", "Avanzamento:", "Archivia", and "Annulla".

ComPACS permette inoltre di tagliare dei filmati per poter esser archiviati nella lunghezza desiderata. Per fare quest'operazione è sufficiente selezionare il filmato specifico (sempre nella finestra di archiviazione oggetti) e premere il tasto *Impostazioni Avanzate*.

Apparirà una nuova finestra in cui sarà possibile vedere l'intero filmato e selezionare i punti d'inizio e fine del filmato che si desidera archiviare.

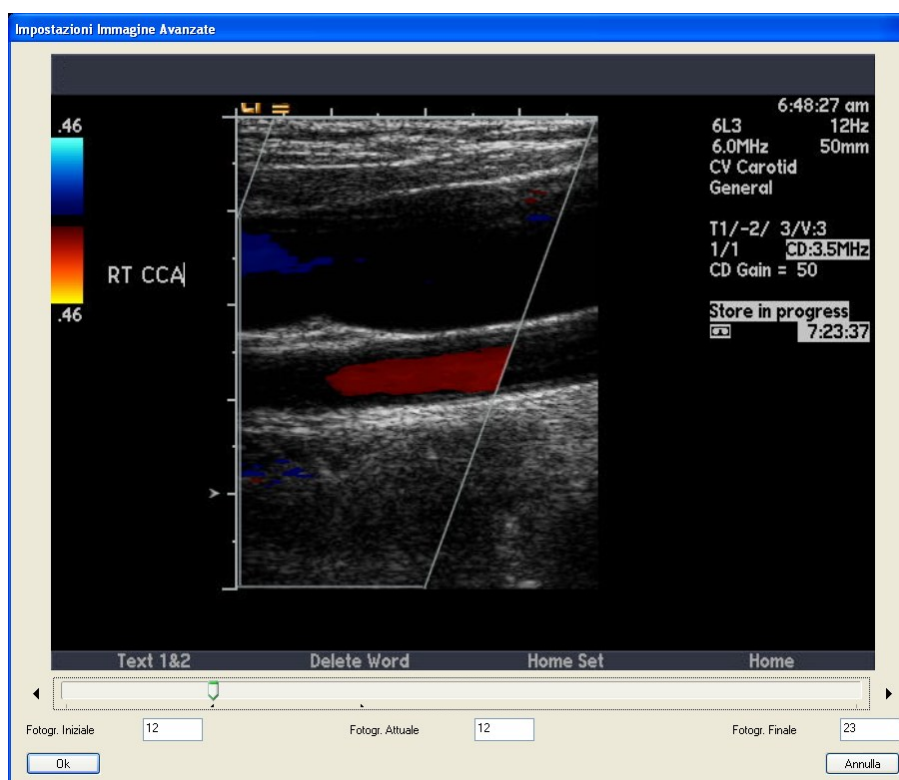


8.8. ALLEGATI


ComPACS Review Station, in aggiunta alle informazioni DICOM, permette di gestire informazioni non DICOM come ad esempio documenti e allegati Adobe® PDF e di Microsoft® Word.

Gli allegati possono essere messi ad ogni livello della gerarchia Persona/Esame/Serie/Oggetto. Per allegare, visualizzare o rimuovere un allegato è sufficiente cliccare sul tasto destro del mouse


sull'anteprima di un'immagine, su una serie, su un esame o su una persona e selezionare la voce *Allegati...*

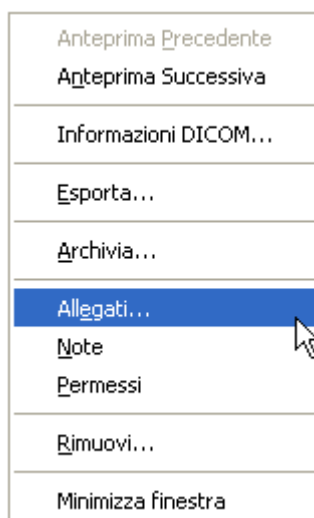


Una finestra di gestione degli allegati si aprirà e visualizzerà una lista di tutti gli allegati (se presenti) per l'oggetto selezionato.

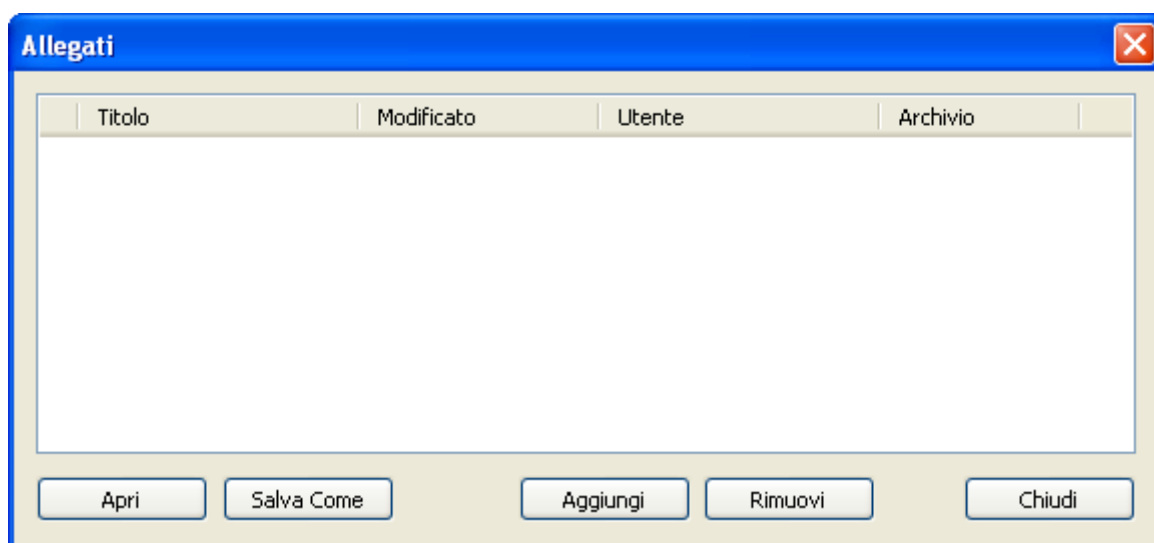

Cliccando sul tasto *Aggiungi* è possibile aggiungere un nuovo allegato.

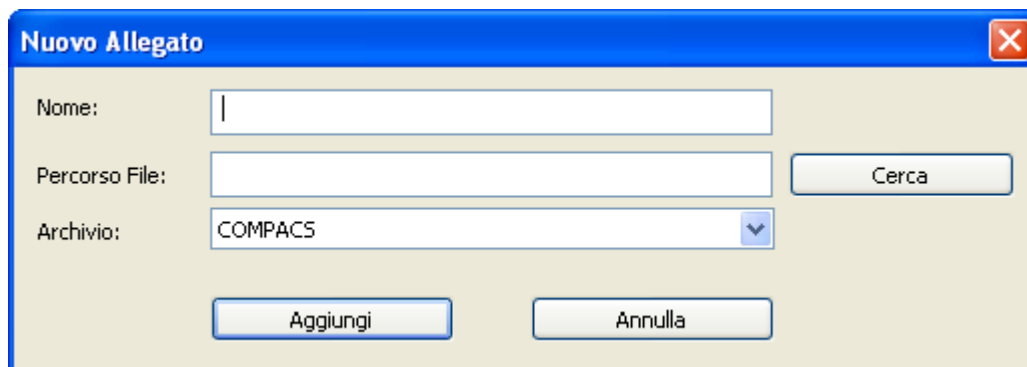

Dopo aver dato un titolo all'allegato (e selezionato l'archivio in cui si desidera archiviare l'allegato), potete esplorare il vostro computer e selezionare qualsiasi tipo di documento. Cliccando sul tasto *Aggiungi* verrà allegato il file selezionato. Se al file allegato è associata un'icona, essa verrà visualizzata sulla sinistra del titolo come mostrato sotto.

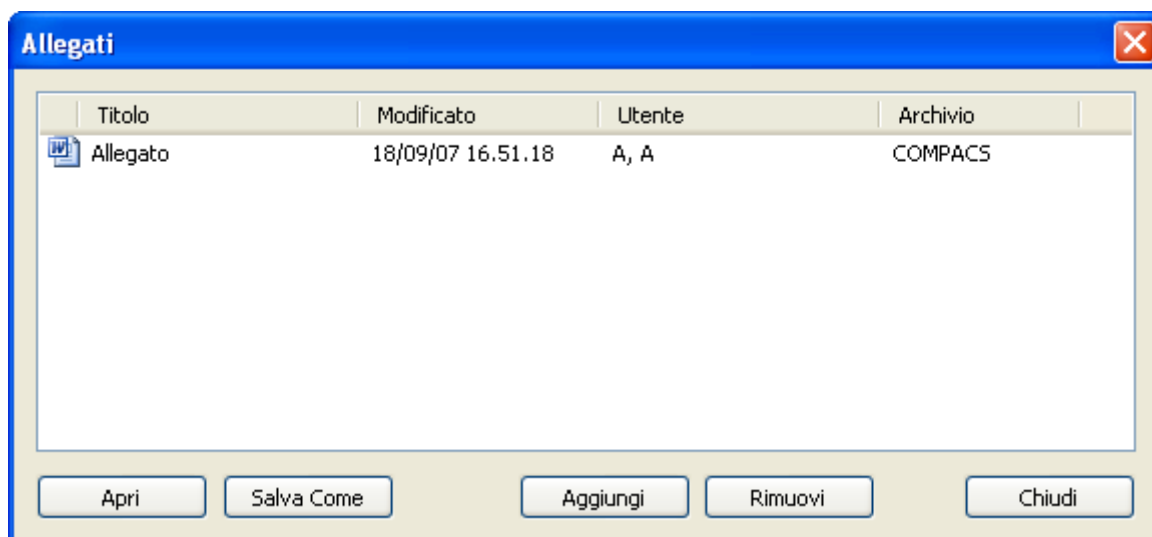

Nella lista degli allegati è inoltre segnalato l'utente che ha archiviato l'allegato, l'archivio in cui è stato archiviato e la data di archiviazione.

E' anche possibile gestire gli allegati selezionandoli e cliccando sul tasto relativo in base all'operazione che si desidera effettuare:

Apri: per aprire un allegato dentro ComPACS;


Salva come: per salvare l'allegato sotto forma di file esterno;

Rimuovi: per cancellare un allegato.




Notare che le operazioni permesse sugli allegati dipendono dai vostri privilegi sull'oggetto in questione (persona, esame, serie o oggetto). Di conseguenza alcuni o tutti i tasti possono essere disabilitati poiché le loro funzioni non sono accessibili.

Se un allegato viene aperto dentro ComPACS, verrà visualizzato nella finestra dei tab come segue

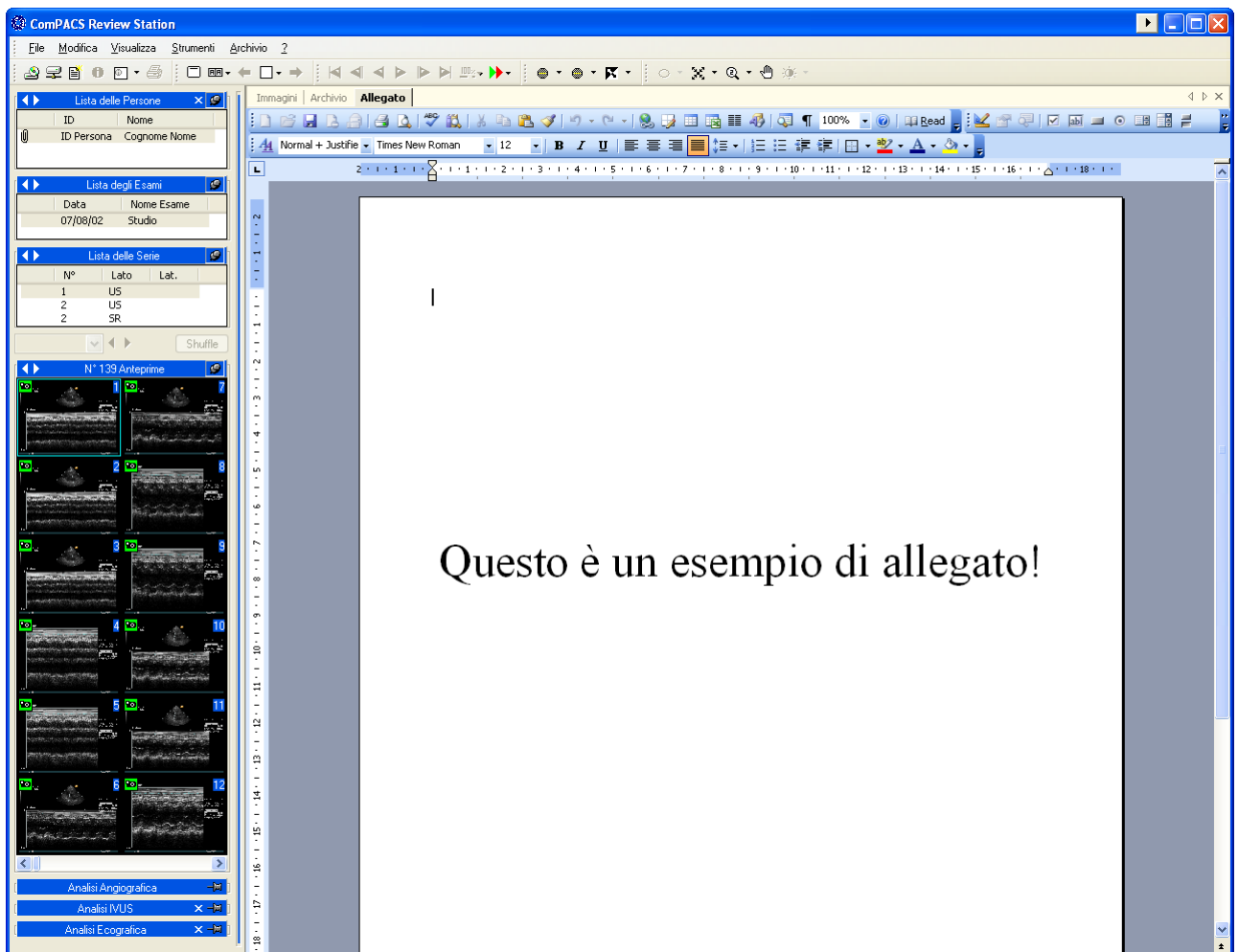

Per la funzionalità di apertura internamente a ComPACS è necessario che il documento ed il relativo Viewer siano compatibili con la tecnologia ActiveX e Active Document come ad esempio sono i file Adobe® PDF e Microsoft® Office.

Quando un oggetto contiene uno o più allegati, un simbolo di graffetta sulla sinistra dell'oggetto avviserà l'utente della presenza di allegati.

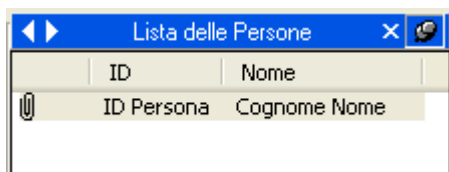


La stessa icona viene visualizzata nella finestra dell'archivio.


8.9. NOTE

Può essere utile allegare delle note agli oggetti (immagine, serie, esame, persona).


CompPACS Review Station permette questa operazione. Cliccare col destro sull'oggetto e selezionare *Note*.

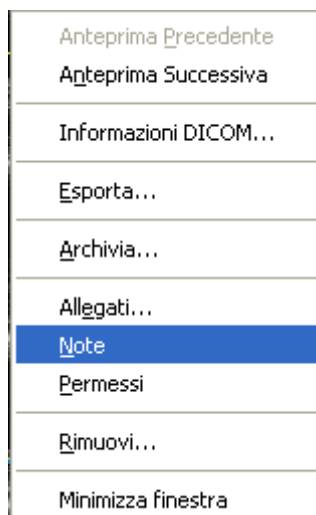

Si aprirà la finestra delle *Note*.

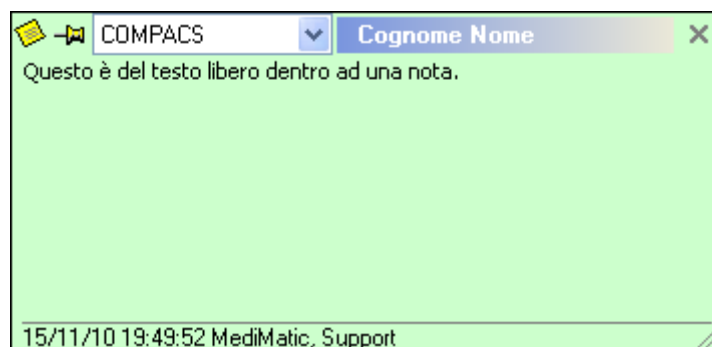

In questa finestra si possono scrivere le informazioni da ricordare; quindi cliccando sulla piccola icona *Nota* in alto a sinistra della finestra, si ha accesso ad un menù per impostare diverse proprietà del memo.

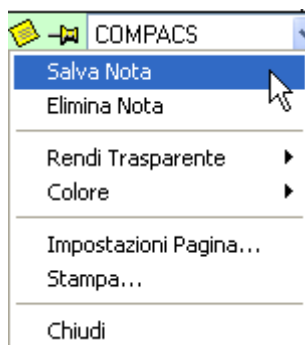


Ad esempio si può stabilire il colore dello sfondo o la trasparenza. Quando il memo è concluso, cliccando su *Salva Nota* questo sarà salvato e sull'oggetto apparirà una piccola icona *Nota*. Per rimuovere un memo cliccare su *Elimina Nota* o in alternativa cancellare il testo al suo interno e chiuderla. Per scegliere il carattere e le sue dimensioni cliccare col destro nella finestra *Memo* e scegliere *Impostazioni Carattere*.




Notare che le operazioni permesse sulle note dipendono dai privilegi sull'oggetto in questione (persona, esame, serie o oggetto). Di conseguenza alcuni o tutti i tasti possono essere disabilitati poiché le loro funzioni non sono accessibili.

Quando un oggetto contiene uno o più note, un simbolo di appunto sulla sinistra dell'oggetto avviserà l'utente della presenza di note.

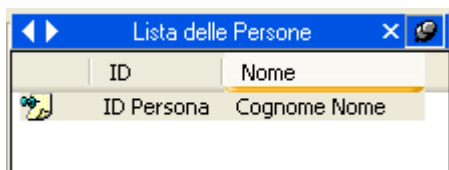


8.10. PERMESSI

ComPACS Review Station permette di impostare i permessi d'accesso ad una persona, esame serie o ad un singolo oggetto. Per aprire il menù dei permessi cliccare col destro su un oggetto (persona, esame, serie od oggetto) e scegliere *Permessi*.

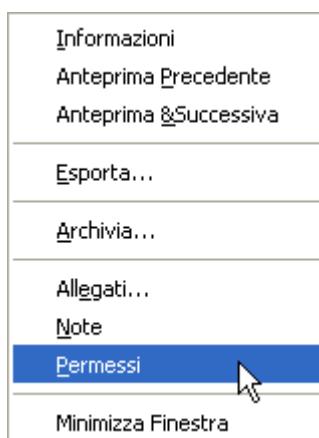

Si aprirà così una finestra di *Gestione delle ACL (Access Control List)*.

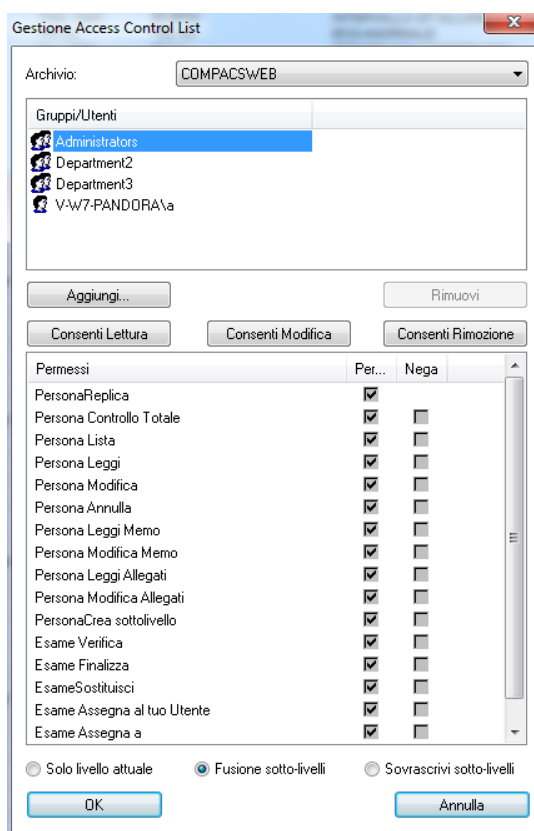


In questa finestra è possibile selezionare un utente (o un gruppo di utenti) e permettere o negare alcune operazioni come lettura, modifica o cancellazione, ecc. Tre pulsanti rapidi (*Consenti Lettura*, *Consenti Modifica* e *Consenti Rimozione*) permettono di impostare i livelli di sicurezza più diffusi.



I nomi delle operazioni fanno riferimento all'oggetto selezionato e dal nome stesso si può capire il permesso gestito. Fate riferimento tuttavia al vostro amministratore di sistema per avere maggiori dettagli.

E' anche possibile aggiungere o rimuovere un utente o un gruppo di utenti dalla lista mediante l'utilizzo dei tasti *Aggiungi* e *Rimuovi*. Quando il tasto *Aggiungi* viene premuto appare una finestra contenente la lista degli utenti e dei gruppi tra cui poter scegliere.

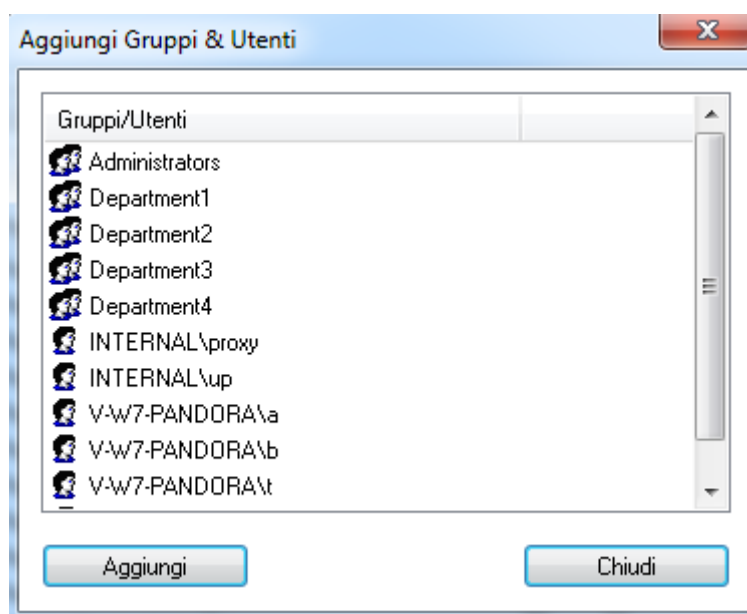

Notare che utenti e gruppi possono essere aggiunti solo se sono stati registrati come utenti abilitati all'uso dell'applicazione ComPACS. Fate riferimento al vostro amministratore di sistema per cambiare i componenti di questa lista.

In fase di conferma è necessario specificare anche come i cambiamenti saranno applicati al database ComPACS. Sono disponibili tre diverse opzioni:

Solo livello attuale: Vengono modificati i permessi solo nel livello selezionato;

Fusione sotto-livelli: Modifica i permessi per il livello selezionato, dopodiché estende i cambiamenti a tutti i sottolivelli (nel caso di un esame ad esempio, i suoi sottolivelli saranno le serie e gli oggetti. Il processo di fusione preserverà qualsiasi impostazione di autorizzazione aggiuntiva e specifica ai livelli inferiori se non interessata dai cambiamenti fatti (ad esempio se si riferisce ad utenti o gruppi).

Sovrascrivi sotto-livelli: Modifica le autorizzazioni al livello scelto e le applica ai sotto-livelli (ad esempio i sotto-livelli di un esame sono la sua serie e i suoi oggetti), sovrascrivendo le impostazioni di autorizzazione precedenti che possono essere state fatte per tali livelli.



Ricordare che per impostare i permessi bisogna avere *Controllo Totale* dell'oggetto preso in considerazione.



Questi permessi faranno riferimento al livello dell'oggetto (persona, esame, serie od oggetto) che avete scelto ma saranno necessariamente propagate ai livelli superiori per mantenere consistenza nelle impostazioni di autorizzazione. Ad esempio mettere un'autorizzazione di lettura al livello di *esame* richiede come minimo un'autorizzazione di elenco al livello *persona*.




Cambiare le impostazioni di autorizzazione influenzerà per gli utenti la possibilità di elencare, leggere, modificare e cancellare i vari oggetti nel database ComPACS. Si raccomanda di utilizzare queste funzionalità con molta attenzione.


9. ANNOTAZIONI SU IMMAGINI CHIAVE

9.1. VISUALIZZARE LE ANNOTAZIONI SU IMMAGINI CHIAVE

Se il modulo “Key Image Note” è abilitato in licenza, alcuni elementi aggiuntivi saranno visibili nella finestra di controllo:

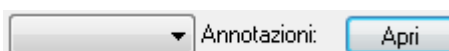

Un menu a tendina elencherà tutte le Annotazioni su Immagini Chiave disponibili. Se selezionate, le icone rifletteranno il contenuto delle Annotazioni su Immagini Chiavi, anche se le immagini appartengono a diversi esami dello stesso paziente. La navigazione sulle icone avverrà a questo punto all'interno dell'insieme delle immagini nelle Annotazioni su Immagini Chiave selezionate.

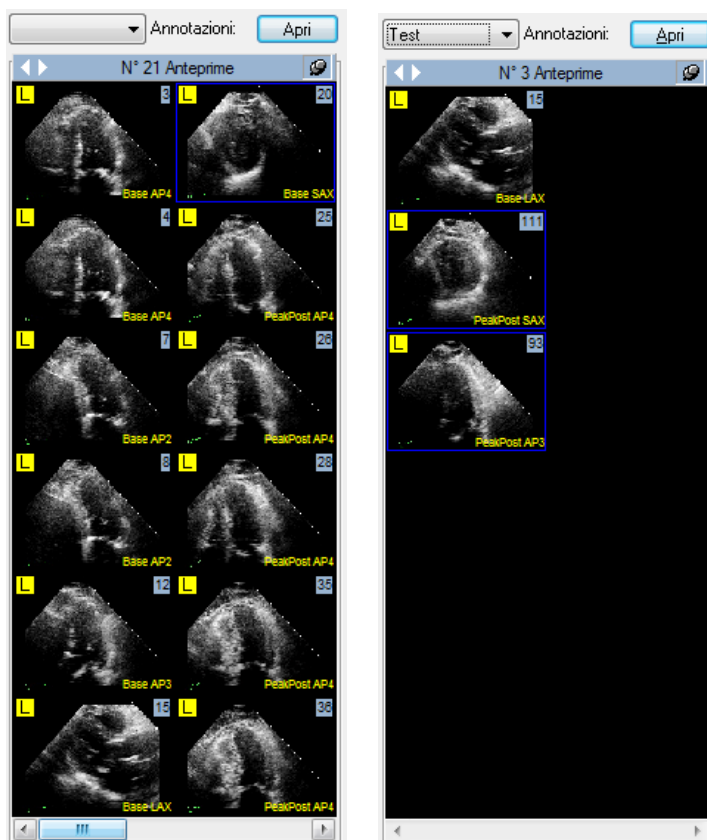

L'utente può sempre ritornare alla visualizzazione complete, semplicemente rimuovendo la selezione delle Annotazioni su Immagini Chiave.

Premendo il pulsante Apri, è possibile visualizzare e modificare tutte le Annotazioni su Immagini Chiave aperte:

Immagini | Archivio **Elenco Annotazioni Immagini Chiave**


ID Paziente: TESTMULTI - Nome: Sample KeyImageNote

| Data | Ora | Data Esame | Titolo Annotazioni Immagini Chiave | Tipo | Data di Riferim... | Nome Autore: |
|----------|------------|------------|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 12/15/15 | 4:43:30 AM | 08/07/07 | Esempio di Annotazioni | Di Interesse | - | Administrator User |
| 12/15/15 | 4:43:47 AM | 08/07/07 | Riunione Interna | Per Didattica | 11/08/15 | Administrator User |


Nuovo Rimuovi
Modifica Salva
Dettagli Storia
Chiudi

Tutte le Immagini Immagini Selezionate

Data Esame: 08/07/07 - Numero Accesso: - Descrizione:
Data Series: 11/03/15 Ora: 4:32:41 PM - Numero: 2 - Modalità: KD - Lateralità:
Data Series: 01/20/15 Ora: 9:53:28 AM - Numero: 1 - Modalità: US - Lateralità:

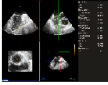


0 - 01/20/15 9:53:29 AM
Data Series: 08/07/07 Ora: 6:55:28 PM - Numero: 1 - Modalità: US - Lateralità:

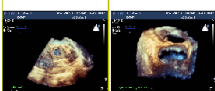


95 - 08/07/07 6:55:32 PM 98 - 08/07/07 6:55:48 PM

Data Esame: 10/10/00 - Numero Accesso: - Descrizione: Catheterization
Data Series: - Ora: 12:00:00 AM - Numero: 4 - Modalità: XA - Lateralità: N

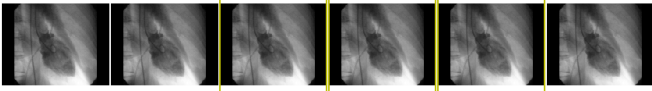

1 - 01/20/99 9:42:00 AM 3 - 01/20/99 9:49:00 AM 4 - 01/20/99 9:58:00 AM 101 - 07/23/96 12:00:00 AM 105 - 12/14/96 12:00:00 AM 110 - 07/30/96 12:00:00 AM

Data Esame: 05/08/07 - Numero Accesso: - Descrizione: Cardiac Echo
Data Series: 05/08/07 Ora: 8:17:24 AM - Numero: 1 - Modalità: US - Lateralità:



Nella parte alta delle finestra, potete trovare un elenco delle Annotazioni su Immagini Chiave. Se il titolo contiene il simbolo “*” come suffisso, significa che le Annotazioni sono in modalità di modifica.

Per le Annotazioni su Immagini Chiave selezionate, le immagini contenute negli esami aperti sono identificate con un rettangolo giallo.

Selezionando l’etichetta “Immagini Selezionate”, potete visualizzare solo le immagini contenute nelle Annotazioni su Immagini Chiave.

Immagini | Archivio **Elenco Annotazioni Immagini Chiave**

ID Paziente: TESTMULTI - Nome: Sample KeyImageNote


| Data | Ora | Data Esame | Titolo Annotazioni Immagini Chiave | Tipo | Data di Riferim... | Nome Autore: |
|----------|------------|------------|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 12/15/15 | 4:43:30 AM | 08/07/07 | Esempio di Annotazioni | Di Interesse | - | Administrator User |
| 12/15/15 | 4:43:47 AM | 08/07/07 | Riunione Interna | Per Didattica | 11/08/15 | Administrator User |

Nuovo Rimuovi
Modifica Salva
Dettagli Storia
Chiudi

Tutte le Immagini Immagini Selezionate

Nota:


Sposta Su
Sposta Giù
Rimuovi

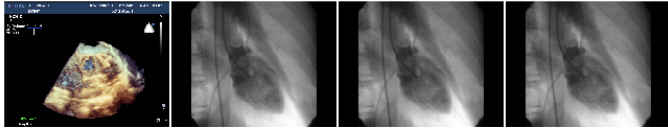


1 - 95 - 08/07/07 6:55:32 PM 4 - 101 - 07/23/96 12:00:00 AM 4 - 4 - 01/20/99 9:58:00 AM 4 - 105 - 12/14/96 12:00:00 AM


9.2. CREARE NUOVE ANNOTAZIONI SU IMMAGINI CHIAVE

E' possibile creare nuove Annotazioni su Immagini Chiave in due modi diversi:

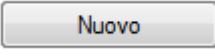- Premendo il pulsante  nella finestra di Elenco Annotazioni su Immagini Chiave.
- Premendo il tasto destro del mouse su di un'immagine e selezionando l'apposita voce del menu:

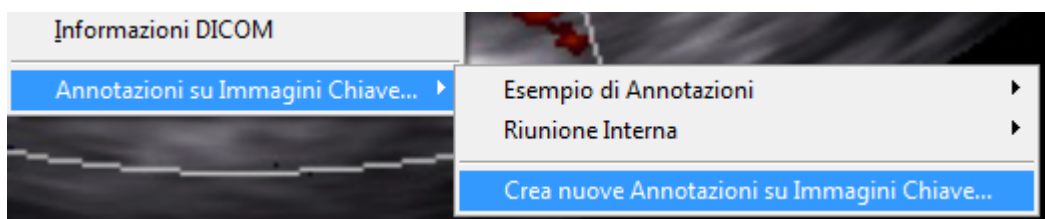

Verrà visualizzata una finestra di dialogo:

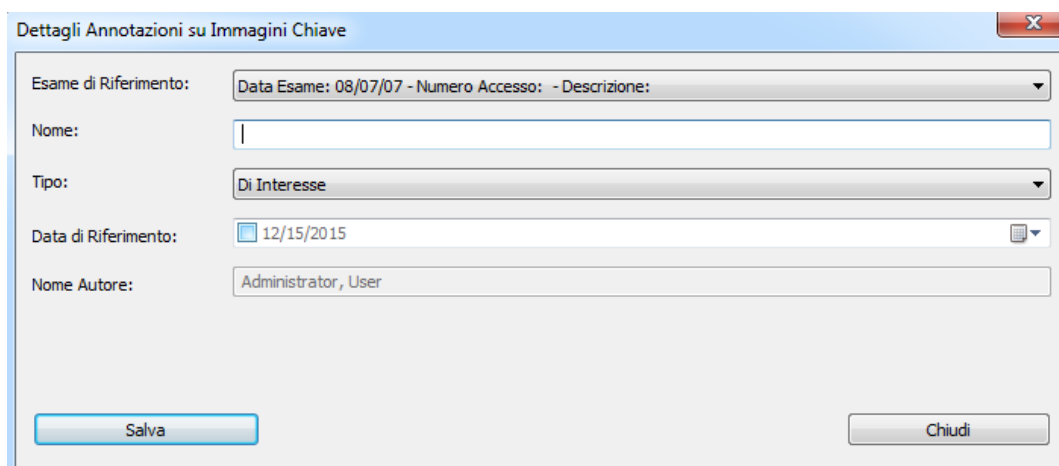The image shows a dialog box titled "Dettagli Annotazioni su Immagini Chiave". It contains several input fields and dropdown menus:

- Esame di Riferimento:** A dropdown menu with the text "Data Esame: 08/07/07 - Numero Accesso: - Descrizione:".
- Nome:** A text input field.
- Tipo:** A dropdown menu with "Di Interesse" selected.
- Data di Riferimento:** A date picker showing "12/15/2015".
- Nome Autore:** A text input field containing "Administrator, User".


At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Salva" on the left and "Chiudi" on the right.

E' necessario associare un Titolo e Tipo alle Annotazioni su Immagini Chiave. Se più esami sono disponibili per il paziente, è inoltre necessario indicare l'esame nel quale le annotazioni saranno salvate.

Opzionalmente è anche possibile indicare una Data di Riferimento, utile per poter ricercare le annotazioni successivamente.

9.3. MODIFICARE LE ANNOTAZIONI SU IMMAGINI CHIAVE


Se Annotazioni su Immagini Chiave non sono in modalità di modifica, occorre premere il pulsante

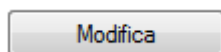

per attivare tale modalità. Solo un utente alla volta può modificare le annotazioni.

Quando tutte le modifiche sono state effettuate, premere il pulsante  per confermare il salvataggio o il pulsante annulla  per annullare l'operazione.

Le immagini possono essere aggiunte o rimosse dalle Annotazioni su Immagini Chiave premendo il tasto destro del mouse sull'immagine e selezionando l'apposita voce del menu di contesto:

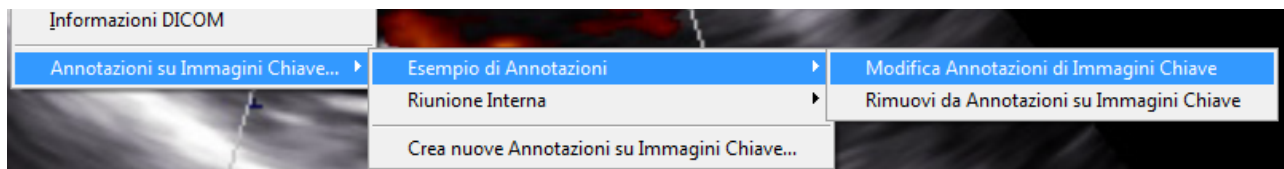

In alternativa, è possibile aggiungere o rimuovere le immagini premendo con il mouse l'icona corrispondente nella finestra di Elenco Annotazioni Immagini Chiave. Un rettangolo giallo indica se una specifica immagine è contenuta nelle annotazioni.

Immagini | Archivio | **Elenco Annotazioni Immagini Chiave** 4 x

ID Paziente: TESTMULTI - Nome: Sample KeyImageNote

| Data | Ora | Data Esame | Titolo Annotazioni Immagini Chiave | Tipo | Data di Riferim... | Nome Autore: |
|----------|------------|------------|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 12/15/15 | 4:43:30 AM | 08/07/07 | Esempio di Annotazioni | Di Interesse | - | Administrator User |
| 12/15/15 | 4:43:47 AM | 08/07/07 | Riunione Interna | Per Didattica | 11/08/15 | Administrator User |

Tutte le Immagini | Immagini Selezionate

Data Esame: 08/07/07 - Numero Accesso: - Descrizione:
 Data Series: 11/03/15 Ora: 4:32:41 PM - Numero: 2 - Modalità: KD - Lateralità:
 Data Series: 01/20/15 Ora: 9:53:28 AM - Numero: 1 - Modalità: US - Lateralità:

0 - 01/20/15 9:53:29 AM
 Data Series: 08/07/07 Ora: 6:55:28 PM - Numero: 1 - Modalità: US - Lateralità:

95 - 08/07/07 6:55:32 PM 98 - 08/07/07 6:55:48 PM

Data Esame: 10/10/00 - Numero Accesso: - Descrizione: Catheterization
 Data Series: - Ora: 12:00:00 AM - Numero: 4 - Modalità: XA - Lateralità: N

1 - 01/20/99 9:42:00 AM 3 - 01/20/99 9:49:00 AM 4 - 01/20/99 9:58:00 AM 101 - 07/23/96 12:00:00 AM 105 - 12/14/96 12:00:00 AM 110 - 07/30/96 12:00:00 AM

Data Esame: 05/08/07 - Numero Accesso: - Descrizione: Cardiac Echo
 Data Series: 05/08/07 Ora: 8:17:24 AM - Numero: 1 - Modalità: US - Lateralità:


Tramite l'etichetta "Immagini Selezionate" è possibile associare delle note ad una specifica immagine o cambiare l'ordine di visualizzazione, sia tramite il drag & drop con il mouse, o utilizzando i pulsanti *Sposta Su* e *Sposta Giù*. Per rimuovere un'immagini è possibile utilizzare il pulsane *Rimuovi*.

ID Paziente: TESTMULTI - Nome: Sample KeyImageNote

| Data | Ora | Data Esame | Titolo Annotazioni Immagini Chiave | Tipo | Data di Riferim... | Nome Autore: | |
|----------|------------|------------|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--|
| 12/15/15 | 4:43:30 AM | 08/07/07 | Esempio di Annotazioni | Di Interesse | - | Administrator User | <input type="button" value="Nuovo"/> |
| 12/15/15 | 4:43:47 AM | 08/07/07 | Riunione Interna | Per Didattica | 11/08/15 | Administrator User | <input type="button" value="Rimuovi"/> |

Tutte le Immagini | Immagini Selezionate

Nota:

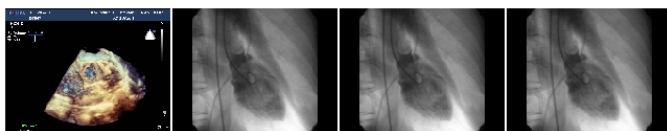

1 - 95 - 08/07/07 6:55:32 PM 4 - 101 - 07/23/96 12:00:00 AM 4 - 4 - 01/20/99 9:58:00 AM 4 - 105 - 12/14/96 12:00:00 AM



Per modificare il contenuto delle Annotazioni su Immagini Chiave, tali annotazioni devono essere aperte in modalità di modifica.

9.4. ALTRE OPERAZIONI

Il pulsante apre una finestra che visualizza la storia delle modifiche. In questa finestra è possibile forzare l'apertura di una versione precedente delle Annotazioni su Immagini Chiave.

Il pulsante apre una finestra con le informazioni principali sulle Annotazioni su Immagini Chiave. In questa finestra è possibile anche visualizzare il contenuto dei tag DICOM o modificare i permessi di accesso sull'Immagine Chiave.

Il pulsante rimuove le Annotazioni su Immagini Chiave dall'archivio. Questa operazione tenterà di rimuovere l'intera catena di Annotazioni, comprese quindi le revisioni precedenti.

9.5. APRIRE LE ANNOTAZIONI SU IMMAGINI CHIAVE

Le Annotazioni su Immagini Chiave possono essere aperte e selezionate direttamente dall'archivio premendo il tasto destro del mouse sulla finestra Paziente o Esame:

| | Cognome | Nome | ID | Ses... | Nato il | Primo Es... | Ultimo E... |
|--|---------|-------|----|--------|---------|-------------|-------------|
| | Sample | KeyIn | | | | 08/07/07 | 08/07/07 |
| | Sample2 | KeyIn | | | | 05/08/07 | 05/08/07 |

Supporto...
 Apri Annotazioni Immagini Chiave...

Una finestra di dialogo visualizzerà l'elenco delle Annotazioni su Immagini Chiave associate alla voce selezionata.

9.6. RICERCARE LE ANNOTAZIONI SU IMMAGINI CHIAVE

E' possibile ricerca specifiche Annotazioni su Immagini Chiave presenti in archivio utilizzando la finestra di Ricerca Avanzata:

Finestra di Ricerca Avanzata X

Generale

Non cancellare la lista delle persone

Opzioni di Ricerca Livello Persona

Nome Persona [Cog. Nome]: ID Persona: Sesso:

Data di Nasc.: Da: A:

Opzioni di Ricerca Livello Esame

Numero di Accesso: Descrizione Esame:

Data Esame: Da: A:

ID Esame: Medico Referente:

Opzioni di Ricerca Livello Serie

Modalità: Medico Esecutore:

Operatore:

Opzioni di Ricerca per Annotazioni su Immagini Chiave:

Nome:

Tipo:

Operatore:

Data di Riferimento: Da: A:



10. GESTIONE DEI REFERTI

10.1. CREAZIONE DI UN NUOVO REFERTO



Per creare un nuovo referto è necessario configurare la propria stazione di lavoro in modo adeguato. Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al vostro amministratore di sistema e ai manuali per l'*Amministratore di Sistema*.

Per creare un referto è necessario aprire un esame. Per i dettagli su come eseguire quest'operazione, si prega di consultare il relativi capitoli relativi all'archivio.

Dopodiché è sufficiente premere il tasto  sulla barra degli strumenti . Una nuova finestra vi richiederà di immettere un certo numero di parametri.

Crea un nuovo Referto ✖

| | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Utente: | MediMatic, Support | Data Referto: | 11/10/2010 |
| Archivio: | COMPACS | Lingua: | Latin 1 (Europa Ovest) |
| Gruppo: | Ecografico | Schema: | Cardiaco |
| Vista del Referto: | Vista referto | Vista di Analisi: | Vista di analisi |
| Schema Stampa: | Stampa | Schema di Stampa: | |

Importare Referto da

| Data | Ora | Titolo |
|------|-----|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Crea
Annulla

Esaminiamo in dettaglio i parametri richiesti:

Data Referto – indica la data del nuovo referto. Il valore di default è la data di sistema;

Archivio – indica l'archivio in cui il referto sarà archiviato;

Lingua – indica la lingua (tipo di codifica dei caratteri) utilizzata nel referto. Questo parametro viene pre-impostato al valore assegnato alla Application Entity corrispondente alla stazione di revisione.



E' importante impostare correttamente la lingua altrimenti alcuni caratteri speciali, come ad esempio le vocali accentate, potrebbero non essere inseriti correttamente nel referto.

Gruppo – le varie tipologie di referto sono raggruppate in gruppi per permetterne una migliore identificazione e selezione. Questo campo consente di scegliere tra i diversi gruppi di tipi di referti cui siete interessati, ad esempio referti *Cardiaci* o *Vascolari*.

Schema – identifica il tipo di referto (o schema) che si desidera effettivamente creare. Ad esempio Referto *Cardiaco*.

Vista del Referto – le informazioni archiviate in un referto possono essere visualizzate in modi differenti (identificati da questa vista), dipendenti e ottimizzati per gli scopi di refertazione. Le viste sono strutturate in varie parti scelte dagli utenti: patologie della persona, protocolli di studio, ecc. Un possibile esempio può essere dato dalla *Vista Carotidea* per un Referto *Vascolare*.

Questo campo consente la selezione della vista di riferimento per ogni referto. Notare che questa è solo una selezione iniziale che può essere cambiata in ogni momento durante il processo di refertazione.

Schema di Stampa – sotto la *Vista del Referto* è possibile selezionare lo *Schema di Stampa*. Con questo parametro si può definire la struttura finale del documento stampato per ogni tipologia di referto (identificato dallo schema e dalla vista del referto).

Questo campo consente la selezione della vista di riferimento per ogni referto. Notare che questa è solo una selezione iniziale che può essere cambiata in ogni momento durante il processo di refertazione.

Viste di Analisi – le informazioni archiviate in un referto possono essere visualizzate in modi differenti (identificati da questa vista), dipendenti e ottimizzati per gli scopi di analisi d'immagini. Le viste sono strutturate in varie parti scelte dagli utenti: patologie della persona, protocolli di studio, ecc. Un possibile esempio può essere dato dalla *Vista Carotidea* per un Referto *Vascolare*.

Questo campo consente la selezione della vista di riferimento per ogni referto. Notare che questa è solo una selezione iniziale che può essere cambiata in ogni momento durante il processo di refertazione.

Schema di Stampa – sotto la *Vista di Analisi* è possibile selezionare lo *Schema di Stampa*. Con questo parametro si può definire la struttura finale del documento stampato per ogni tipologia di resoconto dell'analisi (identificato dallo schema e dalla vista di analisi).

Questo campo consente la selezione della vista di riferimento per ogni referto. Notare che questa è solo una selezione iniziale che può essere cambiata in ogni momento durante il processo di refertazione.

Una volta selezionati i parametri corretti è possibile creare il referto premendo il tasto *Crea*. Notare che quest'operazione potrebbe richiedere anche qualche minuto in base alle dimensioni e al tipo di referto che deve essere creato.



Il sistema memorizza le ultime impostazioni utilizzate da ogni utente durante la creazione del referto. Comunque se si è soliti creare sempre lo stesso tipo di referto è sufficiente cliccare direttamente sul tasto *Crea*.

10.2. IMPORTAZIONI DI REFERTI ESISTENTI

Nel caso in cui vengano rilevati referti esistenti che non sono ancora stati associati, essi verranno elencati nella finestra di creazione referto. Il contenuto dei referti selezionati mediante l'apposito simbolo di spunta confluirà nel nuovo referto che si sta creando.

| Data | Ora | Titolo |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 04/10/10 15:00:41 | Adult Echocardiography Procedure Report |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 16/09/10 18:14:06 | Adult Echocardiography Procedure Report |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

Questo è un tipico scenario in cui viene generato ed inviato al sistema dalla modalità un referto preliminare. In questo caso la finestra di creazione referto avrà selezionerà tale referto sulla base del tipo di referto e delle configurazioni.




Nel caso in cui sia presente un solo referto e ComPACS riesca ad assegnare univocamente e automaticamente i parametri necessari, la finestra di creazione referto non verrà visualizzata e il referto verrà aperto automaticamente in stato modificabile.





La finestra di creazione referto verrà sempre visualizzata nel caso in cui si abbiano più referti da unire per avvertire l'utente di tale condizione. Questa operazione deve essere comunque effettuata con la massima attenzione per evitare che i dati dei referti uniti vadano in conflitto tra loro.

10.3. MODIFICARE UN REFERTO

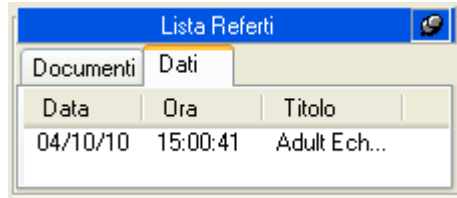Per poter modificare un referto, il suo oggetto deve essere aperto e visibile nella tab *Dati* della finestra di controllo *Lista Referti*.



L'operazione da effettuare è identica a quella effettuata per creare un nuovo referto. Cliccare sul tasto di apertura/generazione referto  nella barra degli strumenti .

Nel caso in cui sia presente un solo referto, non obsoleto, l'oggetto sarà aperto automaticamente in stato modificabile.

Nel caso in cui ulteriori oggetti SR, non obsoleti, siano stati archiviati nel sistema, verrà aperta la finestra di dialogo descritta nel paragrafo precedente. Questo consentirà all'utente di essere avvertito dell'esistenza di referti aggiuntivi e permetterà a tali referti di essere importati e uniti al referto corrente.



Questo è un tipico scenario in cui il referto viene inizializzato prima dell'acquisizione delle immagini e delle misure. In questo caso i dati e le misure verranno importati quando il referto inizializzato verrà completato.



L'importazione e la fusione dei referti deve essere effettuata con la massima attenzione per evitare che i dati dei referti uniti vadano in conflitto tra loro.

10.4. APRIRE DOCUMENTI DI REFERTO



Per creare o aprire un referto è necessario configurare il proprio sistema in modo appropriato. Per ulteriori dettagli fate riferimento al vostro amministratore di sistema e ai manuali dell'amministratore.

Per aprire un documento di referto, un esame contenente un referto deve essere aperto in revisione. I documenti di referto disponibili per l'esame selezionato sono elencati nella tab *Documenti* della finestra di controllo *Lista Referti*.

| Lista Referti | | |
|---------------|----------|--------|
| Documenti | | Dati |
| Data | Ora | Titolo |
| 04/10/10 | 15:00:41 | |

Referti finalizzati e documenti generici vengono archiviati come file PDF nel formato DICOM Encapsulated PDF e possono essere aperti con un semplice click del mouse.



Un oggetto di tipo *DICOM Encapsulated PDF Report* può essere altresì presente se creato da un sistema di terze parti e poi archiviato nel database di ComPACS.



Per visualizzare il referto in PDF è necessario che il modulo *Encapsulated Report Module* sia installato e provvisto di apposita licenza. Inoltre Adobe® Acrobat PDF Reader deve essere installato sul vostro sistema.

Le informazioni strutturate di un referto sono generalmente archiviate in un oggetto di tipo DICOM SR e visibile nel tab *Dati*. Questi elementi possono essere aperti con un semplice click del mouse e visualizzati approfonditamente mediante gli appositi moduli di analisi e reporting licenziati. La stessa operazione la si può effettuare mediante tasto destro del mouse sul referto e selezione della voce *Apri dati referto*.




Se il referto non fosse generato da una Stazione di Revisione ComPACS o dai Plugin ComPACS di importazione delle misure ma fosse quindi ricevuto direttamente da uno schema di terze

parti, una volta cliccato sull'oggetto, vi verrà richiesto mediante una apposita finestra la selezione dei relativi schemi e viste.


Quest'operazione è simile a quella descritta per la creazione di referti, mostrata nella sezione precedente, essa però non porta alla generazione di un nuovo referto bensì all'associazione del relativo schema e della relativa vista.

E' inoltre possibile associare manualmente un referto ad uno schema differente. Ciò può essere effettuato mediante pressione del tasto destro del mouse sull'elemento di referto e selezionando la voce *Assegna schema di refertazione al referto*.

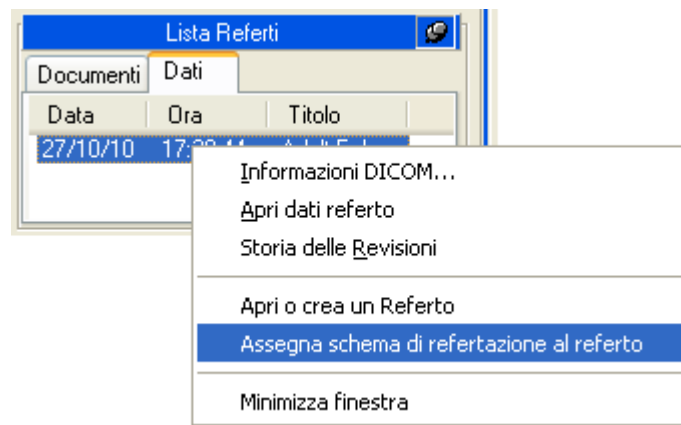


10.5. CRONOLOGIA DELLE REVISIONI DI REFERTO

CompPACS tiene traccia delle varie revisioni di referto. La tab *Lista Referti* mostrerà solo la revisione dei documenti e degli SR più recentemente aperta per revisione. per esaminare i documenti precedenti basta premere il tasto destro del mouse sull'elemento in questione e selezionare la voce *Storia delle Revisioni*.

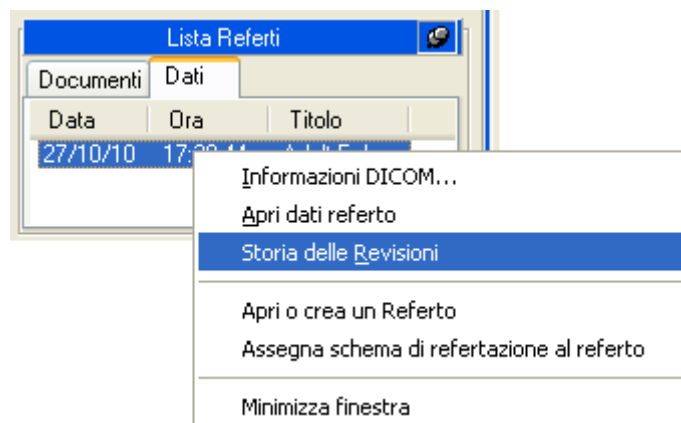

Verrà aperta la finestra *Storia delle revisioni* che mostrerà un albero gerarchico relativo alla storia delle revisioni per l'elemento in questione. La data, l'ora, il tipo e lo stato del referto viene riportato per ogni revisione.

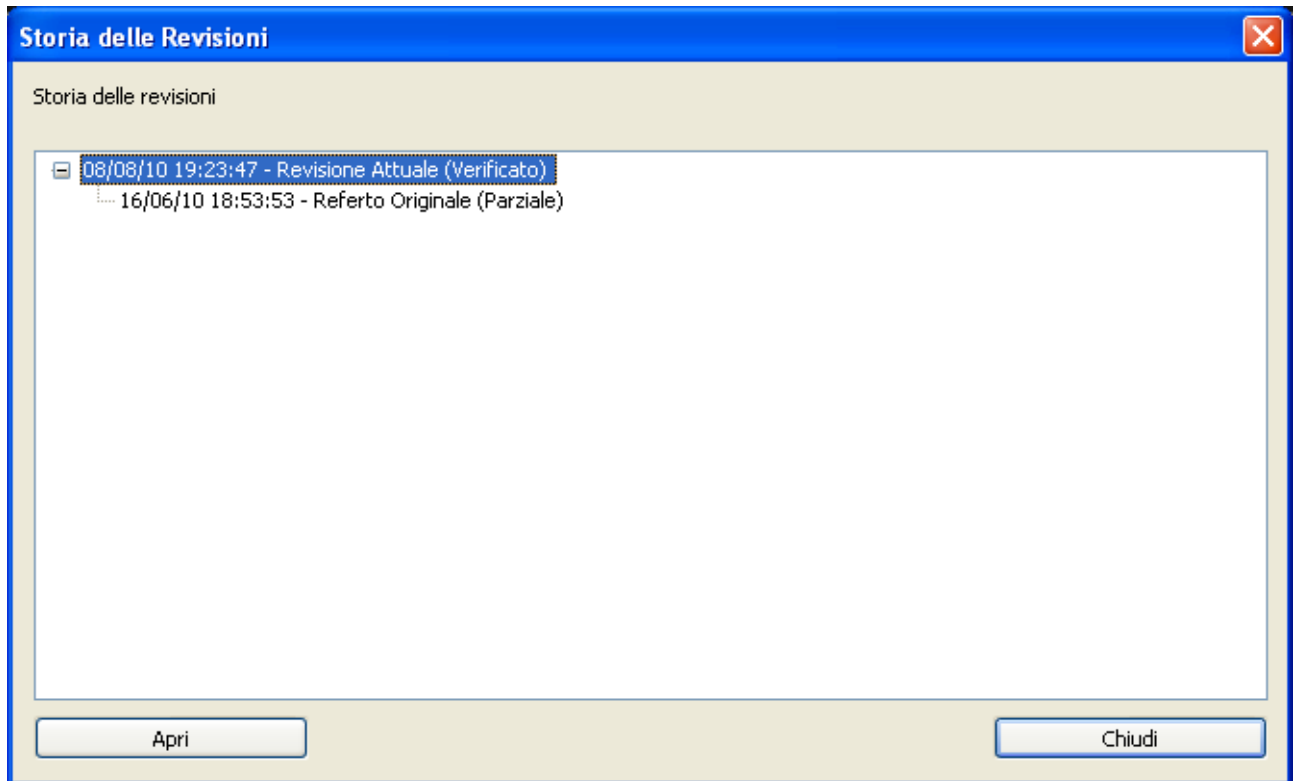

E' possibile aprire una revisione precedente del documento selezionandola e cliccando sul tasto *Apri*. Tali documenti vengono aperti in revisione ma non possono essere modificati.



La storia delle revisione è limitata agli oggetti aperti in revisione dall'archivio di ComPACS. Nel caso in cui venga aperto da una workstation solo un limitato numero di oggetti, gli elementi presenti nella storia delle revisioni potrebbero essere incompleti e portare ad una interpretazione sbagliata dello stato corrente del referto.



Assicuratevi sempre che tutti i documenti siano aperti o che almeno l'ultima revisione del referto sia sempre presente nella lista dei referti aperti.

11. ANALISI ECOGRAFICA

11.1. ATTIVAZIONE DELL'ANALISI ECOGRAFICA

Se ComPACS ECHO è abilitato sul vostro sistema, il seguente pulsante sarà visibile sulla barra degli strumenti



Se il pulsante è premuto allora il modulo è già attivo. Altrimenti è possibile attivarlo premendo il pulsante con il mouse.

Durante l'attivazione il modulo richiederà una licenza per l'utilizzo al Server ComPACS. Se la licenza non può essere recuperata il modulo non sarà attivato e verrà invece visualizzato un messaggio di errore.




Nel caso di licenze concorrenti è possibile che tutte le licenze siano già state richieste e assegnate ad altri utenti che utilizzano il sistema in quel momento, e che non vi siano altre licenze disponibili per l'attivazione. Questo è il caso più comune di fallimento.

Il fallimento nell'attivazione del modulo può altresì avvenire se si perde il collegamento di rete con il Server.

Si prega di assicurarsi di rilasciare la licenza del modulo, rilasciando l'apposito tasto suddetto, dopo averne terminato l'utilizzo in modo da rendere la licenza disponibile per altri utenti di altre postazioni.


Quando il modulo è attivo, una finestra denominata "Analisi Ecografica" viene aggiunta ed è visibile sulla finestra dei controlli. Tale finestra può essere aperta o minimizzata con un singolo click del pulsante sinistro del mouse sulla barra blu.

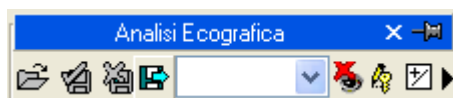

11.2. MISURE OFF-LINE

Il modulo ECHO permette di effettuare misure effettuate su ogni tipo di immagine ecografica.


Nel tab *Generico* della finestra di analisi ecografica sono sempre disponibili misure generiche.

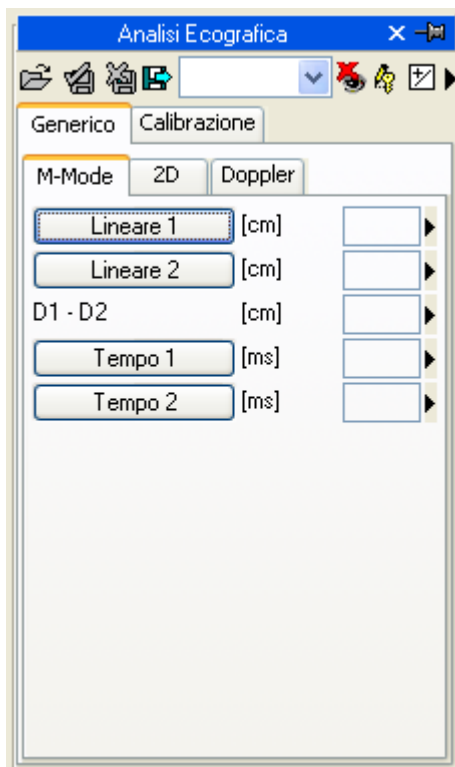

Sono disponibili misure di base M-Mode, 2D e Doppler per effettuare rapide verifiche.




Le misure generiche sono solo temporanee. Esse non possono essere archiviate nel database di ComPACS.

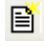Per accedere al pannello di misure avanzate è necessario aprire un referto esistente o crearne uno nuovo. Questa operazione può essere eseguita cliccando sull'icona  della barra degli strumenti, come descritto nel capitolo “*Gestione dei referti?*”.

La finestra di analisi verrà estesa con un tab aggiuntivo chiamato *Strutturato* contenente tutte le misure strutturate. Il contenuto e l'aspetto di tale tab dipende dagli schemi di refertazione e di analisi configurati dal vostro amministratore di sistema per la specifica postazione o utente.



Le misure strutturate vengono salvate nell'oggetto di tipo DICOM SR a cui si riferiscono.

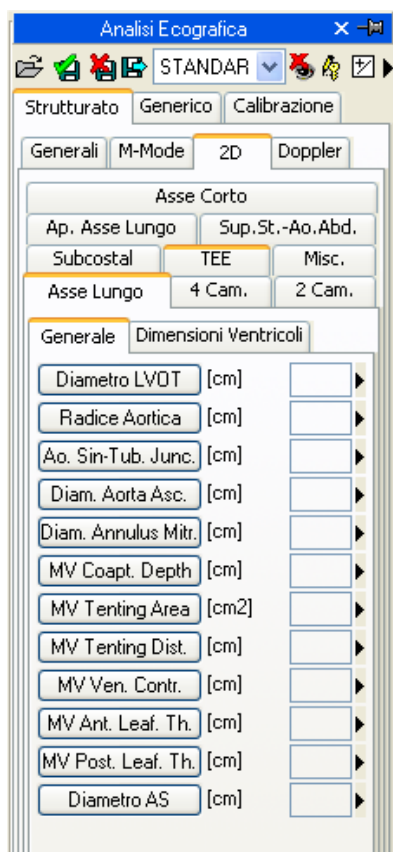

In tale interfaccia si riempiranno (di numeri di misure) solo i campi corrispondenti ai dati presenti nell'oggetto aperto. Per correggere le misure presenti cliccare sull'icona di editing:



Per chiudere e salvare i cambiamenti effettuati cliccare sull'icona *Salva e Chiudi*:



Per chiudere senza salvare eventuali cambiamenti apportati cliccare sull'icona *Chiudi e ignora le modifiche*:



Per esportare i dati è necessario cliccare sull'icona *Esporta*:



Si aprirà un'interfaccia in cui selezionare il formato dei dati e la loro destinazione.

Mediante il menù a tendina è altresì possibile selezionare la disposizione degli elementi di misura e calcolo strutturati nella pagina in base alle configurazioni installate.



Questa funzionalità è stata estesa per esportare non solo i valori numerici ma anche altri tipi di campo (testi, diagnosi, date, ecc.). Inoltre l'esportazione include le strutture ripetute ed annidate (per esempio le fasi di un esame di ecostress).

La "Descrizione Colonne" è un semplice file di testo che elenca, in righe separate, i campi che devono essere esportati. Ogni riga ha il formato seguente:

IDCampo; Etichetta - Opzionale; Unità di misura - Opzionale

Se l'etichetta o l'unità di misura non sono specificati, i valori di riferimento verranno utilizzati.

Per le strutture ripetute, la lista dei campi deve essere racchiusa nella seguente struttura:

```
BEGINGROUP(ID Struttura); Etichetta - Opzionale; Indice - Opzionale
... elenco dei campi ..
ENDGROUP(ID Struttura)
```

L'indice è opzionale. Se omesso tutte le istanze di tali strutture saranno esportate.

Infine alcuni campi speciali consistono in elementi DICOM. Sono identificati con la seguente sintassi:

\$(Gruppo,Elemento); Etichetta - Opzionale;



Le operazioni di editing saranno descritte nei prossimi capitoli.

11.3. MISURE IMPORTATE

Il modulo ECHO permette di importare le misure effettuate a bordo degli ecografi tramite DICOM SR. Pertanto il prodotto offre la possibilità di visualizzare i dati misurati sulla piattaforma, di inserire nuove misure o correggerne di esistenti.


Inoltre per i marchi di ecografi più diffusi sono state sviluppate anche delle tecniche ad hoc che permettono di importare le misure anche da ecografi non conformi allo standard DICOM SR. L'architettura di CompACS consente di importare tali misure e le trasforma nel formato DICOM SR per assicurarne la massima portabilità.


Quando un esame è aperto in revisione ed è presente un oggetto di tipo DICOM SR, la *Lista Referti* visualizzerà tale elemento nel tab *Dati*.

Il tab *Dati* presenta inizialmente le misure effettuate dalla modalità, se presenti. Notare comunque che nell'oggetto è possibile includere misure off-line o effettuare altre attività di refertazione su di esso.

E' anche possibile effettuare delle misure off-line su immagini ecografiche; anche queste saranno salvate come DICOM SR. Il prodotto quindi offre la possibilità di rivedere i dati misurati a bordo degli ecografi, ed eventualmente inserirne di nuovi o correggere quelli già presenti.

Nella *Lista delle Serie* sarà presente un elemento SR che corrisponde alla serie DICOM contenente gli oggetti di tipo DICOM SR.

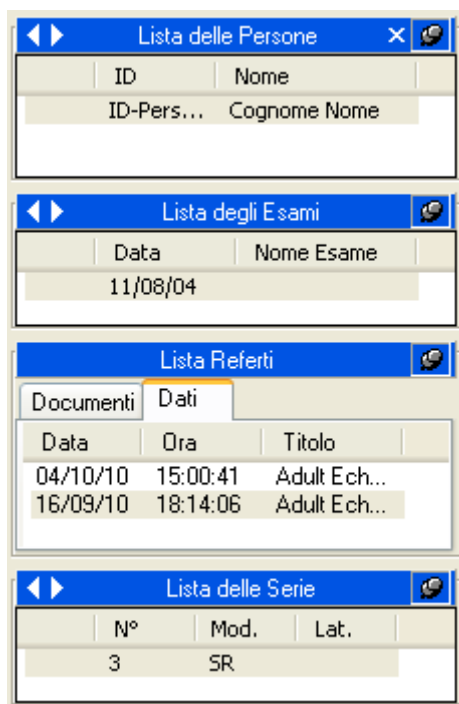

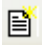Cliccando sull'icona  della barra degli strumenti, come descritto nel capitolo “*Gestione dei referti*”, è possibile aprire un referto esistente in revisione ed analisi. Questo include i dati importati dalle modalità.

In alternativa è possibile aprire uno specifico documento DICOM SR ed accedere ai suoi dati cliccando sull'elemento SR contenuto nel tab *Dati*.

11.3.1 CALIBRARE LE IMMAGINI

Le informazioni di calibrazione sono solitamente presenti nel file DICOM. Il prodotto sfrutta tali informazioni per evitare di far fare all'utente la calibrazione manuale ed assicurando così maggior accuratezza. Per questo motivo non è generalmente necessario effettuare operazioni di calibrazione.

Muovendo il mouse sull'immagine, appariranno le informazioni di calibrazione nel tab *Calibrazione* della finestra di analisi ecografica. In questo modo è possibile verificare se la calibrazione dell'immagine è presente o meno.




Nel caso in cui nessuna informazione viene visualizzata al passaggio del mouse sull'immagine, allora è necessario effettuarne la calibrazione.




Le immagini ecografiche possono contenere più regioni di calibrazioni. Quindi è possibile che le informazioni di calibrazioni varino in relazione alla posizione del mouse sull'immagine. Inoltre è possibile che alcune regioni siano calibrate mentre altre non lo siano..

Se le informazioni di calibrazione sono assenti è possibile calibrare manualmente l'intera immagine o una regione di essa.

La prima cosa da fare per calibrare un'immagine è scegliere il formato (2D, Doppler, M-Mode, ecc) e il tipo di dati (tessuto, PW, CW, ecc); ciò è possibile agendo sui due menù dedicati nel riquadro della calibrazione:

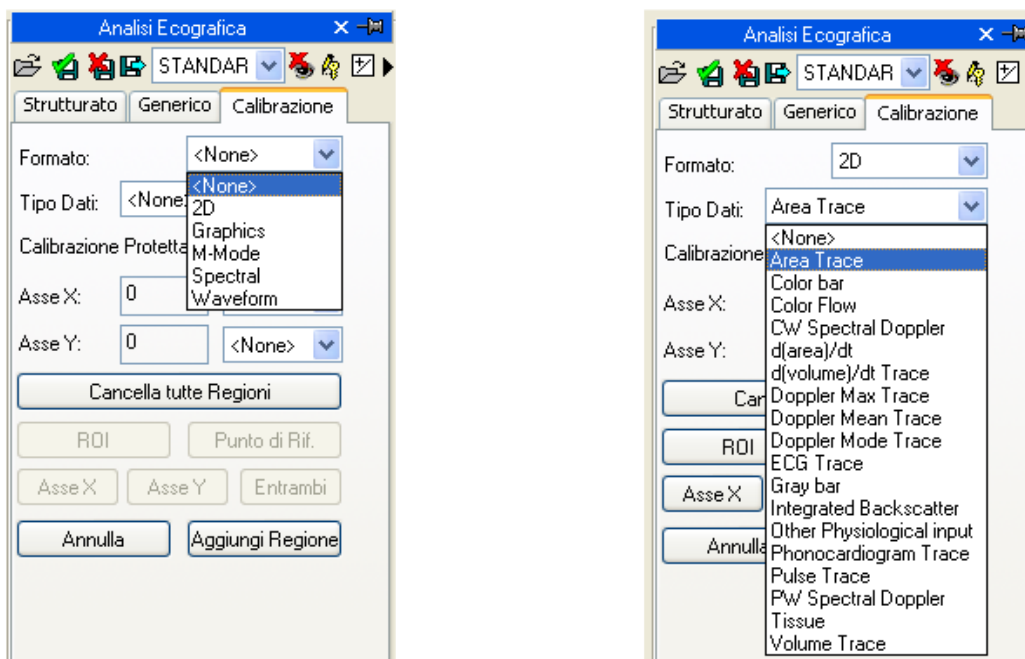


Successivamente è necessario stabilire (agendo sui tasti *Asse X* e *Asse Y*) i valori da assegnare agli assi componenti l'immagine. Ad esempio, nel caso di un'immagine Doppler, bisogna assegnare un valore di tempo all'asse X e di velocità all'asse Y. Per immagini 2D, che dispongono della stessa unità di misura per entrambi gli assi, è altresì possibile calibrare entrambi gli assi con un unico segmento diagonale mediante il tasto *Entrambi*.

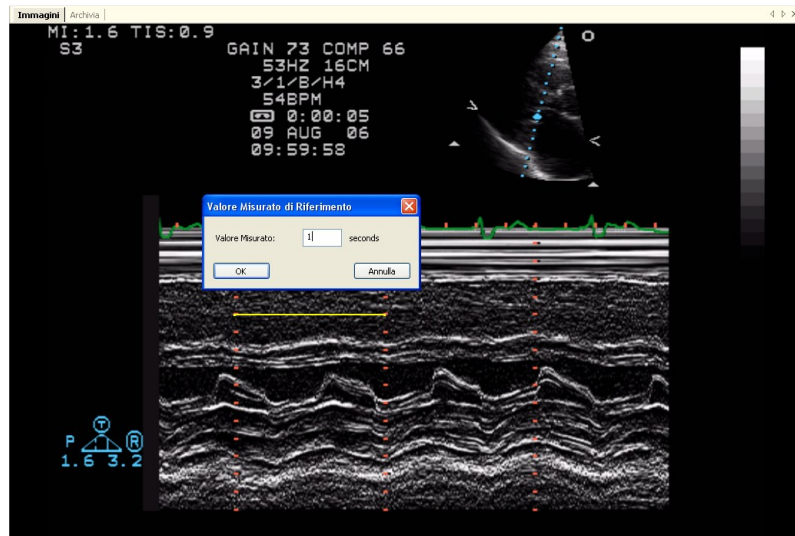

Il cursore sull'immagine cambierà in una penna e consentirà di tracciare un segmento premendo il pulsante sinistro una prima volta nel punto iniziale e poi una seconda volta in quello finale. Al termine una finestra di dialogo vi chiederà di indicare la dimensione del segmento tracciato nell'unità di misura apposta.

E' anche possibile per le immagini Doppler indicare la posizione del punto zero (ovvero della baseline) mediante il tasto *Punto di Rif* ed indicandolo con il mouse.

Una volta eseguita quest'operazione per entrambi gli assi si può decidere se calibrare tutta l'immagine (cliccando su *Aggiungi Regione*) o selezionare una ROI (regione d'interesse) all'interno dell'immagine dove rendere valida la calibrazione. A tale scopo, selezionando il pulsante *ROI*, e dopo aver tracciato sull'immagine la regione d'interesse, è possibile calibrarla cliccando su *Aggiungi Regione*:

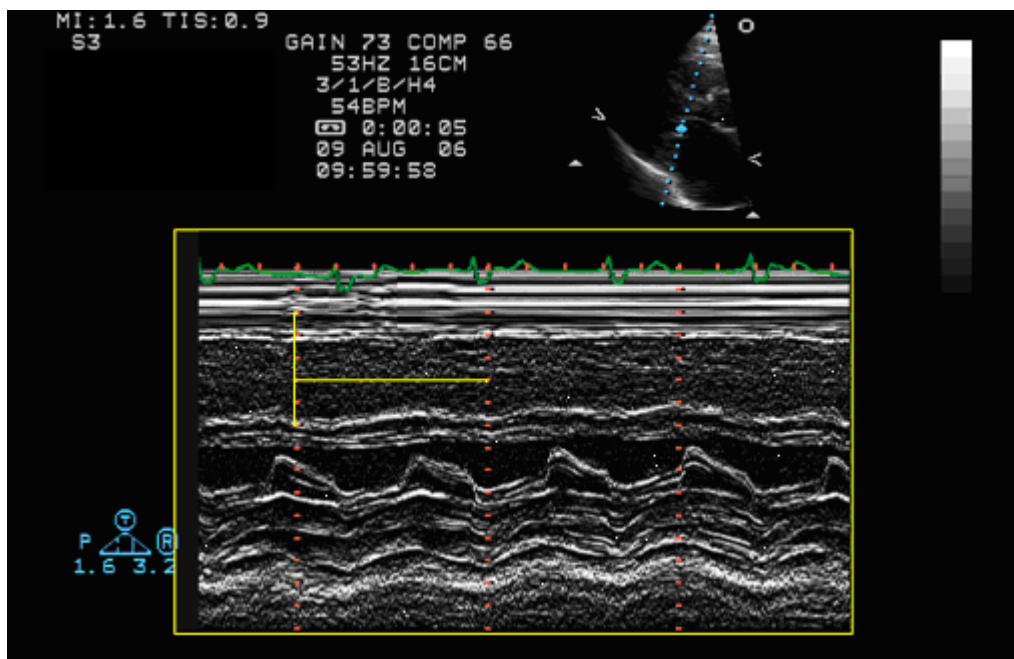

Passando il puntatore del mouse sulla regione calibrata, nel riquadro della calibrazione appariranno i dati appena impostati.



In assenza di una corretta calibrazione le misure sull'immagine non sono valide.



Il programma non effettua alcun controllo sulla consistenza del fattore di calibrazione. E' sempre necessario verificare il fattore calcolato per controllare se è ammissibile.



L'accuratezza del fattore di calibrazione dipende dall'accuratezza con cui viene tracciato il segmento da misurare ed è direttamente proporzionale alla dimensione della struttura in pixels.

11.3.2 ESEGUIRE DELLE MISURE

A questo punto siamo pronti per eseguire delle misure off-line sulle immagini di nostro interesse. ComPACS ECHO permette di misurare immagini di tipo 2D, Doppler, M-Mode e TDI. Per ogni tipo di formato dati esistono delle misure specifiche. Ad esempio nel 2D il software permette misure di lunghezza, area, perimetri e calcola volumi. Nel doppler permette di misurare tempi e velocità, calcolando flussi e altre grandezze derivate.


Scelta l'immagine su cui eseguire la misura è necessario selezionare, all'interno del pannello di misure, il parametro da misurare. In particolare vi sono due pannelli: il pannello *Generico* sempre disponibile e quello *Strutturato* che dipende dalla configurazione impostata e richiede l'apertura di un referto (inteso come oggetto DICOM SR).



Le misure generiche sono solo temporanee e non vengono salvate in un oggetto DICOM SR.

Cliccando sull'elemento da misurare il puntatore del mouse assume la forma di una penna e a quel punto con dei semplici click sull'immagine il prodotto traccia la misura (in giallo) e la salva all'interno del proprio database conservandola nel formato DICOM SR.

Un esempio di misura lineare su un'immagine 2D:

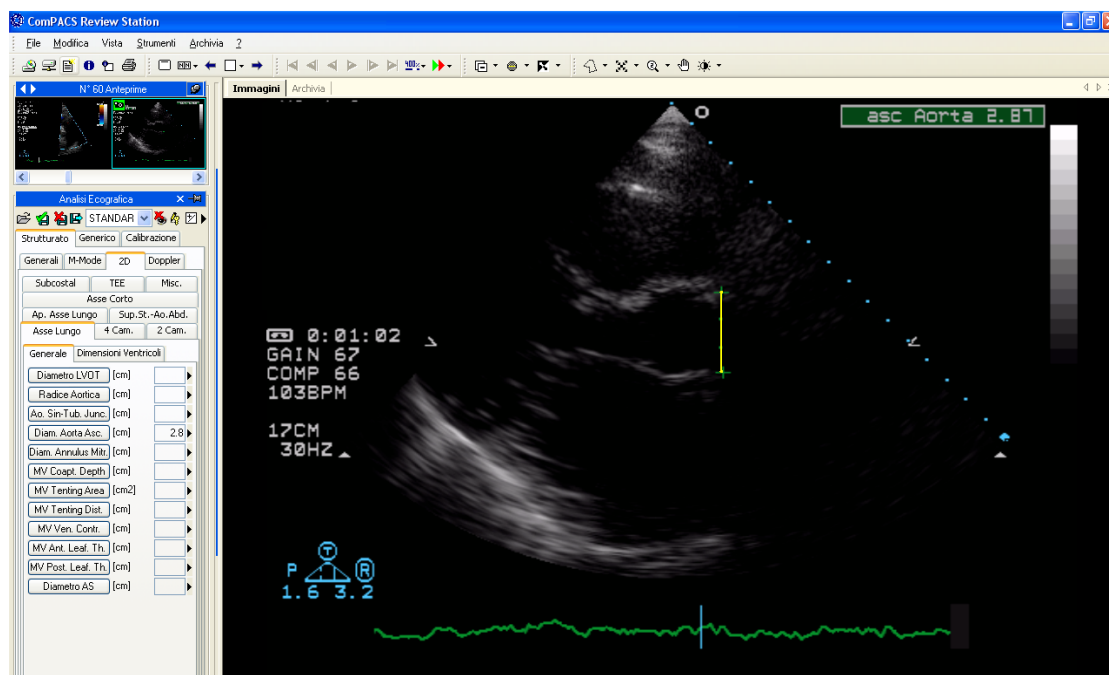


Per effettuare la misura, premere il tasto relativo alla misura che si desidera effettuare. Posizionare poi il cursore del mouse sul punto di partenza della misura, esso prenderà la forma di una penna. Cliccare sul punto e muovere il mouse nel punto di chiusura della misura. Cliccare nuovamente e la misura sarà effettuata e il suo valore verrà riportato nel relativo campo. Per misure che vengono normalmente prese


in sequenza, come IVSD, LVID, LVPWD, ogni click del mouse continuerà la sequenza fino a che non sarà completa.

Nel caso di misure più complesse (ad esempio aree), si fissa con ogni click un punto dell'area e il software crea una linea morbida passante per tali punti - "spline" - così da rendere la forma armonizzata. Un doppio click indica la fine della misura. In caso di errore, agendo col tasto destro del mouse, si possono cancellare punti o, con un doppio click, l'intera misura.


Nel prossimo esempio abbiamo misurato l'area telediastolica del ventricolo sinistro in una proiezione 4 camere. CompACS ECHO calcola automaticamente anche l'asse lungo:

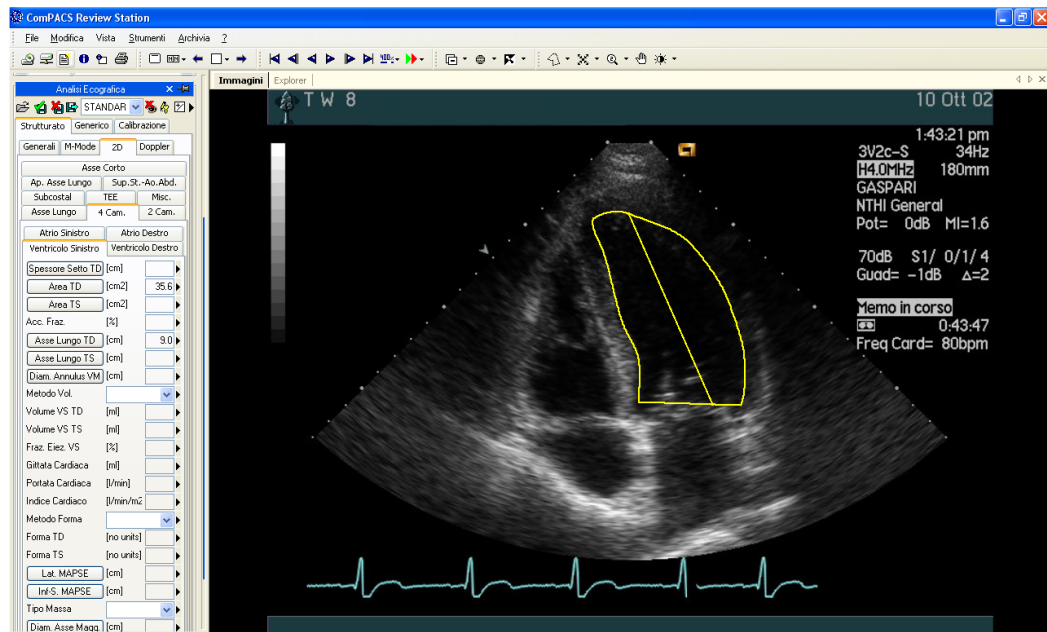


Per le immagini doppler il software fornisce delle facilitazioni. Infatti in caso di misure di velocità il sistema automaticamente imposta delle misure verticali; nel caso di una misura temporale crea una linea orizzontale. Un esempio di misura effettuata su un'immagine doppler:

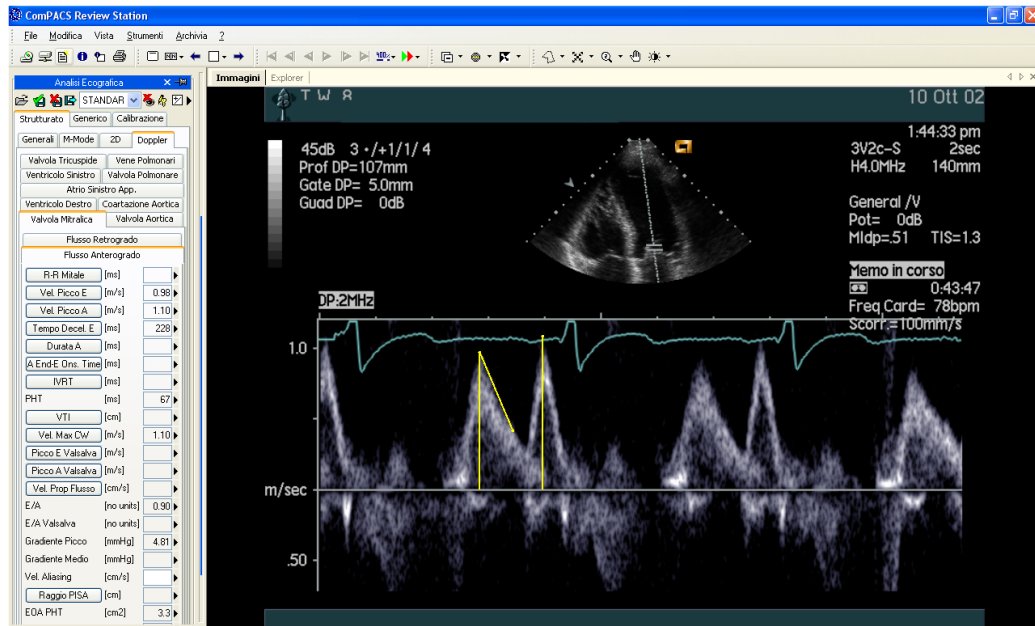

Un esempio di una misura temporale ci mostra che anche se la misura è tracciata in maniera diagonale, trattandosi di un tempo, il software ne prende la proiezione sull'asse X:

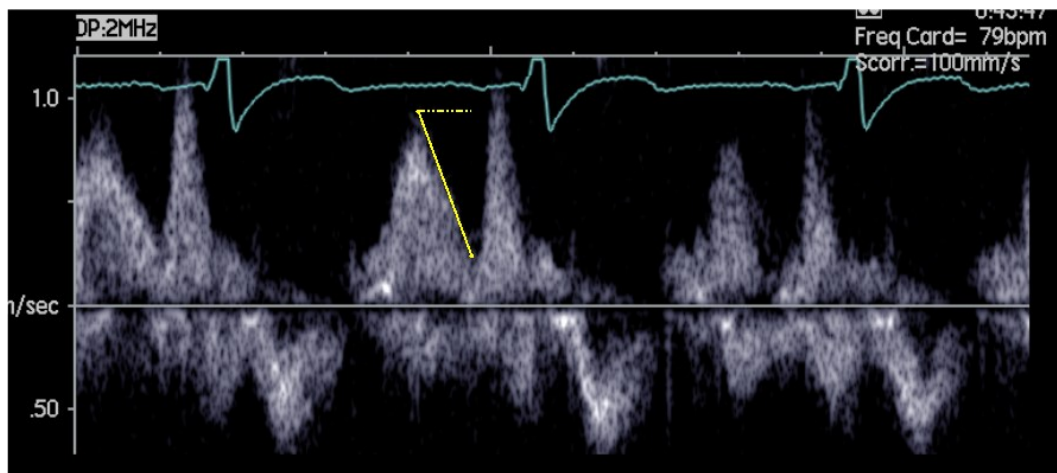

Anche le immagini M-Mode hanno il loro insieme di misure dedicate. Nel prossimo esempio vediamo la misura delle dimensioni ventricolari:

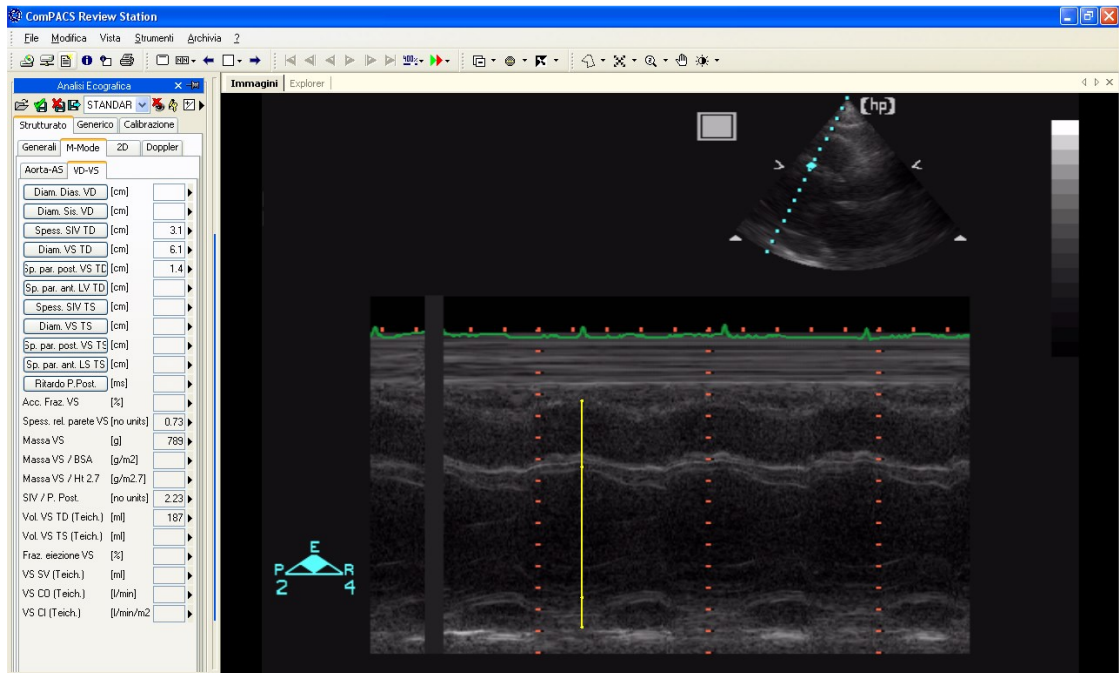

Non tutte le misure sono disponibili su tutti i tipi d'immagine. Infatti provando a fare una misura di area su un'immagine doppler (ad esempio) si riceve un messaggio di errore, infatti il doppler non è calibrato per effettuare misure di area o di lunghezza. O viceversa, se si prova a misurare una velocità su di un'immagine 2D il software fornirà un messaggio di errore.

11.3.3 I CALCOLI E LE FORMULE

Una volta acquisite tutte le informazioni necessarie, il software permette di calcolare valori derivati semplici o complessi applicando delle formule matematiche. Ad esempio, guardando il ventricolo sinistro in 4 camere, misurati le aree e gli assi lunghi telediastolici e telesistolici, è possibile selezionare dal menù a tendina il metodo per il calcolo dei volumi (TD e TS) e, di conseguenza, della frazione di eiezione.



In assenza di un calibrazione valida le misure effettuate non sono valide.



Il programma non effettua alcun controllo di consistenza del fattore di calibrazione. E' sempre necessario controllare il valore del fattore di calibrazione calcolato per verificare che sia ammissibile.




Il software non effettua alcun controllo sulla validità della misura e/o corrispondenza alla struttura misurata. L'operatore è tenuto a controllare la correttezza della struttura selezionata e della misura stessa mediante il riscontro visivo del grafico della misura visualizzato.

11.4. GESTIONE DELLE MISURE


Il prodotto fornisce una gestione dettagliata delle misure effettuate.

Innanzitutto è possibile la gestione della BaseLine e degli assi durante il processo di misura. Infatti, non tutte le immagini Doppler hanno la BaseLine (la linea dello 0) correttamente impostata e alcune immagini 2D hanno gli assi X e Y invertiti. Per gestire queste casistiche è necessario cliccare sulla freccia presente nel pannello delle misure e stabilire il comportamento del software rispetto a queste problematiche:

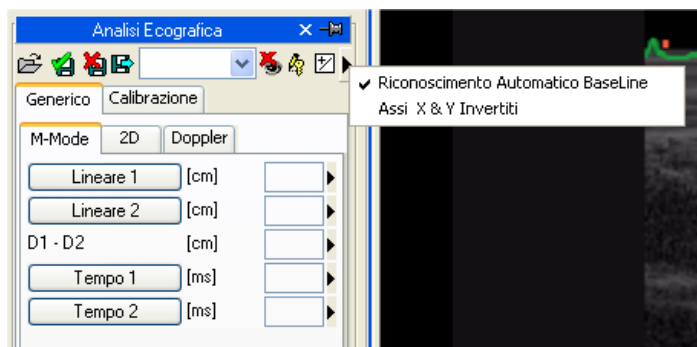


Quando una misura è già presente e viene ri-eseguita, il software, di default, sostituisce il nuovo valore al posto di quello vecchio che viene cancellato.


Tuttavia si può eseguire più di una misura sullo stesso campione (o su campioni diversi) calcolandone la media e la deviazione standard. Effettuando più misurazioni come risultato ne viene mostrata la media. Per decidere di effettuare misurazioni ripetute bisogna agire sul relativo pulsante come mostrato di seguito:

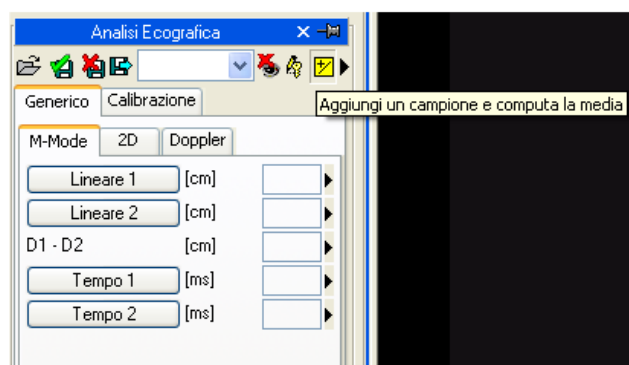

Nel caso di misure ripetute il valore mostrato accanto alla misura è quello della media aritmetica. Comunque rimane possibile visualizzare tutti i campioni acquisiti. A fianco di ogni misura c'è una freccia che permette di accedere a un menù di gestione della singola misura:

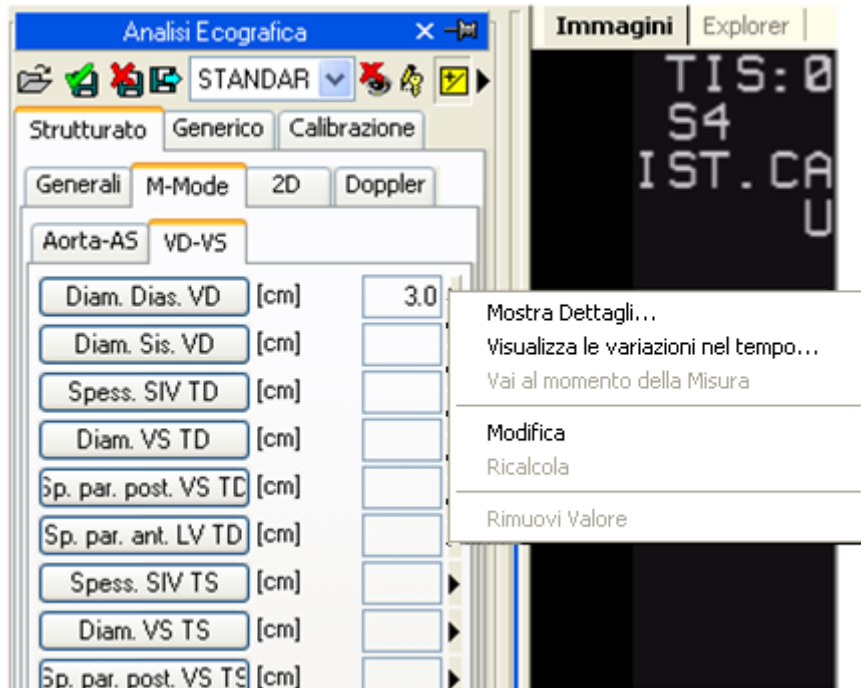


Cliccando sulla freccia e poi su *Mostra Dettagli*, si accede a una finestra dove sono mostrati tutti i campioni presi per quella misura, la media e la deviazione standard:

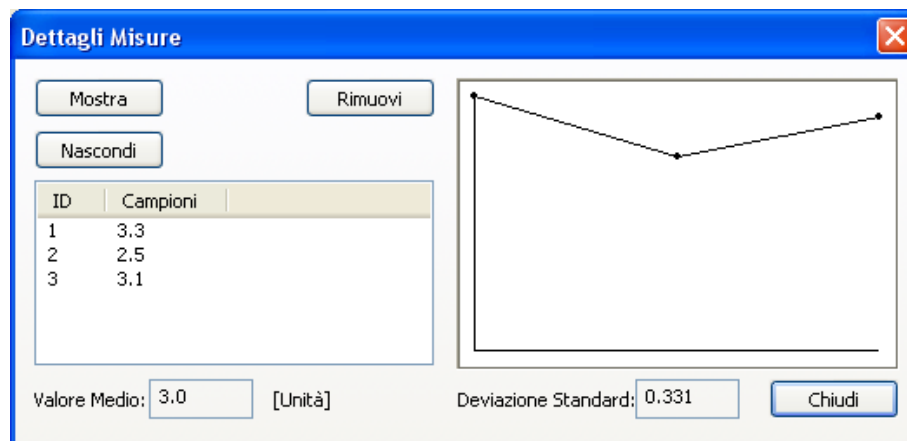

Esiste la possibilità di cancellare un valore misurato se ci sembra sbagliato, semplicemente selezionandolo e cliccando su *Rimuovi*. Con i pulsanti *Mostra* e *Nascondi* è invece possibile visualizzare simultaneamente o nascondere le misure sull'immagine.

Se l'analisi ecografica è stata effettuata sullo stesso paziente in diversi esami archiviati in ComPACS, è possibile vedere come specifici campi siano variati nel tempo.

Quest'operazione può essere effettuata cliccando sulla voce di menù *Visualizza le variazioni nel tempo...* Verrà aperta una finestra che mostrerà i diversi valori per la stessa misura nei vari esami sia in formato numerico sia in formato grafico.

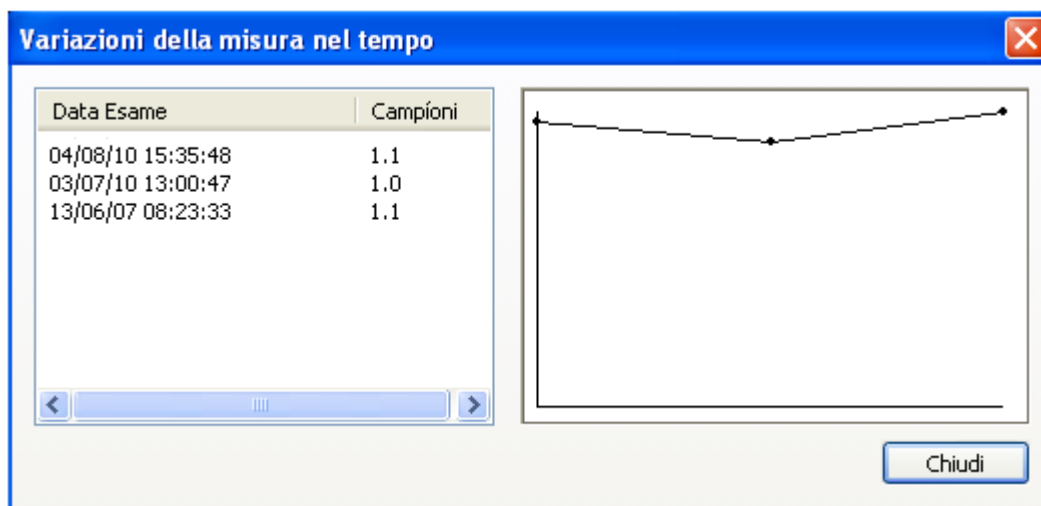

Un'altra funzione molto interessante è quella che consente, in qualsiasi momento, di recuperare l'immagine e il momento in cui è stata eseguita la misura. Sempre all'interno del menù delle misure, cliccando su *Vai al Momento della Misura*, il software seleziona automaticamente l'immagine e lo specifico *fotogramma* sul quale la misura è stata effettuata.



La funzione *Vai al Momento della Misura* è disponibile solo per misure effettuate off-line con ComPACS ECHO.

Inoltre, cliccando su *Modifica* è possibile inserire manualmente il valore invece di misurarlo o calcolarlo. Tale valore sarà sottolineato in giallo per evidenziare tale operazione dell'operatore.

| | |
|---------------------|------------|
| Aorta-AS | VD-VS |
| Diam. Dias. VD [cm] | <u>2.5</u> |
| Diam. Sis. VD [cm] | |
| Spess. SIV TD [cm] | |
| Diam. VS TD [cm] | |

Per mostrare/nascondere le misure sulle immagini agire sull'icona:



Per mostrare le misure effettuate su tutti i frame di un filmato (e non solo sul fotogramma in cui è stata eseguita la misura) cliccare sull'icona:



Per chiudere e salvare i cambiamenti effettuati cliccare sull'icona *Salva e Chiudi*:



Per chiudere senza salvare eventuali cambiamenti apportati cliccare sull'icona *Chiudi e ignora le modifiche*:



11.5. IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE

Questo modulo consente importazioni personalizzate per ciascun utente, tramite la finestra di *Impostazioni* del programma, nell'etichetta *Analisi Ecografica*.

- Abilita la media delle misure all'avvio
- Misure multiple (se la media è abilitata)
- Non visualizzare il valore della misura sull'immagine
- Inverti asse X e Y
- Rileva automaticamente la linea di base Doppler
- Usa il cursore penna originale

“Abilita la media delle misure all'avvio” automaticamente abilita la funzionalità di media quando il modulo viene attivato.

“Misure multiple (se la media è abilitata)” consente all'utente di misurare un parametro specifico più volte, senza dover premere nuovamente sul pulsante corrispondente. La sequenza delle misure può essere interrotta premendo il tasto destro del mouse.

“Non visualizzare il valore della misura sull'immagine” non visualizza l'etichetta e il valore misurato in sovrapposizione sull'immagine.

“Inverti asse X e Y” viene utilizzato se gli assi X e Y devono essere interpretato diversamente in relazione alla misura strutturata da effettuare. Questa opzione può essere abilitata automaticamente all'avvio del modulo.

“Rileva automaticamente la linea di base Doppler” è utilizzato per rilevare automaticamente la linea di base in immagini Doppler e consentire misure di velocità più rapide con un solo click. Questa funzionalità può essere disabilitata se l'immagine DICOM non contiene una codifica corretta della linea di base.

“Usa il cursore penna originale” utilizza il cursore penna già in uso nelle precedenti revisioni del software. A partire dalla revisione 10.8.6 il cursore penna è stato sostituito con un cursore a forma di mirino.

12. ANALISI ANGIOGRAFICA

12.1. ATTIVAZIONE DI COMPACS QCA II

Se ComPACS QCA II è abilitato sul vostro sistema, il seguente pulsante sarà visibile sulla barra dei comandi, nella parte destra:



Se il pulsante è premuto allora il modulo è già attivo. Altrimenti è possibile attivarlo premendo il pulsante con il mouse.

Durante l'attivazione il modulo richiederà una licenza per l'esecuzione al Server ComPACS. Se la licenza non può essere recuperata il modulo non sarà attivato e verrà invece visualizzato un messaggio di errore.




Nel caso di licenze concorrenti è possibile che tutte le licenze siano già state richieste e assegnate ad altri utenti che utilizzano il sistema in quel momento, e che non vi siano altre licenze disponibili per l'attivazione. Questo è il caso più comune di fallimento.

Il fallimento nell'attivazione del modulo può altresì avvenire se si perde il collegamento di rete con il Server.

Si prega di assicurarsi di rilasciare la licenza del modulo, rilasciando l'apposito pulsante suddetto, dopo averne terminato l'utilizzo in modo da rendere la licenza disponibile per altri utenti di altre postazioni.

Quando il modulo è attivo, una finestra denominata “Analisi Angiografica” con una sottofinestra “QCA” viene aggiunta ed è visibile sulla finestra dei controlli. Tale finestra può essere aperta o minimizzata con un singolo click del pulsante sinistro del mouse sulla barra blu.

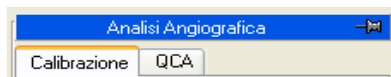

12.2. ATTIVAZIONE DI COMPACS LVA

Se ComPACS LVA è abilitato sul vostro sistema, il seguente pulsante sarà visibile sulla barra dei comandi, nella parte destra:



Se il pulsante è premuto allora il modulo è già attivo. Altrimenti è possibile attivarlo premendo il pulsante con il mouse.

Durante l'attivazione il modulo richiederà una licenza per l'esecuzione al Server ComPACS. Se la licenza non può essere recuperata il modulo non sarà attivato e verrà invece visualizzato un messaggio di errore.




Nel caso di licenze concorrenti è possibile che tutte le licenze siano già state richieste e assegnate ad altri utenti che utilizzano il sistema in quel momento, e che non vi siano altre licenze disponibili per l'attivazione. Questo è il caso più comune di fallimento.

Il fallimento nell'attivazione del modulo può altresì avvenire se si perde il collegamento di rete con il Server.

Si prega di assicurarsi di rilasciare la licenza del modulo, rilasciando l'apposito pulsante suddetto, dopo averne terminato l'utilizzo in modo da rendere la licenza disponibile per altri utenti di altre postazioni.

Quando il modulo è attivo, una finestra denominata "Analisi Angiografica" con una sottofinestra "LVA" viene aggiunta ed è visibile sulla finestra dei controlli. Tale finestra può essere aperta o minimizzata con un singolo click del pulsante sinistro del mouse sulla barra blu.

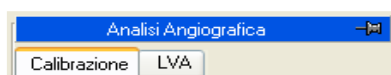

12.3. CALIBRAZIONE

La calibrazione è un'operazione essenziale che deve essere svolta prima di effettuare qualsiasi misura sulle immagini. Infatti questa procedura permette di calcolare il fattore di ingrandimento dell'immagine riportando la misura in pixel di una struttura nota alla sua misura reale in mm.

Vi sono diversi modi per effettuare la calibrazione:

- **default** - Selezionare un fattore d'ingrandimento precalcolato (detto di default) poiché non vi è nessuna struttura nota nell'immagine o la struttura è significativamente distorta (per esempio si trova ai margini dell'immagine).

● **distanza** - Effettuare la calibrazione in modo manuale tracciando con il mouse un segmento di misura nota (per esempio la distanza tra due markers su di un catetere).

● **catetere** - Effettuare la calibrazione in modo automatico sul catetere pieno di contrasto di cui si conosce il diametro (per es. 7 French).

La calibrazione si può effettuare in tutti e tre i modi tramite i pulsanti nel riquadro *Calibrazione* del pannello a sinistra *Analisi Angiografica*.



In assenza di una corretta calibrazione le misure effettuate sulle immagini non sono valide.

Il programma non effettua alcun controllo sulla consistenza del fattore di calibrazione. Occorre sempre controllare l'attendibilità del fattore di calibrazione calcolato per verificarne l'ammissibilità.

12.3.1 CALIBRAZIONE DI DEFAULT



La calibrazione di default può essere effettuata premendo il pulsante *Default* nel riquadro *Calibrazione*. Nel riquadro bianco apparirà una lista di nomi corrispondenti a calibrazioni di default impostate nel programma. Per attivarne una selezionarla con il pulsante sinistro del mouse. Il valore corrispondente al nome selezionato verrà visualizzato nel riquadro in alto.

Alternativamente è possibile impostare manualmente il fattore di calibrazione direttamente nel riquadro che ne visualizza il valore selezionando il riquadro con il mouse ed impostando il valore numerico con la tastiera.




Il programma non effettua alcun controllo sulla consistenza del fattore di calibrazione il cui valore è completa responsabilità dell'operatore.

12.3.2 CALIBRAZIONE SU DI UNA DISTANZA NOTA




La calibrazione su di una distanza nota può essere effettuata premendo il pulsante *Distanza* nel riquadro *Calibrazione*. Nel riquadro bianco apparirà una lista delle distanze note impostate nel programma che possono essere selezionate con il mouse.

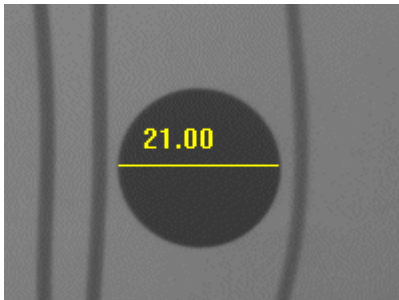

A questo punto è sufficiente premere il pulsante sinistro del mouse sulla finestra immagine all'estremo del segmento da misurare e rilasciare il pulsante. Trascinando il mouse si può tracciare manualmente un segmento di dimensione nota. Premendo il pulsante sinistro del mouse una seconda volta si termina l'operazione. Il fattore di calibrazione sarà calcolato automaticamente e visualizzato nell'apposito riquadro. Alternativamente premendo il tasto destro del mouse durante la visualizzazione del segmento si annulla l'operazione.

Se non è stata selezionata alcuna distanza verrà visualizzata una finestra di dialogo in cui vi si chiede di impostare la misura in mm del segmento tracciato. Anche in questo caso il fattore di calibrazione verrà poi calcolato automaticamente e visualizzato nel riquadro apposito.

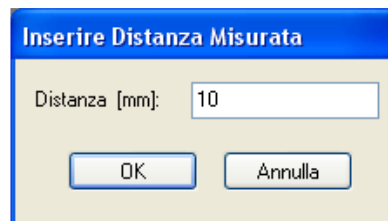



Il programma non effettua alcun controllo sulla consistenza del fattore di calibrazione il cui valore è completa responsabilità dell'operatore.

Occorre calibrare su di una struttura nello stesso piano di misura del ventricolo da analizzare.


L'accuratezza del fattore di precisione dipende dall'accuratezza con la quale vengono scelti gli estremi del segmento da misurare ed è inversamente proporzionale alla dimensione nell'immagine del segmento misurato. In appendice sono riportati i riferimenti in accuratezza e precisione mediante l'utilizzo di questo metodo.

12.3.3 CALIBRAZIONE SU DI UN CATETERE



La calibrazione su di un catetere noto può essere effettuata premendo il pulsante *Catetere* nel riquadro *Calibrazione*. Nel riquadro bianco apparirà una lista di cateteri di dimensione nota impostati nel programma. Inizialmente sarà selezionato l'ultimo catetere utilizzato precedentemente ed evidenziato in blu. Per attivarne un altro selezionarlo con il pulsante sinistro del mouse.

A questo punto occorre selezionare due punti lungo il decorso del catetere stesso (preferibilmente nella porzione non rastremata più vicina all'ostio coronarico) tramite la pressione del pulsante sinistro del mouse sulla finestra dell'immagine. I punti sono evidenziati da una crocetta gialla.

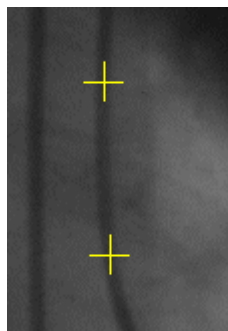

Attorno a questi punti il programma genera una regione d'interesse entro la quale determina automaticamente lo scheletro del catetere ed i bordi dello stesso.

Se il programma non riesce a rilevare lo scheletro del catetere o se i punti selezionati sono troppo vicini viene segnalato l'errore tramite un'apposita finestra di dialogo. L'operatore dovrà a questo punto procedere a una nuova selezione di punti e/o alla scelta di una nuova immagine su cui calibrare.

Al termine dell'analisi verrà visualizzato il profilo del catetere in sovrapposizione. L'immagine e i profili possono essere ingranditi per facilitare la verifica visuale della correttezza della misura. Nel pannello è invece indicato il fattore di calibrazione calcolato.



Occorre calibrare su di un catetere nello stesso piano di misura del ventricolo da analizzare. Occorre calibrare su di una struttura nello stesso piano di misura del ventricolo da analizzare.



Il programma non effettua alcun controllo sulla consistenza del fattore di calibrazione il cui valore è completa responsabilità dell'operatore. Per questo motivo occorre sempre verificare la correttezza dell'analisi confrontando i profili calcolati con quelli identificati visivamente.



L'accuratezza del fattore di precisione dipende dalla qualità dell'immagine e varia se effettuata su catetere pieno o catetere vuoto. In appendice sono riportati i riferimenti in accuratezza e precisione mediante l'utilizzo di questo metodo.

12.3.4 IMPOSTAZIONI PER LA CALIBRAZIONE


Le procedure di calibrazione richiedono l'utilizzo di alcuni dati di riferimento (calibrazioni di default, distanze note, dimensioni dei cateteri). Per evitare di dover impostare tali dati a ogni esecuzione il programma è in grado di memorizzare queste impostazioni e presentarle nel momento in cui sono necessarie.

Per impostare questi valori selezionare l'elemento *Impostazioni...* dal menù File del programma principale o consultare la guida del programma principale. Le impostazioni rimarranno valide per tutte le successive esecuzioni fino a quando non verranno nuovamente modificate.

Apparirà una finestra di dialogo che, all'interno del riquadro *Analisi Angiografica*, permette di impostare i dati richiesti tramite riquadri: *Calibrazioni di Default*, *Distanze di Riferimento* e *Lista dei Cateteri*. Il

funzionamento è analogo per ciascun riquadro etichetta (a parte naturalmente il significato dei valori impostati) ed è il seguente:

- Il riquadro visualizza la lista dei nomi attribuiti ai valori attualmente impostati.
- Quando si seleziona un nome nella finestra, il nome e il valore corrispondente verranno visualizzati anche a destra dove potranno essere modificati.
- Per accettare le modifiche premere il pulsante *Modifica*.
- Per eliminare il valore dalla lista premere il pulsante *Rimuovi*.
- Per impostare un nuovo valore ed attribuirgli il nome indicato premere il pulsante *Nuovo*.

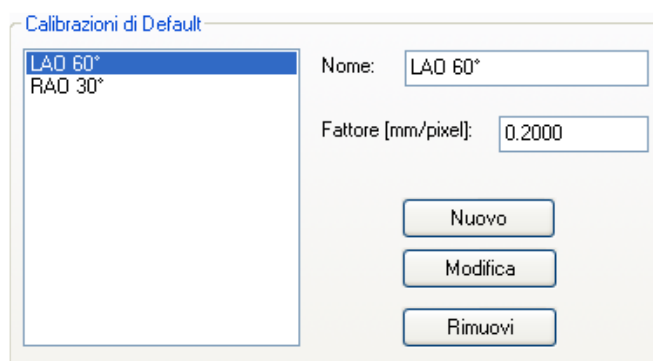


I cambiamenti verranno memorizzati solo quando verrà premuto il pulsante *Applica* oppure il pulsante *Ok*. Invece, premendo il pulsante *Annulla* si ritornerà ai valori impostati precedentemente.

12.4. ANALISI DELLE CORONARIE

Una volta calibrata l'immagine è possibile effettuare l'analisi di una coronaria (o in modo analogo di vasi periferici). Le misurazioni delle stenosi coronariche si effettuano selezionando con il pulsante sinistro del mouse due punti, rispettivamente a monte e a valle della stenosi dopo avere premuto il pulsante *2 Punti* nel riquadro QCA della finestra *Analisi Angiografica*.

I punti selezionati vengono evidenziati da crocette gialle. Attorno a questi punti il programma genera una regione d'interesse entro la quale determina automaticamente la centerline e i bordi coronarici e calcola il diametro del vaso a partire dai punti più prossimi a quelli selezionati dall'operatore.

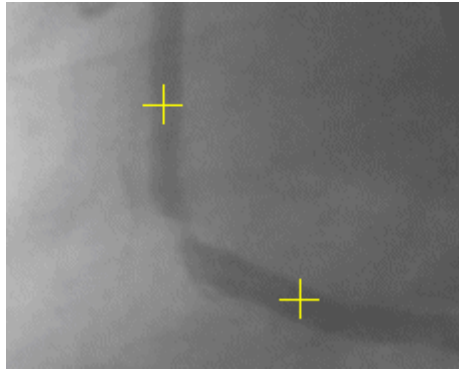

Se il programma non riesce a rilevare lo scheletro del catetere o se i punti selezionati sono troppo vicini viene segnalato l'errore tramite un'apposita finestra di dialogo. L'operatore dovrà a questo punto procedere a una nuova selezione di punti e/o alla scelta di una nuova immagine da analizzare.


Occorre sottolineare che il programma individua il percorso più breve, evidenziato in rosso, tra i due punti selezionati sullo scheletro coronarico individuato. In alcuni casi questo percorso non corrisponde al ramo che si desidera analizzare. Il problema può abitualmente essere risolto indicando un ulteriore punto nel percorso attivando l'analisi tramite il pulsante *3 Punti*. In questo caso il punto intermedio corrisponde normalmente alla regione stenotica o a un via-point rilevante.

Infine è anche possibile misurare una coronaria nella quale sia stato impiantato uno stent. In tale caso si preme il pulsante *Stent* e s'indicano quattro punti: il primo corrisponde all'inizio del segmento del vaso che si vuole analizzare, il secondo e il terzo rispettivamente all'inizio e fine dello stent (successivamente modificabili) e l'ultimo alla fine del segmento del vaso.

Il sistema escluderà la regione in cui è presente lo stent dal calcolo per stimare il profilo normale e calcolerà tre valori di stenosi: uno prossimale entro 5 mm dallo stent, uno interno allo stent stesso e uno distale (entro 5 mm dallo stent).

12.4.1 LA FINESTRA DEI RISULTATI

Al termine dell'analisi verrà visualizzata una finestra di risultati nella quale a destra è presentata l'immagine della coronaria con i profili rilevati in sovraimpressione.

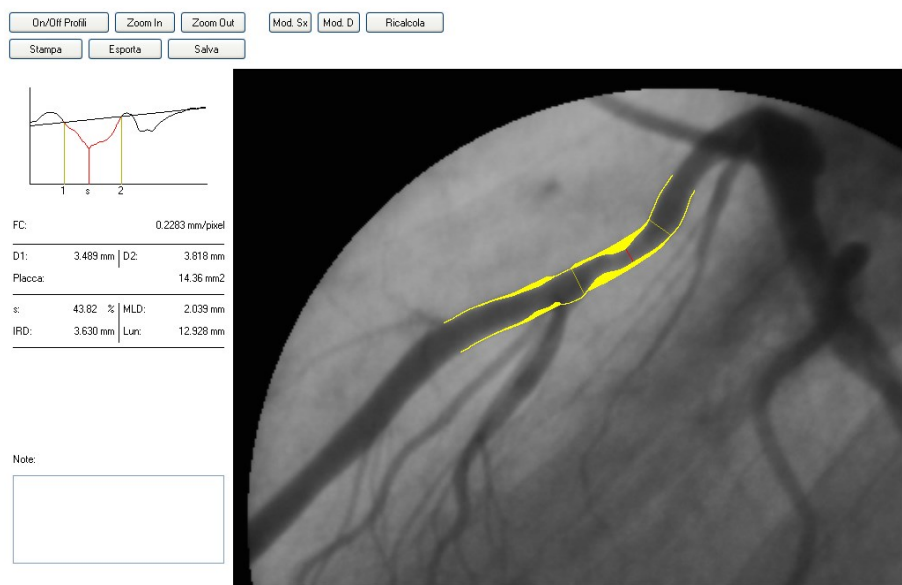

L'immagine e i profili sono ingranditi per facilitare la verifica visuale della correttezza della misura. I bordi coronarici vengono evidenziati in giallo sull'immagine originale. Il programma identifica inoltre il punto di massimo restringimento e il profilo probabilisticamente "normale". Il primo viene indicato tramite un tratto perpendicolare alla centerline di colore rosso mentre il secondo viene indicato in giallo. La regione tra i bordi coronarici e il profilo normale stimato viene anch'essa riempita in colore giallo.


A sinistra sono invece riportati i seguenti dati che riassumono l'analisi geometrica:

- 1) Il fattore di calibrazione (FC)
- 2) Il diametro del tratto "normale" a monte (D1)
- 3) Il diametro del tratto "normale" a valle (D2)
- 4) L'entità della stenosi in termini percentuali (s)
- 5) Il diametro minimo luminale in mm (MLD)
- 6) Il diametro interpolato nella stenosi (IRD)
- 7) La lunghezza del tratto stenotico in mm (Lun)

Nella stessa finestra compare inoltre il grafico della funzione diametro nel tratto analizzato. I tratti normali di riferimento vengono identificati da segmenti verticali, etichettati 1 e 2. Il punto di massima riduzione di diametro, anch'esso identificato da un segmento verticale, è etichettato s. Viene anche visualizzata la retta interpolante i tratti normali, utilizzata per la stima del profilo normale e per il calcolo della percentuale di stenosi.


L'operatore può modificare la posizione dei punti 1, 2 e s indipendentemente, trascinando con il mouse i corrispondenti tratti verticali sulla finestra di dialogo. Ciò determina l'automatico aggiornamento della

posizione dei corrispondenti segmenti sull'immagine originale. Al rilascio del pulsante sinistro del mouse tutti i parametri descrittivi della stenosi vengono ricalcolati in base alla nuova posizione.

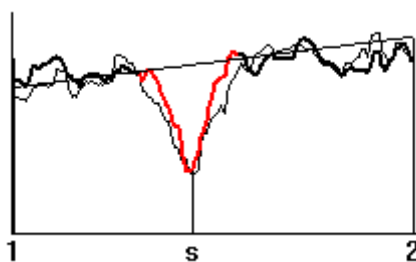

Inoltre, con un doppio click del mouse sulla funzione di diametro il programma visualizzerà i risultati dell'analisi densitometrica. L'analisi geometrica viene riportata in sovrapposizione con un tratto più leggero per un confronto diretto. Un ulteriore doppio click riporta alla visualizzazione impostata in precedenza.

Il software consente anche di modificare manualmente i profili nel caso venga riscontrato un errore nella stima automatica. Tale operazione viene svolta mediante i pulsanti *Mod. Sx* e *Mod. Dx* secondo quale parte del profilo si desidera modificare. La regione soggetta a modifica si colorerà di verde.

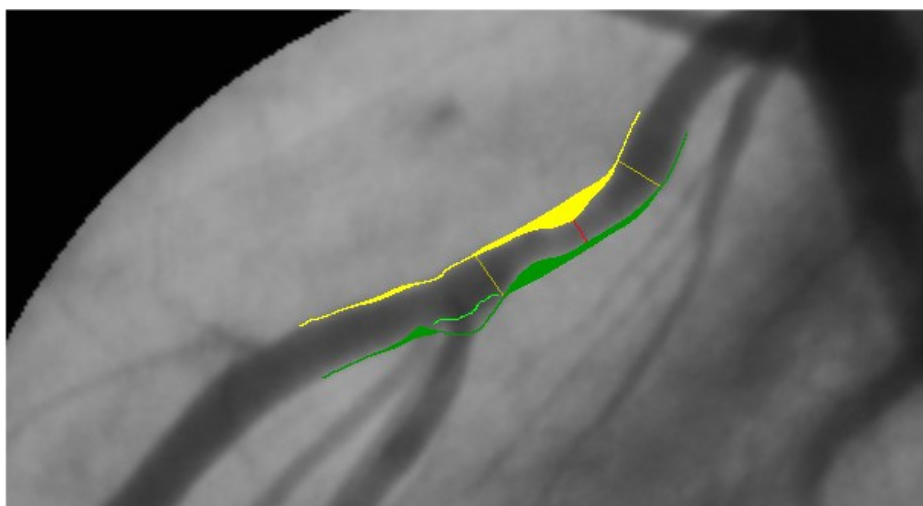

Occorre a questo punto tracciare con il mouse la parte del profilo che risulta errata e ripremere il pulsante *Ricalcola*. Il software rieseguirà una stima del profilo coronarico sulla base delle indicazioni fornite.

La finestra presenta anche una serie di ulteriori pulsanti con le seguenti funzionalità:


- **On/Off Profili** Permette di attivare/disattivare la visualizzazione dei profili della coronaria calcolati in sovrapposizione. Attivando e disattivando i profili l'operatore può verificare visivamente la correttezza dell'analisi effettuata
- **Zoom In** Ingrandisce l'immagine con uno zoom interpolato.

- **Zoom Out** Riduce il fattore di zoom dell'immagine.
- **Stampa** Permette di stampare i risultati dell'analisi riportando anche il nome della persona e i riferimenti dell'esame oltre all'immagine su cui è stata svolta l'analisi.
- **Esporta** Permette di esportare i risultati.
- **Salva** Genera un'immagine DICOM con i risultati delle analisi che possono essere salvati assieme all'immagine dell'esame.

Le operazioni di esportazione possono essere attivate manualmente rispettivamente mediante il pulsante *Esporta*. Le stesse operazioni, se previsto, possono essere attivate automaticamente all'apertura della finestra di dialogo o alla chiusura. In quest'ultimo caso all'utente verrà chiesta l'autorizzazione a procedere.



Una volta ritornati all'interfaccia principale è possibile rivisualizzare i dettagli dell'analisi tramite il pulsante *Dettagli* o in alternativa è possibile rimuovere i risultati tramite il pulsante *Rimuovi*. La selezione di una nuova immagine rimuove automaticamente i risultati.




In assenza di una corretta calibrazione le misure effettuate sulle immagini non sono valide. Occorre sempre controllare il fattore di calibrazione calcolato, la misura ottenuta ed i profili tracciati per verificarne l'ammissibilità.

In appendice sono riportate le analisi sull'accuratezza e la precisione del metodo utilizzato.

12.4.2 ANALISI IN PRESENZA DI UNO STENT

Per effettuare l'analisi di un vaso coronarico nel quale è stato inserito uno stent occorre effettuare la medesima procedura per l'analisi di una coronaria premendo il pulsante *Stent*.

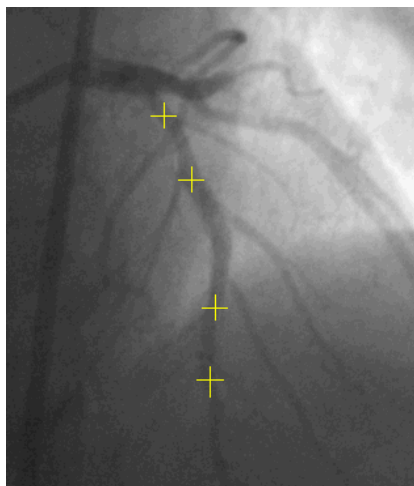

In questo caso occorre indicare quattro punti sul vaso che verranno visualizzati con delle crocette gialle. I due punti intermedi hanno lo scopo di identificare l'inizio e la fine dello stent all'interno del vaso.

Se il programma non riesce a rilevare lo scheletro del catetere o se i punti selezionati sono troppo vicini viene segnalato l'errore tramite un'apposita finestra di dialogo. L'operatore dovrà a questo punto procedere a una nuova selezione di punti e/o alla scelta di una nuova immagine da analizzare.

Occorre sottolineare che il programma individua il percorso più breve, evidenziato in rosso, tra i due punti esterni selezionati sullo scheletro coronarico. In alcuni casi questo percorso non corrisponde al ramo che si desidera analizzare.

La posizione dello stent viene utilizzata per eliminare l'utilizzo della corrispondente regione coronarica dal calcolo per stimare il profilo normale. Inoltre il programma visualizzerà tre valori di stenosi:

- 1) La stenosi rilevata all'interno dello stent. (s)
- 2) La stenosi prima dell'inizio dello stent. (p)
- 3) La stenosi dopo lo stent. (d)

Per ogni stenosi viene indicato il valore percentuale della stenosi, il valore assoluto del diametro misurato e il valore del diametro di riferimento stimato. In Magenta è riportata la posizione dello stent.



In assenza di una corretta calibrazione le misure effettuate sulle immagini non sono valide. Occorre sempre controllare il fattore di calibrazione calcolato, la misura ottenuta ed i profili tracciati per verificarne l'ammissibilità.

In appendice sono riportate le analisi sull'accuratezza e la precisione del metodo utilizzato.

12.5. ANALISI DEL VENTRICOLO

Dopo aver opportunamente calibrato l'immagine è possibile effettuare l'analisi del ventricolo sinistro seguendo la seguente procedura.


- Selezionare tramite i controlli del programma principale un'immagine diastolica. Premere il pulsante *Traccia Diastole* nel riquadro LVA.
- A questo punto premere il pulsante sinistro del mouse sulla finestra immagine e trascinare il mouse a pulsante premuto per tracciare manualmente il profilo del ventricolo. Al rilascio del pulsante è ancora possibile continuare a tracciare il profilo, premendo nuovamente il tasto sinistro del mouse o in alternativa è possibile cancellare il profilo progressivamente all'indietro mantenendo premuto il tasto destro. Infine, con un doppio click sul pulsante sinistro del mouse, il profilo tracciato verrà fissato definitivamente e l'asse lungo visualizzato.
- Analogamente selezionare tramite i controlli del programma principale l'immagine sistolica corrispondente. Premere il pulsante *Traccia Sistole* nel riquadro LVA. A questo punto è possibile tracciare manualmente il profilo sistolico con la stessa procedura di cui sopra.
- Premere il pulsante *Analisi*. Una finestra con i risultati delle analisi (volumi ventricolari, frazione di eiezione, accorciamento regionale, ecc.) verrà visualizzata.



Il tracciamento del profilo del ventricolo non è consentito se il fattore di calibrazione è nullo. Occorre prima calibrare l'immagine e successivamente analizzare il ventricolo.

Il programma non effettua alcun controllo sui profili tracciati dall'operatore. Per questo motivo occorre sempre verificare la correttezza dei profili tracciati esaminando la traccia grafica in sovraimpressione.

Un esempio di finestra di dialogo dei risultati è riportato qui di seguito.

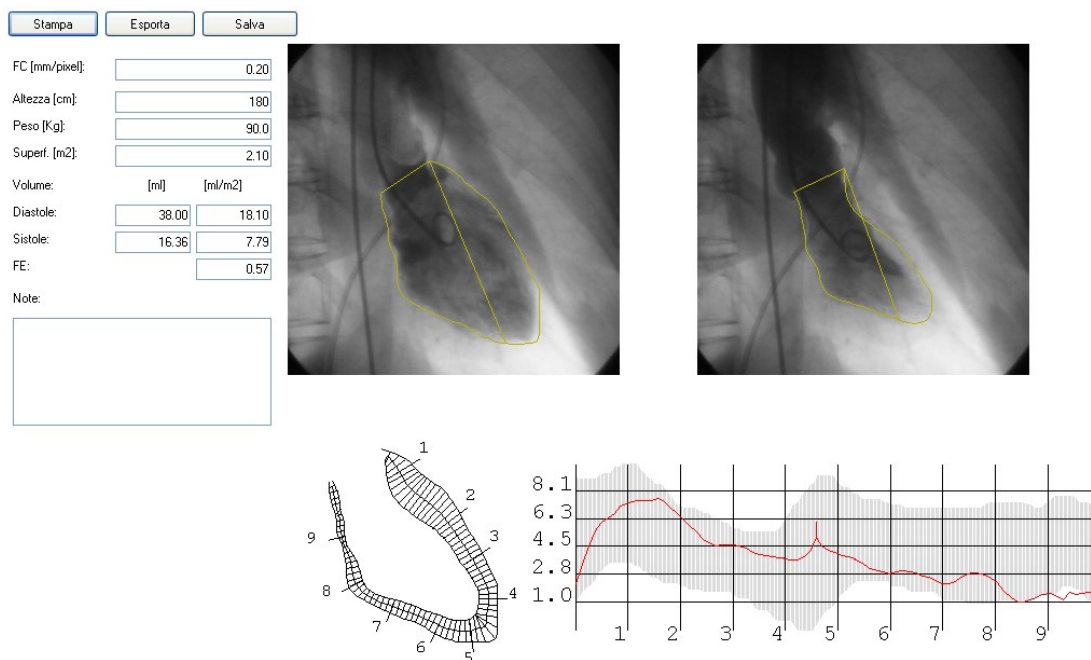

Nella finestra sono riportati i volumi ventricolari e la frazione di eiezione calcolati con il metodo *Area-Lunghezza* e l'accorciamento regionale calcolato con il metodo *Centerline*.

I volumi sono espressi in ml e possono essere normalizzati sulla base della superficie corporea calcolata in base al peso e all'altezza della persona. Questi ultimi valori sono prelevati dal programma principale e/o possono essere inseriti/modificati in questa finestra di dialogo.


Gli accorciamenti regionali sono espressi in termini percentuali con riferimento al perimetro del ventricolo in diastole. Sullo sfondo in grigio viene riportata la zona di normalità corrispondente al valore medio dell'accorciamento ± 2 unità di deviazione standard.

In questa finestra è anche possibile inserire delle annotazioni sull'analisi e/o stampare un referto con il pulsante *Stampa*. Quest'ultimo è automaticamente impaginato e riporta i dati sulla persona e sull'esame, le immagini ventricolari, i risultati ottenuti e le eventuali annotazioni.

Con il pulsante *Salva* il referto verrà generato come immagine DICOM per poterlo archiviare assieme alle immagini dell'esame.

Inoltre, secondo le modalità di esportazione installate, è anche possibile esportare i risultati dell'analisi a una base di dati, in un foglio Excel (qualora Microsoft Excel® 2003 o superiore sia installato sul medesimo PC) o anche in formati proprietari o definiti dall'utente.

Le operazioni di esportazione possono essere attivate manualmente rispettivamente mediante il pulsante *Esporta*. Le stesse operazioni, se previsto, possono essere attivate automaticamente all'apertura della finestra di dialogo o alla chiusura. In quest'ultimo caso all'utente verrà chiesta l'autorizzazione a procedere.

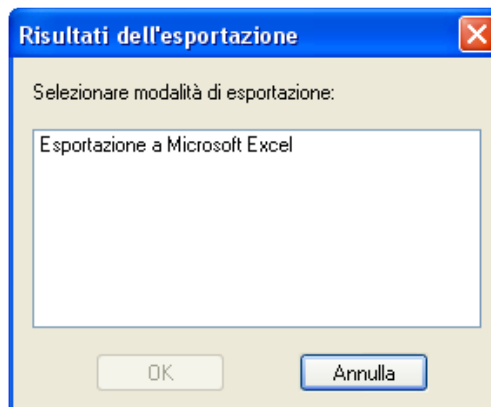

Infine è possibile anche effettuare le seguenti ulteriori operazioni:

- I profili possono essere rimossi con il pulsante *Rimuovi*.
- Si può ritornare a visualizzare l'immagine sistolica selezionata premendo il pulsante *Vai a Sistole* oppure quella diastolica premendo il pulsante *Vai a Diastole*.



In assenza di una corretta calibrazione e di un corretto tracciamento dei profili ventricolari le misure effettuate sulle immagini non sono valide. Occorre sempre controllare il fattore di calibrazione calcolato, la misura ottenuta ed i profili tracciati per verificarne l'ammissibilità.

In appendice sono riportate le analisi sull'accuratezza e la precisione del metodo utilizzato.

13. ANALISI IVUS

13.1. ATTIVAZIONE DI COMPACS IVUS

Se ComPACS IVUS è abilitato sul vostro sistema, il seguente pulsante sarà visibile sulla barra dei comandi, nella parte destra:



Se il pulsante è premuto allora il modulo è già attivo. Altrimenti è possibile attivarlo premendo il pulsante con il mouse.

Durante l'attivazione il modulo richiederà una licenza per l'esecuzione al Server ComPACS. Se la licenza non può essere recuperata il modulo non sarà attivato e verrà invece visualizzato un messaggio di errore.




Nel caso di licenze concorrenti è possibile che tutte le licenze siano già state richieste e assegnate ad altri utenti che utilizzano il sistema in quel momento, e che non vi siano altre licenze disponibili per l'attivazione. Questo è il caso più comune di fallimento.


Il fallimento nell'attivazione del modulo può altresì avvenire se si perde il collegamento di rete con il Server.

Si prega di assicurarsi di rilasciare la licenza del modulo, rilasciando l'apposito pulsante suddetto, dopo averne terminato l'utilizzo in modo da rendere la licenza disponibile per altri utenti di altre postazioni.

Quando il modulo è attivo una finestra denominata "Analisi IVUS" viene aggiunta ed è visibile sulla finestra dei controlli. Tale finestra può essere aperta o minimizzata con un singolo click del pulsante sinistro del mouse sulla barra blu.

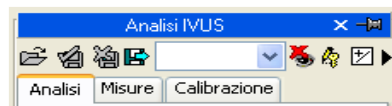

13.2. RICOSTRUZIONE LONGITUDINALE (ILD)

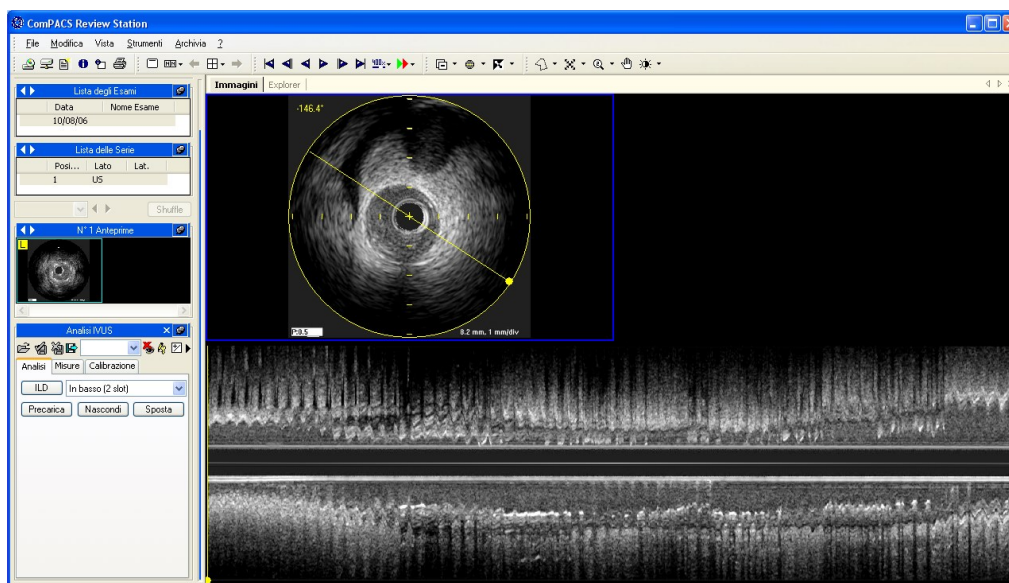

Se l'oggetto selezionato è una sequenza IVUS, premendo il pulsante *ILD* verrà creata un'immagine con la ricostruzione longitudinale. La posizione e dimensione dell'immagine dipende dal menù a tendina a fianco del pulsante *ILD* stesso.

Sull'immagine un cerchio giallo e una linea indicano la regione oggetto della ricostruzione e l'orientazione dell'asse di campionamento. Sull'immagine ricostruita (ILD) è invece presente una linea gialla che indica la corrispondenza con il fotogramma della sequenza originale al momento visualizzato. Tali informazioni grafiche possono essere nascoste con il pulsante *Nascondi*.

La ricostruzione è effettuata automaticamente durante la riproduzione del filmato. Per averla disponibile subito è possibile premere il pulsante *Precarica*.

Premendo il pulsante *Sposta* il software consente di modificare direttamente e intuitivamente la direzione dell'asse di campionamento utilizzando il tasto sinistro del mouse sull'immagine originale. La ricostruzione viene automaticamente aggiornata se una quantità sufficiente di memoria RAM è installata. Altrimenti il file dovrà essere riprodotto o precaricato ancora una volta per aggiornare la ricostruzione.


Analogamente spostando la linea gialla sull'immagine ricostruita sarà possibile spostarsi al fotogramma corrispondente nell'immagine originale.

13.3. MISURE OFF-LINE

Il modulo IVUS offre la possibilità di effettuare misure sulle immagini IVUS e sulla ricostruzione longitudinale. Le informazioni di calibrazione di solito sono contenute all'interno del file DICOM e il prodotto le utilizza per evitare una calibrazione manuale e allo stesso tempo garantire una maggiore

accuratezza dei dati. Qualora le informazioni di calibrazione siano assenti è comunque possibile effettuare una calibrazione manuale.


Nel tab *Misure* della finestra di analisi ecografica sono sempre disponibili misure generiche.

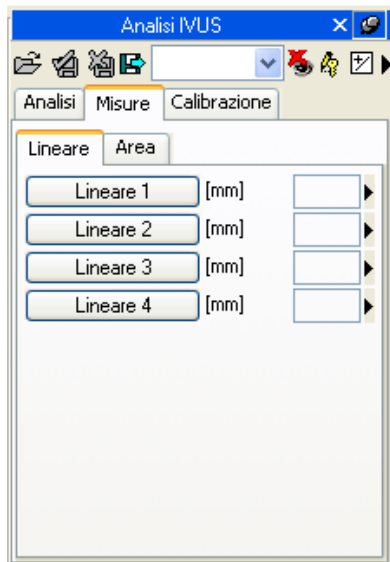

Sono disponibili misure di base lineari e di area per effettuare rapide verifiche.



Le misure generiche sono solo temporanee. Esse non possono essere archiviate nel database di ComPACS.

Per accedere al pannello di misure avanzate è necessario aprire un referto esistente o crearne uno nuovo. Questa operazione può essere eseguita cliccando sull'icona  della barra degli strumenti, come descritto nel capitolo “*Gestione dei referti*”.




Le misure strutturate e le funzionalità di refertazione non sono disponibili nel modulo IVUS di base. La licenza per il modulo IVUS II o superiore è necessaria.

La finestra di analisi verrà estesa con un tab aggiuntivo chiamato *Strutturato* contenente tutte le misure strutturate. Il contenuto e l'aspetto di tale tab dipende dagli schemi di refertazione e di analisi configurati dal vostro amministratore di sistema per la specifica postazione o utente.



Le misure strutturate vengono salvate nell'oggetto di tipo DICOM SR a cui si riferiscono.

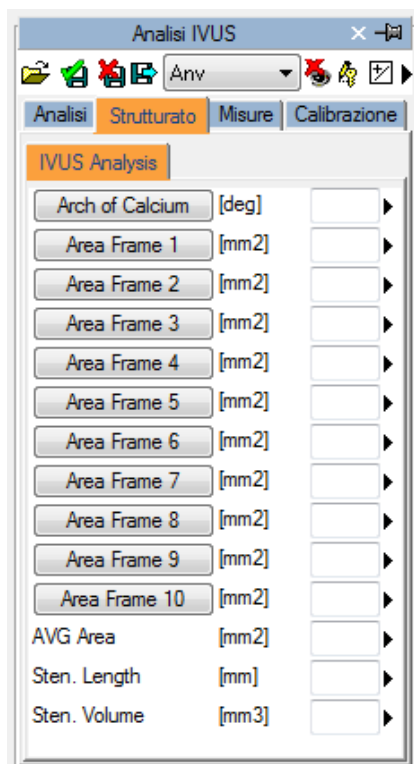

In tale interfaccia si riempiranno (di numeri di misure) solo i campi corrispondenti ai dati presenti nell'oggetto aperto. Per correggere le misure presenti cliccare sull'icona di editing:



Per chiudere e salvare i cambiamenti effettuati cliccare sull'icona *Salva e Chiudi*:



Per chiudere senza salvare eventuali cambiamenti apportati cliccare sull'icona *Chiudi e ignora le modifiche*:



Per esportare i dati è necessario cliccare sull'icona *Esporta*:



Si aprirà un'interfaccia in cui selezionare il formato dei dati e la loro destinazione.

Mediante il menù a tendina è altresì possibile selezionare la disposizione degli elementi di misura e calcolo strutturati nella pagina in base alle configurazioni installate.



Questa funzionalità è stata estesa per esportare non solo i valori numerici ma anche altri tipi di campo (testi, diagnosi, date, ecc.). Inoltre l'esportazione include le strutture ripetute ed annidate.

La "Descrizione Colonne" è un semplice file di testo che elenca, in righe separate, i campi che devono essere esportati. Ogni riga ha il formato seguente:

IDCampo; Etichetta - Opzionale; Unità di misura - Opzionale

Se l'etichetta o l'unità di misura non sono specificati, i valori di riferimento verranno utilizzati.

Per le strutture ripetute, la lista dei campi deve essere racchiusa nella seguente struttura:

*BEGINGROUP(ID Struttura); Etichetta – Opzionale; Indice – Opzionale
... elenco dei campi ..
ENDGROUP(ID Struttura)*


L'indice è opzionale. Se omissso tutte le istanze di tali strutture saranno esportate.

Infine alcuni campi speciali consistono in elementi DICOM. Sono identificati con la seguente sintassi:


\$(Gruppo,Elemento); Etichetta - Opzionale;

13.3.1 CALIBRARE LE IMMAGINI

E' possibile vedere se la calibrazione dell'immagine è automatica o meno. Infatti, semplicemente passando il mouse sull'immagine, le informazioni appariranno nel riquadro *-Calibrazione:*

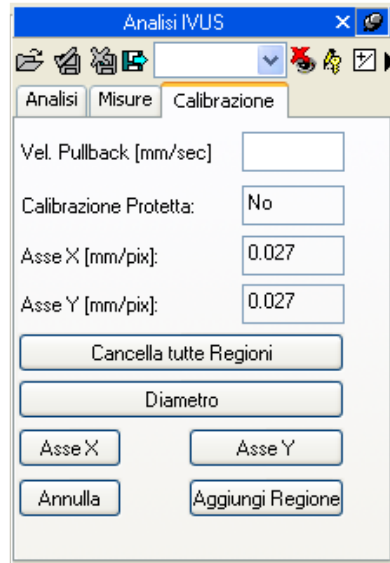

Se, al passaggio del mouse, nessuna informazione appare nel riquadro allora l'immagine è da calibrare. Per calibrare l'immagine è necessario stabilire (agendo sui tasti *Asse X* e *Asse Y*) i valori da assegnare agli assi componenti l'immagine.

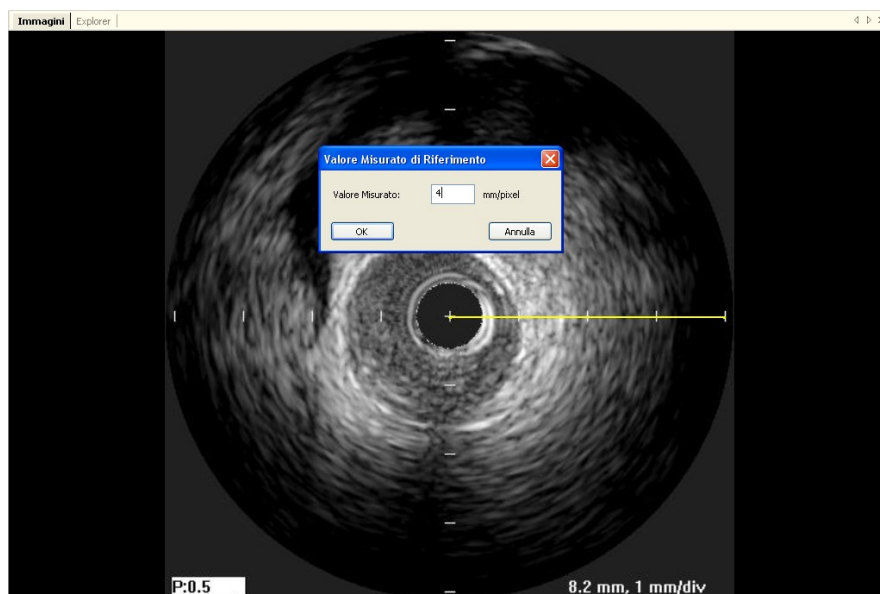

Il cursore sull'immagine cambierà in una penna e consentirà di tracciare un segmento premendo il pulsante sinistro una prima volta nel punto iniziale (il centro dell'immagine IVUS) e poi una seconda volta in quello finale prescelto. Al termine una finestra di dialogo vi chiederà di indicare la dimensione del segmento tracciato nell'unità di misura apposta.

E' anche possibile indicare separatamente il diametro dell'immagine IVUS premendo sul pulsante *Diametro*. Se tale operazione non viene svolta il diametro è il maggiore tra quello identificato dalla calibrazione X e Y.

Una volta eseguita quest'operazione per entrambi gli assi si può accettare la calibrazione cliccando su *Aggiungi Regione*. Passando il puntatore del mouse sulla regione calibrata, nel riquadro della calibrazione appariranno i dati appena impostati.



In assenza di una corretta calibrazione le misure sull'immagine non sono valide.



Il programma non effettua alcun controllo sulla consistenza del fattore di calibrazione. E' sempre necessario verificare il fattore calcolato per controllare se è ammissibile.




L'accuratezza del fattore di calibrazione dipende dall'accuratezza con cui viene tracciato il segmento da misurare ed è direttamente proporzionale alla dimensione della struttura in pixels.

13.3.2 CALIBRARE LA RICOSTRUZIONE LONGITUDINALE

Il fattore di calibrazione della ricostruzione longitudinale non viene impostato direttamente ma viene importato dalle immagini dalle quali tale ricostruzione è effettuata. Tali immagini dovranno dunque essere calibrate prima di effettuare la ricostruzione.

Tuttavia per la ricostruzione è necessario un parametro aggiuntivo relativo alla *Velocità di Pullback* al fine di poter effettuare misure sull'immagine ricostruita. Anche questo parametro è importato dal DICOM (se presente) ma può anch'esso essere impostato manualmente nell'apposito contenitore dopo (e non prima) che la ricostruzione è stata creata.

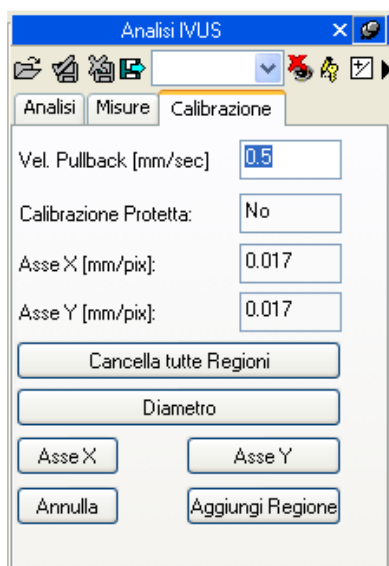

In assenza di una corretta calibrazione le misure sull'immagine non sono valide.



Il programma non effettua alcun controllo sulla consistenza del fattore di calibrazione o della velocità di pullback. E' sempre necessario verificare il fattore calcolato per controllare se è ammissibile.

13.3.3 ESEGUIRE DELLE MISURE


A questo punto siamo pronti per eseguire delle misure off-line sulle immagini di nostro interesse. ComPACS IVUS permette di misurare sia le immagini IVUS originali sia la ricostruzione longitudinale (ILD) effettuata.

Scelta l'immagine su cui eseguire la misura è necessario selezionare, all'interno del pannello di misure, il parametro da misurare. In particolare vi sono due pannelli: il pannello *Misure* sempre disponibile e quello *Strutturato* che dipende dalla configurazione impostata e richiede l'apertura di un referto (inteso come oggetto DICOM SR).




Le misure generiche sono solo temporanee e non vengono salvate in un oggetto DICOM SR.

Scelta l'immagine su cui eseguire la misura è necessario selezionare, all'interno del pannello di misure, il parametro da misurare. In particolare possono essere effettuate misure di distanza e area, oltre ai calcoli derivati indicati.

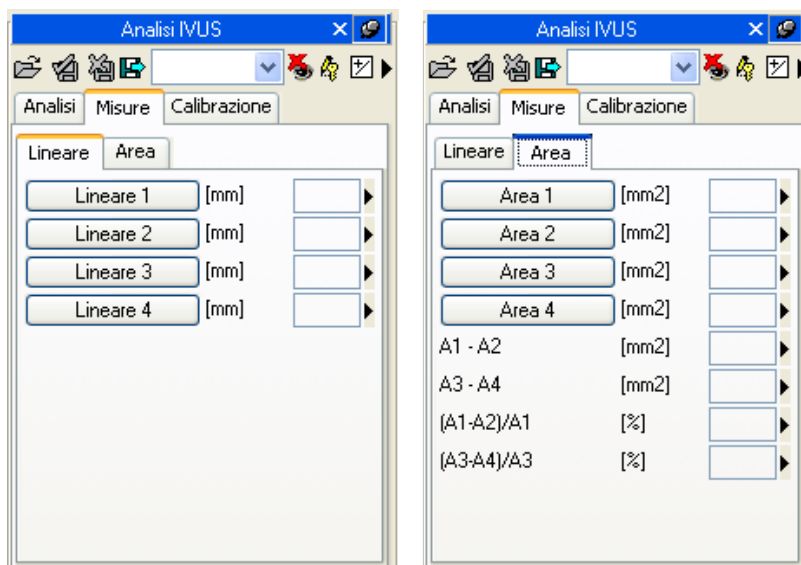


Cliccando sul pulsante prescelto il puntatore del mouse assume la forma di una penna e a quel punto con dei semplici click sull'immagine il prodotto traccia la misura (in giallo).

Un esempio di misura lineare su un'immagine IVUS:

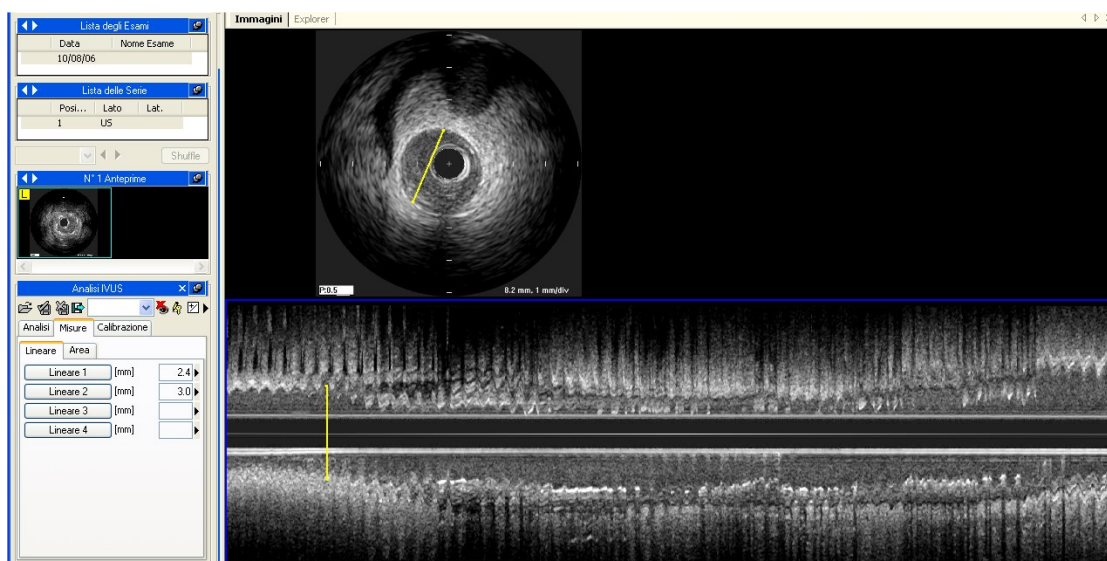

Nel caso di misure di area, si fissa con ogni click un punto dell'area e il software crea una linea morbida passante per tali punti - "spline" - così da rendere la forma armonizzata. Un doppio click indica la fine della misura. In caso di errore, agendo col tasto destro del mouse, si possono cancellare punti o, con un doppio click, annullare la misura.

Nel prossimo esempio abbiamo misurato un'area:

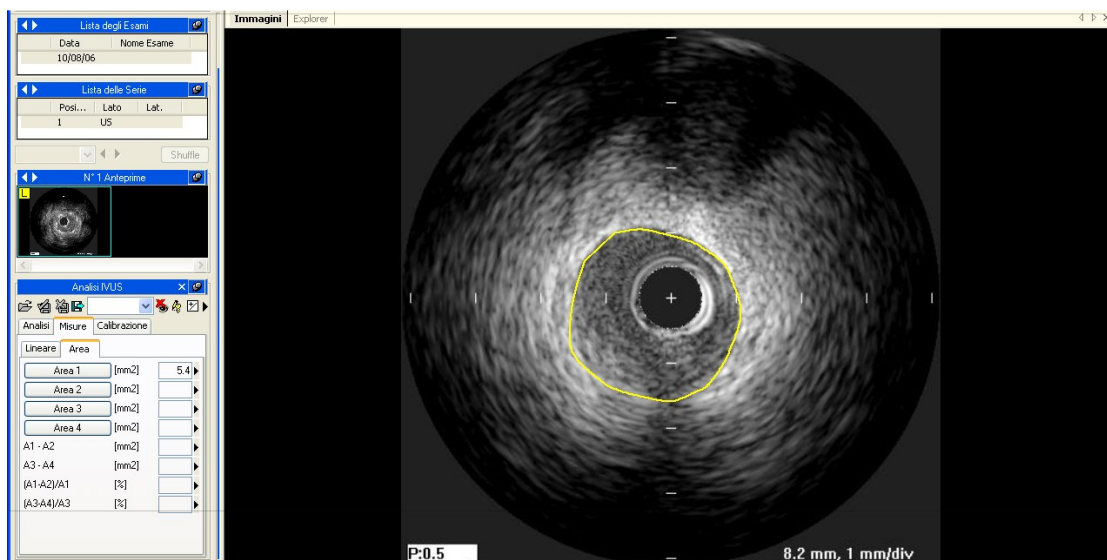

Nel caso di misura di un angolo, il sistema utilizza automaticamente il centro dell'immagine come punto di riferimento. E' quindi sufficiente fare un click su due punti nell'immagine, muovendosi in senso orario, per misurare l'angolo corrispondente. In caso di errore, agendo col tasto destro del mouse, si possono cancellare punti o, con un doppio click, annullare la misura.

13.3.4 I CALCOLI E LE FORMULE

Una volta acquisite tutte le informazioni necessarie, il software permette di calcolare valori derivati semplici o complessi applicando delle formule matematiche. Ad esempio, se si effettuano misure multiple di area su diverse sezioni e per una lunghezza indicata manualmente, è possibile stimare il volume.



In assenza di una calibrazione valida le misure effettuate non sono valide. Inoltre è sempre necessario controllare il valore del fattore di calibrazione calcolato e la velocità di pullback per verificare che siano ammissibili.




Il software non effettua alcun controllo sulla validità della misura e/o corrispondenza alla struttura misurata. L'operatore è tenuto a controllare la correttezza della struttura selezionata e della misura stessa mediante il riscontro visivo del grafico della misura visualizzato.

13.4. GESTIONE DELLE MISURE


Il prodotto fornisce una gestione dettagliata delle misure effettuate.

Quando una misura è già presente e viene ri-eseguita, il software, di default, sostituisce il nuovo valore al posto di quello vecchio che viene cancellato.


Tuttavia si può eseguire più di una misura sullo stesso campione (o su campioni diversi) calcolandone la media e la deviazione standard. Effettuando più misurazioni come risultato ne viene mostrata la media. Per decidere di effettuare misurazioni ripetute bisogna agire su un pulsante come mostrato di seguito:

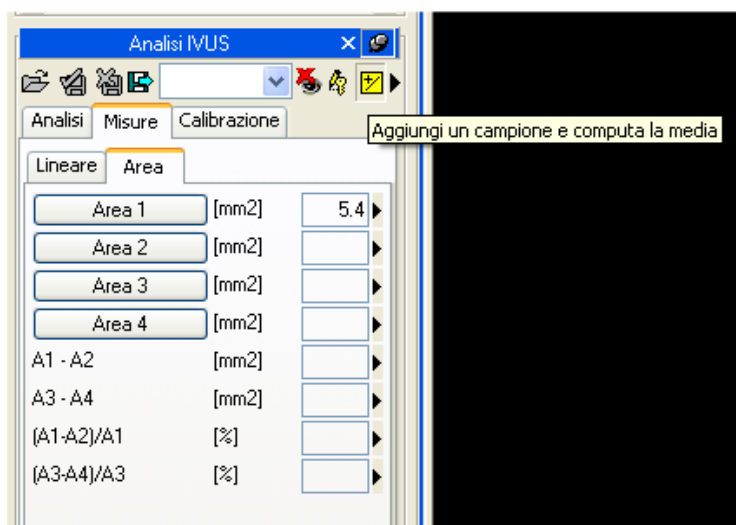

Nel caso di misure ripetute il valore mostrato accanto alla misura è quello della media aritmetica. Comunque rimane possibile visualizzare tutti i campioni acquisiti. A fianco di ogni misura c'è una freccia che permette di accedere a un menù di gestione della singola misura:

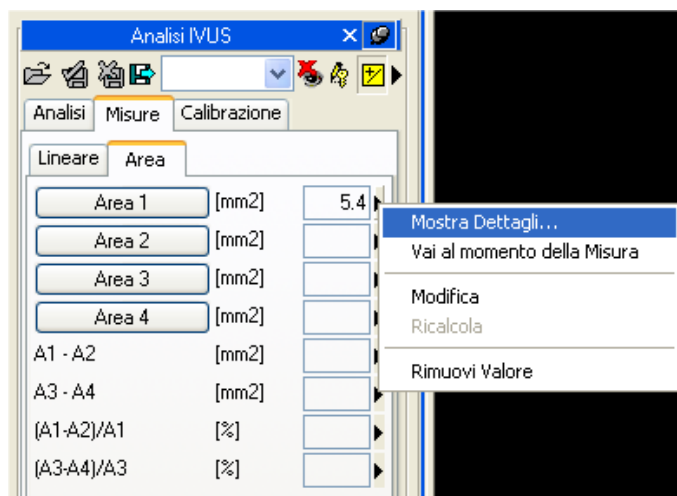


Cliccando sulla freccia e poi su *Mostra Dettagli*, si accede a una finestra dove sono mostrati tutti i campioni presi per quella misura, la media e la deviazione standard:

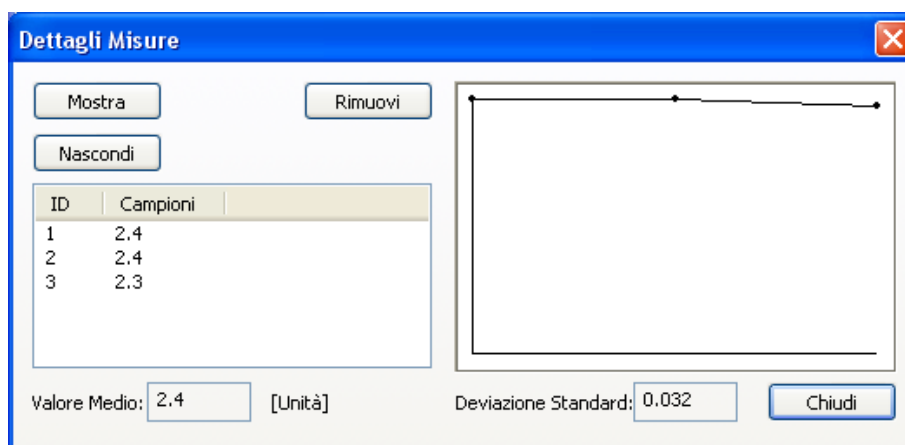

Esiste la possibilità di cancellare un valore misurato se ci sembra sbagliato, semplicemente selezionandolo e cliccando su *Rimuovi*. Con i pulsanti *Mostra* e *Nascondi* è invece possibile visualizzare simultaneamente o nascondere le misure sull'immagine.

Se l'analisi IVUS è stata effettuata sullo stesso paziente in diversi esami archiviati in ComPACS, è possibile vedere come specifici campi siano variati nel tempo.

Quest'operazione può essere effettuata cliccando sulla voce di menù *Visualizza le variazioni nel tempo...* Verrà aperta una finestra che mostrerà i diversi valori per la stessa misura nei vari esami sia in formato numerico sia in formato grafico.

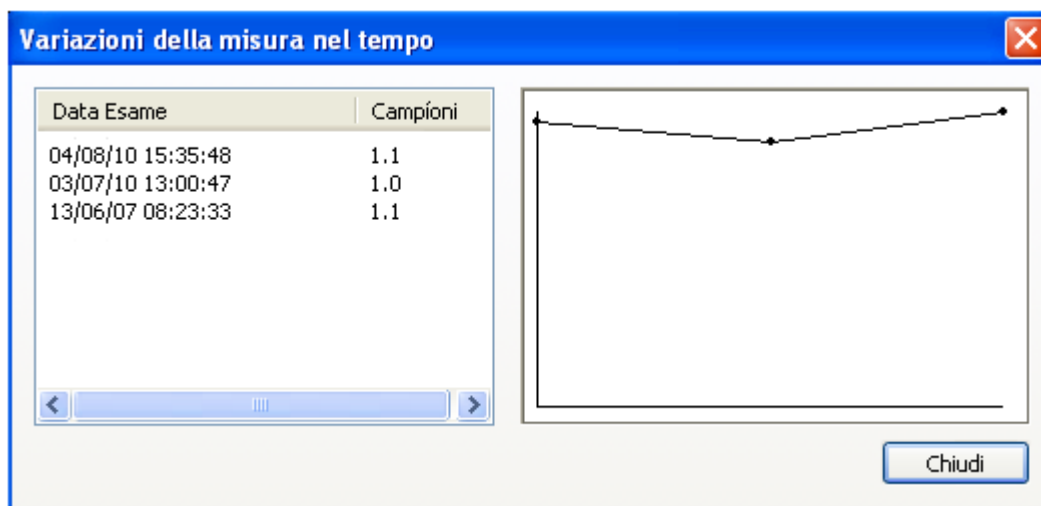

Un'altra funzione molto interessante è quella che consente, in qualsiasi momento, di recuperare l'immagine e il momento in cui è stata eseguita la misura. Sempre all'interno del menù delle misure, cliccando su *Vai al Momento della Misura*, il software seleziona automaticamente l'immagine e lo specifico *fotogramma* sul quale la misura è stata effettuata.



La funzione *Vai al Momento della Misura* è disponibile solo per misure effettuate off-line con ComPACS IVUS.

Inoltre, cliccando su *Modifica* è possibile inserire manualmente il valore invece di misurarlo o calcolarlo. Tale valore sarà sottolineato in giallo per evidenziare tale operazione dell'operatore.

Per mostrare/nascondere le misure sulle immagini agire sull'icona:



Per mostrare le misure effettuate su tutti i frame di un filmato (e non solo sul frame in cui è stata eseguita la misura) cliccare sull'icona:



Per chiudere e salvare i cambiamenti effettuati cliccare sull'icona *Salva e Chiudi*:



Per chiudere senza salvare eventuali cambiamenti apportati cliccare sull'icona *Chiudi e ignora le modifiche*.



13.5. IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE

Questo modulo consente importazioni personalizzate per ciascun utente, tramite la finestra di *Impostazioni* del programma, nell'etichetta *Analisi IVUS*.

- Abilita la media delle misure all'avvio
- Misure multiple (se la media è abilitata)
- Non visualizzare il valore della misura sull'immagine
- Inverti asse X e Y
- Usa il cursore penna originale

“Abilita la media delle misure all'avvio” automaticamente abilita la funzionalità di media quando il modulo viene attivato.

“Misure multiple (se la media è abilitata)” consente all'utente di misurare un parametro specifico più volte, senza dover premere nuovamente sul pulsante corrispondente. La sequenza delle misure può essere interrotta premendo il tasto destro del mouse.

“Non visualizzare il valore della misura sull'immagine” non visualizza l'etichetta e il valore misurato in sovrapposizione sull'immagine.

“Inverti asse X e Y” viene utilizzato se gli assi X e Y devono essere interpretato diversamente in relazione alla misura strutturata da effettuare. Questa opzione può essere abilitata automaticamente all'avvio del modulo.

“Usa il cursore penna originale” utilizza il cursore penna già in uso nelle precedenti revisioni del software. A partire dalla revisione 10.8.6 il cursore penna è stato sostituito con un cursore a forma di mirino.

14. MISURE GENERICHE

14.1. ATTIVAZIONE DELLE MISURE GENERICHE

Se il modulo per le misure generiche è abilitato sul vostro sistema, il seguente pulsante sarà visibile sulla barra degli strumenti



Se il pulsante è premuto allora il modulo è già attivo. Altrimenti è possibile attivarlo premendo il pulsante con il mouse.

Durante l'attivazione il modulo richiederà una licenza per l'utilizzo al Server ComPACS. Se la licenza non può essere recuperata il modulo non sarà attivato e verrà invece visualizzato un messaggio di errore.



Nel caso di licenze concorrenti è possibile che tutte le licenze siano già state richieste e assegnate ad altri utenti che utilizzano il sistema in quel momento, e che non vi siano altre licenze disponibili per l'attivazione. Questo è il caso più comune di fallimento.

Il fallimento nell'attivazione del modulo può altresì avvenire se si perde il collegamento di rete con il Server.


Si prega di assicurarsi di rilasciare la licenza del modulo, rilasciando l'apposito tasto suddetto, dopo averne terminato l'utilizzo in modo da rendere la licenza disponibile per altri utenti di altre postazioni.

Quando il modulo è attivo, una finestra denominata "Misure Generiche" viene aggiunta ed è visibile sulla finestra dei controlli. Tale finestra può essere aperta o minimizzata con un singolo click del pulsante sinistro del mouse sulla barra blu.



14.2. MISURE OFF-LINE

Il modulo permette di effettuare misure su diversi tipi di immagine. Tali misure semplici sono sempre disponibili nel tab *Misure*.

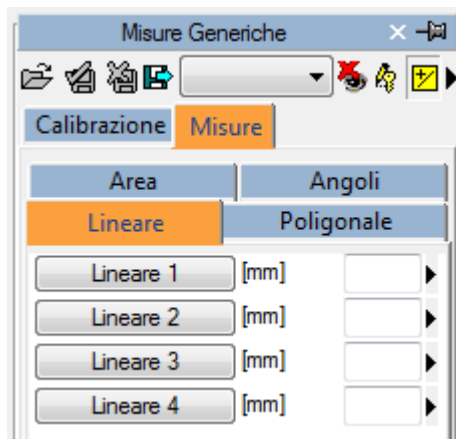

Misure lineari, poligonali, di area e di angoli sono disponibili per rapide verifiche.




Le misure generiche sono solo temporanee. Esse non possono essere archiviate nel database di ComPACS.

Per esportare i dati è necessario cliccare sull'icona *Esporta*:



Si aprirà un'interfaccia in cui selezionare il formato dei dati e la loro destinazione.

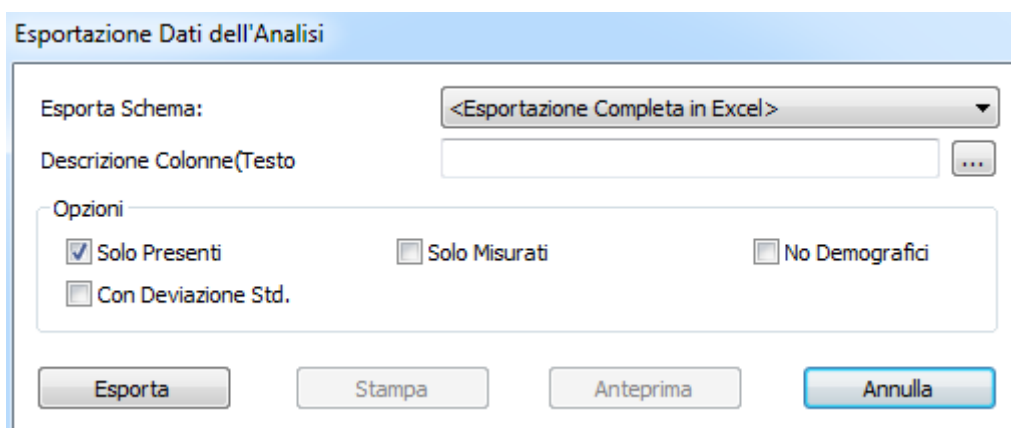

Mediante il menù a tendina è altresì possibile selezionare la disposizione degli elementi di misura e calcolo strutturati nella pagina in base alle configurazioni installate.



Questa funzionalità è stata estesa per esportare non solo i valori numerici ma anche altri tipi di campo (testi, diagnosi, date, ecc.). Inoltre l'esportazione include le strutture ripetute ed annidate.

La “Descrizione Colonne” è un semplice file di testo che elenca, in righe separate, i campi che devono essere esportati. Ogni riga ha il formato seguente:

IDCampo; Etichetta - Opzionale; Unità di misura - Opzionale

Se l'etichetta o l'unità di misura non sono specificati, i valori di riferimento verranno utilizzati.

Per le strutture ripetute, la lista dei campi deve essere racchiusa nella seguente struttura:

```
BEGINGROUP(ID Struttura); Etichetta – Opzionale; Indice – Opzionale  
... elenco dei campi ..  
ENDGROUP(ID Struttura)
```

L'indice è opzionale. Se omesso tutte le istanze di tali strutture saranno esportate.

Infine alcuni campi speciali consistono in elementi DICOM. Sono identificati con la seguente sintassi:

\$(Gruppo,Elemento); Etichetta - Opzionale;

14.2.1 CALIBRARE LE IMMAGINI

Le informazioni di calibrazione sono solitamente presenti nel file DICOM. Il prodotto sfrutta tali informazioni per evitare di far fare all'utente la calibrazione manuale ed assicurando così maggior accuratezza. Per questo motivo non è generalmente necessario effettuare operazioni di calibrazione.

Muovendo il mouse sull'immagine, appariranno le informazioni di calibrazione nel tab *Calibrazione* della finestra di analisi ecografica. In questo modo è possibile verificare se la calibrazione dell'immagine è presente o meno.



Nel caso in cui nessuna informazione viene visualizzata al passaggio del mouse sull'immagine, allora è necessario effettuare la calibrazione.




La calibrazione per immagini radiologiche (DICOM Pixel Spacing) è supportata. Tuttavia tale calibrazione è effettuata sulla superficie ricevente che non è necessariamente sullo stesso piano e con la stessa orientazione della struttura che si desidera misurare. Questo può portare a risultati non corretti. Si suggerisce di verificare la calibrazione (o ricalibrare manualmente) utilizzando una struttura di dimensioni note e posizionata sullo stesso piano e con la stessa orientazione.




Le immagini ecografiche possono contenere più regioni di calibrazioni. Quindi è possibile che le informazioni di calibrazioni varino in relazione alla posizione del mouse sull'immagine. Inoltre è possibile che alcune regioni siano calibrate mentre altre non lo siano..

Se le informazioni di calibrazione sono assenti è possibile calibrare manualmente l'intera immagine o una regione di essa.

La prima cosa da fare per calibrare un'immagine è scegliere il formato (2D, Doppler, M-Mode, ecc) e il tipo di dati (tessuto, PW, CW, ecc); ciò è possibile agendo sui due menù dedicati nel riquadro della calibrazione:

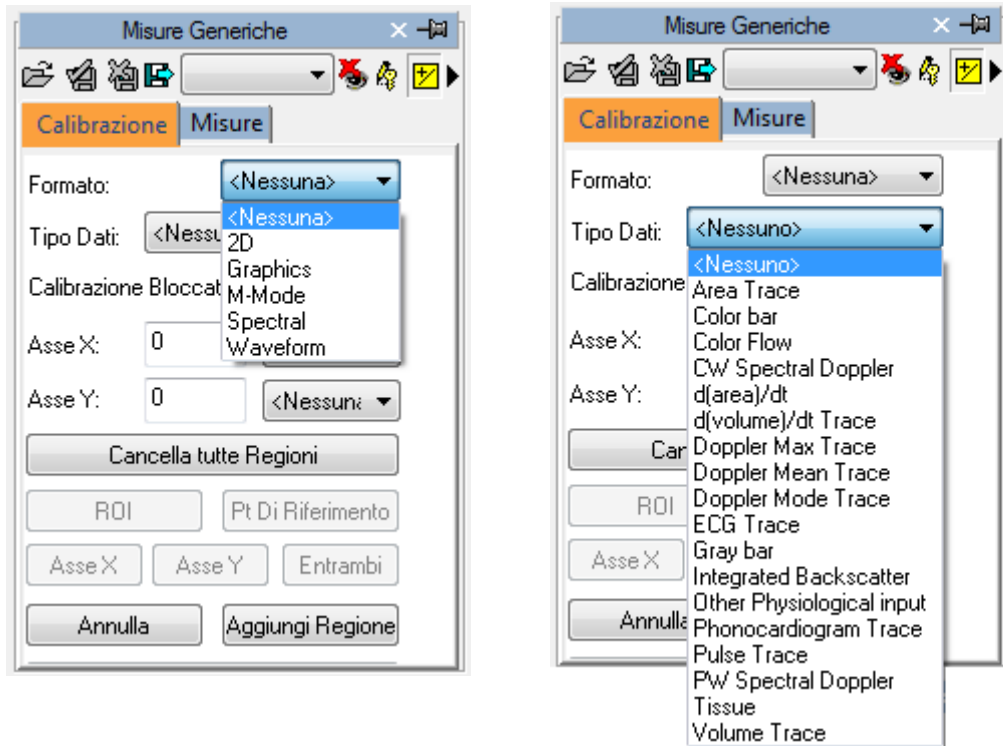


Successivamente è necessario stabilire (agendo sui tasti *Asse X* e *Asse Y*) i valori da assegnare agli assi componenti l'immagine. Ad esempio, nel caso di un'immagine Doppler, bisogna assegnare un valore di tempo all'asse X e di velocità all'asse Y. Per immagini 2D, che dispongono della stessa unità di misura per entrambi gli assi, è altresì possibile calibrare entrambi gli assi con un unico segmento diagonale mediante il tasto *Entrambi*.

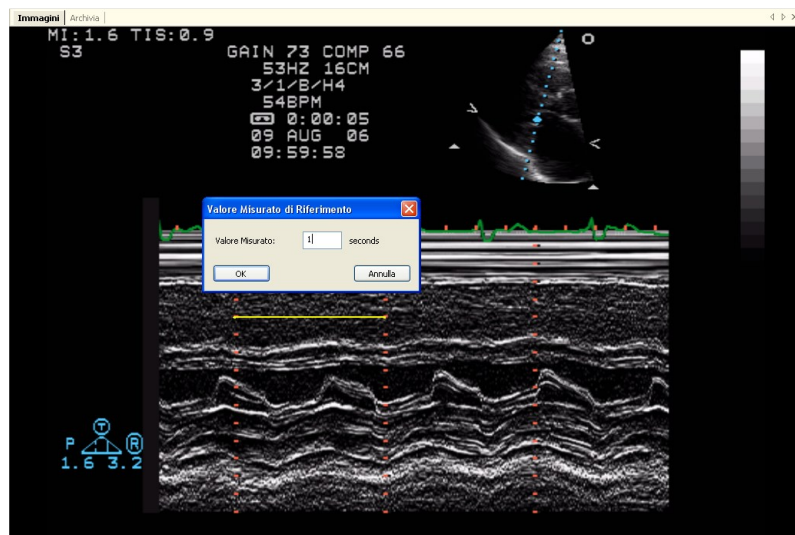

Il cursore sull'immagine cambierà in una penna e consentirà di tracciare un segmento premendo il pulsante sinistro una prima volta nel punto iniziale e poi una seconda volta in quello finale. Al termine una finestra di dialogo vi chiederà di indicare la dimensione del segmento tracciato nell'unità di misura apposta.

E' anche possibile per le immagini Doppler indicare la posizione del punto zero (ovvero della baseline) mediante il tasto *Punto di Rif* ed indicandolo con il mouse.

Una volta eseguita quest'operazione per entrambi gli assi si può decidere se calibrare tutta l'immagine (cliccando su *Aggiungi Regione*) o selezionare una ROI (regione d'interesse) all'interno dell'immagine dove rendere valida la calibrazione. A tale scopo, selezionando il pulsante *ROI*, e dopo aver tracciato sull'immagine la regione d'interesse, è possibile calibrarla cliccando su *Aggiungi Regione*:

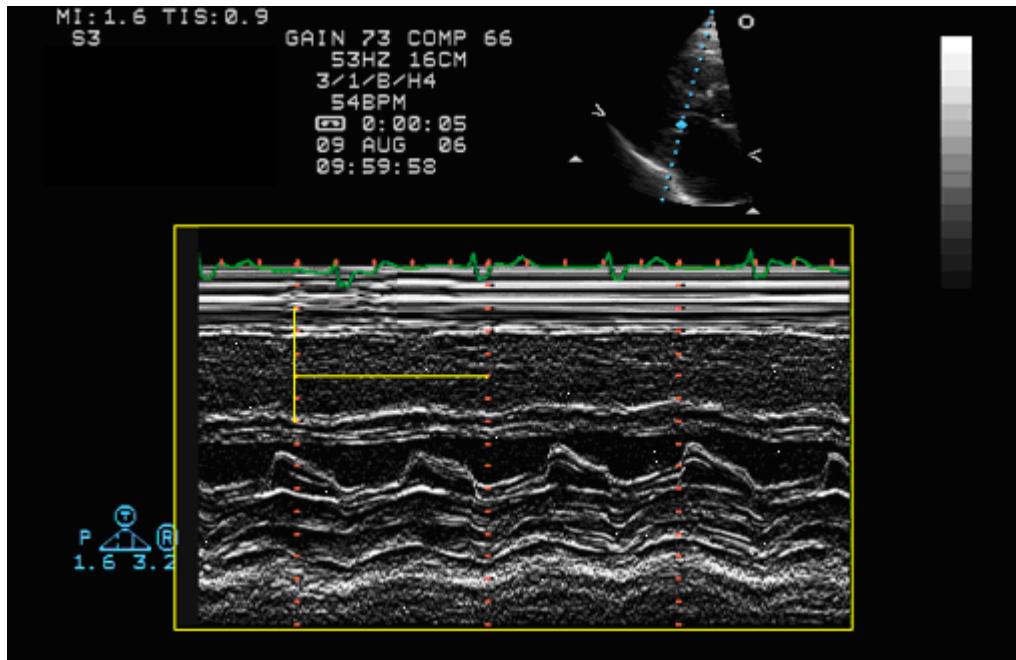

Passando il puntatore del mouse sulla regione calibrata, nel riquadro della calibrazione appariranno i dati appena impostati.



In assenza di una corretta calibrazione le misure sull'immagine non sono valide.



Il programma non effettua alcun controllo sulla consistenza del fattore di calibrazione. E' sempre necessario verificare il fattore calcolato per controllare se è ammissibile.



L'accuratezza del fattore di calibrazione dipende dall'accuratezza con cui viene tracciato il segmento da misurare ed è direttamente proporzionale alla dimensione della struttura in pixels.

A questo punto siamo pronti per eseguire delle misure off-line sulle immagini di nostro interesse. Scelta l'immagine su cui eseguire la misura è necessario selezionare, all'interno del pannello di misure, il parametro da misurare.



Le misure generiche sono solo temporanee e non sono salvate su di un oggetto DICOM SR.

Cliccando sull'elemento da misurare il puntatore del mouse assume la forma di una penna e a quel punto con dei semplici click sull'immagine il prodotto traccia la misura (in giallo).

Per effettuare la misura, premere il tasto relativo alla misura che si desidera effettuare. Posizionare poi il cursore del mouse sul punto di partenza della misura, esso prenderà la forma di una penna. Cliccare sul punto e muovere il mouse nel punto di chiusura della misura. Cliccare nuovamente e la misura sarà effettuata e il suo valore verrà riportato nel relativo campo.

Nel caso di misure più complesse (ad esempio aree), si fissa con ogni click un punto dell'area e il software crea una linea morbida passante per tali punti - "spline" - così da rendere la forma armonizzata. Un doppio click indica la fine della misura. In caso di errore, agendo col tasto destro del mouse, si possono cancellare punti o, con un doppio click, l'intera misura.

Non tutte le misure sono disponibili su tutti i tipi d'immagine. Infatti provando a fare una misura di area su un'immagine doppler (ad esempio) si riceve un messaggio di errore, infatti il doppler non è calibrato per effettuare misure di area o di lunghezza.

14.2.2 I CALCOLI E LE FORMULE

Una volta acquisite tutte le informazioni necessarie, il software permette di calcolare valori derivati semplici o complessi applicando delle formule matematiche.



In assenza di un calibrazione valida le misure effettuate non sono valide.



Il programma non effettua alcun controllo di consistenza del fattore di calibrazione. E' sempre necessario controllare il valore del fattore di calibrazione calcolato per verificare che sia ammissibile.



Il software non effettua alcun controllo sulla validità della misura e/o corrispondenza alla struttura misurata. L'operatore è tenuto a controllare la correttezza della struttura selezionata e della misura stessa mediante il riscontro visivo del grafico della misura visualizzato.

14.3. GESTIONE DELLE MISURE


Il prodotto fornisce una gestione dettagliata delle misure effettuate.

Quando una misura è già presente e viene ri-eseguita, il software, di default, sostituisce il nuovo valore al posto di quello vecchio che viene cancellato.


Tuttavia si può eseguire più di una misura sullo stesso campione (o su campioni diversi) calcolandone la media e la deviazione standard. Effettuando più misurazioni come risultato ne viene mostrata la media. Per decidere di effettuare misurazioni ripetute bisogna agire sul relativo pulsante come mostrato di seguito:



Nel caso di misure ripetute il valore mostrato accanto alla misura è quello della media aritmetica. Comunque rimane possibile visualizzare tutti i campioni acquisiti. A fianco di ogni misura c'è una freccia che permette di accedere a un menù di gestione della singola misura:

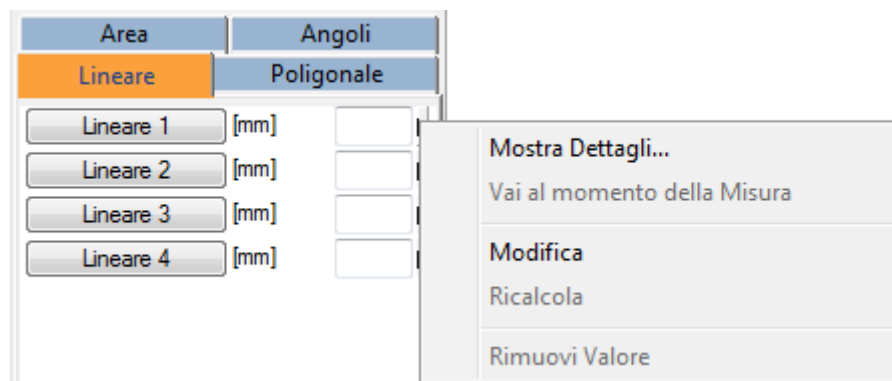

Cliccando sulla freccia e poi su Mostra Dettagli, si accede a una finestra dove sono mostrati tutti i campioni presi per quella misura, la media e la deviazione standard:

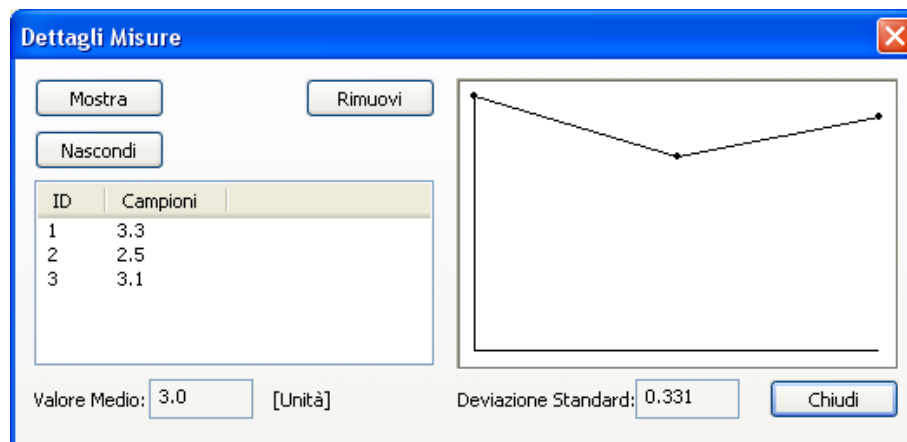

Esiste la possibilità di cancellare un valore misurato se ci sembra sbagliato, semplicemente selezionandolo e cliccando su Rimuovi. Con i pulsanti Mostra e Nascondi è invece possibile visualizzare simultaneamente o nascondere le misure sull'immagine.

Un'altra funzione molto interessante è quella che consente, in qualsiasi momento, di recuperare l'immagine e il momento in cui è stata eseguita la misura. Sempre all'interno del menù delle misure, cliccando su *Vai al Momento della Misura*, il software seleziona automaticamente l'immagine e lo specifico *fotogramma* sul quale la misura è stata effettuata.



La funzione *Vai al Momento della Misura* è disponibile solo per misure effettuate off-line con ComPACS.

14.4. IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE

Questo modulo consente importazioni personalizzate per ciascun utente, tramite la finestra di *Impostazioni* del programma, nell'etichetta *Misure Generiche*.

- Abilita la media delle misure all'avvio
- Misure multiple (se la media è abilitata)
- Non visualizzare il valore della misura sull'immagine
- Inverti asse X e Y
- Rileva automaticamente la linea di base Doppler
- Usa il cursore penna originale

“Abilita la media delle misure all'avvio” automaticamente abilita la funzionalità di media quando il modulo viene attivato.

“Misure multiple (se la media è abilitata)” consente all'utente di misurare un parametro specifico più volte, senza dover premere nuovamente sul pulsante corrispondente. La sequenza delle misure può essere interrotta premendo il tasto destro del mouse.

“Non visualizzare il valore della misura sull'immagine” non visualizza l'etichetta e il valore misurato in sovraimpressione sull'immagine.

“Inverti asse X e Y” viene utilizzato se gli assi X e Y devono essere interpretato diversamente in relazione alla misura strutturata da effettuare. Questa opzione può essere abilitata automaticamente all'avvio del modulo.

“Rileva automaticamente la linea di base Doppler” è utilizzato per rilevare automaticamente la linea di base in immagini Doppler e consentire misure di velocità più rapide con un solo click. Questa

funzionalità può essere disabilitata se l'immagine DICOM non contiene una codifica corretta della linea di base.

“Usa il cursore penna originale” utilizza il cursore penna già in uso nelle precedenti revisioni del software. A partire dalla revisione 10.8.6 il cursore penna è stato sostituito con un cursore a forma di mirino.

15. PHILIPS QLAB

15.1. ATTIVAZIONE DI PHILIPS QLAB

Se l'integrazione di Philips QLAB in una ComPACS Workstation è abilitata per il vostro sistema, nella barra degli strumenti sarà presente la seguente icona



Se il pulsante è premuto allora il modulo è già attivo. Altrimenti è possibile attivarlo premendo il pulsante con il mouse.

Durante l'attivazione il modulo richiederà una licenza per l'esecuzione al Server ComPACS. Se la licenza non può essere recuperata il modulo non sarà attivato e verrà invece visualizzato un messaggio di errore.



Nel caso di licenze concorrenti è possibile che tutte le licenze siano già state richieste e assegnate ad altri utenti che utilizzano il sistema in quel momento, e che non vi siano altre licenze disponibili per l'attivazione. Questo è il caso più comune di fallimento.

Il fallimento nell'attivazione del modulo può altresì avvenire se si perde il collegamento di rete con il Server.

Si prega di assicurarsi di rilasciare la licenza del modulo, rilasciando l'apposito pulsante suddetto, dopo averne terminato l'utilizzo in modo da rendere la licenza disponibile per altri utenti di altre postazioni.


Philips QLAB, in aggiunta al viewer di base comprende diversi moduli di analisi che possono essere licenziati separatamente. Per vedere quali sono i moduli licenziati nella vostra workstation cliccare sulla freccia nera puntante verso il basso a fianco al tasto di attivazione. Un menù a tendina mostrerà i moduli disponibili.




In questa finestra è possibile selezionare o deselezionare i moduli che interessano. Cliccando sul tasto QLAB, verranno richieste al server ComPACS solo le licenze selezionate.

15.2. LANCIO DI PHILIPS QLAB

Il plug-in di Philips QLAB può essere attivato semplicemente mediante il tasto destro del mouse sull'anteprima dell'immagine che si desidera analizzare. Il seguente menù verrà mostrato.

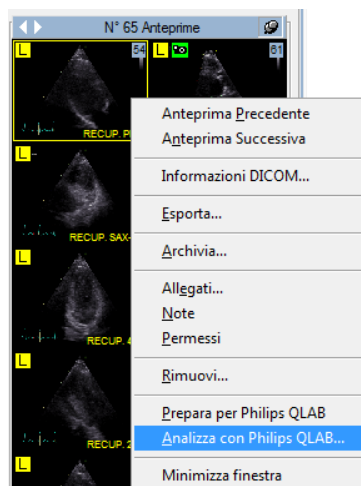


Selezionando *Analizza con Philips QLAB...* il software verrà aperto sull'immagine selezionata.

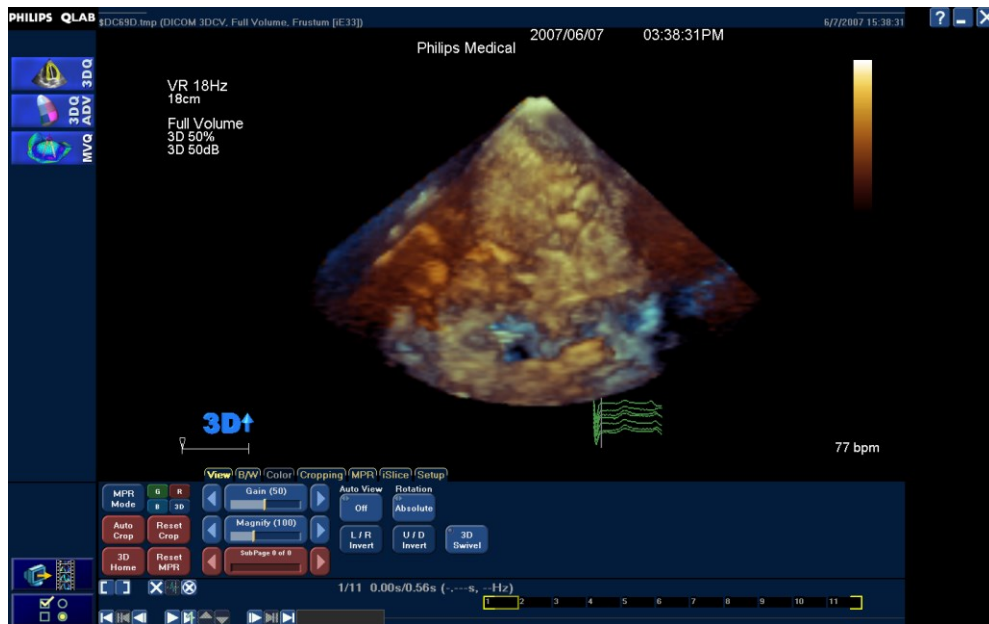

E' possibile inoltre aggiungere in coda per l'analisi più immagini. Questo può essere fatto nel caso in cui si necessiti di analizzare con QLAB più di un elemento.

Inoltre è possibile analizzare un'intera serie cliccando col tasto destro del mouse sulla serie in questione ed utilizzando il relativo menù.

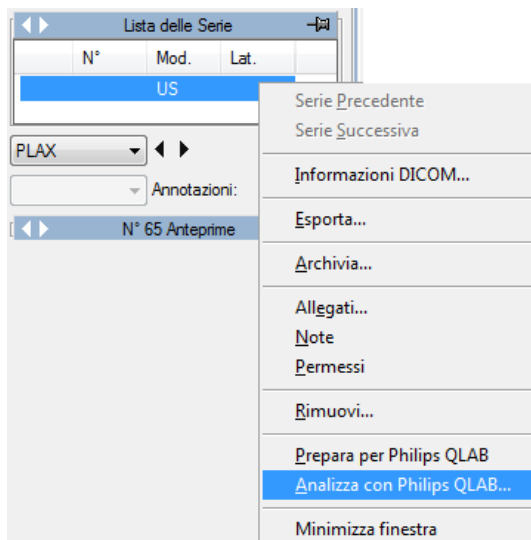

Lavorando con QLAB, il contenuto dello schermo può essere salvato sia come immagine sia come filmato utilizzando il seguente tasto.



L'oggetto salvato sarà automaticamente archiviato in archivio assieme alle immagini originali analizzate.

Allo stesso modo è possibile esportare DICOM SR utilizzando il seguente tasto.



I dati verranno importati automaticamente se un referto è aperto in modifica.



Questo manuale descrive solo come l'applicazione Philips QLAB può essere lanciata. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo, sulle avvertenze e su ulteriori istruzioni operative si prega di far riferimento al manuale dell'utente e alla documentazione di Philips QLAB.

16. INVIA CORRIDOR 4DM

16.1. ATTIVAZIONE DI INVIA CORRIDOR 4DM

Se l'integrazione di INVIA Corridor 4DM in una ComPACS Workstation è abilitata per il vostro sistema, nella barra degli strumenti sarà presente la seguente icona



Se il pulsante è premuto allora il modulo è già attivo. Altrimenti è possibile attivarlo premendo il pulsante con il mouse.

Durante l'attivazione il modulo richiederà una licenza per l'esecuzione al Server ComPACS. Se la licenza non può essere recuperata il modulo non sarà attivato e verrà invece visualizzato un messaggio di errore.




Nel caso di licenze concorrenti è possibile che tutte le licenze siano già state richieste e assegnate ad altri utenti che utilizzano il sistema in quel momento, e che non vi siano altre licenze disponibili per l'attivazione. Questo è il caso più comune di fallimento.

Il fallimento nell'attivazione del modulo può altresì avvenire se si perde il collegamento di rete con il Server.

Si prega di assicurarsi di rilasciare la licenza del modulo, rilasciando l'apposito pulsante suddetto, dopo averne terminato l'utilizzo in modo da rendere la licenza disponibile per altri utenti di altre postazioni.

16.2. LANCIO DI INVIA CORRIDOR 4DM

INVIA Corridor 4DM può essere attivato semplicemente mediante il tasto destro del mouse sulla finestra del paziente o dell'esame che si desidera analizzare. Tipicamente questa operazione viene eseguita a livello esame.

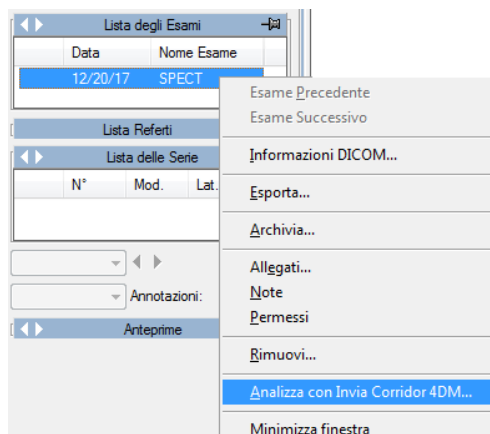

Selezionando *Analizza con Invia Corridor 4DM...*, il modulo verrà immediatamente aperto sulle immagini selezionate:



Durante l'utilizzo dell'applicativo INVIA Corridor 4CM, acquisizioni di immagini derivate o analisi effettuate possono essere salvate. Gli oggetti salvati saranno automaticamente memorizzati nell'archivio assieme alle immagini originali analizzate.



Questo manuale descrive solo come l'applicazione INVIA Corridor 4DM può essere lanciata. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo, sulle avvertenze e su ulteriori istruzioni operative si prega di far riferimento al manuale dell'utente e alla documentazione di INVIA.

17. GE ECHOPAC PLUGIN

17.1. ATTIVAZIONE DEL PLUGIN GE ECHOPAC

Se l'integrazione di General Electric EchoPAC plugin in una ComPACS Workstation è abilitata per il vostro sistema, nella barra degli strumenti sarà presente la seguente icona



Se il pulsante è premuto allora il modulo è già attivo. Altrimenti è possibile attivarlo premendo il pulsante con il mouse.

Durante l'attivazione il modulo richiederà una licenza per l'esecuzione al Server ComPACS in aggiunta alla licenza del plugin fornita da General Electric. Se la licenza non può essere recuperata il modulo non sarà attivato e verrà invece visualizzato un messaggio di errore.



Nel caso di licenze concorrenti è possibile che tutte le licenze siano già state richieste e assegnate ad altri utenti che utilizzano il sistema in quel momento, e che non vi siano altre licenze disponibili per l'attivazione. Questo è il caso più comune di fallimento.


Il fallimento nell'attivazione del modulo può altresì avvenire se si perde il collegamento di rete con il Server.

Si prega di assicurarsi di rilasciare la licenza del modulo, rilasciando l'apposito pulsante suddetto, dopo averne terminato l'utilizzo in modo da rendere la licenza disponibile per altri utenti di altre postazioni.

17.2. LANCIO DI GE ECHOPAC PLUGIN


Il plug-in di EchoPAC può essere attivato semplicemente mediante il tasto destro del mouse sulla finestra del paziente, dell'esame, della serie o sull'anteprima dell'immagine che si desidera analizzare. Tipicamente questa operazione viene eseguita a livello esame.

Il seguente menù verrà mostrato.

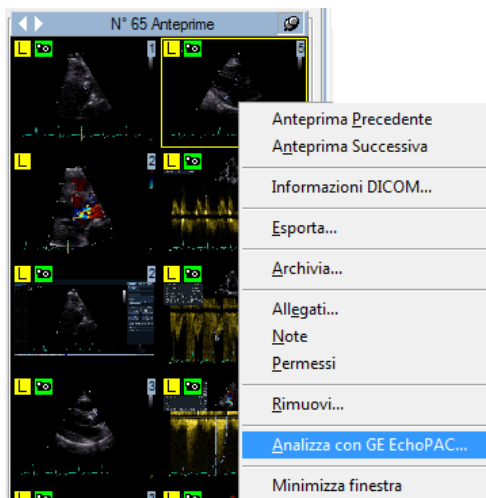

Selezionando *Analizza con GE EchoPAC...* il software verrà aperto sull'elemento selezionato.

Lavorando con EchoPAC, il contenuto dello schermo può essere salvato sia come immagine sia come filmato utilizzando il seguente tasto.

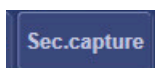

L'oggetto salvato sarà automaticamente archiviato in archivio assieme alle immagini originali analizzate.

Se delle misure sono effettuate durante l'utilizzo de plugin, un oggetto DICOM SR verrà salvato automaticamente quando l'utente termina tale utilizzo e ritorna in ComPACS. Questo consente di importare le misure nel referto.



Questo manuale descrive solo come l'applicazione GE EchoPAC plugin può essere lanciata. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo, sulle avvertenze e su ulteriori istruzioni operative si prega di far riferimento al manuale dell'utente e alla documentazione di General Electric.

18. ANALISI TOMTEC

18.1. ATTIVAZIONE DEL PLUGIN DI ANALISI TOMTEC

Se l'integrazione di moduli di analisi TomTec in una ComPACS Workstation è abilitata per il vostro sistema, nella barra degli strumenti sarà presente la seguente icona



Se il pulsante è premuto allora il modulo è già attivo. Altrimenti è possibile attivarlo premendo il pulsante con il mouse.

Durante l'attivazione il modulo richiederà una licenza per l'esecuzione al Server ComPACS in aggiunta alla licenza fornita dal server di licenze TomTec. Se la licenza non può essere recuperata il modulo non sarà attivato e verrà invece visualizzato un messaggio di errore.



Nel caso di licenze concorrenti è possibile che tutte le licenze siano già state richieste e assegnate ad altri utenti che utilizzano il sistema in quel momento, e che non vi siano altre licenze disponibili per l'attivazione. Questo è il caso più comune di fallimento.

Il fallimento nell'attivazione del modulo può altresì avvenire se si perde il collegamento di rete con il Server.


Si prega di assicurarsi di rilasciare la licenza del modulo, rilasciando l'apposito pulsante suddetto, dopo averne terminato l'utilizzo in modo da rendere la licenza disponibile per altri utenti di altre postazioni.

Il plugin di analisi TomTec, in aggiunta al visualizzatore base Image-Com, può comprendere diversi moduli con licenza indipendente. Quali moduli specifici sono attivi in licenza può essere verificato all'interno del plugin TomTec una volta che tale plugin viene attivato.

18.2. LANCIO DELL'ANALISI TOMTEC

Il plug-in di TomTec può essere attivato semplicemente mediante il tasto destro del mouse sulla finestra del paziente, dell'esame, della serie o sull'anteprima dell'immagine che si desidera analizzare. Tipicamente questa operazione viene eseguita a livello esame.

Il seguente menù verrà mostrato.

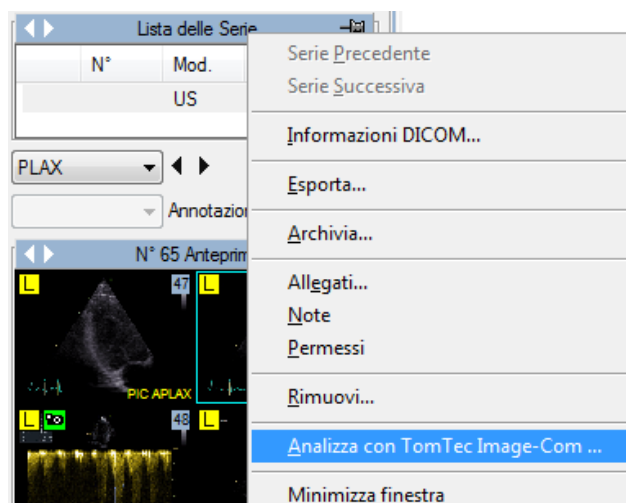

Selezionando *Analizza con TomTec Image-Com...* il software verrà aperto sull'elemento selezionato.

Lavorando con TomTec, il contenuto dello schermo può essere salvato sia come immagine sia come filmato utilizzando il seguente tasto.



L'oggetto salvato sarà automaticamente archiviato in archivio assieme alle immagini originali analizzate.

Se delle misure sono effettuate durante l'utilizzo de plugin, un oggetto DICOM SR verrà salvato automaticamente quando l'utente termina tale utilizzo e ritorna in ComPACS. Questo consente di importare le misure nel referto.




Questo manuale descrive solo come l'applicazione TomTec Image-Com può essere lanciata. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo, sulle avvertenze e su ulteriori istruzioni operative si prega di far riferimento al manuale dell'utente e alla documentazione di TomTec.

19. ANALISI MEDIS

19.1. ATTIVAZIONE DEL PLUGIN DI ANALISI MEDIS

Se l'integrazione di moduli di analisi MEDIS in una ComPACS Workstation è abilitata per il vostro sistema, nella barra degli strumenti sarà presente la seguente icona

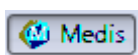

Se il pulsante è premuto allora il modulo è già attivo. Altrimenti è possibile attivarlo premendo il pulsante con il mouse.

Durante l'attivazione il modulo richiederà una licenza per l'esecuzione al Server ComPACS in aggiunta alla licenza fornita dal sistema di licenze Medis. Se la licenza non può essere recuperata il modulo non sarà attivato e verrà invece visualizzato un messaggio di errore.



Nel caso di licenze concorrenti è possibile che tutte le licenze siano già state richieste e assegnate ad altri utenti che utilizzano il sistema in quel momento, e che non vi siano altre licenze disponibili per l'attivazione. Questo è il caso più comune di fallimento.

Il fallimento nell'attivazione del modulo può altresì avvenire se si perde il collegamento di rete con il Server.


Si prega di assicurarsi di rilasciare la licenza del modulo, rilasciando l'apposito pulsante suddetto, dopo averne terminato l'utilizzo in modo da rendere la licenza disponibile per altri utenti di altre postazioni.

Il plugin di analisi Medis, in aggiunta al visualizzatore base della Medis Suite, può comprendere diversi moduli con licenza indipendente. Quali moduli specifici sono attivi in licenza può essere verificato all'interno del visualizzatore della Medis Suite una volta che tale plugin viene attivato.

19.2. LANCIO DELL'ANALISI MEDIS

Il plug-in analisi Medis può essere attivato semplicemente mediante il tasto destro del mouse sulla finestra del paziente, dell'esame, della serie o sull'anteprima dell'immagine che si desidera analizzare. Tipicamente questa operazione viene eseguita a livello esame.

Il seguente menù verrà mostrato.

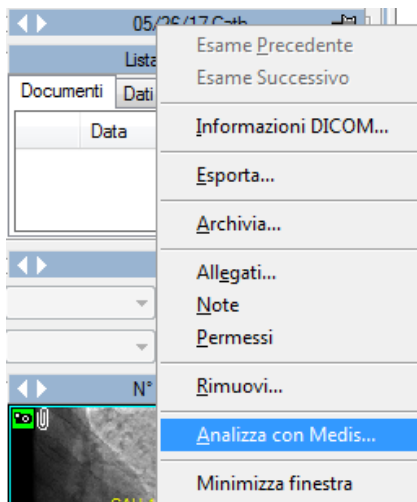

Selezionando *Analizza con Medis...* il software verrà aperto sull'elemento selezionato.

Lavorando con Medis Suite, il contenuto dello schermo può essere salvato sia come immagine sia come filmato.

L'oggetto salvato sarà automaticamente archiviato in archivio assieme alle immagini originali analizzate.

Se delle misure sono effettuate durante l'utilizzo de plugin, un oggetto DICOM SR verrà salvato automaticamente quando l'utente termina tale utilizzo e ritorna in ComPACS. Questo consente di importare le misure nel referto.



Questo manuale descrive solo come l'applicazione Medis Suite può essere lanciata. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo, sulle avvertenze e su ulteriori istruzioni operative si prega di far riferimento al manuale dell'utente e alla documentazione di Medis.

20. ANALISI EPSILON ECHOINSIGHT

20.1. ATTIVAZIONE DEL PLUGIN DI ANALISI ECHO INSIGHT

Se l'integrazione di moduli di analisi Epsilon Echo Insight in una ComPACS Workstation è abilitata per il vostro sistema, nella barra degli strumenti sarà presente la seguente icona



Se il pulsante è premuto allora il modulo è già attivo. Altrimenti è possibile attivarlo premendo il pulsante con il mouse.

Durante l'attivazione il modulo richiederà una licenza per l'esecuzione al Server ComPACS in aggiunta alla licenza fornita dal sistema di licenze Epsilon. Se la licenza non può essere recuperata il modulo non sarà attivato e verrà invece visualizzato un messaggio di errore.



Nel caso di licenze concorrenti è possibile che tutte le licenze siano già state richieste e assegnate ad altri utenti che utilizzano il sistema in quel momento, e che non vi siano altre licenze disponibili per l'attivazione. Questo è il caso più comune di fallimento.

Il fallimento nell'attivazione del modulo può altresì avvenire se si perde il collegamento di rete con il Server.


Si prega di assicurarsi di rilasciare la licenza del modulo, rilasciando l'apposito pulsante suddetto, dopo averne terminato l'utilizzo in modo da rendere la licenza disponibile per altri utenti di altre postazioni.

Il plugin di analisi Echo Insight, in aggiunta al visualizzatore base Epsilon, può comprendere diversi moduli con licenza indipendente. Quali moduli specifici sono attivi in licenza può essere verificato all'interno del visualizzatore Epsilon una volta che tale plugin viene attivato.

20.2. LANCIO DELL'ANALISI ECHO INSIGHT

Il plug-in analisi Echo Insight può essere attivato semplicemente mediante il tasto destro del mouse sulla finestra del paziente, dell'esame, della serie o sull'anteprima dell'immagine che si desidera analizzare. Tipicamente questa operazione viene eseguita a livello esame.

Il seguente menù verrà mostrato.

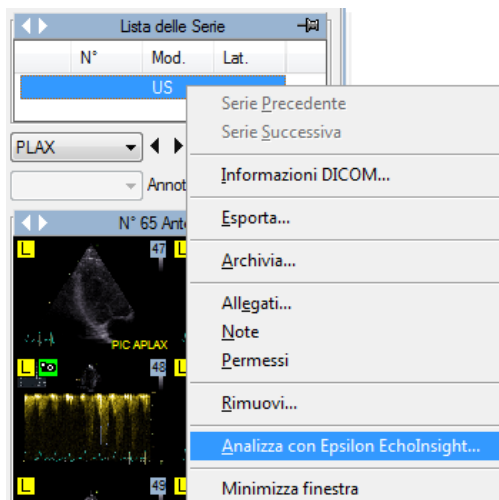

Selezionando *Analizza con Epsilon EchoInsight...* il software verrà aperto sull'elemento selezionato.

Lavorando con l'applicazione Epsilon, il contenuto dello schermo può essere salvato sia come immagine sia come filmato.

L'oggetto salvato sarà automaticamente archiviato in archivio assieme alle immagini originali analizzate.

Se delle misure sono effettuate durante l'utilizzo de plugin, un oggetto DICOM SR verrà salvato automaticamente quando l'utente termina tale utilizzo e ritorna in ComPACS. Questo consente di importare le misure nel referto.



Questo manuale descrive solo come l'applicazione Epsilon può essere lanciata. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo, sulle avvertenze e su ulteriori istruzioni operative si prega di far riferimento al manuale dell'utente e alla documentazione di Epsilon.


21. GESTIONE DEGLI ECG

21.1. REVISIONE DI ECG DICOM



Per poter revisionare gli ECG DICOM in ComPACS è necessario che il modulo ECG Viewer sia licenziato. Il visualizzatore ECG non richiede alcuna attivazione manuale: la licenza viene attivata automaticamente alla login.

Nel caso in cui un ECG DICOM sia presente nell'esame selezionato, un'anteprima simile a quella mostrata sotto sarà visualizzata nella finestra delle Anteprime.

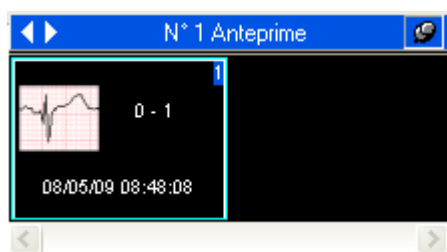

Cliccando sull'anteprima, l'ECG DICOM verrà aperto in revisione.

Nella parte in alto della finestra di visualizzazione, se l'ECG è aperto a tutto schermo, è presente una serie di controlli:



Il menu a tendina *Sequenza* elenca tutte le sequenze disponibili. Il menu a tendina *Formato Schermo* permette di scegliere il formato di visualizzazione desiderato. Il menu a tendina *Formato Referto* permette di scegliere il formato per la generazione di un referto. Per alcuni referti a più pagine è possibile scegliere tra un'impaginazione basata sulle *derivazioni* o sull'asse temporale (*tempo*): nel primo caso ogni pagina conterrà un sottoinsieme delle derivazioni mentre nel secondo caso ogni pagina conterrà un sottoinsieme dell'arco temporale.

I menu a tendina *Velocità* e *Calibrazione* definiscono la calibrazione orizzontale e verticale.

Il tasto *Stampa* permette di stampare la sequenza visualizzata in scala reale.

Il tasto *Referto* permette di generare un referto o di aprire il referto più recente, se già esistente.


Il tasto *Approva* permette di approvare direttamente un referto sulla base dell'interpretazione importata.

Il tasto *Confronta* permette di confrontare diverse tracce ECG dello stesso paziente, se già precedentemente aperte per revisione.

Il tasto *Tutti i Marker* consente di visualizzare in punti fiduciali rilevati, se presenti nel file DICOM. Questi punti saranno utilizzati per allineare i complessi mediani nella modalità di confronto sovrapposto.

Utilizzando il menu a tendina associato al pulsante *Tutti i Marker*, è possibile limitare la visualizzazione a punti fiduciali di interesse: per esempio *Inizio P* oppure *Inizio QRS*. Il nome del pulsante viene modificato sulla base dell'impostazione scelta.

Immediatamente sotto tali controlli viene visualizzata la traccia ECG.

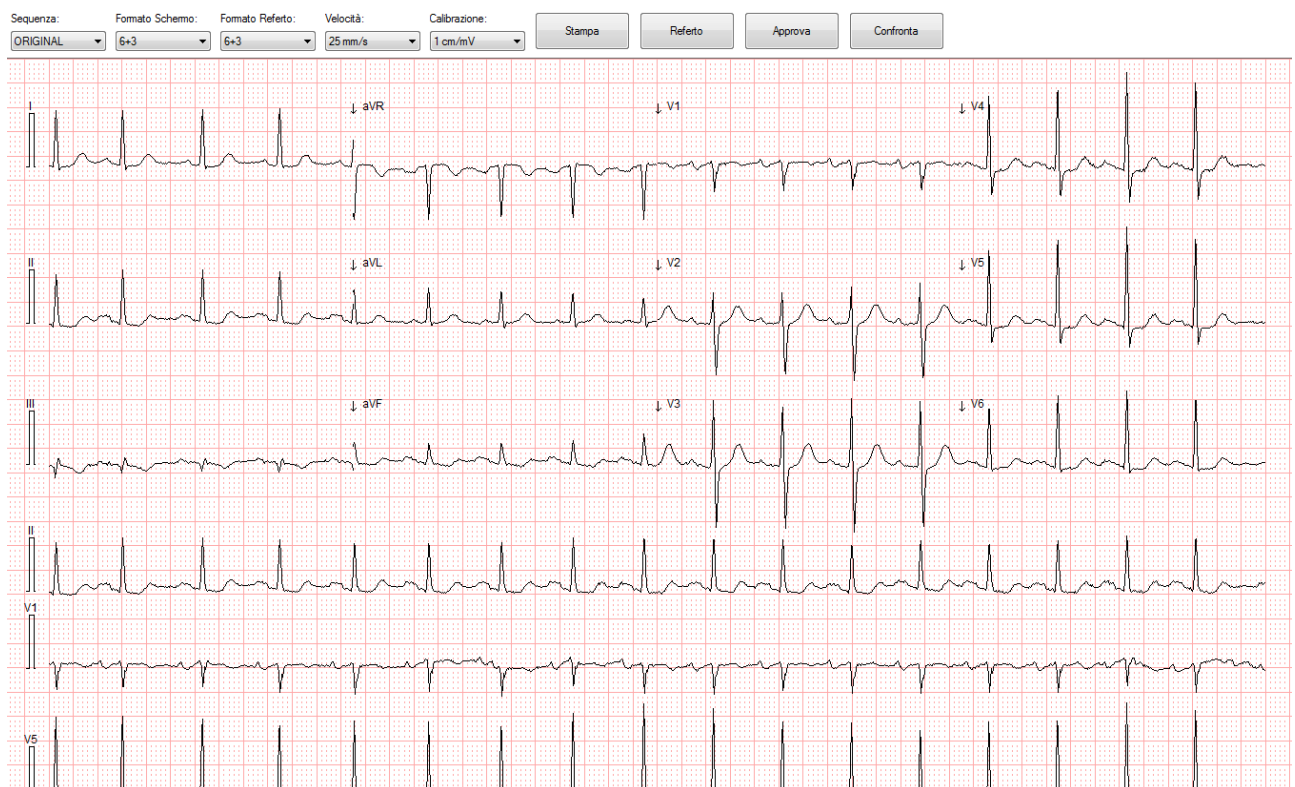

Uno slider orizzontale può essere presente se l'intera traccia ECG non può essere visualizzata contemporaneamente. Spostando lo slider è possibile revisionare l'intera sequenza temporale.

Uno slider verticale può essere presente se tutte le tracce non possono essere visualizzate contemporaneamente. Spostando lo slider è possibile visualizzare tutte le tracce sulla base del formato di visualizzazione prescelto.

Invece, sulla destra è possibile trovare informazione sulla persona, esame e oggetto ECG visualizzato, incluso le informazioni sul referto. Alcune informazioni possono non essere visibili se non presenti nel file DICOM.

| | | | |
|---------------|---|----------|--------------|
| ID Persona: | SAMPLE-ECG | | |
| Cognome: | Susas | | |
| Nome: | Doe | | |
| Sesso: | Femmina | PAD/PAS: | 95/190 mm |
| Nato il: | 1935/18/12 | Età: | 80 anni |
| Altezza: | 1,53 m | Peso: | 62,0 kg |
| Data Esame: | 2016/02/10 15:09:45 | | |
| Accession N.: | 378881 | | |
| Istituto: | Cardiologia TOLMEZZO | | |
| Produttore: | Mortara Instrument, Inc. el250 | | |
| Postazione: | | | |
| Fonte: | Dispositivo | | |
| Frequenza: | [0.05-300] Hz | | |
| Freq. Card.: | 103 BPM | PR int.: | 185 ms |
| Dur. QRS: | 85 ms | QT/QTc: | 328 / 387 ms |
| Assi P-R-T: | 49 / 27 / 7 | | |
| Conclusioni: | TACHICARDIA SINUSALE SOTTOSLIVELLAMENTO DI ST MODERATO ECG ANORMALE Refertato da _____ | | |



Gli oggetti ECG possono anche essere processati utilizzando gli stessi strumenti descritti in questo manuale per le immagini. Ad esempio le funzionalità relative allo zoom, all'esportazione e all'archiviazione sono tutte disponibili.

21.2. ATTIVAZIONE DELL'ANALISI E REFERTAZIONE ECG

Se il modulo di analisi e refertazione ECG è abilitato sul vostro sistema, il seguente pulsante sarà visibile sulla barra dei comandi, nella parte destra:



Se il pulsante è premuto allora il modulo è già attivo. Altrimenti è possibile attivarlo premendo il pulsante con il mouse.

Durante l'attivazione il modulo richiederà una licenza per l'esecuzione al Server ComPACS. Se la licenza non può essere recuperata il modulo non sarà attivato e verrà invece visualizzato un messaggio di errore.



Nel caso di licenze concorrenti è possibile che tutte le licenze siano già state richieste e assegnate ad altri utenti che utilizzano il sistema in quel momento, e che non vi siano altre licenze disponibili per l'attivazione. Questo è il caso più comune di fallimento.

Il fallimento nell'attivazione del modulo può altresì avvenire se si perde il collegamento di rete con il Server.

Si prega di assicurarsi di rilasciare la licenza del modulo, rilasciando l'apposito pulsante suddetto, dopo averne terminato l'utilizzo in modo da rendere la licenza disponibile per altri utenti di altre postazioni.

Quando il modulo è attivo una finestra denominata "Analisi ECG" viene aggiunta ed è visibile sulla finestra dei controlli. Tale finestra può essere aperta o minimizzata con un singolo click del pulsante sinistro del mouse sulla barra blu.



21.3. REFERTAZIONE

Il referto preliminare dell'ECG, importato dall'elettrocardiografo, viene visualizzato alla destra delle tracce ECG.

In base al sistema ECG utilizzato questa parte può essere vuota o contenere diagnosi automatiche effettuate dal software a bordo del dispositivo.

Cliccando il testo *Referto* un nuovo referto verrà generato o, qualora un referto sia già esistente, tale referto verrà aperto in scrittura.

Immagini | Archivio **Referto**

ID Persona: Test-ECG Nome: Test ECG Data Esame: 03/20/09 Data Referto: 06/01/12
 Stato: Originale, Parziale Lingua: Latin 1 (Europa Over) Vista: RpvITA Schema: Rptita

Storia delle Revisioni **Dati Generali**

- Dati Generali
 Data Rich. Sesso Altezza Peso Sup.Corp. Età

Referto

PR Int. Dur. QRS. QT/QTc QT/QTc F.C. PS PD

Conclusioni
 RITMO SINUSALE
 POSSIBILE INGRANDIMENTO ATRIALE SINISTRO [ONDA P -0.1 MV IN V1/V2]
 INFARTO INFERIORE [ONDA Q DI 40 MS E/O ANOMALIE DI ST/T IN DII/AVF], PROBABILMENTE PREGRESSO
 ST E ANOMALIE DELL'ONDA T, POSSIBILE ISCHEMIA LATERALE [ONDA T -0.1+ MV IN DI/AVL/V5/V6]
 ECG ANORMALE
 REPORT NON CONFERMATO


Il tasto *Approva* permette di approvare direttamente un referto sulla base dell'interpretazione importata.

Si prega di fare riferimento al capitolo "REFERTAZIONE" per maggiori dettagli.

21.4. CONFRONTO

Il tasto *Confronta* permette di confrontare diverse tracce ECG dello stesso paziente, se già precedentemente aperte per revisione.

Un insieme di controlli aggiuntivi verrà visualizzato.

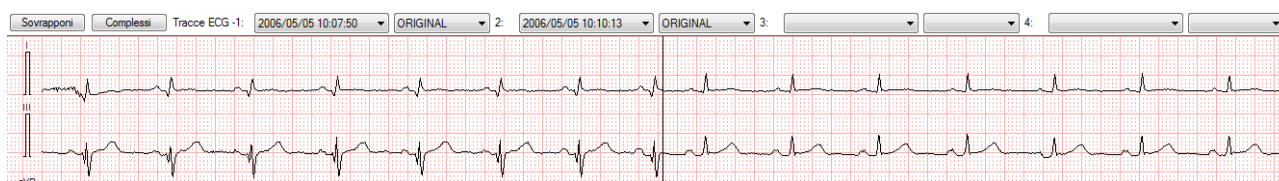

Ogni menu a tendina consente la selezione della specifica traccia e sequenza da confrontare. E' possibile selezionare fino a quattro diverse tracce.

Lo schermo sarà suddiviso verticalmente in diverse sezioni che riflettono le diverse tracce ECG a confronto.

Il tasto *Sovrapponi*, se premuto, consente di sovrapporre le tracce a confronto, ognuna visualizzata con un diverso colore.

Il tasto *Complessi*, se premuto, confronta i diversi complessi se presenti.


21.5. MISURE OFF-LINE


Il modulo ECG offre la possibilità di effettuare misure su oggetti ECG DICOM.

Misure generiche sono disponibili nel tab *Generico* della finestra *Analisi ECG*.



Le misure generiche sono solo temporanee. Esse non vengono memorizzate nel database di ComPACS e non possono quindi essere conservate.

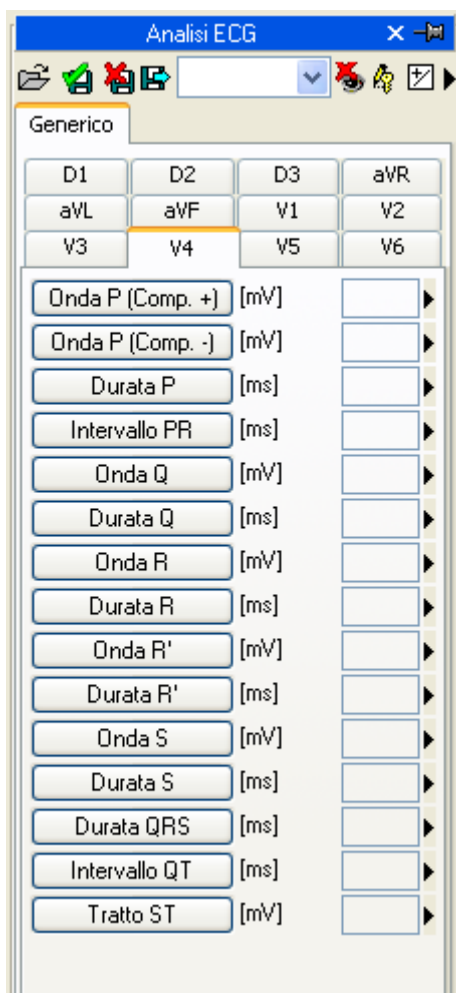

Per accedere ad un più avanzato e personalizzato pannello di misure, aprire un referto DICOM SR ECG o crearne uno nuovo. Questa operazione può essere effettuata cliccando sull'icona  della barra degli strumenti come descritto nel capitolo “Gestione documenti e referti”.

La finestra di analisi verrà estesa con un tab aggiuntivo chiamato *Strutturato* contenente tutte le misure strutturate. Il contenuto e l'aspetto di tale tab dipende dagli schemi di refertazione e di analisi configurati dal vostro amministratore di sistema per la specifica postazione o utente.



Le misure strutturate vengono salvate nell'oggetto di tipo DICOM SR a cui si riferiscono.

In tale interfaccia si riempiranno (di numeri di misure) solo i campi corrispondenti ai dati presenti nell'oggetto aperto. Per correggere le misure presenti cliccare sull'icona di editing:



Per chiudere e salvare i cambiamenti effettuati cliccare sull'icona *Salva e Chiudi*:



Per chiudere senza salvare eventuali cambiamenti apportati cliccare sull'icona *Chiudi e ignora le modifiche*:



Per esportare i dati è necessario cliccare sull'icona *Esporta*:



Si aprirà un'interfaccia in cui selezionare il formato dei dati e la loro destinazione.

La finestra di dialogo "Esportazione Dati dell'Analisi" presenta un titolo a sfondo blu con il testo "Esportazione Dati dell'Analisi". Sotto il titolo, ci sono due campi di input: "Esporta Schema:" con un menu a tendina che mostra "< Excel Report - Dati in Colonne >" e "Descrizione Colonne (Unicode)" con un campo di testo che contiene "W:\PREDICTOR-Variable-Output.txt" e un pulsante "..." a destra. Sotto questi campi, c'è una sezione "Opzioni" con quattro caselle di controllo: "Solo Presenti", "Solo Misurate", "No Dati Demog." e "Con Dev. Standard". In fondo alla finestra, ci sono quattro pulsanti: "Esporta", "Stampa", "Anteprima" e "Annulla".

Mediante il menu a tendina è altresì possibile selezionare la disposizione degli elementi di misura e calcolo strutturati nella pagina in base alle configurazioni installate.



Questa funzionalità è stata estesa per esportare non solo i valori numerici ma anche altri tipi di campo (testi, diagnosi, date, ecc.). Inoltre l'esportazione include le strutture ripetute ed annidate.

La "Descrizione Colonne" è un semplice file di testo che elenca, in righe separate, i campi che devono essere esportati. Ogni riga ha il formato seguente:

IDCampo; Etichetta - Opzionale; Unità di misura - Opzionale

Se l'etichetta o l'unità di misura non sono specificati, i valori di riferimento verranno utilizzati.

Per le strutture ripetute, la lista dei campi deve essere racchiusa nella seguente struttura:

*BEGINGROUP(ID Struttura); Etichetta – Opzionale; Indice – Opzionale
... elenco dei campi ..
ENDGROUP(ID Struttura)*

L'indice è opzionale. Se omissso tutte le istanze di tali strutture saranno esportate.

Infine alcuni campi speciali consistono in elementi DICOM. Sono identificati con la seguente sintassi:

\$(Gruppo,Elemento); Etichetta - Opzionale;

21.5.1 CALIBRAZIONE TRACCE ECG

Le informazioni di calibrazione sono contenute nel file DICOM ECG. Il prodotto sfrutta tali informazioni per evitare la calibrazione manuale ed assicurare maggiore accuratezza. Per cui la calibrazione dei file ECG per effettuare le misure non è necessaria.


21.5.2 EFFETTUARE MISURE

Una volta che l'oggetto ECG viene scelto, selezionare il valore da misurare dal pannello di misure. Sono presenti due pannelli: il pannello *Generico*, che è sempre disponibile, e il pannello *Strutturato* che dalla propria configurazione e che richiede l'apertura di un referto (inteso come oggetto DICOM SR).



Le misure generiche sono solo temporanee e non vengono memorizzate in un oggetto di tipo DICOM SR.

Cliccando sull'elemento e portando il puntatore del mouse sull'ECG, il puntatore del mouse diventa una penna. Con pochi click sulla traccia ECG, il software traccia la misura e la salva nel database di ComPACS nel formato DICOM SR. La figura seguente mostra un esempio di misura di tempo.

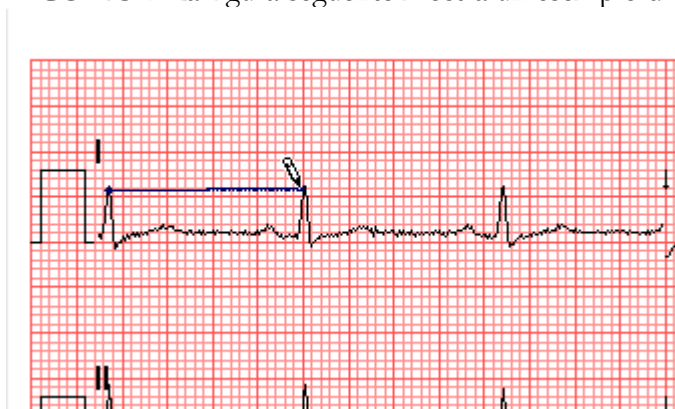

Per procedere nella misura, prima di tutto selezionare la misura desiderata cliccando sul tasto relativo nel pannello di misure. Portare il puntatore del mouse sul punto di partenza della misura (il puntatore diventerà una penna) e cliccare una volta. Spostare il puntatore del mouse sul punto finale della misura e cliccare nuovamente, la misura viene quindi chiusa e il suo valore verrà inserito nella locazione selezionata.

21.5.3 CALCOLI E FORMULE

Il programma è in grado inoltre di effettuare calcoli derivati parametrizzati mediante formule matematiche.



In assenza di una corretta calibrazione le misure sull'immagine non sono valide.



Il programma non effettua alcun controllo sulla consistenza del fattore di calibrazione. E' sempre necessario verificare il fattore calcolato per controllare se è ammissibile.



Il programma non effettua alcun controllo sulla validità clinica delle misure. L'operatore deve verificare visivamente la validità di tutte le misure effettuate.

21.6. GESTIONE DELLE MISURE


Il software permette di gestire in modo dettagliato le misure effettuate

Nel caso in cui una misura sia già presente e ri-effettuata, il programma sostituisce il valore esistente con quello nuovo.


Tuttavia possono essere effettuate ed archiviate più misure sullo stesso campione (o su campioni diversi) calcolandone il valore medio e la deviazione standard. per effettuare misure multiple e visualizzarne il valore medio cliccare sul tasto mostrato di seguito. Nel caso in cui tale modalità sia attivata, il tasto è di colore giallo.



Nel caso di misure ripetute il valore mostrato accanto alla misura è quello della media aritmetica. Comunque rimane possibile visualizzare tutti i campioni acquisiti. A fianco di ogni misura c'è una freccia che permette di accedere a un menù di gestione della singola misura:

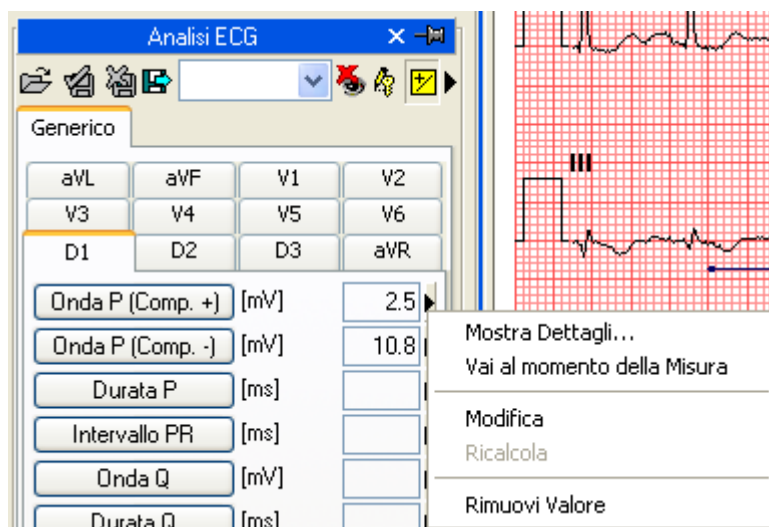


Cliccando sulla freccia e poi su *Mostra Dettagli*, si accede a una finestra dove sono mostrati tutti i campioni presi per quella misura, la media e la deviazione standard.

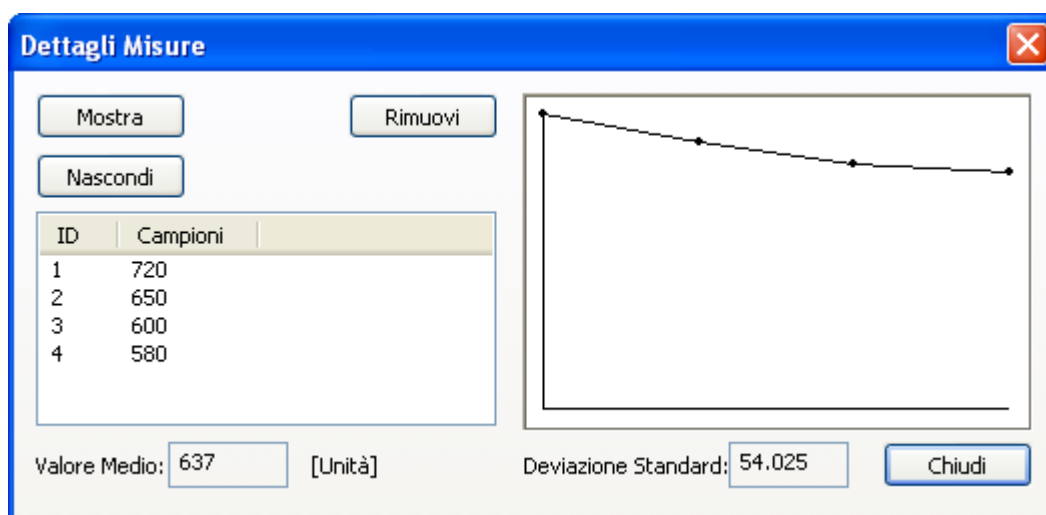

E' inoltre possibile rimuovere un valore di misura, se errato, semplicemente selezionandolo e cliccando sul tasto *Rimuovi*. I tasti *Mostra* e *Nascondi* servono per mostrare o nascondere i valori nel ECG.

Se l'analisi ECG è stata effettuata sullo stesso paziente in diversi esami archiviati in ComPACS, è possibile vedere come specifici campi siano variati nel tempo.

Quest'operazione può essere effettuata cliccando sulla voce di menu *Visualizza le variazioni nel tempo...* Verrà aperta una finestra che mostrerà i diversi valori per la stessa misura nei vari esami sia in formato numerico sia in formato grafico.

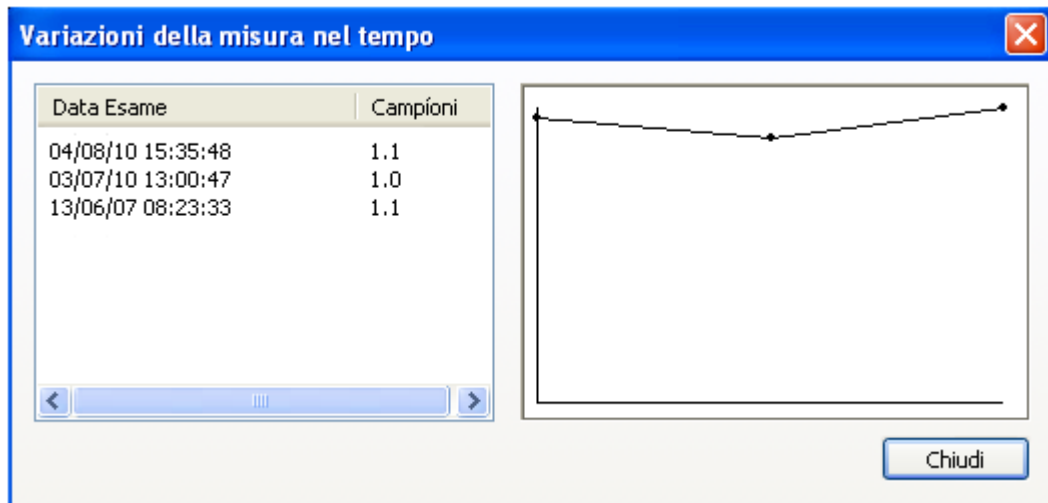

Un'altra funzione molto interessante è quella che consente, in qualsiasi momento, di recuperare la traccia ECG e il momento in cui è stata eseguita la misura. Sempre all'interno del menu delle misure, cliccando su *Vai al Momento della Misura*, il software seleziona automaticamente la traccia sul quale la misura è stata effettuata.



La funzione *Vai al Momento della Misura* è disponibile solo per misure effettuate off-line con ComPACS ECG.

Inoltre, cliccando su *Modifica* è possibile inserire manualmente il valore invece di misurarlo o calcolarlo. Tale valore sarà sottolineato in giallo per evidenziare tale operazione dell'operatore.

| | | | |
|----------|------|------------|---|
| Durata Q | [ms] | <u>145</u> | ▶ |
| Onda R | [mV] | | ▶ |
| Durata R | [ms] | | ▶ |

Per mostrare/nascondere le misure sulle immagini agire sull'icona:



Per mostrare le misure effettuate cliccare sull'icona:



Per chiudere e salvare i cambiamenti effettuati cliccare sull'icona *Salva e Chiudi*:



Per chiudere senza salvare eventuali cambiamenti apportati cliccare sull'icona *Chiudi e ignora le modifiche*:



21.7. IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE

Questo modulo consente importazioni personalizzate per ciascun utente, tramite la finestra di *Impostazioni* del programma, nell'etichetta *ECG*.

| | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|--|
| Formato Schermo: | <input type="text" value="6+3"/> | Colori | |
| Formato Referto: | <input type="text" value="6+3"/> | Sfondo: | <input type="color" value="white"/> |
| Velocità: | <input type="text" value="25 mm/s"/> | Traccia ECG: | <input type="color" value="black"/> |
| Calibrazione: | <input type="text" value="1 cm/mV"/> | Traccia ECG 2: | <input type="color" value="red"/> |
| Zoom di Default: | <input type="text" value="Auto"/> | Traccia ECG 3: | <input type="color" value="magenta"/> |
| <input type="checkbox"/> Abilita la media delle misure all'avvio | | Traccia ECG 4: | <input type="color" value="cyan"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Misure multiple (se la media è abilitata) | | Griglia ECG: | <input type="color" value="lightcoral"/> |
| <input type="checkbox"/> Non visualizzare il valore della misura sulla traccia | | Carattere: | <input type="color" value="black"/> |
| <input type="checkbox"/> Usa il cursore penna originale | | Misure: | <input type="color" value="darkblue"/> |
| <input type="checkbox"/> Ignora le pagine del referto con ECG incompleti | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Visualizza le informazioni ECG sopra la traccia | | | |
| | | | <input type="button" value="Colori Standard"/> |

Il formato di riferimento di visualizzazione e di refertazione, la scala temporale e la calibrazione da utilizzare all'avvio per la visualizzazione degli ECG possono essere impostati.

“Abilita la media delle misure all'avvio” automaticamente abilita la funzionalità di media quando il modulo viene attivato.

“Misure multiple (se la media è abilitata)” consente all'utente di misurare un parametro specifico più volte, senza dover premere nuovamente sul pulsante corrispondente. La sequenza delle misure può essere interrotta premendo il tasto destro del mouse.

“Non visualizzare il valore della misura sulla traccia” non visualizza l’etichetta e il valore misurato in sovraimpressione sulla traccia.

“Usa il cursore penna originale” utilizza il cursore penna già in uso nelle precedenti revisioni del software. A partire dalla revisione 10.8.6 il cursore penna è stato sostituito con un cursore a forma di mirino.

“Ignora le pagine del referto con ECG incompleti” non include nel referto ECG le pagine aggiuntive in cui i campioni del tracciato non coprono la linea temporale completa della pagina.

“Visualizza le informazioni ECG sopra la traccia” visualizza la sezione con le informazioni sopra la traccia ECG e non alla posizione destra di default.

E’ inoltre possibile personalizzare i colori utilizzati per la visualizzazione dei tracciati ECG.

22. REFERTAZIONE

22.1. ATTIVAZIONE DELLA REFERTAZIONE



Per creare un nuovo referto è necessario configurare la propria stazione in modo appropriato. Per ulteriori dettagli fate riferimento al vostro amministratore di sistema e ai manuali dell'amministratore.

Se ComPACS Reporting è abilitato sul vostro sistema, il seguente pulsante sarà visibile sulla barra dei comandi, nella parte destra:



Se il pulsante è premuto allora il modulo è già attivo. Altrimenti è possibile attivarlo premendo il pulsante con il mouse.

Durante l'attivazione il modulo richiederà una licenza per l'esecuzione al Server ComPACS. Se la licenza non può essere recuperata il modulo non sarà attivato e verrà invece visualizzato un messaggio di errore.



Nel caso di licenze concorrenti è possibile che tutte le licenze siano già state richieste e assegnate ad altri utenti che utilizzano il sistema in quel momento, e che non vi siano altre licenze disponibili per l'attivazione. Questo è il caso più comune di fallimento.

Il fallimento nell'attivazione del modulo può altresì avvenire se si perde il collegamento di rete con il Server.

Si prega di assicurarsi di rilasciare la licenza del modulo, rilasciando l'apposito pulsante suddetto, dopo averne terminato l'utilizzo in modo da rendere la licenza disponibile per altri utenti di altre postazioni.

Quando il modulo è attivo, ogni qualvolta che un referto viene creato o modificato, un'apposita finestra sarà visualizzata. Si prega di fare riferimento alle restanti sezioni per ulteriori dettagli.

22.2. CREARE O APRIRE UN REFERTO

Per creare o aprire un referto è necessario aprire un esame. Per i dettagli su come eseguire questa operazione consultate il capitolo Modulo di Archivio.

Dopodiché è sufficiente premere il tasto  sulla barra degli strumenti . Possono verificarsi scenari differenti:

- Non ci sono referti nell'esame selezionato: viene creato un nuovo referto ed una finestra di dialogo vi permetterà di selezionare tutti i parametri necessari.
- Un solo referto è già presente nell'esame selezionato ed è identificato automaticamente dal sistema: il referto viene aperto in modalità modificabile. Si tenga presente che i referti obsoleti (ad esempio referti marcati come predecessori di altri referti) non sono inclusi nel computo complessivo.
- Un solo referto è già presente nell'esame selezionato ma il suo tipo non viene identificato automaticamente dal sistema: una finestra di dialogo vi chiederà di associare il referto ad uno degli schemi di referto configurati nel sistema.
- Diversi referti sono presenti nell'esame selezionato: una finestra di dialogo vi chiederà di confermare la creazione di un nuovo referto e di selezionare i referti esistenti da importare in quello che si sta creando.

Si prega di far riferimento al capitolo “Gestione documenti e referti” per ulteriori e dettagliate informazioni.


Una volta che il referto è aperto, una nuova finestra dei tab chiamata *Referto* si aprirà nel monitor identificato per eseguire quest'operazione. In cima a tale finestra verrà presentato un breve riepilogo del referto.

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|---------|---------------------|--------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
| ID Persona: | TESTMULTI | Nome: | Sample KeyImageNote | Data Ordine: | 08/07/07 | Data Esame: | 08/07/07 | Data Referto: | 12/15/15 |
| Stato: | Originale, Parziale | Lingua: | Unicode | Vista: | TTE | Schema: | Rpt | | |


Il riepilogo presenterà l'identificativo della persona, il nome, la data dell'ordine, la data dell'esame, la data del referto, lo stato del referto (se modificato, verificato, finalizzato, ecc...), la lingua (codifica di caratteri utilizzata), le viste del referto e gli schemi di stampa attualmente scelti.



Le *viste del referto* e gli *schemi di stampa* possono essere cambiati anche dinamicamente, come anche la codifica di caratteri utilizzata, semplicemente agendo sui menù a tendina mostrati sopra. Gli altri campi sono solo di visualizzazione e vengono gestiti direttamente dal software.

I nuovi referti vengono aperti direttamente in modalità modificabile. I referti esistenti invece vengono aperti in modalità di sola visualizzazione. Per modificarli è sufficiente premere il tasto  ed avere i diritti sufficienti per effettuare tale operazione sul referto selezionato.

Nel caso in cui un referto sia già stato approvato e firmato, non è più possibile modificarne il contenuto. E' necessario creare un referto sostitutivo o annullativo cliccando sulla freccia nera puntata verso il basso alla sinistra del tasto *Modifica* e selezionare l'elemento desiderato dal menù a tendina.

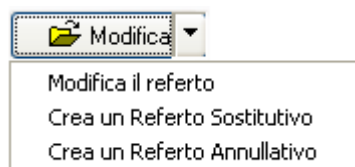

Una volta approvato un referto annullativo, non è più possibile continuare la medesima catena di referti. Una nuova catena dovrà essere creata in tale scenario.

Di seguito sono presentate diverse sottofinestre, anche organizzate con strutture ad etichette (o tab). La prima etichetta (*Storia delle Revisioni*) è sempre presente e fornisce le informazioni cronologiche di revisione del referto. La disposizione delle etichette restanti varia secondo lo schema e della vista specifica scelta. Un possibile esempio è rappresentato nella seguente immagine.

Storia delle Revisioni | Dati Generali | **Parametri Principali** | Dettagli

Ventricolo Sinistro

Diametro TD mm Metodo Vol.
Diametro TS mm Volume TD ml
Spes. Setto mm Volume TS ml
Spes. Parete Pos. mm Fraz. Eie. %
Massa g g/m2

Ventricolo Destro

Diametro TD mm Metodo Vol.
TAPSE mm Volume TD ml
Volume TS ml
Fraz. Eie. %

Altro Sinistro

Volume ml
Diametro AP mm
Diam. Sup-Inf. mm
Diam. Mid-Lat. mm

Altro Destro

Volume ml
Diam. Sup-Inf. mm
Diam. Mid-Lat. mm

Valvola Mitrale

Vel. Picco E cm/s
Vel. Picco A cm/s
E / A
Tempo Decel. ms
Vel. Picco E' cm/s
E / E'
Grad. Medio mmHg
Area PHT cm2
Area Planim. cm2
Grado Rigur.

Valvola Aortica

Vel. Picco cm/s
Grad. Picco mmHg
Grad. Medio mmHg
Area cm2
Area / BSA cm2/m2
Gittata Cardiaca ml
Grado Rigur.

Aorta

Anello mm
Seni Valsalva mm
Rapporto Aortico < 1.0
Giunzione S-T mm
Aorta Asc. 1 cm. mm
Aorta Asc. mm
Arco mm
Sep. Cusp. mm

Valvola Tricuspide

Vel. Picco Rig. cm/s
Grad. Max. Reg. mmHg
Grado Rigur.
Press. Atrio D. mmHg
Press. Sist. Art. Polm. mmHg

LVDT

Diametro LVDT mm
Grad. Picco mmHg

Vena Cava

Diam. Esp. mm
Indice Collasso %


Valvola Polmonare

Grado Rigur.
Grad. Picco mmHg
Grad. Medio mmHg


Morfologia delle altre Strutture

Conclusioni

Nell'esempio sopra è possibile vedere il tab *Parametri principali* avente diversi campi di misura con tasti relativi a strutture anatomiche. Essi, quando cliccati, determinano l'apertura di finestre pop-up che permettono la scelta delle frasi che comporranno il report strutturato.

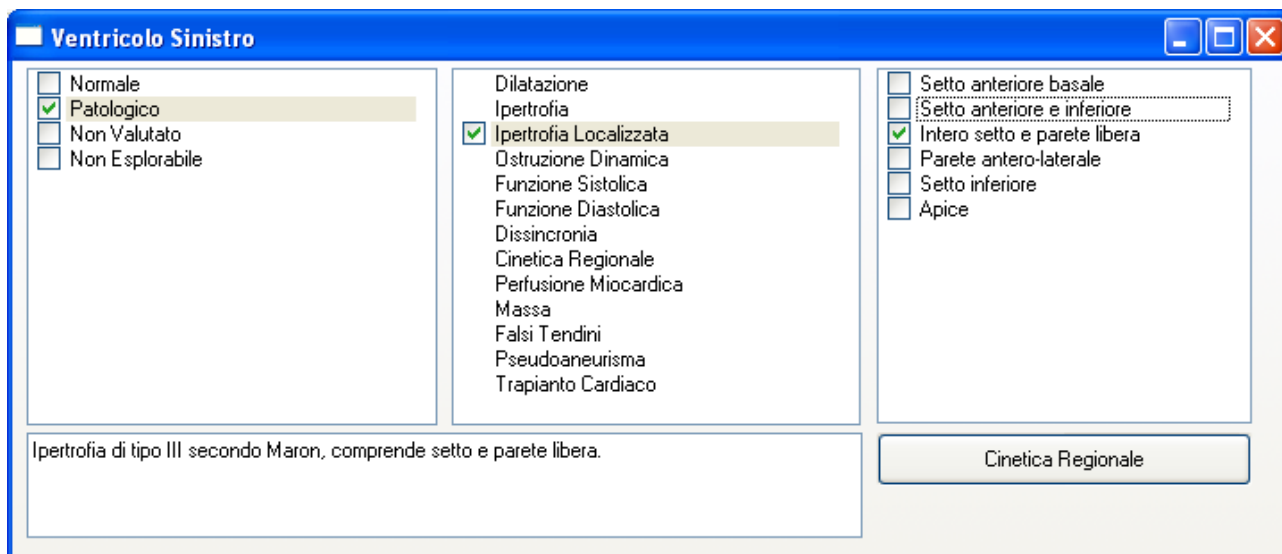


Possono anche essere presenti campi di testo libero o elementi grafici.

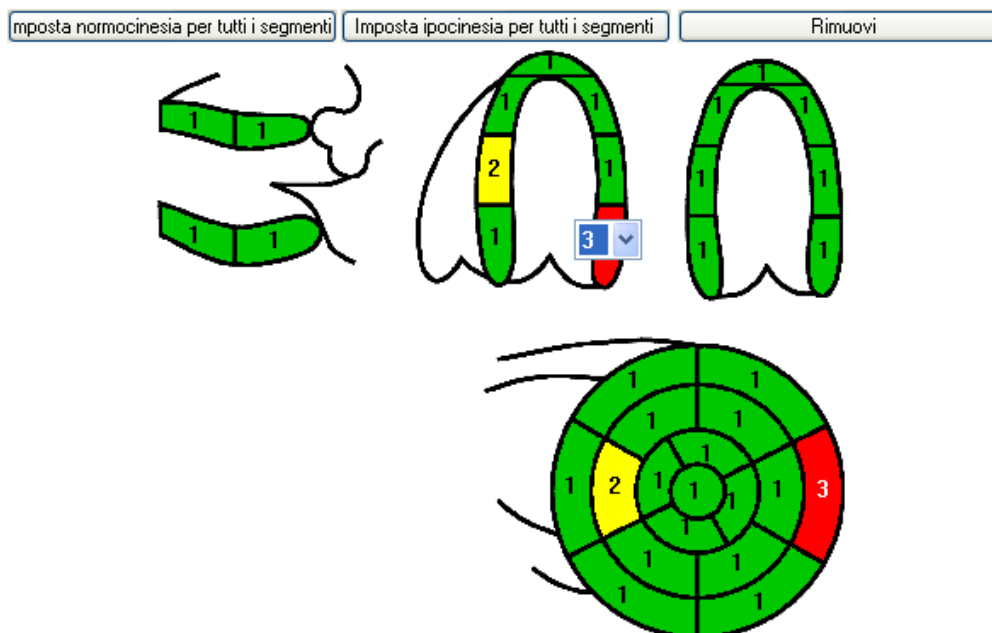


Le strutture dei menù dipendono dagli *Schemi*, dai relativi *Gruppi contestuali* e dalle *Viste dei Referti* selezionate. Quanto presentato in questo manuale è soltanto un possibile esempio.


22.3. ANTEPRIMA E STAMPA DEL REFERTO

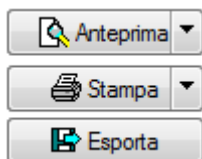

E' possibile visualizzare un'anteprima del referto cliccando sul tasto *Anteprima*. Un tab aggiuntivo verrà visualizzato con l'anteprima richiesta.

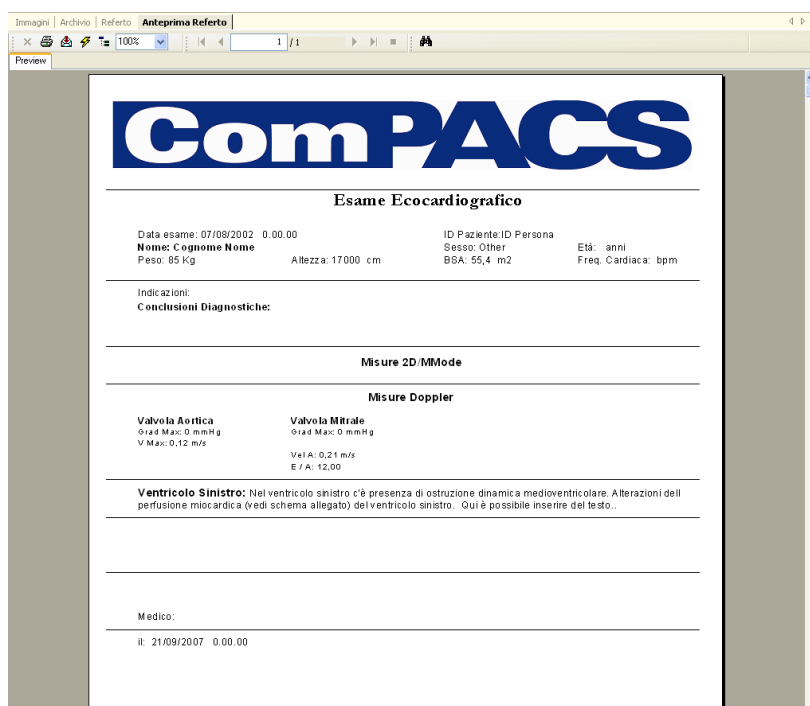

Se il referto è stato approvato, l'anteprima mostrerà il PDF del documento approvato. Invece, se è in uno stato modificabile, l'anteprima sarà aggiornata dinamicamente ogni volta che avverranno cambiamenti nei referti strutturati o nelle misure.

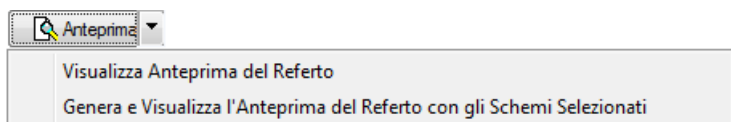


Inoltre è possibile visualizzare l'anteprima del referto approvato, rigenerata con schemi differenti, selezionando l'apposita voce nel menu a tendina associato al pulsante.



In un'impostazione multi-monitor questa anteprima potrebbe essere mostrata nell'altro monitor.

Il tasto *Stampa*, permette di stampare il referto utilizzando la stampante di sistema. Per referti approvati verrà stampato il documento PDF. Per referti non ancora approvati la funzione di stampa utilizzerà gli schemi selezionati per la generazione del documento da stampare.

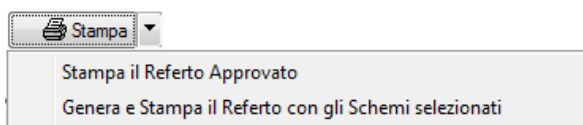


Anche in questo caso è possibile stampare il referto approvato, ri-generato con schemi differenti, selezionando l'apposita voce nel menu a tendina associato al pulsante.

Il tasto di esportazione permette di esportare il referto in formati elettronici comuni come PDF, RTF, HTML, Excel, ecc.

22.4. OPERAZIONI AVANZATE

22.4.1 AGGIUNGERE IMMAGINI


Quando un referto è aperto in modifica, è possibile aggiungere immagini al referto premendo il tasto destro del mouse sull'immagine e selezionando la voce "Aggiungi l'immagine al referto selezionato" dal menu di contesto:

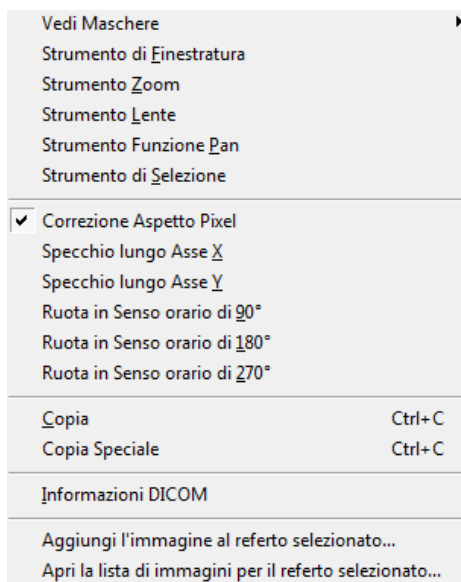


Una finestra di dialogo verrà visualizzata per confermare l'operazione:




E' possibile aggiungere l'immagine completa visualizzata, solo l'immagine selezionata o semplicemente una regione di interesse. L'immagine da aggiungere necessita di una etichetta. Opzionalmente possono essere associate delle note.

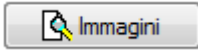Dallo stesso menu di contesto o tramite il pulsante  nella finestra di refertazione, è possibile visualizzare tutte le immagini contenute nel referto, modificare l'ordine o rimuoverle.

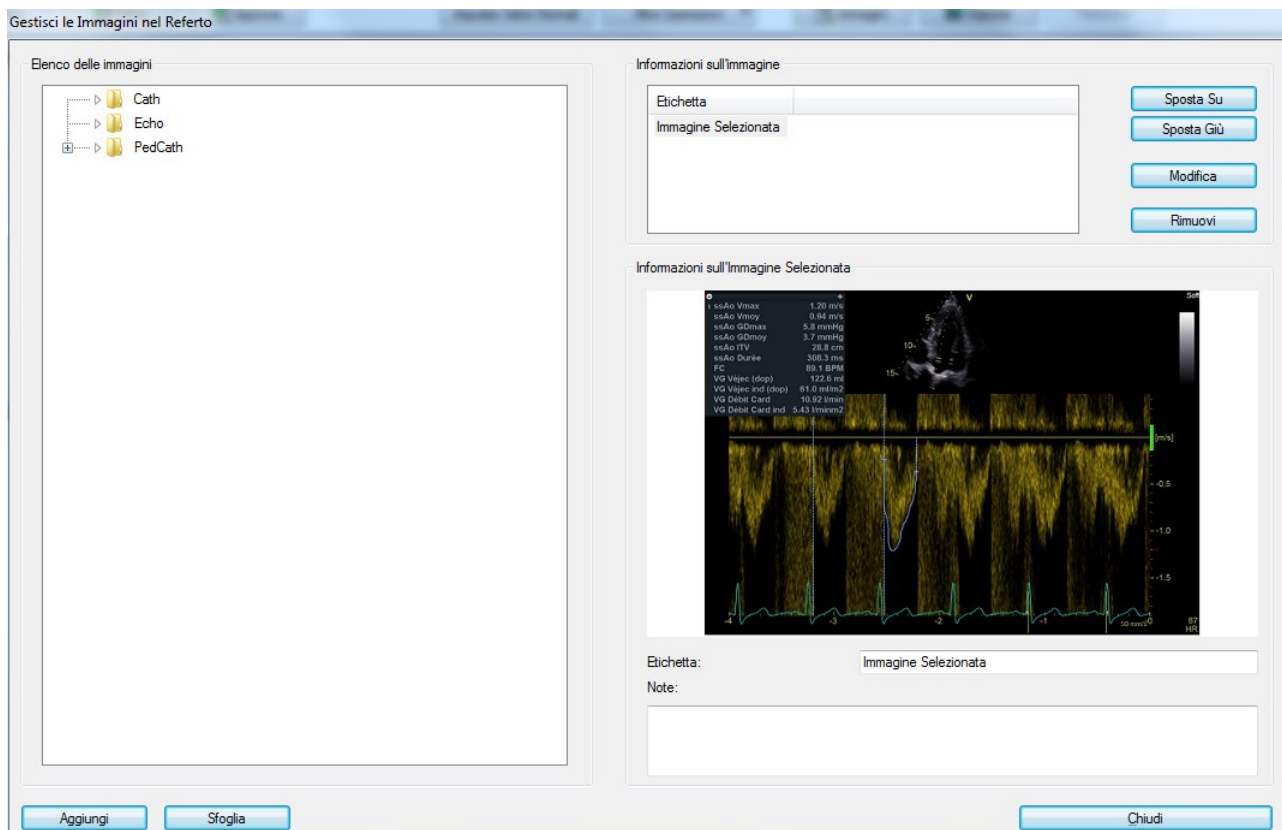

In questa finestra è anche possibile aggiungere delle immagini da una libreria o di cercare specifici file immagine da aggiungere. La libreria viene costruita dinamicamente sulla base del contenuto della cartella "ReportImages", collocata nella cartella genitrice di quella contenente l'applicativo.

Premendo il pulsante  modifica è possibile editare l'immagine utilizzando il software di edizione pre-configurato nel sistema operativo.



Gli schemi di refertazione devono essere modificati per indicare come le immagini nel referto dovranno essere impaginate in stampa.


22.4.2 FRASI SUI VALORI NORMALI

I referti per i casi normali possono essere creati velocemente utilizzando il tasto

Imposta Valori Normali


che consente di impostare i valori normali nel referto che si sta modificando.

Per rimuovere tale selezione è possibile utilizzare il menù “*Altre Operazioni*” e selezionare la voce “*Rimuovi Valori Normali?*”.

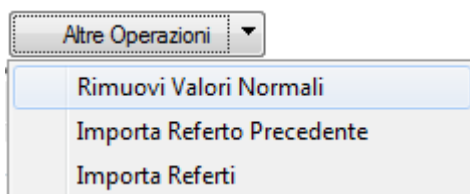

22.4.3 IMPORTARE I REFERTI PRECEDENTI

Utilizzando il menù “*Altre Operazioni*” e selezionando la voce “*Importa Referto Precedente*” o “*Importa Referti*” è possibile importare il referto di un esame precedente dello stesso paziente in modo da evitare il re-inserimento di una diagnosi simile.

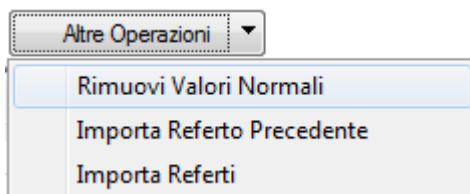

Se la voce “*Importa Referto Precedente*” è selezionata, il sistema importerà automaticamente il più recente referto compatibile (dello stesso tipo).

Se la voce “*Importa Referti*” è selezionata, una finestra sarà visualizzata per consentire la selezione manual del referto da importare.

I campi specifici da importare devono essere configurati da uno specialista di prodotto.

22.4.4 RICALCOLO VALORI


Ricalcola

Il tasto *Ricalcola* è attivo quando il cursore del mouse è posizionato su un campo di misura con una formula associata. Cliccando sul tasto la formula verrà calcolata e, se possibile, il campo selezionato verrà aggiornato.

22.4.5 DETTAGLI SU MISURE

Dettagli


Il tasto *Dettagli* è attivo quando il cursore del mouse è posizionato su un campo di misura. Cliccando sul tasto una finestra visualizzerà tutte le misure effettuate o i campioni importati per il campo selezionato, il loro valore medio e la deviazione standard.

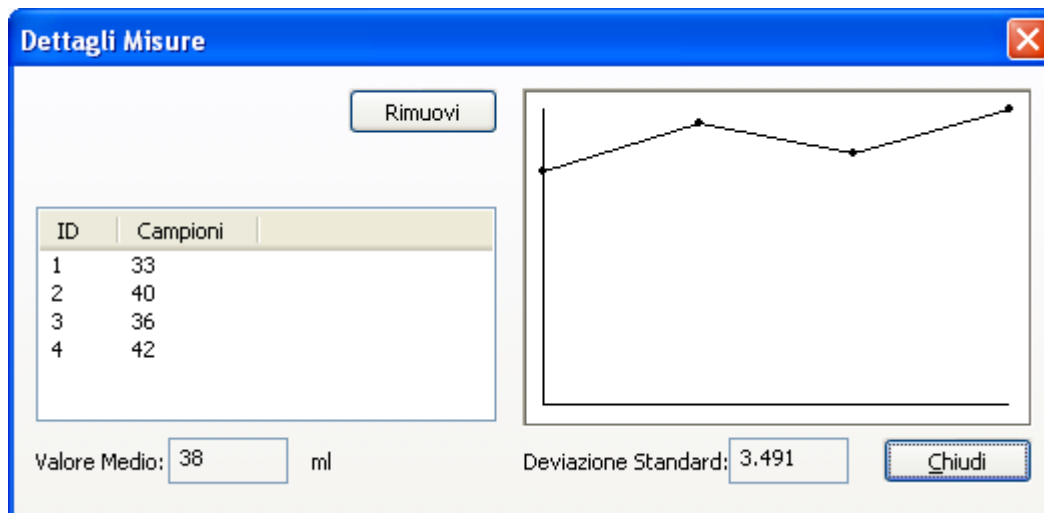


22.4.6 VARIAZIONI MISURE

Variazioni

Il tasto *Variazioni* è attivo quando il cursore del mouse è posizionato su un campo di misura. Cliccando sul tasto una finestra visualizzerà tutte le misure effettuate o i campioni importati per il campo selezionato, il loro valore medio e la deviazione standard. The Trends button is activated when the mouse cursor is positioned on a measurement field. By clicking the button, a window will display the trend over time for the selected field, considering all previous reports for the selected patient.

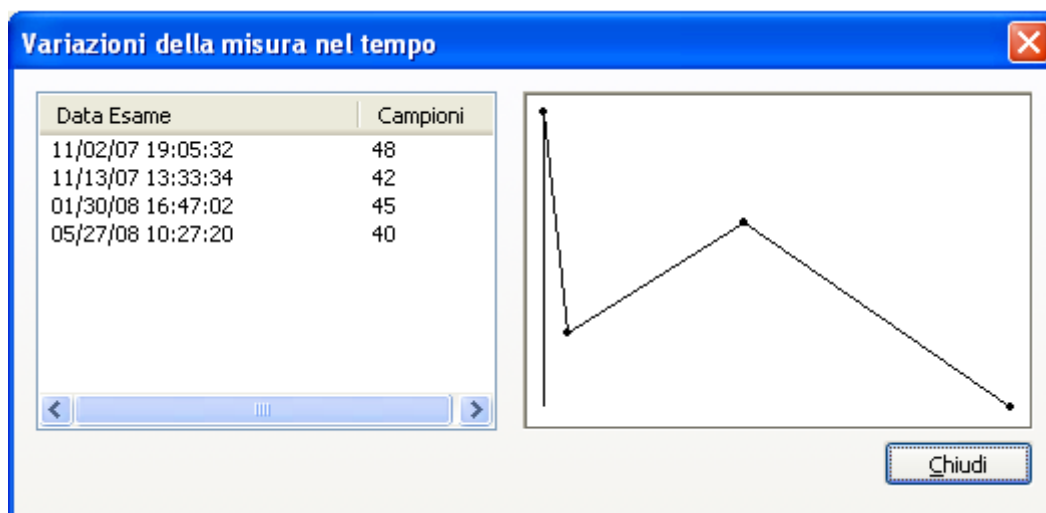

22.5. CONFERMA O ANNULLAMENTO DEI CAMBIAMENTI

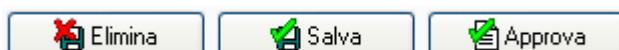

Se ci si trova in modalità di *Modifica* del referto, prima di chiudere il referto è necessario decidere cosa farne delle modifiche effettuate. Se volete scartare i cambiamenti fatti dall'ultima modifica o scartare un nuovo referto è sufficiente cliccare su tasto *Elimina*. Se invece volete confermare i cambiamenti effettuati, è necessario cliccare sul tasto *Conferma*; un pannellino vi richiederà ulteriori informazioni.



Secondo i vostri privilegi è possibile che solo un sottoinsieme di queste opzioni sia disponibile.

I tasti per la conferma dei cambiamenti fatti sono così suddivisi:

Referto Parziale – questo tipo di conferma viene utilizzata per interrompere temporaneamente il processo di refertazione di un referto incompleto;

Conferma

– questo tipo di conferma viene utilizzata nel caso in cui il referto sia completo ma non avete i diritti necessari a verificare/finalizzare il suo contenuto da un punto di vista medico.

Verificato

– questo tipo di conferma viene utilizzata se il referto è completato e deve essere verificato da un punto di vista medico. Il referto può essere ancora editato per la finalizzazione finale da un utente autorizzato.

Infine, nel caso in cui si desideri approvare e firmare il referto, premere il tasto *Approva*. Una finestra visualizzerà il referto finale in formato PDF, firmato per revisione ed approvazione.

Revisione e Approvazione Referto

Utente: Vw7FWNDORA/a Nome: User: Test <M...> Tipo di Referto: Originale

Esame Ecocardiografico TRANSTORACICO

Paziente: Doe John
Data di Nascita: 7/11/2012 Sesso: Maschio Anni: 52 Provenienza: m
Qualità Esame: m Altezza: m Peso: Kg Sup.Corp.: m2
Approccio: Transtoracico. Modalità: M-Mode. 2D. Doppler.

Quesito Diagnostico:
VALUTAZIONI MORFO-FUNZIONALI E FLUSSIMETRICHE

VENTRICOLO SINISTRO: Normali dimensioni, spessori parietali, cinesi e indici di funzione sistolica e diastolica.

Cinetica Regionale

Legenda:
0 Non Valutato
i Ipercinesia
1 Normocinesia
2 Ipocinesia
3 Acinesia
4 Discinesia
5 Aneurisma

Approva Approva e Stampa Annulla e Modifica Referto

In tale finestra sono inoltre presenti le informazioni relative all'utente connesso che ha effettuato l'accesso all'applicazione, il proprio nome e il tipo di referto (originale, sostitutivo o annullativo).



In base ai privilegi dell'utente è possibile che solo un sottoinsieme di queste opzioni sia disponibile.



Dopo la *Approvazione* nessun ulteriore cambiamento è permesso al referto che viene definitivamente archiviato.



Alla finalizzazione il sistema genera una versione PDF del referto con lo schema di stampa in uso al momento dell'operazione stessa. Tale PDF, incapsulato in un oggetto DICOM, è archiviato per successive consultazioni e per registrare il contenuto e l'aspetto del referto al momento dell'emissione.



Se si modificano gli schemi di stampa del referto il suo aspetto in anteprima può cambiare anche a seguito della finalizzazione. E' importante fare sempre riferimento alla versione PDF per il contenuto e l'aspetto del referto effettivamente emesso.

22.6. STORIA DELLE REVISIONI

La linguetta (o tab) chiamata *Storia delle Revisioni* è comune a tutte le schede e mostra lo stato corrente del rapporto e la cronologia dei cambiamenti che ha subito. Nella cronologia sono contenuti l'utente responsabile di tali cambiamenti, la data e l'ora in cui sono avvenuti.

| Storia delle Revisioni | | | | Dati Generali | Parametri Principali | Dettagli |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|----------|
| Stato: | Originale, Finalizzato | | | | | |
| Data: | 10/11/10 16:38:37 | | | | | |
| Verificato da: | | | | | | |
| Data | Operatore | Istituto | | | | |
| 10/11/10 16:38:24 | MediMatic Support Dr. | | | | | |
| 10/11/10 16:38:37 | MediMatic Support Dr. | | | | | |
| Dettagli sulle Revisioni: | | | | | | |
| Data | Descrizione | Operatore | Istituto | | | |
| 10/11/10 16:38:24 | Completo,Verificato | MediMatic Support Dr. | | | | |
| 10/11/10 16:38:37 | Completo,Finalizzato | MediMatic Support Dr. | | | | |
| Dettagli Firma: | | | | | | |
| | | | | | | |

Nel caso in cui sia applicata al referto una firma digitale verranno visualizzate le informazioni aggiuntive relative ai dettagli del processo di firma.


23. SINCRONIZZAZIONE DI CONTESTO

La workstation può essere sincronizzata con un sistema compatibile di terze parti. Questo consente all'applicazione di cambiare automaticamente il contest paziente quando tale cambiamento avviene sul Sistema di terze parti o vice-versa.



Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al vostro amministratore di sistema e ai manuali per l'Amministratore di Sistema.

Se questa funzione è abilitata, una voce di sincronizzazione di contest sarà visibile nel menu *File*, prima della voce *Esci*.

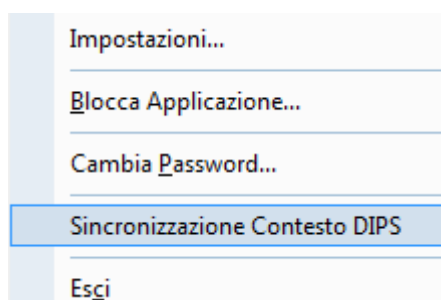

Se la funzione è attiva, la voce del menu sarà spuntata. Se non spuntata, la workstation non rimarrà sincronizzata con l'applicazione di terze parti.

Quando si seleziona la voce del menu, lo stato di sincronizzazione è modificato di conseguenza.

Messaggi di avviso saranno visualizzati quando la workstation perde il contest di sincronizzazione o quando non è in grado di cambiare il contest del paziente.



24. APPENDICE A

24.1. VIGILANZA POST-VENDITA



Questo software è soggetto alla sorveglianza post vendita da parte di MediMatic S.r.l. per rilevare o venire a conoscenza il più rapidamente possibile di reali o potenziali pericoli per la persona e/o l'operatore che sono causati da un non corretto funzionamento del software, al fine di poterli risolvere nel modo più rapido ed efficiente.

Per questo motivo se l'utilizzatore registra un qualsiasi malfunzionamento nel software, peggioramento nelle sue caratteristiche, o una inadeguatezza nell'etichettatura o nelle istruzioni d'uso, che possano condurre ad un reale o potenziale pericolo per la persona e/o operatore, richiediamo gentilmente di essere immediatamente informati direttamente o attraverso i nostri rivenditori mediante la compilazione del seguente modulo o l'invio di una comunicazione riportante le stesse informazioni. Tutti i dati relativi al software (nome, versione, codice licenza) sono disponibili nella finestra di informazioni del programma e nel CD di installazione. In questo modo potremmo prendere tutte le misure correttive e preventive adeguate con la massima efficienza e rapidità.

24.2. Modulo di Segnalazione dei Pericoli

Inviare a: MEDIMATIC S.R.L.

Funzione di Assicurazione della Qualità

Viale Cembrano 4C

I-16148 Genova ITALIA

Fax : + 39 - 010 - 3074548

Nome del Software:

Nome dei moduli integrati:

Codice Licenza (S/N):

Descrizione dei reali/potenziati pericoli:

Annotazioni e suggerimenti:

Persona/Dipartimento da contattare:

Indirizzo:

Telefono: Fax:

E-Mail:

Data: Firma:

25. APPENDICE B

25.1. CONFIGURAZIONE

25.1.1 WEB TOOL & SERVER TOOLS

Prima di utilizzare ComPACS Review Station è necessario assicurarsi che tutti i componenti lato server siano installati correttamente e configurati. Si prega di fare riferimento ai manuali per *Amministratori di Sistema* per configurare tali componenti.



I parametri di configurazione del servizio *ComPACS Archive Service* devono essere consistenti con i parametri da utilizzare durante la configurazione per accedere all'archivio/Server.

25.1.2 PRIMA ESECUZIONE

Una volta installato il software e configurato il *Web Configuration Tool*, cliccando sull'icona d'inizio si avvierà *ComPACS Review Station*.

Alla prima esecuzione di ComPACS apparirà una finestra di dialogo. Questa è la finestra di *Configurazione dell'Archivio*.

La prima scelta consiste nel determinare se la configurazione è valida solo per la stazione in uso (identificata dalla sua *AE Stazione*) o da *tutte le altre*, ovvero dalle stazioni per le quali non è stata definita una configurazione specifica. I pulsanti *Nuova Stazione* o *Rimuovi Stazione* consentono rispettivamente di creare o rimuovere le impostazioni per una specifica stazione.

Successivamente nella finestra di *Configurazione dell'Archivio* è possibile impostare i parametri per una corretta connessione del Data Base e un uso proprio dell'archivio. Essi sono:

- Informazioni Archivio* - Il nome identificativo della specifica configurazione dell'archivio;
- Tipo Archivio* - Il tipo di archivio cui vi state collegando;
- Dominio di Default* - Il Dominio di default a cui appartengono gli utenti che accederanno all'applicazione;
- Archivio di Default* - Indica se la configurazione è quella che si desidera ottenere all'avvio dell'applicazione;

Archivio

Ripristina Impostazioni di Default Imposta come Default

Lista AE Stazioni: <Tutte le altre> Nuova Stazione Rimuovi Stazione

Lista Archivi COMPACS

Tipo Archivio:

Info Generali

Nome Configurazione: COMPACS Tipo di Archivio: Server (Protocollo 2)

Dominio di Default: MEDIMATIC Archivio di Default

 Annulla
 Nuovo
 Modifica
 Rimuovi

Info Server

Nome Macchina/IP: COMPACSSERVER

AE Title: COMPACS

Descrizione:

Server SQL: COMPACS\COMPACS

Catalogo SQL: COMPACS

Livello Aut. COM: Connetti

Porta: 2375

Timeout: 50

Info Client

AE Title: COMPACSWKS

Richiedi Autenticazione Diretta

Ping
Verifica

Esistono sostanzialmente due insiemi di *Tipo Archivio*:

- a) Archivi che rappresentano sistemi ComPACS (Server – Protocollo 2, Web Server);
- b) Archivi di terze parti accessibili mediante protocollo di rete DICOM (DICOM Server).

Per connettersi all'archivio ComPACS sono necessarie le seguenti informazioni aggiuntive:

- Host Name/IP* - il nome o l'indirizzo IP del server su cui risiede *ComPACS Archive Service*;
- AE Title* - la AE Title del Server;
- Descrizione* - una descrizione (non è necessario che sia la stessa presente sul server);
- SQL Server* - il nome dell'istanza Microsoft® SQL Server su cui è installato il Database ComPACS;
- SQL Catalog* - il nome del catalogo (database) installato su SQL server;
- Livello Aut. COM* - il livello di autenticazione COM/DCOM che il client utilizzerà per accedere al servizio *ComPACS Archive Service*;
- Porta* - Il valore automaticamente impostato dal software è quello suggerito.
- Timeout* - Il valore automaticamente impostato dal software è quello suggerito.

mentre per quanto riguarda il *Client*:

- AE Title* - PAE Title della workstation. Questo parametro deve essere stato precedentemente impostato mediante il Web Configuration Tool ed il Server Tool.
- Richiedi Autenticazione Diretta* - Questo parametro deve essere impostato affinché la workstation autentichi automaticamente l'utente sulla base dell'utente di Windows collegato.

Per collegarsi a un Archivio di tipo "ComPACS Web Server", utilizzando HTTP/HTTPS, occorre specificare gli stessi parametri e, in aggiunta, anche i seguenti parametri:

- URL Server* - Questo è l'URL del Web Server. Generalmente <http://<nome macchina>/webserver>.
- Tipo Proxy* - Il tipo di Proxy utilizzato. Questo è l'URL del Web Server. Generalmente "Default Internet Explorer". Impostazioni personalizzate (Indirizzo, Utente e Password) possono essere alternativamente configurate.

Per connettersi invece ad un archivio DICOM sono necessarie le seguenti informazioni aggiuntive:

| | |
|---------------------|--|
| <i>Host Name/IP</i> | - il nome o l'indirizzo IP del server su cui risiede il <i>DICOM Server</i> ; |
| <i>AE Title</i> | - la AE Title del <i>DICOM Server</i> ; |
| <i>Descrizione</i> | - una descrizione; |
| <i>Porta</i> | - la porta sulla quale il <i>DICOM Server</i> è in ascolto per le connessioni in ingresso; |
| <i>Timeout (s)</i> | - il timeout di associazione che il <i>DICOM Server</i> consente per le connessioni (espresso in secondi); |
| <i>Max PDU (KB)</i> | - le dimensioni massime del PDU che il <i>DICOM Server</i> si attende. Il valore è espresso in KB; |
| <Proprietà DICOM.> | - Check-box per i diversi servizi che il <i>DICOM Server</i> mette a disposizione. |
| <Avanzate> | - impostazioni DICOM avanzate: formati di ricompressione per operazioni di C-STORE e funzioni di log. |

mentre per quanto riguarda il *Client*:

| | |
|-----------------|---|
| <i>AE Title</i> | - la AE Title del client |
| <i>Port</i> | - la porta sulla quale il <i>Client</i> è in ascolto per le connessioni in ingresso. |
| <i>Timeout</i> | - il timeout di associazione che il <i>Client</i> consente per le connessioni (espresso in secondi) |
| <i>Max PDU</i> | - le dimensioni massime del PDU che il <i>Client</i> si attende. Il valore è espresso in KB |



Il tasto *Verifica* consente di effettuare una richiesta di C-ECHO per controllare se i parametri inseriti sono corretti.

Una volta impostati i parametri, per renderli effettivi è necessario utilizzare il tasto *Nuovo*. Esso permetterà la registrazione dell'archivio nella *Lista Archivi* (in alto a destra). Questo metodo vi permetterà di aggiungere numerosi archivi o di modificare quelli già definiti.



Vale la pena osservare che l'archivio principale dovrebbe essere messo come default selezionando il tasto *Imposta come Default*. In questo modo sarà automaticamente disponibile per tutti gli utenti Windows® e sarà anche possibile recuperarne le impostazioni di default (in caso di errori) mediante l'utilizzo del tasto *Ripristina Impostazioni di Default*.



Una volta che tutti i parametri necessari sono stati inseriti, ogni successivo lancio dell'applicazione avrà le impostazioni di default pre-caricate al suo interno e sarà quindi sufficiente inserire *Nome utente* e *Password* per poter accedere. E' inoltre possibile accedere come utente anonimo, in questo modo però non si avrà accesso all'archivio. Gli utenti abilitati per accedere all'applicazione sono solo quelli precedentemente configurati con il Web Tool.

25.2. ARCHIVI AGGIUNTIVI

Nel pannello di login viene proposto l'archivio principale. Possono però essere configurati degli archivi secondari ed avere assegnate configurazioni differenti. Essi possono essere configurati in modo simile tramite la funzione *Impostazioni* del menù *File* e successivamente nella linguetta (tab) *Archivio*. In questo modo ComPACS può eseguire richieste simultanee su più archivi invece che su uno solo.

25.3. ALTRE OPZIONI

Il pulsante *Altre Opzioni* consente la configurazione delle impostazioni all'avvio per la ricerca nell'archivio.

The *Other Options* button allows the configuration of the default archive settings.

Opzioni di Ricerca

Aggiungi carattere jolly * alle ricerche

Esegui automaticamente una ricerca nei sottolivelli

Valori all'avvio

| | | | |
|------------------------|--------------------------|---|----------------------------|
| Filtro Archivio: | Ultimo valore utilizzato | Filtro Fonte: | Ultimo valore utilizzato |
| Tipo Ricerca per Data: | Ultimo valore utilizzato | Filtro Fonte Esami: | Ultimo valore utilizzato |
| Filtro Assegnazione: | Ultimo valore utilizzato | <input type="checkbox"/> Ricerca automatica degli esami | |
| Filtro Origine: | Ultimo valore utilizzato | Arco Temporale [ore prima - dopo]: | 12 12 |
| Filtro Modalità: | Ultimo valore utilizzato | Stato di un Nuovo Esame: | Esame creato |
| Filtro Stato Esame: | Ultimo valore utilizzato | Stato Urgenza del Nuovo Esame: | <Non Definita> |
| Filtro Erogatore: | Ultimo valore utilizzato | Erogatore del Nuovo Esame: | Ultimo valore utilizzato |
| Filtro Urgenza: | Ultimo valore utilizzato | | |
| Filtro Organizzazione: | Ultimo valore utilizzato | | |
| Filtro Sito: | Ultimo valore utilizzato | | |

E' possibile indicare se i caratteri jolly sono aggiunti automaticamente ai campi di ricerca. Si sottolinea che tale funzionalità non si applica ai campi identificativi quali per esempio all'ID paziente o al Numero di Accesso.

E' inoltre possibile indicare i valori all'avvio per i filtri nella pagina di archivio, per le fonti anagrafiche, per gli erogatori e per lo stato di nuovi esami aggiunti. Per la maggior parte dei campi il Sistema è in grado di memorizzare l'ultimo valore utilizzato dall'utente.



26. APPENDICE C

26.1. ComPACS ECHO - Accuratezza e Precisione

In quest'appendice sono utilizzati i termini accuratezza e precisione con l'accezione comunemente adottata in letteratura:

Accuratezza - il valore assoluto della differenza tra la misura reale e il valore medio delle stime effettuate.

Precisione - la deviazione standard delle stime effettuate.

La seguente tabella riporta l'accuratezza e la precisione in un esperimento in cui sono state effettuate una serie di misure di strutture geometriche artificiali all'interno di un'immagine ecografica DICOM.

| Misura | Accuratezza | Precisione |
|----------------|------------------------|------------------------|
| Misure Lineari | 0,3 pixel | 1,2 pixel |
| Aree | 0,1 pixel ² | 0,4 pixel ² |
| Perimetri | 0,3 pixel | 1,3 pixel |

I valori si riferiscono al pixel poiché per ciascuna tipologia d'immagine ecografica la misura effettiva utilizza unità di misura diverse (metri, secondi, m/s). Per conoscere l'accuratezza e la precisione nell'unità di misura desiderata occorre semplicemente derivarne il valore sulla base del fattore di calibrazione orizzontale e verticale dell'immagine in questione.

In generale per le misure si suggerisce di applicare un fattore di zoom sull'immagine per ridurre l'effetto dell'errore introdotto dall'indicazione manuale della distanza da misurare.



In assenza di una corretta calibrazione, le misure ottenute sulle immagini non sono valide. E' sempre necessario controllare il fattore di calibrazione calcolato, le misure ottenute ed il tracciamento dei contorni per verificare la loro ammissibilità.



Nell'appendice sono riportate l'accuratezza e la precisione dei vari metodi



27. APPENDICE D

27.1. ANALISI ANGIOGRAFICA - ACCURATEZZA E PRECISIONE

In quest'appendice sono utilizzati i termini accuratezza e precisione con l'accezione comunemente adottata in letteratura:

Accuratezza - il valore assoluto della differenza tra la misura reale e il valore medio delle stime effettuate.

Precisione - la deviazione standard delle stime effettuate.

27.2. CALIBRAZIONE SU DI UNA DISTANZA NOTA

La seguente tabella riporta i valori medi e la precisione in un esperimento in cui sono state effettuate una serie di misure di calibrazione su distanze note di diverse dimensioni all'interno della stessa immagine. La tabella evidenzia una relazione tra la dimensione della struttura misurata nell'immagine e la precisione della misura; all'aumentare della dimensione in pixel (in questo caso corrispondente anche alla dimensione reale) aumenta la precisione della misura.

| Lunghezza Lato Quadrato | Accuratezza | Precisione |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 4 mm | 0.0013 mm/pixel | 0.0070 mm/pixel |
| 8 mm | 0.0016 mm/pixel | 0.0032 mm/pixel |
| 12 mm | 0.0010 mm/pixel | 0.0016 mm/pixel |
| 16 mm | 0.0000 mm/pixel | 0.0019 mm/pixel |
| 20 mm | 0.0004 mm/pixel | 0.0017 mm/pixel |
| 40 mm | 0.0001 mm/pixel | 0.0003 mm/pixel |

Per questa ragione all'operatore si consiglia di effettuare la calibrazione su strutture con dimensione in pixel (ovvero sull'immagine da analizzare) sufficientemente grandi. In alternativa, se possibile, si suggerisce di applicare un fattore di zoom per ridurre l'effetto dell'errore introdotto dall'indicazione manuale della distanza da misurare.

27.3. CALIBRAZIONE SUL CATETERE

La seguente tabella riporta i risultati di un esperimento di calibrazione su di una serie di cateteri di diverse dimensioni e marche sia pieni di contrasto sia vuoti.

| Catetere Pieno | |
|-----------------------|-------------------|
| Accuratezza | Precisione |
| 0.008 mm | 0.009 |

27.4. ANALISI DELLE CORONARIE

La seguente tabella riporta i risultati dell'analisi in vitro per una serie di modelli di coronarie con diametro diverso.

| Dimensione Misure | Immagini da Angiografo | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | Accuratezza | Precisione |
| | mm | mm |
| 5.0 mm | 0.00143 | 0.01349 |
| 4.5 mm | 0.00684 | 0.02083 |
| 4.0 mm | 0.00245 | 0.01854 |
| 3.5 mm | 0.00274 | 0.02282 |
| 3.0 mm | 0.00391 | 0.02812 |
| 2.5 mm | 0.00001 | 0.02370 |
| 2.0 mm | 0.00066 | 0.02994 |
| 1.5 mm | 0.00336 | 0.03547 |
| | | |
| Valore Medio: | 0.002681 | 0.02411 |

27.5. VOLUME VENTRICOLARE

La seguente tabella indica i risultati ottenuti nell'applicazione del programma a un'immagine ellittica sintetica per rilevare gli errori dovuti al tracciamento manuale del profilo ventricolare:

| | Accuratezza | Precisione |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| Volume Diastolico | 0.34 ml | 1.858 ml |
| Volume Sistolico | 0.47 ml | 0.254 ml |

Risulta evidente che gli errori indicati sono trascurabili rispetto alla misura stessa e in particolare agli errori intrinseci nel metodo di stima del volume ventricolare utilizzato Area-Length.

27.6. SUPERFICIE CORPOREA

La formula della superficie corporea utilizzata è:

$$BSA = 71.84 \cdot W^{0.425} \cdot H^{0.725}$$

dove W corrisponde al peso espresso in Kg, H corrisponde all'altezza espressa in cm e la superficie calcolata è espressa in cm².

27.7. ACCORCIAMENTO REGIONALE

La seguente tabella indica l'errore nel programma nel rilevare l'accorciamento regionale in un'immagine sintetica:

| | Accuratezza | Precisione |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Accorciamento Regionale | 0.0193 % | 0.0266 % |



28. APPENDICE E

28.1. ANALISI IVUS - Accuratezza e Precisione

In quest'appendice sono utilizzati i termini accuratezza e precisione con l'accezione comunemente adottata in letteratura:

Accuratezza - il valore assoluto della differenza tra la misura reale e il valore medio delle stime effettuate.

Precisione - la deviazione standard delle stime effettuate.

La seguente tabella riporta i valori medi e la precisione in un esperimento in cui sono state effettuate una serie di misure di distanze e di aree nell'immagine di sezione presente nel file DICOM.

| Misura | Accuratezza | Precisione |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tratti orizzontali | 0,002 mm | 0,028 mm |
| Tratti verticali | 0,002 mm | 0,044 mm |
| Tratti diagonali | 0,006 mm | 0,032 mm |
| Aree | 0,001 mm ² | 0,020 mm ² |

In tali misure si suggerisce di applicare un fattore di zoom per ridurre l'effetto dell'errore introdotto dall'indicazione manuale della distanza da misurare.

La successiva tabella riporta invece i valori medi e la precisione in un esperimento in cui sono state effettuate una serie di misure di distanze e di aree nell'immagine longitudinale ricostruita.

| Misura | Accuratezza | Precisione |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tratti orizzontali | 0,001 mm | 0,022 mm |
| Tratti verticali | 0,020 mm | 0,050 mm |
| Tratti diagonali | 0,026 mm ² | 0,032 mm ² |
| Aree | 0,058 mm ² | 0,060 mm ² |



29. APPENDICE F

29.1. MISURE GENERICHE - Accuratezza e Precisione

In quest'appendice sono utilizzati i termini accuratezza e precisione con l'accezione comunemente adottata in letteratura:

Accuratezza - il valore assoluto della differenza tra la misura reale e il valore medio delle stime effettuate.

Precisione - la deviazione standard delle stime effettuate.

La seguente tabella riporta l'accuratezza e la precisione in un esperimento in cui sono state effettuate una serie di misure di strutture geometriche artificiali all'interno di un'immagine ecografica DICOM.

| Misura | Accuratezza | Precisione |
|-----------------|------------------------|--------------------------|
| Misure Lineari | 0,1 pixel | 0,050 pixel |
| Aree Poligonali | 0,1 pixel ² | 0,793 pixel ² |
| Angoli | 0,1 ° | 0.589 ° |

I valori si riferiscono al pixel poiché per ciascuna tipologia d'immagine ecografica la misura effettiva utilizza unità di misura diverse (metri, secondi, m/s). Per conoscere l'accuratezza e la precisione nell'unità di misura desiderata occorre semplicemente derivarne il valore sulla base del fattore di calibrazione orizzontale e verticale dell'immagine in questione.

In generale per le misure si suggerisce di applicare un fattore di zoom sull'immagine per ridurre l'effetto dell'errore introdotto dall'indicazione manuale della distanza da misurare.



In assenza di una corretta calibrazione, le misure ottenute sulle immagini non sono valide. E' sempre necessario controllare il fattore di calibrazione calcolato, le misure ottenute ed il tracciamento dei contorni per verificare la loro ammissibilità.



Nell'appendice sono riportate l'accuratezza e la precisione dei vari metodi